



MÁS QUE PALABRAS

Nuestro trabajo nos invita a reflexionar constantemente sobre el mundo que tenemos y el mundo que queremos, y hemos asumido un compromiso a largo plazo de gestión ética y responsable buscando la coherencia en nuestras decisiones. Para nosotros es una cuestión de respeto por lo que hacemos y por la sociedad a la que servimos.

La RSE, Responsabilidad Social Empresarial, entendida como la contribución activa y voluntaria a la mejora de la sociedad es uno de nuestros pilares y le damos gran importancia. Ayudas Dinámicas se define como empresa humanista a través del respeto por el medio ambiente y del compromiso social.



En un acto de responsabilidad social, nos vinculamos a la Fundación Josep Carreras y nos sumamos a la lucha por la vida.



El diseño y desarrollo de las ayudas técnicas de Ayudas Dinámicas están basados en cuatro pilares básicos que nos permiten poner a su disposición productos funcionales, ergonómicos, duraderos y seguros.

Funcionales

En el diseño de nuestros productos siempre prima la funcionalidad. Por eso mismo, y sin olvidar los aspectos estéticos, ofrecemos productos prácticos y útiles que cumplan la función para la que han sido diseñados.

Ergonómicos

La óptima relación entre la persona y el producto es muy importante durante el proceso de diseño industrial. En Ayudas Dinámicas conocemos bien estos condicionantes para desarrollar y dimensionar adecuadamente las ayudas técnicas. Como resultado ofrecemos productos que se adaptan lo mejor posible al usuario y a su entorno.

Duraderos

Somos conscientes de que muchos de nuestros productos están sometidos a circunstancias de uso extremas (ambientes húmedos, uso intensivo, etc.). Por eso sólo utilizamos materiales resistentes y preferiblemente inoxidables para garantizar ayudas duraderas.

Seguros

Para mantener un aceptable grado de independencia en el día a día es importante prevenir las caídas y otros accidentes. Para conseguirlo, usted debe escoger el equipamiento más adecuado para cada individuo con la confianza de que en Ayudas Dinámicas hemos puesto todo nuestro empeño y experiencia para ofrecerle ayudas técnicas seguras.

ÍNDICE




8 ASEO

Elevadores WC	8
Reposabrazos WC	16
Sillas de inodoro	18
Asientos para ducha y baño	22
Protectores impermeables	28
Sillas y taburetes para baño	29
Lavacabezas	37
Tablas de bañera	38
Cuidado personal	40
Higiene de los pies	42
Incontinencia	44
Orinales	47
Contenedor pañales	48
Cuidado de la piel	49
Barras para baño	50
Asideras para baño	54
Camillas y mampara portátil	62
Sillas de baño con ruedas	64
Linido	74





84 GRÚAS

Grúas electrónicas	84
Arneses	92

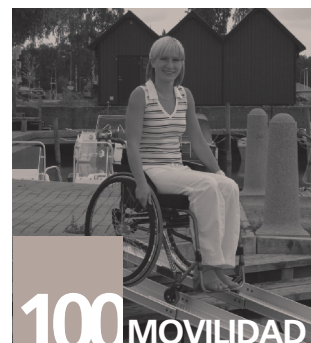

100 MOVILIDAD

Rolators	100
Caminadores	102
Bastones	108
Sillas de ruedas	116
Sillas ascensor y evacuación	130
Accesorios sillas ruedas	133
Recambios ruedas	144
Transferencia y movilización	148
Rampas	154
Scooters	160

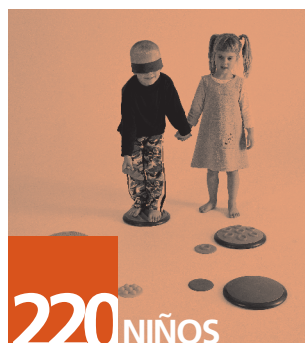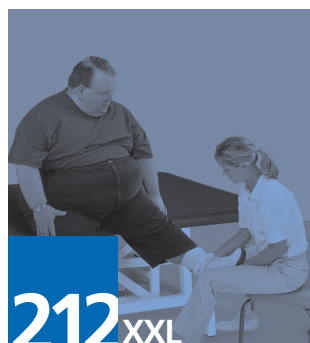

Camas electrónicas	166
Barandillas	172
Sillón elevador	176
Mesitas auxiliares y trapecios	178
Sistemas de sujeción	182
Botas y taloneras	184
Cuñas y abductores	186
Colchones dinámicos	191
Colchones	194
Fundas y protectores	197
Cojines para sillas	198
Cojín elevador	206
Almohadas	208
Cojines lumbares	210

Baño	214
Caminadores y bastones	217
Sillas de ruedas	218

Special tomato	222
Buggys	225
Snug seat	230
Tumble Forms	231
Baño	232
Bastones	234
Caminadores	235

Teléfonos	238
Ayudas para vestirse	242
Tijeras	245
Pinzas	246
Cubiertos	248
Platos	253
Preparación alimentos	254
Vasos	256
Utensilios de cocina	258
Muebles auxiliares	260
Dycem antideslizante	262
Material escritorio	265
Pastilleros	266
Tensiómetros	270
Pedaliers	271
Material terapia	272
Tratamiento del dolor	277

ASEO

La higiene diaria otorga grandes beneficios y debería realizarse con el máximo de independencia posible y sobre todo con seguridad.

Independencia

Utilizar el baño con independencia es importante teniendo en cuenta lo íntimo de esta actividad diaria.

Seguridad

En este ambiente húmedo y resbaladizo debemos prevenir las caídas aun más que en ningún otro lugar de la casa.



Ayudas Dinámicas ofrecemos productos diseñados por profesionales:

Ergonómicos, con las dimensiones y texturas correctas y formas no agresivas.

Versátiles, que se adaptan a diferentes personas y a diferentes entornos.

Resistentes, fabricados con materiales inoxidables y resistentes, pensados para durar aun en condiciones de uso intensivo. Fáciles de mantener limpios.

Fiables y prácticos, que estén a nuestro alcance cuando se precisan y a la vez que no sean un obstáculo cuando no los necesitamos.

Ayudas técnicas funcionales y bien diseñadas harán del cuarto de baño el lugar seguro y agradable que debería ser.



Elevadores WC

Ir al retrete con cierta independencia es importante y los inodoros actuales son por lo general demasiado bajos por lo que muchas personas tienen dificultad para sentarse y para incorporarse.

Un asiento elevado colocado sobre el retrete proporciona una mayor altura y permite más intimidad en esta actividad tan personal. Los asientos elevadores son así una ayuda prácticamente imprescindible para incorporarse y sentarse con el mínimo esfuerzo y seguridad.

Los especialistas opinan que disminuye el riesgo de caídas en pacientes osteoporóticos y está especialmente recomendado para hemipléjicos, personas con prótesis o artrodesis de cadera o cualquier otro proceso degenerativo de la cadera o rodilla que limite la movilidad por dolor.

Se adaptan al retrete sin la necesidad de herramientas y en pocos minutos.



UN ELEVADOR PARA CADA NECESIDAD

Los elevadores de WC suplementan la altura del inodoro existente en 5, 10 o 15 cm. Para escoger el más apropiado hay que tener en cuenta la altura del usuario. A pesar que el más habitual es el de 10 cm, una persona alta puede precisar el de 15 cm y para una persona más bajita el de 5 cm será suficiente.

Cuando un inodoro es utilizado por más de una persona se recomienda el de 10 cm de altura. Existen elevadores que se pueden regular en el momento de su instalación en las 3 alturas (AD510)

Para los que precisan una ayuda complementaria los elevadores pueden incorporar apoyabrazos para incorporarse y sentarse con mas facilidad. Los brazos son abatibles para permitir una transferencia lateral, por ejemplo desde una silla de ruedas (AD510)

Los que deben permanecer mucho tiempo sentados en el WC deben utilizar elevadores blandos por su comodidad y para evitar la aparición de úlceras por presión (AD511 o AD513)

Para el post operatorio inmediato de cadera están recomendados los elevadores graduables en inclinación ya que evitan la flexión exagerada de cadera y disminuye el riesgo de luxaciones.

Elevadores de WC de altura e inclinación graduable

Este es el elevador más versátil y seguro del mercado. Para adaptarlo apropiadamente a cada usuario se puede ajustar a 3 diferentes alturas y además se puede regular en inclinación. Todo ello sin herramientas y en pocos minutos. Proporciona la máxima seguridad ya que este elevador va montado directamente (sin necesidad de herramientas) en los orificios que tienen las tazas del inodoro. Diseño ergonómico y funcional sin rincones que retengan la suciedad y fabricado sólo con materiales inoxidables y de la mejor calidad: aluminio, acero inoxidable y plástico ABS.

AD510

CON REPOSABRAZOS



De idénticas características pero además incorpora unos reposabrazos abatibles para aquellos casos en que es necesario un apoyo adicional.



Peso máximo:
100 kg

AD510S

SIN REPOSABRAZOS



Regulable en inclinación.

modelo	descripción
AD510	con reposabrazos
AD510S	sin reposabrazos

Elevadores de WC económicos

Este económico pero seguro y eficaz elevador es de plástico completamente sellado, que resiste los olores y las manchas. El acabado suave facilita las transferencias laterales y su recorte trasero de gran tamaño, para el coxis, proporciona una postura cómoda, y fácil acceso para la higiene personal. Se adapta a la mayoría de retretes sin necesidad de obras o instalaciones y con sólo apretar las dos palomillas laterales el elevador se mantendrá seguro y firme sobre la taza del WC.

AD509 SIN TAPA



AD509LUX CON TAPA



AD509BIDET

BIDET ACOPLABLE ECONÓMICO

Bidet de plástico. Se acopla directamente sobre los elevadores de WC y queda completamente integrado en su interior. Sólo para elevadores de la serie **AD509**.



modelo	alto	tapa	peso máximo
AD509C	5 cm	NO	130 kg
AD509B	10 cm	NO	130 kg
AD509A	15 cm	NO	130 kg
AD509B-LUX	10 cm	SI	130 kg
AD509A-LUX	15 cm	SI	130 kg

AD500E

BIDET ACOPLABLE UNIVERSAL




Bidet de plástico acoplable directamente sobre el inodoro.

AD513

ELEVADOR DE WC BLANDO SOFT

Proporciona un confort excepcional y garantiza una cómoda higiene, gracias a la espuma inyectada debajo de una capa de PVC

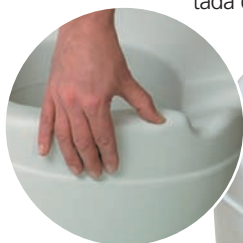

Altura de elevación:
11 cm

AD511

ELEVADOR DE WC BLANDO BLUE



Altura de elevación:
4 cm

Fabricado en espuma de poliuretano. Cálido y con diseño anatómico. De tacto blando y antideslizante. Lavable y ligero para facilitar su transporte. Se adapta sobre la tapa del WC.

AD516

ELEVADOR WC HI-LOO

Elevador muy estable y ergonómico fabricado por la firma sueca ETAC. Para facilitar acceso tiene un hueco tanto en la parte delantera como en la trasera. El Hi-Loo es fácil de ajustar a la mayoría de tipos de inodoro gracias su sistema totalmente único de bridas ajustables, se adapta incluso a aquellos inodoros que por su forma especial no se adaptan los elevadores corrientes.



etac



Peso total:
1,5 Kg



modelo	alto	tapa	peso máximo
AD516	10 cm	NO	130 kg
AD516LUX	10 cm	SI	130 kg

AD507 ELEVADORES WC DERBY



Elevadores universales de WC. Se adaptan a casi todas las tazas de inodoro. De construcción plástica de una sola pieza para una higiene total. Se montan fácilmente sin herramientas. VER TABLA DE MEDIDAS.



AD507LUX ELEVADORES WC ASHBY CON TAPA



modelo	alto	tapa	peso máximo
AD508C	5 cm	NO	190 kg
AD507	10 cm	NO	190 kg
AD508A	15 cm	NO	190 kg
AD508C-LUX	5 cm	SI	190 kg
AD507LUX	10 cm	SI	190 kg
AD508A-LUX	15 cm	SI	190 kg
AD518	10 cm	NO	190 kg

AD518 ELEVADORES WC EASY-ACCES



Un asiento elevador de WC ideal para aquellas personas con dificultad para limpiarse. Los amplios huecos tanto en la parte delantera como en la trasera facilitan el acceso para limpiarse tanto al usuario, como en su caso al cuidador. Durante el proceso de fabricación se añade un componente anti-bacterias de efecto permanente. Fabricado de una sola pieza, sin rincones y fácil de limpiar.

Seguridad: el único elevador de WC que queda firmemente fijado a la porcelana del WC con 4 bridas de sujeción.

AD519 ASIENTO FAMILY



Asiento que viene con dos tapas, una de ellas con un orificio de menor tamaño para niños o adultos pequeños. Los reposabrazos integrados ofrecen un soporte adicional para levantarse del WC. Queda fijado con total seguridad con unas bridas directamente a la porcelana como las tapas de WC tradicionales.



AD855

PINZA PARA PAPEL HIGIÉNICO TORKEL

Facilita la higiene personal a personas con problemas de agarre o movilidad. Las personas con reuma, por ejemplo, encuentran el Torkel fácil de agarrar y manipular. Lavable y fácil de limpiar.

etac



Peso total:
100 gr



largo total: 33 cm

1. Corte un trozo de papel de WC (aprox.40 cm). Abra las lengüetas apretando el mango y enganche el papel entre ellas.
2. Enrolle el papel de WC hasta cubrir el extremo de las lengüetas.
3. Ponga las lengüetas entre las piernas y frote.
4. Abra las lengüetas apretando el mango y sacuda el papel para que caiga al WC. Limpie con detergente sin disolvente con un PH de 6 a 9, o con una solución desinfectante al 70%. Si es preciso se puede descontaminar a 85°C.

AD857

EASYWIPE



Diseñado por la reconocida Terapeuta Ocupacional (OT) británica Chris Clarke para aquellas personas que por algún motivo tienen dificultad para limpiarse.

Agarra firmemente el papel y lo suelta fácilmente después de haberlo usado. Libera el papel sin necesidad de tocarlo. De formas redondeadas, blando y suave al tacto.

Va bien tanto con el papel de WC como con toallitas húmedas. Su diseño sin rincones permite mantenerlo limpio fácilmente. Ligero y a la vez resistente.

No contiene látex.

largo total: 7,5 cm



Peso total:
116 gr

AD858

EASYWIPE COMPACT

Debido al éxito del EASYWIPE se ha desarrollado una versión plegable y discreta que se suministra en una cajita de viaje que cabe en un bolsillo o en un bolso



PRESSALIT[®] care

Durante 30 años la firma de Dinamarca **Pressalit Care** ha diseñado los mejores productos del mercado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas con alguna incapacidad, de proporcionar mejor entorno y condiciones de trabajo para aquellos que los ayudan y las mejores soluciones a largo plazo para los directivos que invierten en las instalaciones.

El extraordinario resultado de este trabajo se traduce en productos con un alto grado de flexibilidad, productos que se adaptan a cualquier persona y a cualquier situación. Productos fuertes y duraderos que ofrecen confianza y seguridad al usuario.



Los asientos de Pressalit están fabricados con **duroplast** de alta calidad, un material resistente a las rayadas, fuerte y muy duradero. Sorprendentemente cómodos: diseñados según rigurosos condicionantes ergonómicos para adaptarse a diferentes tipos de personas. Agradables a la vista: un diseño cuidado y llevado al detalle, que además está disponible en una atractiva gama de colores.

Fáciles de mantener limpios: durante el proceso de diseño se ha tenido muy en cuenta la importancia de mantener limpio un asiento de WC y se han evitado rincones donde se pudiera acumular la suciedad.

R32000 / R34000

ELEVADOR DANIA



Disponible sólo en blanco.

Los anclajes son fáciles de limpiar y los estabilizadores aseguran firmemente el asiento a la porcelana incluso en las transferencias laterales, cuando se pasa desde o a una silla de ruedas.

Se suministran con protector de salpicaduras, que se puede quitar si se precisa pasar las manos por los laterales para realizar tactos o para la higiene.



Disponible también con asiento con apertura delantera para facilitar la higiene íntima.

modelo	alto	tapa
R32000	10 cm	SI + apertura delantera
R34000	10 cm	SI

R37000


ASIENTO CORRECTOR POSTURAL DANIA con tapa



Disponible en tres colores.

El asiento DANIA es el asiento de W.C. para los mas exigentes en materia de calidad, conocido en toda Europa por su extraordinaria comodidad.

Las transferencias laterales son fáciles ya que el asiento es prácticamente plano. Los estabilizadores especiales aseguran firmemente el asiento a la porcelana incluso cuando hay una presión lateral (por ejemplo al pasar desde una silla de ruedas). Un diseño cuidado y llevado al detalle, además de agradable a la vista y que está disponible en una atractiva gama de colores.

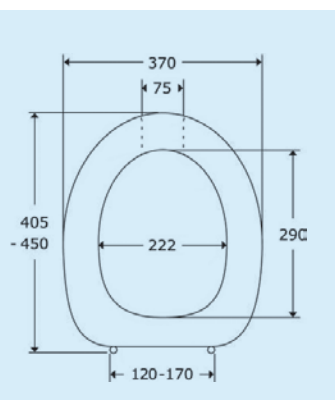

Al hacer el pedido indicar el color deseado.



Reposabrazos para WC

Las personas que tienen dificultad para sentarse o incorporarse del retrete encuentran una gran ayuda en los reposabrazos auxiliares. Muchas personas no quieren alicatar barras de apoyo en la pared por razones estéticas, incluso en algunos casos por la distribución o dimensiones del baño esto no es posible.

Para estos casos hay diferentes opciones, todas funcionales y pensadas para utilizar el WC con la mayor independencia posible y sobre todo con seguridad. Hay brazos que van fijados directamente sobre la porcelana del inodoro y quedan así integrados; ésta es una solución muy estética. Existen también brazos apoyados directamente sobre el suelo, una solución económica y práctica ya que son regulables en altura. Para los más exigentes desde el punto de vista ergonómico y de diseño hay soluciones que combinan los reposabrazos auxiliares y un elevador de WC.



AD500 COMODE PRÁCTICA



Elevador de asiento inodoro con reposabrazos. Diseñado por la prestigiosa firma sueca ETAC, este asiento es muy funcional y estable. El asiento puede ajustarse en altura y ligeramente en ángulo de inclinación para que sea más fácil levantarse. Este asiento es muy ligero, pesa sólo 3,9 kg. lo que permite trasladarlo con comodidad.

etac

KG


Peso total:
3,9 kg

ALUMINIO

KG

Peso máximo:
130 kg

PRODUCTO INOXIDABLE

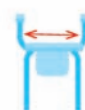

modelo	ancho total	ancho asiento	alto asiento
AD500	54 cm	45 cm	42-57 cm

AD512 SUPPORTER REPOSABRAZOS ABATIBLES



Los reposabrazos abatibles supporter son muy prácticos y funcionales y van fijados directamente a la taza del WC. No hay necesidad de hacer agujeros en las paredes o en el suelo, lo que significa que el supporter es ideal cuando se precisan reposabrazos durante un periodo limitado o simplemente cuando las paredes no ofrecen las necesarias garantías para fijar otro tipo de ayudas.

etac

AD501EL REPOSABRAZOS AUXILIARES DE ALUMINIO



Esta es una solución muy práctica y económica en especial cuando no se desea o no se pueden instalar barras y asideras en las paredes. Proporciona un buen apoyo en ambos lados como ayuda para incorporarse y sentarse, y además se regula a la altura requerida. Al ser de aluminio, no se oxida a pesar del ambiente húmedo del baño y es muy ligero.



KG
Peso total: 2 kg

KG
Peso máximo: 100 kg

Sillas con inodoro incorporado

No siempre queremos desplazarnos hasta el lavabo mas próximo, incluso a veces esto representa alguna dificultad. También hay muchos casos en los que se precisa llegar al WC con urgencia, y en todos estos casos es conveniente contar con la ayuda de una silla que incorpore un WC que se puede colocar junto a la cama, en el hogar, la residencia o la clínica. Muchas de estas sillas tienen un aspecto atractivo y discreto que disimulan perfectamente la función para la que han sido diseñadas, y no desentonan con el mobiliario. Un asiento acolchado esconde el orificio del WC, y así poderla utilizar como una silla corriente cuando está fuera de uso.

AD903 SILLA DE SERVICIO CASA

AD905 SILLA WC 3 EN 1

Se pueden utilizar como elevador de WC de altura regulable, como silla con inodoro para el dormitorio (incorpora una cubeta con asa) y como apoyo auxiliar para el WC. Las sillas se pliegan o desmontan rápidamente y sin herramientas para facilitar su transporte o almacén. VER TABLA DE MEDIDAS

PLEGABLE



Peso total:
6,5 kg



PRODUCTO
INOXIDABLE



Peso total:
3,9 kg



modelo	ancho	altura asiento	fondo	ancho e/brazos	peso máx.
AD901	55 cm	de 36 a 46 cm	52 cm	45 cm	100 kg
AD903	57 cm	de 40 a 55 cm	51 cm	45 cm	100 kg
AD905	53 cm	de 48 a 58 cm	49 cm	48 cm	110 kg
AD917	69 cm	de 52 a 62 cm	50 cm	64 cm	100 kg
AD920	56 cm	de 50 a 60 cm	57 cm	45 cm	100 kg

AD917 SILLA COMODE



Silla de WC, con acolchado blando especialmente recomendada para aquellos que deben permanecer sentados durante largos periodos. Cómoda y fácil de limpiar, de diseño discreto y sobrio que combina fácilmente con el entorno de la casa. Tiene una tapa que esconde el orificio del WC cuando está fuera de uso.

Medidas del asiento: 45 x 45 cm
VER TABLA DE MEDIDAS



Peso total:
8,3 kg

AD901 SILLA DE SERVICIO

Una silla de WC con diversas utilidades. Para estar en la habitación junto a la cama, ya que lleva una cubeta orinal con asa, o bien se puede utilizar directamente sobre la taza del WC como elevador, a la vez que los reposabrazos sirven de ayuda para incorporarse. Los brazos son abatibles para facilitar la transferencia lateral. Altura graduable. VER TABLA DE MEDIDAS



Peso total:
8 kg

AD920 SILLA CLUB

Cómoda silla con inodoro incorporado, de aspecto discreto que disimula bien la función para la que ha sido fabricada. Pensada para personas que por algún motivo tienen dificultad para desplazarse hasta el lavabo. Fabricación robusta y fácil de limpiar.

Medidas del asiento: 43 x 43 cm
VER TABLA DE MEDIDAS



Peso total:
8 kg

AD902 BANQUETA ASHBY



Cómoda silla con asiento acolchado, con inodoro incorporado y de altura graduable. Posee un aspecto atractivo que disimula perfectamente su función. La cubeta de plástico, con tapa y asa, se puede sacar para evacuarla y facilitar su limpieza.



El asiento tiene un mecanismo que lo abate colocándolo en la parte trasera de la silla, dejando libre un asiento de plástico y un orinal de 5 litros con tapa y asidera para su transporte. Cuando extraemos el orinal, un dispositivo impide que la tapa que lo cierra se abra de forma involuntaria.

AD904 SILLA WC DE MADERA ROYAL



Es una silla para utilizar en residencias, junto a la cama en hospitales, o en el hogar. De construcción robusta y fabricada totalmente en madera de la máxima calidad, tiene un aspecto atractivo y discreto que disimula perfectamente la función para la que ha sido diseñada. Asiento y respaldo acolchados con materiales ignífugos de alta resistencia y fáciles de limpiar.



modelo	ancho total	alto total	fondo total	altura asiento	ancho	fondo	peso máx.	total
AD904	58,5 cm	87 cm	48 cm	48 cm	46 cm	48 cm	160 kg	16,3 kg
AD902	55 cm	74 - 89 cm	38 cm	47-62 cm	45 cm	39 cm	160 kg	7 kg

AD832 SILLA MULTIFUNCIÓN CÓMODA-SWIFT



La Cómoda-Swift facilita el día a día a las personas que necesitan tener un inodoro cerca de la cama. La altura es graduable (42-57 cm) y el acolchado del asiento y el respaldo es desmontable. Con el acolchado tiene un diseño discreto y es cómoda de usar para vestirse y desvestirse. Sin el tapizado se puede utilizar como silla de ducha.

El orinal tiene una tapa con asa y se extrae fácilmente hacia arriba, si se prefiere la silla se puede colocar directamente sobre el inodoro. Fabricada en aluminio y plástico, esta silla es muy ligera, y a la vez robusta. Fácil de transportar y guardar: es desmontable y pesa solo 5,4 Kg.



Peso total:
5,4 kg



Peso máximo:
130 kg



etac

modelo	ancho total	entre brazos	fondo
AD832	54 cm	45 cm	50 cm

Asientos abatibles para ducha

Los asientos abatibles permiten sentarse en la ducha, un lugar de ambiente húmedo y resbaladizo, especialmente sensible en lo que a seguridad se refiere. Estos asientos permiten lavarse con más independencia y mayor libertad de movimientos, por ejemplo las piernas o los pies. Los asientos son también una ayuda muy útil para los cuidadores. Los materiales utilizados son siempre exclusivamente inoxidables: acero inoxidable, aluminio o plástico. Hay asientos para necesidades diferentes: con reposabrazos, con respaldo o con asiento higiénico en U para facilitar la higiene íntima. Podemos encontrar asientos para todas las necesidades que se adaptan a las características físicas y del baño de cada usuario.

La gente quiere independencia en el lavabo, es fundamental para su autoestima. Ponemos a su disposición productos que no solo hacen esto posible, sino que intentamos que sea una experiencia agradable.



PRESSALIT®
care

El extraordinario resultado de 30 años de trabajo de Pressalit Care se traduce en productos con un alto grado de flexibilidad. Además su atractiva paleta de colores combina bien en cualquier entorno. Los productos de Pressalit Care son fuertes y duraderos, ofrecen confianza y seguridad al usuario y las mejores soluciones a los directivos que invierten en las instalaciones.

R7010 ASIENTO DE DUCHA

R6010 RESPALDO




Su forma y diseño hacen de la ducha una experiencia agradable y segura.

Con la posibilidad de añadir a este asiento un respaldo y también reposabrazos, este asiento es una buena muestra de la flexibilidad de sistema de Pressalit Care.

Los materiales utilizados son de un plástico especial blando y antideslizante a la vez que cálido al tacto.

Cuando se pliega hacia arriba el asiento ocupa el mínimo espacio, esto proporciona mayor libertad de movimientos tanto al usuario como al cuidador.

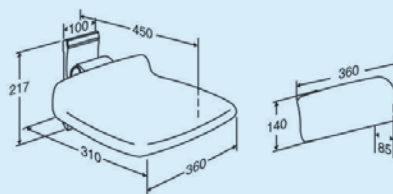


Al hacer el pedido, por favor indicar el color deseado

R7151 ASIENTO DE ALTURA REGULABLE CON RESPALDO Y BRAZOS




Plegado sobresale 17,5 cm

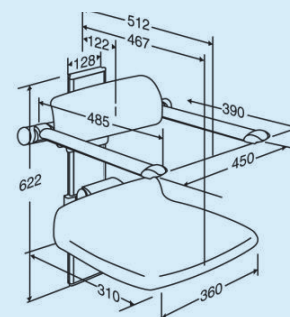

Un asiento versátil y flexible: ideal para un lavabo con diferentes usuarios, este asiento de altura regulable permite regular la altura del asiento y del respaldo (o en su caso los brazos) de forma independiente para adaptarse a las diversas morfologías de usuarios diferentes.

Fabricado en un material blando y de tacto cálido, a la vez que antideslizante.

AD538 ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE

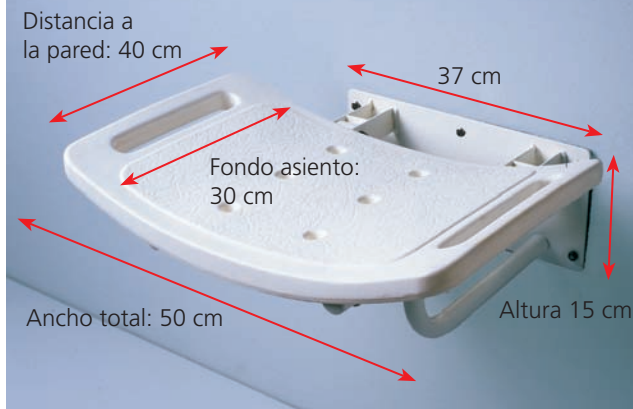

Fabricado en aluminio con recubrimiento epoxi en color blanco. Asiento de plástico de forma cóncava con desagüe y asideras integradas para mayor sensación de seguridad. Se puede plegar contra la pared cuando está fuera de uso.




AD538D ASIENTO ABATIBLE CON PATAS



Silla abatible a la pared, con patas. De iguales características que el modelo AD538 con dos patas, también abatibles a la pared y regulables en altura, que dan mayor seguridad, ya que soportan la mayor parte del peso.



ASIENTO ABATIBLE LINIDO

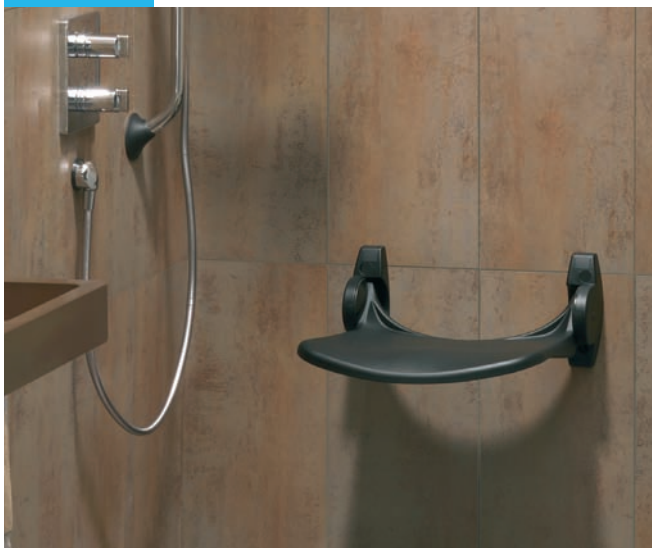

Información detallada de estos productos en la página 78 y 79.



Asientos abatibles compactos y acolchados

Ofrecen una solución económica, compacta y confortable para el usuario en duchas de dimensiones reducidas. Fabricado en plástico de polipropileno y aluminio. Asiento acolchado de tacto suave que se puede desmontar para facilitar su limpieza. Ajuste de precisión en una pata para compensar cualquier irregularidad en la superficie de la ducha (+/- 13 mm).

AD528MAXI



AD528MINI



AD538U ASIENTO ABATIBLE EN "U" CON PATAS




El asiento en U facilita la higiene íntima. Este asiento de ducha con patas y montado en pared es la alternativa apropiada cuando se desea tener un asiento siempre disponible, pero que se pueda abatir fácilmente dejando la ducha libre. Estructura inoxidable, de aluminio y con asiento plástico.



NOTA: Los asientos deben ser instalados en una pared firme y segura. Los tacos y los tornillos deben ser los apropiados y su elección así como la instalación del asiento debe ser llevada a cabo con personal cualificado para ello. Recomendamos utilizar tornillería de acero inoxidable. La carga máxima depende de la correcta instalación, elección de los anclajes y del estado de la pared, por eso no recomendamos el tipo de tacos ni especificamos la carga máxima.

AD527LUX ASIENTO ABATIBLE CON RESPALDO Y BRAZOS AJUSTABLES

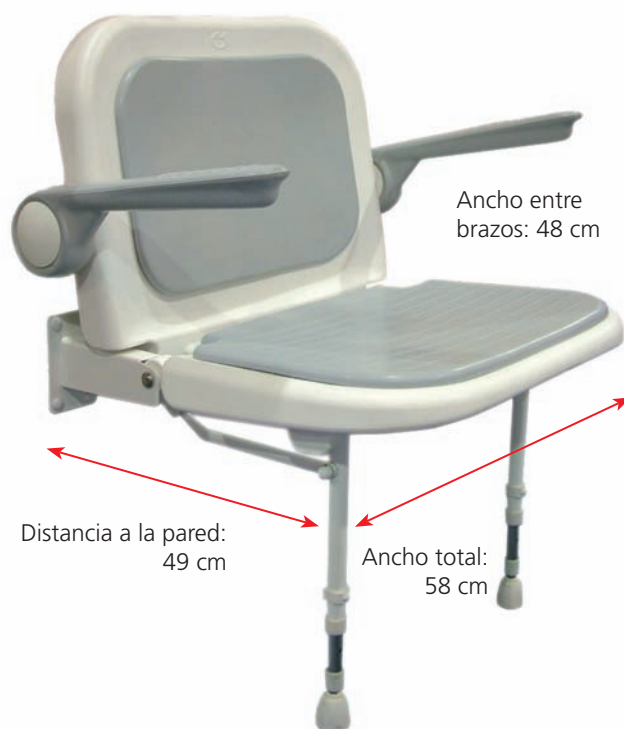

Asiento de ducha abatible de gran calidad, fabricado en acero inoxidable con cojín acolchado para mayor comodidad. Incorpora apoyabrazos independientes para mayor soporte al sentarse y levantarse. El ángulo de caída de los brazos puede ajustarse según las preferencias individuales (+/- 5°)



AD529 ASIENTO ABATIBLE DE MADERA



Diseño elegante y adecuado para cualquier cuarto de baño doméstico. Fabricado en acero inoxidable, tablas de madera y caucho ecológico barnizado con protección de poliuretano. Ajuste de precisión en una pata para compensar cualquier irregularidad en la superficie (+/- 13 mm).


AD531 ASIENTO ABATIBLE EN U



Fabricado en acero inoxidable con cojín acolchado. Asiento en forma de U para facilitar la higiene íntima.



H1180 BANQUETA DE BAÑO MEDICI

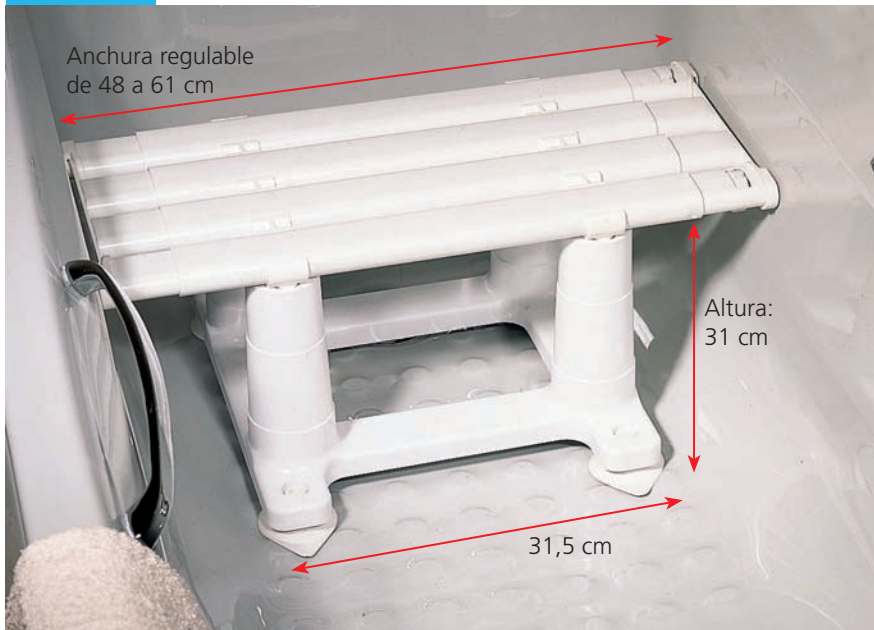

Asiento de anchura regulable para adaptarse a cualquier bañera. Fabricado en plástico y acero inoxidable. Los pies de goma antideslizante y el diseño de los listones del asiento que permiten el drenaje del agua le confieren una seguridad óptima.




Peso total:
2,3 kg



Peso máximo:
130 kg



H1155 BANQUETA SAVANA

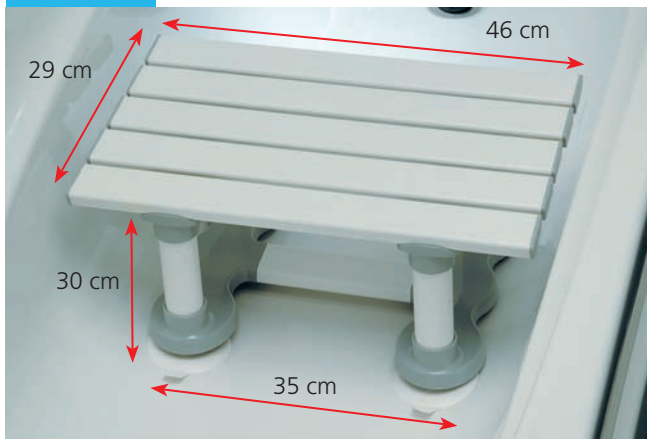

Fabricada en plástico reforzado y con materiales inoxidables. Es cómoda y tiene un buen drenaje para evacuar el agua. 4 ventosas la aseguran firmemente a la bañera.




Peso total:
3,2 kg



Peso máximo:
130 kg



AD525 ASIENTO DE BAÑERA ABBEY

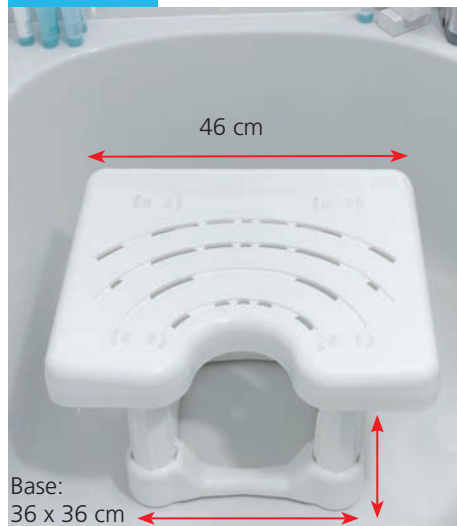

Peso total:
2,3 kg



Peso máximo:
190 kg

Desmontable para facilitar la limpieza o para llevar de viaje

Diseño innovador que permite ajustar fácilmente el asiento a 4 diferentes alturas: 15, 20, 25 y 30 cm.

Según las necesidades de cada usuario. Por seguridad lleva 4 ventosas en las patas.

Protectores impermeables

Para bañarse o ducharse sin mojar el yeso o las vendas de una herida o durante cualquier tratamiento que lo precise. Protectores reutilizables con aro flexible de neopreno que sella completamente el paso del agua sin apretar. Quedan firmemente colocados en su lugar y no se caen. Son cómodos y fáciles de usar y al ponerlos pasan fácilmente sobre vendajes o yesos. Fabricados en PVC reforzado, es reutilizable y duradero.

L1 PROTECTOR PARA MANO

	modelo	circunferencia
MANO	L1	22-25 cm



Medir 5 cm por debajo del codo.

L2 PROTECTOR MEDIO BRAZO

	modelo	circunferencia
MEDIO BRAZO	L2S	22-25 cm
	L2M	25-29 cm
	L2L	30-40 cm



Para yesos o vendajes por debajo del codo. Sella por encima del codo. (medir 8 cm. por encima del codo)

L3 PROTECTOR BRAZO ENTERO

	modelo	circunferencia
BRAZO COMPLETO	L3M	25-29 cm
	L3L	30-40 cm

Para impermeabilizar todo el brazo.



L4 PROTECTOR MEDIA PIERNA

	modelo	circunferencia	altura usuario
MEDIA PIERNA	L4S	35-40 cm	1,65 - 1,83 m.
	L4M	39-54 cm	1,65 - 1,83 m.
	L4L	52-59 cm	más de 1,80 m.



Para yesos o heridas por debajo de la rodilla. El protector impide el paso del agua (medir 10 cm por encima de la rodilla).

L5 PROTECTOR PIERNA ENTERA

	modelo	circunferencia	altura usuario
PIERNA COMPLETA	L5XS	39-54 cm	1,53 - 1,63 m.
	L5S	39-54 cm	1,65 - 1,83 m.
	L5M	52-65 cm	1,65 - 1,83 m.
	L5L	52-65 cm	más de 1,84 m.

Para impermeabilizar toda la pierna.

Los protectores impermeables:

No contienen látex

Fáciles de usar

Reutilizables

Resistentes y duraderos

Para el baño o la ducha



AD590 ELEVADOR DE BAÑERA BATH MASTER



El elevador está a la altura del borde de la bañera y el usuario se sienta de manera cómoda y segura. El asiento ergonómico y agradable al tacto ofrecen gran confort. Simplemente apretando un botón el BATHMASTER desciende suavemente hasta el fondo de la bañera. Cuando el asiento está en el fondo de la bañera se puede reclinar hacia atrás el respaldo para mayor confort.

Bath Master es ligero y fácil de transportar y guardar, cuando no se utiliza se puede retirar de la bañera para dejarla libre.



Peso total:
11 kg



Peso máximo:
140 kg


Apretando un botón el elevador asciende suavemente hasta el borde de la bañera para facilitar la salida. Funciona con baterías de Litio. (recarga en 3 horas)



Accesorios disponibles

A590/1 DISCO GIRATORIO

A590/2 DISCO DESLIZANTE Y GIRATORIO

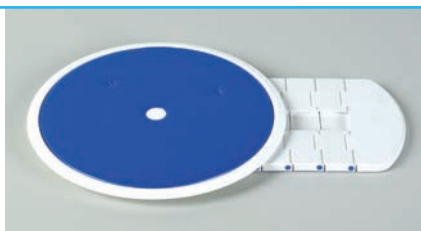

Asientos giratorios

La prevención de caídas es uno de los aspectos mas importantes del higiene y los asientos giratorios son una solución práctica y económica para aquellas personas que experimentan inseguridad o dificultad al utilizar una bañera. Diseñados para utilizarlos con la ayuda de otra persona que con un mínimo de esfuerzo introducirá las piernas del usuario dentro de la bañera. No requiere obras ni mantenimiento, y se puede retirar al instante para dejar libre la bañera.



El usuario se sienta en el asiento que queda bloqueado (cada 90°) para que no gire involuntariamente. Los brazos pueden ser una ayuda adicional.



El cuidador solo tiene que soportar el peso de las piernas, hace girar el asiento cómodamente dentro de la bañera.



La persona está ahora cómodamente sentada en el interior de la bañera.


AD536inox

ASIENTO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE



AD536alu

ASIENTO GIRATORIO DE ALUMINIO

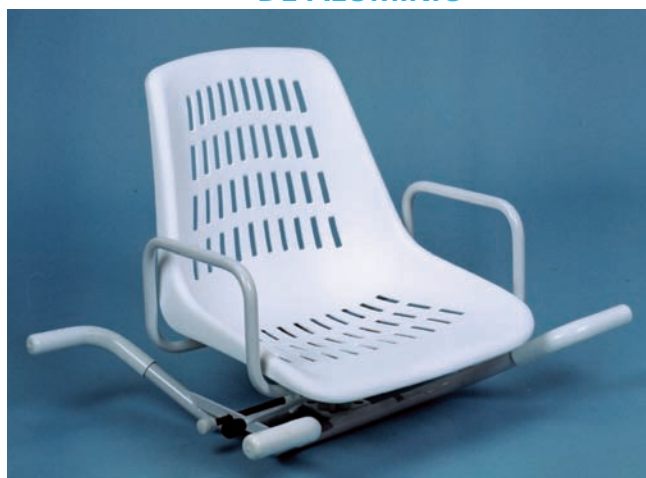

De construcción robusta, **disponible en acero inoxidable o en aluminio** y recubrimiento epoxi en color blanco, no requiere mantenimiento y se puede separar en dos piezas para facilitar su almacén o transporte. El asiento queda emplazado firmemente en la bañera, sin requerir obras ni fijaciones y se puede retirar al instante para usar la bañera normalmente. La seguridad del asiento es muy importante; lleva reposabrazos integrados y una palanca con 4 posiciones que puede bloquear el giro del asiento para mayor seguridad al entrar y salir. El diseño del asiento impide deslizamientos y evacúa el agua. Dos tornillos acolchados, aseguran el asiento al interior de la bañera.


ALFOMBRAS PARA BAÑERA Y DUCHA

Una práctica prevención de caídas ya que reducen el riesgo de resbalar. Tienen un excelente agarre debido al gran número de ventosas y la gran calidad de la goma antideslizante. Tienen cantidad de agujeros que drenan el agua de la superficie rápidamente. Disponible en dos medidas, para ducha y para bañera.



H1803 CUADRADA, 54x54 cm.

H1805 RECTANGULAR, 93x35 cm.

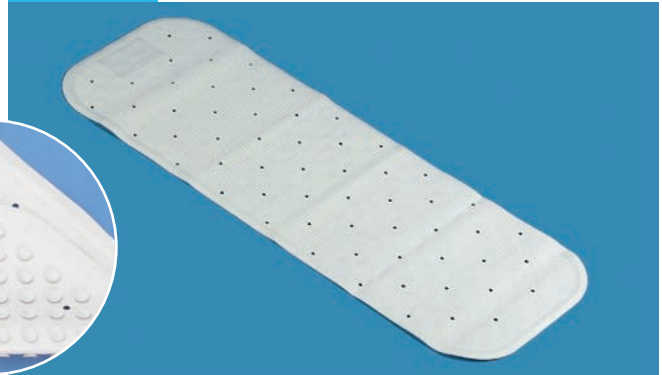

AD530i SILLA GIRATORIA DE ACERO INOXIDABLE

Asiento fabricado en acero inoxidable, con asiento anatómico de plástico. Higiénico y seguro. Apta para ser utilizada en el interior del plato de ducha o como silla auxiliar en el lavabo.



AD539 BANCO DE BAÑERA



Silla de aluminio, regulable en altura, de 46 a 57 cm. Se colocan dos patas dentro y dos fuera, así tendremos una silla dentro de la bañera y otra fuera. La transferencia al entrar y salir de la bañera es así más cómoda y segura. El banco plástico tiene orificios de drenaje. La asidera, reposabrazo, colocada en la parte interior del banco ofrece una ayuda adicional.

Su diseño permite tener una silla dentro y otra fuera de la bañera



modelo	ancho total	fondo total	ancho e/brazos	peso máx.	peso total
AD536inox	70 cm	54 cm	46 cm	120 kg	6 kg
AD536alu	70 cm	55 cm	46 cm	100 kg	3,8 kg
AD530i	53 cm	52 cm	46 cm	100 kg	6,5 kg
AD539	76 cm	41 cm	66 cm	100 kg	4,9 kg

AD831 TABURETE Y SILLA SWIFT

Diseñada en Suecia por A&E design AB en estrecha colaboración con profesionales de la terapia ocupacional y de usuarios. Su concepción modular hace que SWIFT sea justo lo que necesitamos desde un taburete hasta una silla de ducha completa, dependiendo de las necesidades del usuario y de cómo éstas cambien. La composición de los materiales (aluminio y plástico polipropileno) garantiza la máxima seguridad.

Dimensiones
asiento:
45 x 41 cm



etac

AD830 TABURETE SWIFT



Altura con
respaldo:
80-95 cm

Altura asiento:
42-57 cm

47 cm

Ancho total:
54 cm



**PRODUCTO
INOXIDABLE**



Peso total
Taburete: 3,1 kg
Silla completa: 4,7 kg



Peso máximo:
130 kg



**Patas telescópicas graduables
en altura sin herramientas.
Conteras antideslizantes.
Fácil de limpiar: el asiento cabe
en el lavaplatos.
Muy ligera y con asa integrada
para su transporte.**

A828/12 ESTANTE BANDEJA



Práctico estante para artículos de baño, tales como gel, jabones, esponjas, etc...que además permite colgar el teléfono de la ducha.

AD540 TABURETE DE BAÑO MILANO



Peso máximo: 150 kg

AD541 BANQUETA GIRATORIA TURIN



Taburete regulable en altura y desmontable sin necesidad de herramientas para facilitar su transporte. Producto totalmente inoxidable, fabricado en aluminio y plástico. Muy estable y seguro, lleva 4 grandes conteras de goma en las patas. Fácil de limpiar con los detergentes habituales. Muy ligera y apilable.

Banqueta inoxidable con asiento blando y giratorio para facilitar la movilidad. Patas de aluminio de altura regulable y con ventosas. Desmontable sin necesidad de herramientas.

AD833 TABURETE EDGE

Práctico taburete especialmente diseñado para ocupar el mínimo espacio. Totalmente inoxidable y desmontable sin herramientas.



Sentando como muestra la ilustración es fácil doblar las piernas hacia los lados y alcanzar cómodamente los pies, que de otra manera resultan inaccesibles.



Peso total 2,6 kg



Peso máximo: 130 kg

etac

AD537P TABURETE PLEGABLE LEO

Práctico taburete plegable para el baño. Fabricado en aluminio, es muy ligero y totalmente inoxidable. Patas telescópicas de altura graduable, son conteras antideslizantes de caucho. VER TABLA DE MEDIDAS



AD532 BANQUETA DE BAÑO GEMINIS

Práctico asiento de altura graduable para asegurar que se adapta perfectamente a las preferencias de cada persona. Es una banqueta muy estable y de fabricación robusta. Construida en aluminio y plástico, es una silla totalmente inoxidable y a la vez que muy ligera y fácil de transportar, solo pesa 2,3 Kg.



AD543 TABURETE ENTRADO



Un taburete resistente y seguro, muy versátil y práctico para una gran variedad de usos. Ideal para entrar y salir de la bañera, o como taburete para los pies cuando se usa el inodoro y se quieren levantar las rodillas para adoptar una postura que facilite la evacuación.



ASIENTOS DE ALUMINIO PARA BAÑO SAMBA

Serie de asientos especialmente diseñados para ser utilizados en el baño. Sus patas extensibles permiten graduar la altura del asiento y sus conteras de caucho lo dotan de gran estabilidad al ser antideslizantes. Fabricados en aluminio y plástico, resultan totalmente inoxidables y muy ligeros. Los asientos tienen desagües y asideras integradas para mejorar la higiene y la seguridad. VER TABLA DE MEDIDAS



AD537A

SILLA SAMBA

Silla completa con respaldo de plástico. Los asientos tienen desagües y asideras integradas para mejorar la higiene y la seguridad.

AD537AS

TABURETE SAMBA

Con las mismas características que la silla **AD537A** pero sin respaldo.



AD537C

SILLA SAMBA CON ASIENTO EN U

Silla completa con respaldo de plástico. El asiento en forma de herradura facilita la higiene íntima.

AD537CS

TABURETE SAMBA CON ASIENTO EN U

Con las mismas características que la silla **AD537C** pero sin respaldo.



modelo	ancho	alto	fondo	ancho asiento	fondo asiento	altura asiento	peso máx.	peso total
AD537A	42cm	68-80 cm	43 cm	48 cm	28 cm	36-46 cm	100 kg	2,8 kg
AD537AS	42cm	-	43 cm	48 cm	28 cm	36-46 cm	100 kg	2,0 kg
AD537C	43cm	68-80 cm	48 cm	41 cm	38 cm	40-52 cm	100 kg	3,1 kg
AD537CS	43cm	-	48 cm	41 cm	38 cm	40-52 cm	100 kg	2,2 kg
AD537P	52cm	37-40 cm	46-50cm	47 cm	30 cm	37-40 cm	80 kg	2,3 kg

AD834 SILLA WC PORTÁTIL VOYAGER

Práctica y muy ligera (solo 5 Kg.) silla W.C., fácilmente desmontable para su transporte. Totalmente inoxidable y fácil de limpiar con detergentes corrientes. Se puede colocar sobre cualquier WC gracias a su altura graduable: 41-56 cm. Opcionalmente se puede adaptar una

Cubeta con tapa: [Ref TP726](#)



AD520 SILLA DE BAÑO PLEGABLE ACUARIO



Dispositivo antiplegado de seguridad.....



AD520LUX SILLA DE BAÑO PLEGABLE ACOLCHADA ARIES



Silla totalmente inoxidable, fabricada en aluminio. Muy ligera, fácil de transportar y guardar. Altura graduable. Segura y estable: incorpora un **dispositivo antiplegado de seguridad**. Asiento y respaldo agradables al tacto, de formas redondeadas y sin cantos agresivos. El asiento en U facilita el acceso para la higiene íntima.

De iguales características que **AD520 ACUARIO** aunque incorporando un cómodo asiento blando, de tacto cálido y fácilmente extraíble para su limpieza.



modelo	ancho	alto	fondo	ancho asiento	fondo asiento	altura asiento	peso máx.	peso total
AD520+LUX	53 cm	82-89 cm	55 cm	40 cm	40 cm	46-53 cm	100 kg	3,8 kg

H1870 LAVACABEZAS PARA SILLA



Bandeja que se sujeta al cuello con una tira de velcro.

H1872 LAVACABEZAS DE CAMA




De diseño ergonómico y fabricado en una sola pieza, este lavacabezas evacúa el agua por una ranura lejos de la cama, para poder colocar un cubo.

H1874 LAVACABEZAS HINCHABLE



Incorpora un tubo de drenaje para evacuar el agua

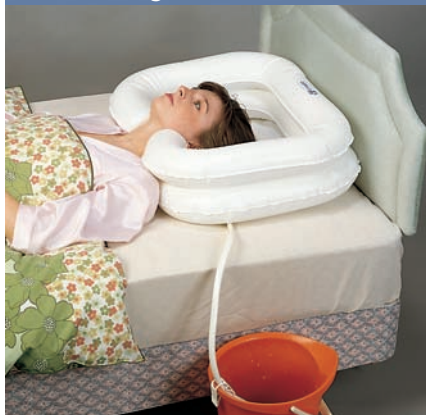

De resistente plástico vinilo, con dos aros hinchables y una abertura para el cuello. Es muy práctico para lavar a una persona encamada. Se puede inflar fácilmente sin necesidad de bomba.



Tablas de bañera: comodidad y prevención de caídas

Las personas que tienen dificultad para utilizar la bañera encuentran en las tablas una gran ayuda para entrar y salir con seguridad. Además lavarse sentado es mucho más cómodo y permite, por ejemplo, prestar la debida atención a la higiene de los pies y las piernas sin grandes esfuerzos ni riesgos de caídas. Se colocan y ajustan sobre la bañera sin necesidad de herramientas y si se quiere pueden retirarse para dejar la bañera libre de nuevo.

ESCOGER LA TABLA ADECUADA

A pesar que las tablas corrientes sirven para la mayoría de las personas, existen **tablas específicas para necesidades diferentes**.

Algunas tablas incorporan una **asidera que proporciona más seguridad**.


Considere las **dimensiones de la bañera**. Para una bañera especialmente pequeña hay tablas mas cortas de lo habitual, de solo 69 cm (**AD559**)

Tenga siempre en cuenta el **peso de la persona** que utilizará la tabla. Cada tabla de bañera indica claramente cual es el peso máximo que soporta.


Las **tablas extragrandes y reforzadas** dan más confianza a las personas con mayores dimensiones. (**H1093** con 36 cm de fondo)



La persona se sienta en el extremo más ancho de la tabla, que debe quedar en la parte exterior y está especialmente diseñado para facilitar la entrada y salida de la bañera.

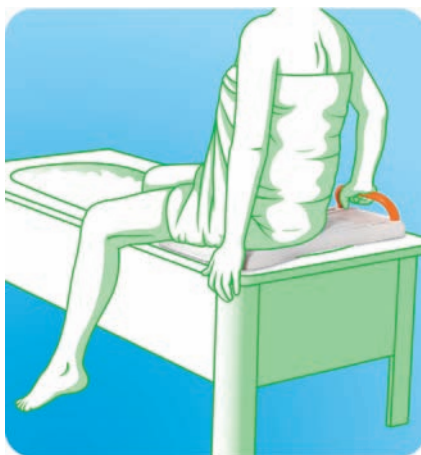


La asidera, que debe estar en la parte interior de la tabla, ofrece una seguridad adicional para entrar y salir de la bañera. En una tabla correctamente diseñada esta asidera deberá estar inclinada hacia dentro o separada de la pared para dejar libre el espacio necesario para agarrarla cómodamente con la mano sin dañarse con la pared.

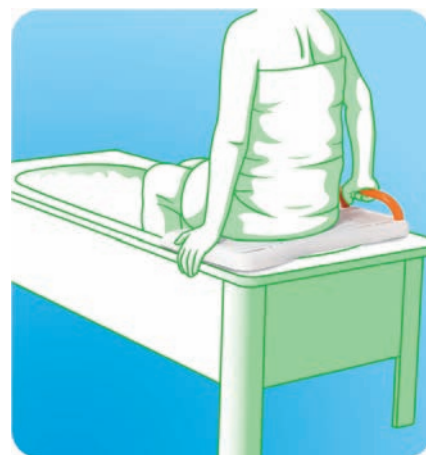

La parte central de la bañera es a menudo mas estrecha para facilitar el acceso durante la higiene íntima. Al estar sentado en el interior de la bañera se puede disfrutar del baño de manera cómoda y segura, además de alcanzar las piernas y los pies sin necesidad de agacharse.

AD559 TABLA PARA BAÑERA FRESH

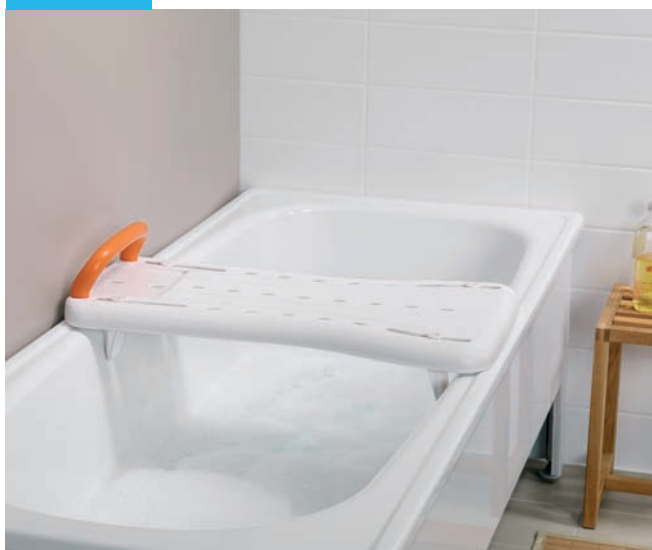

La firma sueca ETAC ha desarrollado la tabla FRESH con los criterios mas actuales en lo referente a la ergonomía y la funcionalidad sin olvidar la seguridad en el baño. El extremo más ancho facilita la entrada a la bañera y la parte mas estrecha proporciona mejor acceso para la higiene íntima. La asidera incorporada incrementa la seguridad del usuario. Reciclable. Disponible en dos medidas para bañeras anchas o estrechas. VER TABLA DE MEDIDAS.

etac



Disponible en dos medidas:

modelo	largo	fondo
AD559 corta	69 cm	27 - 36 cm
AD559 larga	74 cm	27 - 36 cm

KG
Peso máximo:
150 kg

AD557 TABLA DE BAÑERA EXTRAPLANA



Sus soportes regulables permiten ajustarse a la anchura de la bañera

Una tabla especialmente bien dimensionada y extraplana para facilitar el máximo posible el acceso en el caso de transferencia lateral. La superficie tiene un ligero relieve anti-deslizante. Incluye 4 soportes regulables para ajustar la tabla por debajo a la anchura exacta de la bañera.

H1093 TABLA EXTRAGRANDE



Tabla de bañera de plástico de mayores dimensiones que las tablas corrientes. Reforzada y de drenaje rápido que proporciona confianza al usuario. VER TABLA DE MEDIDAS



modelo	largo	fondo	peso máximo
AD557	72 cm	29 cm	130kg
H1093	69 cm	36 cm	150kg

Gama BEAUTY para el cuidado personal

Una completa gama de prácticos utensilios para el cuidado e higiene personal. Ligeros y funcionales, ergonómicamente diseñados para personas con movilidad reducida de las extremidades superiores. Su peso está cuidadosamente equilibrado para conseguir utilizarlos con el mínimo esfuerzo de las manos, los brazos y los hombros. Diseñados por el estudio sueco Ergonomic Design AB para la firma ETAC.



AD852 TOALLITA PARA CUERPO Y ESPALDA

Disponible en dos medidas, corta para el cuerpo y larga y curvada para la espalda que, con su forma ergonómica, hace posible alcanzar toda la espalda. La toallita se desmonta del mango y esta hecha de un material especial que la hace efectiva para lavarse sin absorber demasiada agua, eso significa que la toallita continúa siendo ligera incluso mojada. Recambios disponibles.



AD852C



AD852L



modelo	uso	largo	peso
AD852C	Cuerpo	38 cm	112 gr
AD852L	Espalda	77 cm	203 gr
RECAMBIOS Lavables a máquina hasta 60°			
A852C	Toallita de recambio para el cuerpo		
A852L	Toallita de recambio para la espalda		

AD850 PEINE

Con un mango largo un diseño ergonómico y curvado para adaptarse a la forma de la cabeza, lo que facilita peinarse con un mínimo esfuerzo aguantándolo cerca del cuerpo.



modelo	largo	peso
AD850	37 cm	90 gr



AD851 CEPILLO

Disponible con mango largo o corto, a elegir según la movilidad de los brazos y del hombro de cada persona.



modelo	largo	peso
AD851C	29 cm	102 gr
AD851L	37 cm	112 gr



AD853 CEPILLO PARA LAVARSE EL PELO

Lavarse el pelo es mas fácil con este cepillo BEAUTY de ETAC. Sustituye los dedos al aplicar el champú y su diseño permite alcanzar toda la cabeza y realizar el masaje correspondiente.



modelo	largo	peso
AD853	36 cm	112 gr



etac

H7151 CEPILLO PARA PIES GÉNOVA



Largo: 67 cm



Para la higiene de las extremidades inferiores de personas con dificultad para alcanzar sus pies. Punta redondeada de espuma reemplazable, (se suministra con 3 esponjitas) para limpiar entre los dedos y aplicar cremas o medicamentos.

H7152 LAVAPIÉS 3 EN 1 FONTANA



Peso: 284 gr
Medidas: 28 x 15,7 x 3,2 cm

De iguales características que la **ÍSOLA** en el que puede elegir entre dos tipos de cerdas, mas duras o mas blandas y suaves. En el centro lleva además incorporada una pieza de piedra Pómez.

H7153 LAVAPIÉS ÍSOLA



Medidas: 29 x 14 x 3,1 cm Peso: 300 gr

Para lavar los pies sin agacharse, este lavapiés tiene cientos de pequeñas cerdas blandas y unas potentes ventosas que lo fijan al suelo del plato de ducha o de la bañera. Simplemente tiene que humedecer y aplicar jabón y frotando la planta de los pies sobre el **ÍSOLA** obtendrá un agradable y reparador masaje.

H7154 SHOWER SANDAL



etac

Para masajear y lavar los pies sin necesidad de agacharse. Queda fijada al suelo con unas ventosas. Ganador de un premio al diseño excelente en Noruega.



H1831

ESPONJA DE BAÑO CON MANGO PLÁSTICO

Largo total:
50 cm



H1833

ESPONJA CON MANGO FLEXIBLE



Esponja con mango largo que se puede doblar simplemente con las manos, sin necesidad de calentar el mango, para darle el ángulo deseado y poder alcanzar partes distantes del cuerpo, tales como la espalda.

Largo total: 56 cm




Peso total
60 gr

H1818

APLICADOR DE CREMA

Largo mango:
35 cm

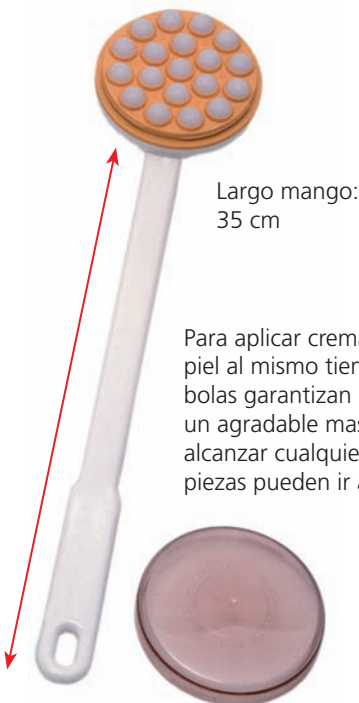

Para aplicar cremas o lociones y masajear la piel al mismo tiempo. La suave rotación de sus bolas garantizan la distribución de la crema y un agradable masaje. Su largo mango permite alcanzar cualquier parte del cuerpo. Todas las piezas pueden ir al lavavajillas.



Peso total
150 gr

AD859

MANGO ERGONÓMICO PARA LIMAS



Mango multiusos que principalmente ofrece un mango grueso y ergonómico para sujetar limas, aunque tiene además un orificio en el lado opuesto para sujetar otros utensilios, por ejemplo maquinillas de afeitar.

H7155

CEPILLO CON VENTOSAS



Diseñado para ser utilizado con una sola mano. Pequeño cepillo con dos ventosas para fijarlo a superficies no porosas.

10 x 5,5 cm
Cerdas de 15 mm.

Incontinencia

La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina ocasional o permanente. Puede tratarse desde pequeñas pérdidas a grandes cantidades. Para los dos millones de afectados, este trastorno supone un reto a superar no solo en cuanto a higiene sino también en cuanto a la carga psicológica que representa.

Muchas personas padecen incontinencia, desde ancianos hasta madres jóvenes y no obstante, la incontinencia sigue siendo un tema del que apenas se habla.

Por este motivo, nuestra intención es, como siempre, informarle y animarle a encontrar la solución profesional que mejor se adapte a cada necesidad.

Con nuestros productos para incontinencia le garantizamos la protección de la piel frente a las pérdidas de orina, así como el confort, un uso sencillo y la discreción de los productos.



MOLIMED FEMENINO

Absorbentes para incontinencia ligera

Gran absorción: la capa DryPlus conduce el líquido rápidamente hacia el núcleo absorbente, donde el sistema SAP HighDry lo aísla con seguridad. Su diseño proporciona una adaptación perfecta.

Piel siempre seca: el tejido exterior permite que la piel respire.

Optima discreción: único y efectivo neutralizador del olor (las moléculas CYDEX absorben el olor, aislándolo).




168 634 MOLIMED mini Absorción hasta 200 ml

168 644 MOLIMED midi Absorción hasta 300 ml

168 654 MOLIMED maxi Absorción hasta 600 ml

* Se suministra en bolsas de 14 unidades

168 600 MOLIMED FOR MEN ACTIVE Absorción hasta 200ml

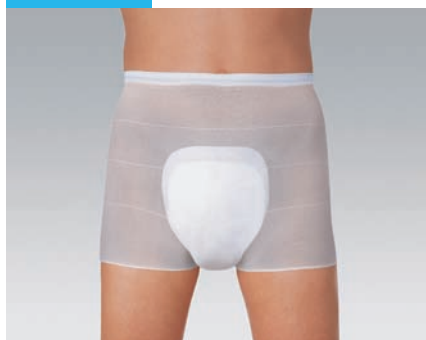

Absorbentes para incontinencia ligera.

Máxima protección con mayor libertad de movimiento. El núcleo especial absorbente y su forma adaptable a la anatomía masculina aseguran la mayor discreción. Proporciona el máximo confort, agradablemente seco.

Optima discreción: único y efectivo neutralizador del olor.

* Se suministra en bolsas de 14 unidades

MOLICARE MOBILE



Ropa interior
desechable,
el más práctico
y nuevo
concepto.

Ropa interior absorbente con forma anatómica, para ofrecer la mayor independencia y seguridad. Proporciona la máxima protección frente a las fugas gracias a su gran capacidad de absorción (de 1.100 ml hasta 1.300 ml) . Rápido de colocar, higiénico de retirar.

915 123 MEDIANA Talla 2 (mediana) cintura: 80-120 cm absorción: 1,100 ml

915 127 GRANDE Talla 3 (grande) cintura: 100-150 cm absorción: 1,300 ml



* Se suministra en
bolsas de 14 unidades



Se usa de la misma forma que la ropa interior.

EMPAPADORES DESECHABLES MOLINEA PLUS



Núcleo absorbente de suaves copos de celulosa adherido linealmente al polietileno. Con dobleces laterales antiescapes. Capa de tisú que distribuye la humedad. Recubrimiento completo de polietileno antideslizante.

161 182 MOLINEA PLUS E. 60x60 Absorción hasta 500 ml

161 184 MOLINEA PLUS E. 60x90 Absorción hasta 750 ml

* Se suministra en bolsas de 30 unidades

RC005 EMPAPADOR SUPERABSORVENTE



Es muy absorbente y fácil de colocar, indispensable para proteger la cama o la silla de ruedas de incontinencias y manchas. La absorbencia es aproximadamente de 2,8 litros/m². Es impermeable, y transpirable con excelente absorción manteniendo una sensación de sequedad total.

Composición:

Tejido 100%. Peso 145 gr/m²

Napa 100%. Peso 190 gr/m²

Film PU 45 gr/m²

Tejido 100%. Peso 90 gr/m² Tintado en azul.

Peso total 470 gr/m² - Acabado antibacterias.



Protectores y fundas completas de colchón

RC114P RIZO DE ALGODÓN + POLIURETANO

Fundas completas y protectores de rizo de 100% algodón y poliuretano.

Gracias a las extraordinarias cualidades del poliuretano inducido (microporoso, impermeable y transpirable) se evita el calor excesivo y el sudor.

Antialérgico y reciclable.

Alarga la vida del colchón y lo mantiene seco.

Los protectores tienen un elástico en todo su perímetro y las fundas completas tienen cremallera con solapa, fáciles de colocar y de desenfundar.

Lavables a 90°.

Disponibles: en protectores o fundas completas



RC115P POLIURETANO IGNÍFUGO

Fundas completas y protectores fabricados en poliuretano microporoso, impermeable y transpirable.

Material ignífugo y antialérgico (no retiene el polvo ni los ácaros).

Higiénico y reciclable.

Lavable a 90° y fácil de colocar, con elásticos en todo el perímetro en el caso de los protectores y cremallera con solapa para las fundas completas.

Evita el calor y el sudor.


Alarga la vida del colchón y lo mantiene seco.

Disponible: en protectores o fundas completas



RC114F

RC115F

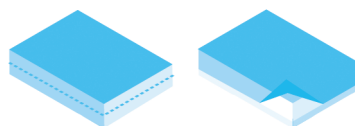

material	funda 90 cm ancho	protector 90 cm ancho *
Rizo	RC114F	RC114P
Poliuretano	RC115F	RC115P

* Compatibles para largos de 190 a 200 cm.

Orinales portátiles

Es una solución práctica para usuarios de sillas de ruedas, personas con incontinencia urinaria, cistitis crónica o cuando hay necesidad de orinar y no hay lavabos disponibles. Su pequeño tamaño permite llevarlo en cualquier bolso, incluso en el bolsillo, y para usarlo solo se requiere un mínimo de intimidad. La tapa cierra con seguridad y no gotea, permitiendo un uso discreto, para guardarlo, vaciarlo y lavarlo posteriormente. La bolsa esta fabricada en látex, ligera y fácil de limpiar para reutilizarla. Es también una solución muy práctica en los viajes o en el camping. Capacidad: 1 litro.

H7251 ORINAL FEMENINO PORTÁTIL URIFEM



Diseñado para adaptarse a la forma femenina, se puede utilizar tanto sentada como de pie.



La tapa cierra con total seguridad impidiendo el goteo

H7250 ORINAL MASCULINO PORTÁTIL URIBAG



De idénticas características que el URIFEM pero adaptado a la fisiología masculina.

Su pequeño tamaño permite llevarlo incluso en el bolsillo.



H7248 ORINAL FEMENINO



Peso: 90 gr
Capacidad: 1 l.

Orinal diseñado anatómicamente para poderse usar sentada, de pie o estirada. Con mango y calibrado exteriormente para registrar la capacidad del contenido. Resistente y fácil de lavar.

H7247 ORINAL MASCULINO



Peso: 102 gr
Capacidad: 1 l.

Orinal tipo botella con mango. Calibrado exteriormente para registrar la capacidad. Resistente, fácil de lavar y puede ir al autoclave.

H7249 SOPORTE PARA ORINALES



Este simple soporte para colgar los orinales de la cama está fabricado en acero y está dimensionado para alojar los orinales H7248 y H7247.

Peso: 315 gr.
Alto: 32 cm

Contenedor para pañales EASY SEAL

El único sistema de recogida de pañales, material de curas y otro tipo de residuos sanitarios, libre de olores y gérmenes. Discreto, higiénico (la tapa y la bolsa antibacterias reducen el riesgo de infecciones). De fácil uso, **EASYSEAL**, elimina los olores con un simple movimiento de giro y sellado. Ayuda a mantener el entorno agradable, tanto para los residentes como para el personal sanitario. Contribuye a dar una buena impresión de su residencia o centro de día cuando reciba a futuros usuarios, familiares, visitantes y trabajadores.

RC101 CONTENEDOR MAXI Capacidad aproximada 25 pañales.
Altura 89 cm

RC102 CONTENEDOR MINI Capacidad aproximada 10 pañales.
Altura 50 cm

RC103 CARTUCHO RECAMBIO 25 metros (unos 100 pañales) de bolsa perfumada con tratamiento antibacterias.



USO SENCILLO

1 Empuje el pañal doblado a través de la boca del contenedor.



2 Gire 2 veces la boca del contenedor. El pañal queda envuelto individualmente en la bolsa antibacteriana.



3 Cierre la tapa.



4 Cuando el contenedor está lleno, se vacía la cadena de pañales envueltos en un contenedor de basura. En el modelo MAXI se puede colocar una bolsa de basura para hacer el vaciado aún mas fácil.

Cuidado de la piel

La piel necesita un cuidado especial. La salud de la piel juega un papel esencial en el bienestar de las personas, más aun cuando se trata de una piel especial, como es el caso de los ancianos. La sequedad que produce la incontinencia urinaria y fecal provoca una pérdida de elasticidad en la piel, mermando sus funciones naturales de protección.

Que tiene de especial **Menalind Professional**?

Este innovador sistema combina las características revitalizantes de la Creatina con las hidratantes del Pantenol, reforzando las funciones naturales de la piel y contribuyendo a mantenerla sana.

Limpieza profesional



995 235 Toallitas húmedas 50 uds.

Higiene práctica y rápida de la zona íntima en cualquier forma de incontinencia. Para aplicar sin la necesidad de agua. Sin alcohol. 50 toallitas extragrandes (200 x 300 mm) y extra suaves.

995 801 Jabón líquido 500 ml.

Para una limpieza suave y segura de todo el cuerpo. Limpia sin eliminar las defensas naturales de la piel. Contiene Pantenol. Hipoalérgico. Neutraliza el olor.

Protección profesional



995 871 Crema protectora 200 ml.

La mejor crema protectora; al aplicarla se forma una barrera protectora contra factores irritantes tales como la orina, heces,...Con Creatina, que revitaliza la piel y refuerza su mecanismo protector natural. Neutralizador de olores patentado.

995 912 Espuma protectora 100 ml.

Recomendada para pieles finas y muy delicadas, donde para evitar dañar la piel, no es fácil o prudente extender una crema. Previene las úlceras de decúbito. Protege y previene las irritaciones de la piel en zonas sensibles, dejando una película protectora en la parte superior de la piel. Ligera y de fácil aplicación gracias a su rápida absorción.

995 861 Loción corporal 500 ml. Cuidado profesional



Loción corporal súper hidratante. Probablemente la mejor loción hidratante disponible en el mercado, para el cuidado intensivo de la piel sensible. Con Creatina, que refuerza el mecanismo natural de protección de la piel.
Emulsión agua / aceite

RC017 ESPONJAS JABONOSAS DE UN SOLO USO



Esponja desechable de un solo uso con jabón de PH neutro. Proporciona espuma abundante al humedecerla. Se suministra en bolsas de 24 unidades.

Seguridad y prevención de caídas

Siempre tenemos en cuenta la seguridad y la prevención de caídas y que las barras y asideras son una herramienta básica para conseguir un entorno seguro. Deben estar a mano cuando se necesitan y no ser un obstáculo cuando no se precisan.

Fabricados teniendo especial cuidado en los detalles y en los condicionantes ergonómicos, tales como dimensiones, formas y texturas. Recuerde que el baño tiene un ambiente húmedo y para eso recomendamos barras y asideras que no se puedan oxidar. Los productos que encontrará en esta sección responden a un criterio funcional y profesional sin olvidar los aspectos estéticos.



BARRAS ABATIBLES Pressalit

Los materiales escogidos y un discreto perfeccionismo en un diseño muy cuidado llevado hasta el detalle son la firma inimitable de Pressalit Care.

Su forma oval única ofrece una cómoda superficie de apoyo. El material especial de la superficie de la barra es blando, antideslizante, y tiene un tacto cálido.

El extremo final de la barra está pensado para que sea más fácil de agarrar al incorporarse y también da

al usuario una clara sensación de donde se encuentra el final de la asidera.


Producto recomendado: para usuarios independientes con disminución estable. También para lugares con requerimientos especiales en relación al vandalismo o robo (por ejemplo: aseos y lavabos públicos)

R3146 BARRA ABATIBLE PRESSALIT 60 cm de largo, recorrido graduable de 25 cm

R3148 BARRA ABATIBLE PRESSALIT 85 cm de largo, recorrido graduable de 25 cm




Al hacer el pedido indicar el color deseado.

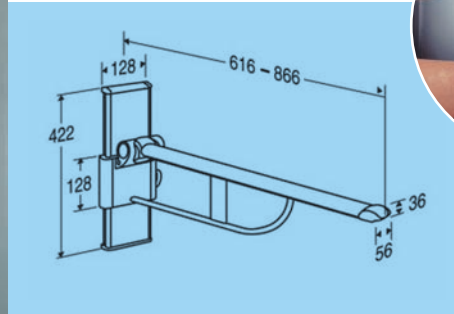


Seguro de bloqueo de la regulación de altura.

R3016 BARRA ABATIBLE PRESSALIT 60 cm de largo


R3018 BARRA ABATIBLE PRESSALIT 85 cm de largo

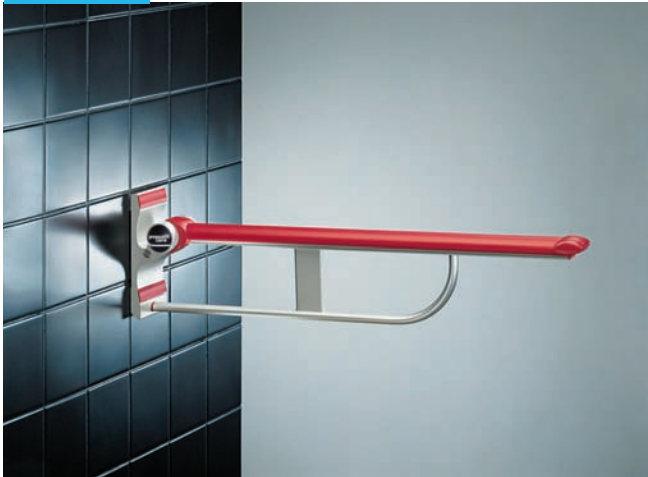

Al hacer el pedido indicar el color deseado.

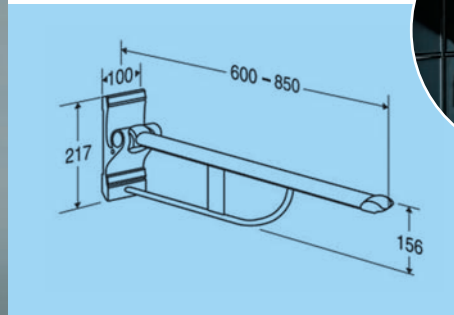

R9320 PORTA ROLLO PAPEL WC

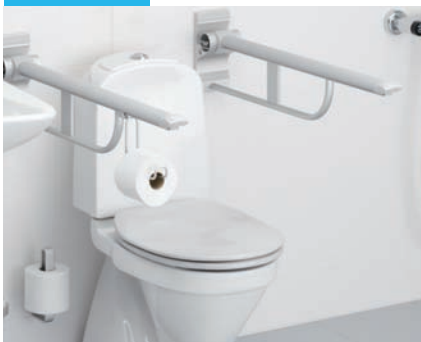

El porta rollo de papel de WC opcional y es un accesorio para montar debajo de las barras.

Las barras Pressalit están disponibles en los siguientes colores:



PRESSALIT®
care

AD503D BARRA OPTIMA



Barra abatible con pata.
Diseño ergonómico de ETAC.



Peso total
3,1 kg

etac

Li2603 BARRA ABATIBLE



Li2603inox BARRA ABATIBLE INOXIDABLE




Las barras de LINIDO son reconocidas en toda Europa por su extraordinaria calidad y están disponibles en una extensa gama de acabados y colores. Encuentre información detallada en la página 80.



AD505LUX DOBLE BARRA ABATIBLE CORTA 55 cm


AD506LUX DOBLE BARRA ABATIBLE LARGA 76 cm

Accionada por muelle interior, sube y baja a voluntad. El tubo de gran diámetro (32 mm) y su acabado hacen de esta barra la preferida de las instituciones más exigentes de Europa. Disponible en dos medidas.

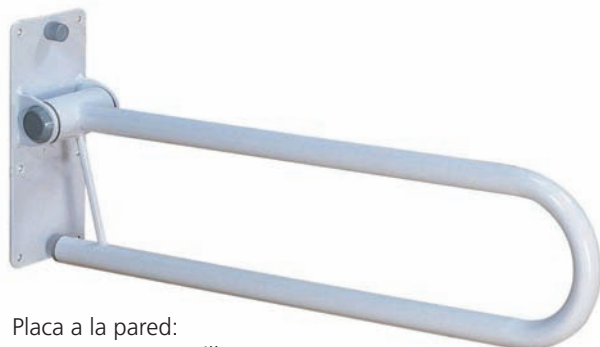

Placa a la pared:
13 x 30 cm. 6 tornillos

AD506A DOBLE BARRA ABATIBLE

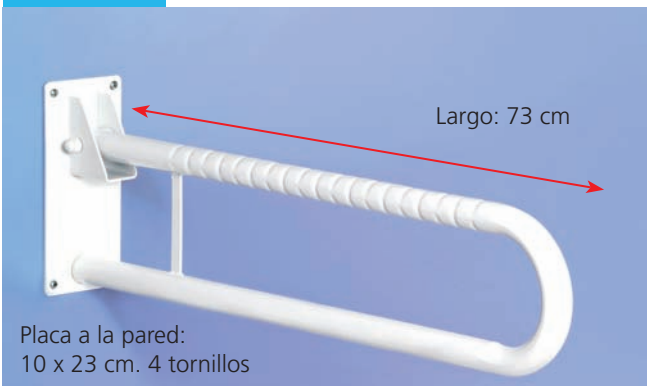

Placa a la pared:
10 x 23 cm. 4 tornillos

Pintada en epoxi blanco va montada sobre la pared. Es abatible y cuando está fuera de uso, queda fijada en posición vertical. Tubo de 32 mm ø.

AD502LUX BARRA DE BAÑO ABATIBLE SOBRE MÁSTIL

Montada sobre un mástil que se fija al suelo, está especialmente recomendada cuando no queremos alicatar sobre la pared o ésta no ofrece las garantías suficientes. Altura regulable.



! Todas las barras y asideras, así como otras ayudas técnicas que vayan alicatadas a la pared deben ser instaladas en una pared firme y segura. Los tacos y los tornillos deben ser los apropiados y su elección y posterior instalación debe ser llevada a cabo por personal cualificado. Ayudas Dinámicas recomienda siempre la utilización de tornillería de acero inoxidable. El peso máximo del usuario / carga de la barras y asideras depende de su correcta instalación, utilizando los anclajes o tacos adecuados de acuerdo con las características de la pared. Por esa razón no indicamos el tipo de tacos ni la carga máxima de las asideras.

AD579 ASIDERA INOXIDABLE DE EXTREMO PLANO




Fabricados en acero inoxidable con recubrimiento de resina de poliéster. Ideales para su uso en exteriores o en ambientes húmedos gracias a su excelente resistencia a la corrosión. Disponible en 3 medidas.

VER REFERENCIAS



modelo	largo
AD579A	30 cm
AD579B	45 cm
AD579C	60 cm

AD506Ai DOBLE BARRA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE

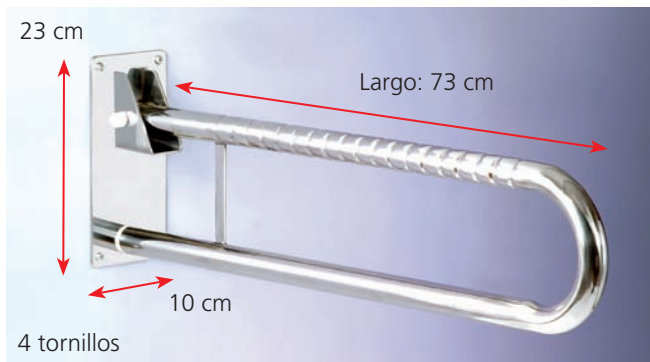

AD506D BARRA ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON PATA REGULABLE



Fabricada en acero inoxidable y aluminio. El pie ajustable ofrece un soporte adicional, especialmente útil cuando las paredes disponibles no garantizan la seguridad suficiente. Abatible, cuando no se utiliza queda fijada a la pared. Tubo de 30 mm ø.



Li2611inox ASIDERAS INOXIDABLES ERGOGRIP



La extraordinaria calidad de LINIDO ahora con tubo de acero inoxidable pulido, y tapas blandas de plástico disponibles en blanco o negro.

Disponible en diferentes largos: 30, 40, 50 y 60 cm. Sobre pedido también en: 70, 80 y 90 cm.

Más información en la sección Linido, página 74.



AD569 BARRAS DE ACERO INOXIDABLE

Robustas barras de acero inoxidable pulido, de tubo de 32 mm \varnothing con ranuras antideslizantes. Disponibles en 4 medidas.


Barras fabricadas con un tubo de gran diámetro: 32 mm

modelo	largo
AD569A	30 cm
AD569B	45 cm
AD569C	60 cm
AD569D	90 cm



AD576 ASIDEROS ERGONÓMICOS REFORZADOS NATURAL GRIP

Diseño ergonómico para ofrecer la mejor forma posible para adaptarse a la mano. Su construcción es especialmente robusta y resistente: los asideros son inoxidables, de plástico inyectado y reforzados interiormente con acero inoxidable.

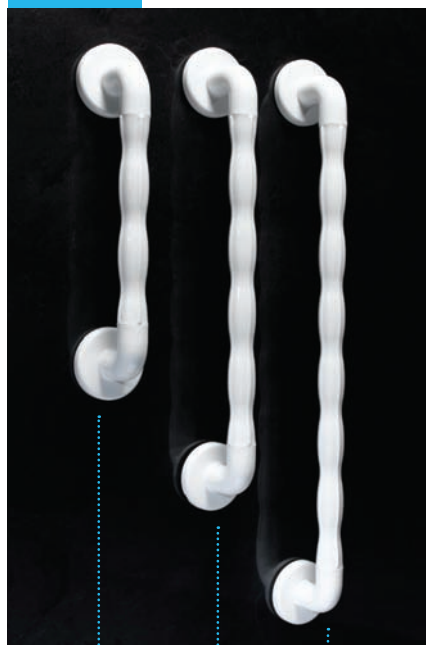


AD576A

AD576B


AD576C

AD576/90


Barra ergonómica y reforzada de 90°.

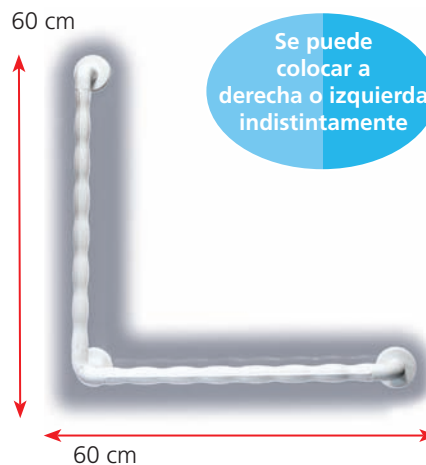

Máxima resistencia gracias a su interior de acero inoxidable

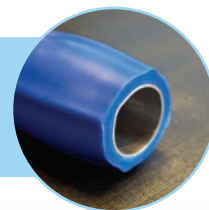


AD576/135

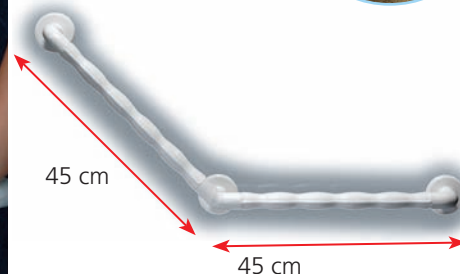

modelo	longitud
AD576A	30 cm
AD576B	45 cm
AD576C	60 cm
AD576/90	60 cm / ángulo 90°
AD576/135	45 cm / ángulo 135°

AD566 ASIDERAS ESTRIADAS

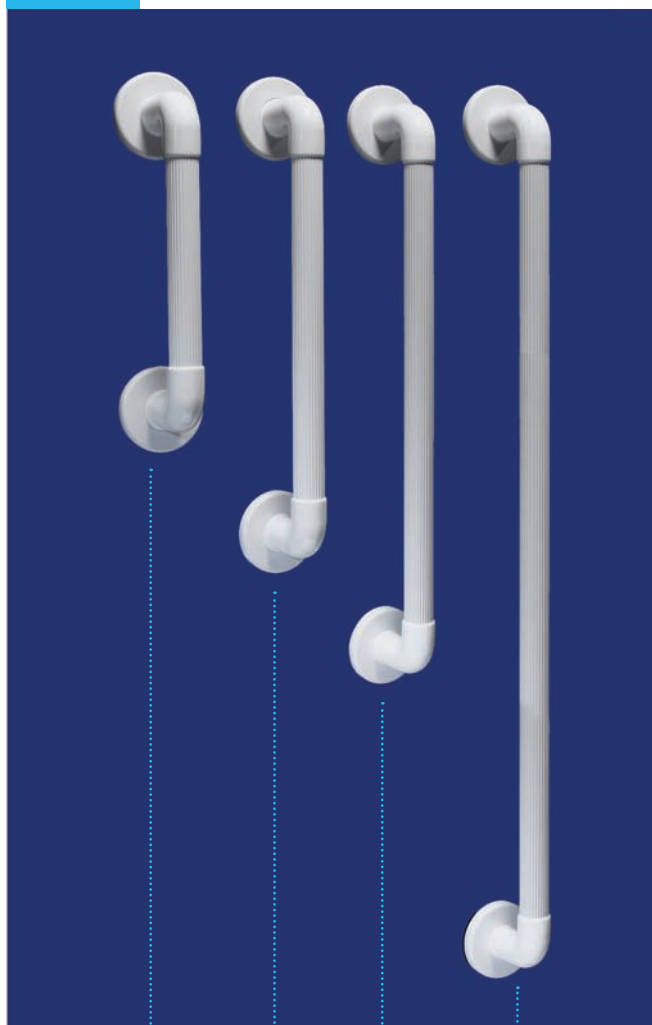

AD566A AD566B AD566C AD566D

Fabricadas en plástico PVC y ABS, con un diseño que impide la rotación sobre sí mismas. Los discos de fijación a la pared tienen unos embellecedores que se integran, tapando la cabeza de los tornillos. El ranurado proporciona un agarre seguro, incluso con las manos mojadas.

modelo	longitud
AD566A	30 cm
AD566B	45 cm
AD566C	60 cm
AD566D	90 cm
AD566/90	61 cm / ángulo 90°



AD566/90 ASIDERAS ESTRIADAS



ASIDERAS RAIL SYSTEM



Este sistema permite construir cualquier barra o asidera según las necesidades individuales

Las barras rectas de 80 cm de largo (H6077) se pueden empalmar fácilmente hasta el largo deseado utilizando las piezas en forma de T (H6071) y se pueden cortar a medida si es preciso. Las piezas en ángulo de 90° (H6073) sirven para salvar esquinas y las piezas finales (H6078) pueden terminar las barras en sus extremos, si bien en algunos casos puede interesar utilizar las tapas finales (H6076).

H6077 TUBO 80 cm.



H6078 PIEZA FINAL



H6071 PIEZA T



H6073 ÁNGULO 90°



H6076 TAPA FINAL

AD560 ASIDERA DE ENTRADA Y SALIDA DE LA BAÑERA



Se coloca fácilmente al borde de la bañera sin herramientas. Muy ligera, se puede retirar cuando ya no se precise o para su transporte. Inoxidable y de diseño antideslizante. Fabricada en plástico de gran resistencia, y con un diámetro de 30 mm.




AD562 ASIDERAS CON VENTOSAS ROTH

AD562A

AD562B

Nuevo sistema de seguridad en estas asideras con ventosas de la firma alemana ROTH.

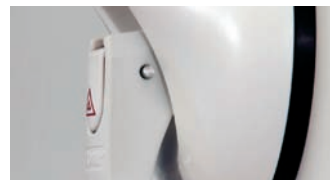

Asideras con ventosas de la máxima fiabilidad, fabricadas en Alemania por la firma ROTH. Son de concepción robusta y resistente. Sin necesidad de hacer agujeros en las paredes, estas asideras se fijan rápida y fácilmente a las paredes y cristales de las mamparas de ducha. Simplemente presionando las dos ventosas de **120 mm** de diámetro sobre una superficie plana y no porosa. Igual de fácil es retirarlas.



modelo	longitud total	longitud barra	peso total
AD562A	43 cm	21 cm	850 gr
AD562B	57 cm	35 cm	1010 gr

Indicador de seguridad.

El botón de seguridad comprueba constantemente el vacío de las ventosas. Si el botón está totalmente introducido en la ventosa indica que la fuerza adhesiva es óptima y la asidera está lista para utilizarse. Si el botón está fuera, mostrando su color rojo de advertencia, debemos instalar la asidera de nuevo.



AD610 ASIDERA CON VENTOSAS



Asidera con ventosas. No precisa taladrar la pared y es ideal para llevársela de viajes. Un testigo de seguridad muestra el color verde cuando las ventosas actúan de forma óptima y muestran el color rojo si no es así, y la asidera debe ser instalada de nuevo.




AD571 BARRA SOPORTE CORTINA



Este soporte para cortina de baño es muy popular en las instituciones de asistencia para evitar salpicaduras durante el baño. Se puede colocar rápidamente donde mas convenga y se abate hacia arriba cuando es preciso o se mueve como una puerta, dependiendo de su colocación. Es flexible para evitar que se rompa. Suministrada en 3 tramos de largo, pudiendo montarla en 3 medidas: 52 cm 85 cm o al máximo de 105 cm
Cortina opcional no incluida.

AD571C CORTINA BLANCA 120 x 80 cm.

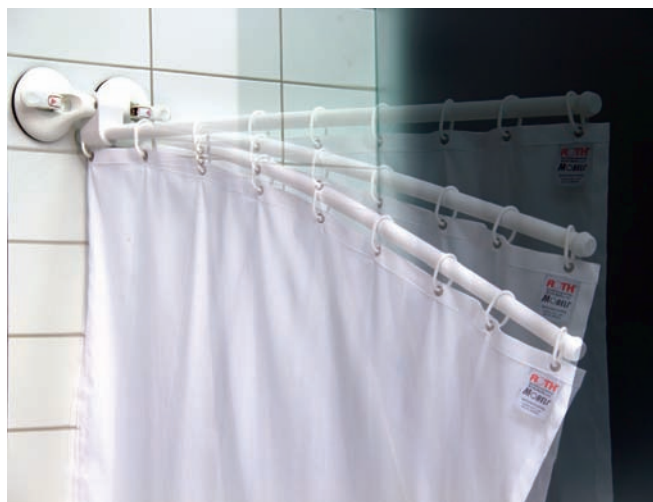

AD572 SOPORTE POLIVALENTE



Con una pinza de grandes dimensiones para sujetar utensilios donde estén más a mano o donde convenga.
Por ejemplo el secapelo.

AD573 SOPORTE PARA TELÉFONO DE DUCHA



Este soporte con ventosa permite tener el teléfono de la ducha siempre a mano al colocarlo donde sea más conveniente.

ASIDERAS VARIOS NIVELES

AD601


20 cm

AD602

40 cm

AD603

60 cm

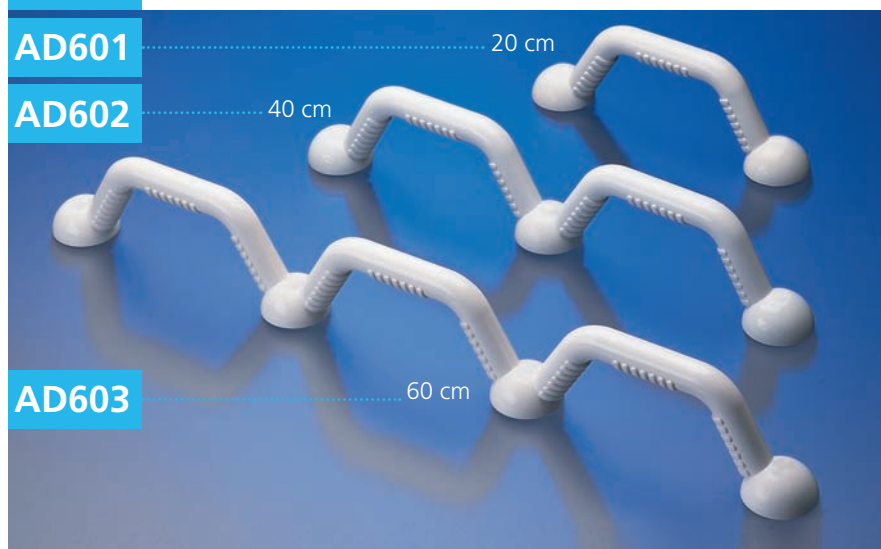

Gama de tres asideras fabricadas en plástico ABS, blanco y con relieve antideslizante. Un diseño ergonómico y funcional que proporciona confort y seguridad durante la higiene personal.



modelo	descripción	longitud
AD601	1 asa	20 cm
AD602	2 asas	40 cm
AD603	3 asas	60 cm

ASIDERAS DE TACTO SUAVE PRIMA

AD605B

45 cm

30 cm

AD605A



AD606B



Fabricadas con plástico reforzado interiormente con acero inoxidable. De aspecto atractivo y de tacto blando y cálido. Ranuradas para facilitar un buen agarre incluso con las manos enjabinadas. Los tornillos quedan ocultos con un embellecedor.



modelo	descripción	longitud
AD606B	angulada	40 cm
AD605A	recta	30 cm
AD605B	recta	45 cm

AD577 ASIDERA 90° PARA DUCHA

Se puede
colocar a
derecha o izquierda
indistintamente



Alto: 70 cm.
Ancho: 40 cm

De robusta construcción, en plástico ABS, de forma tubular de 45 x 25 mm. Se puede montar tanto a derecha como a izquierda.

Especialmente útil en combinación con asientos abatibles o banquetas de ducha.




AD565 ASIDERA ANGULADA GORDON



Barras económicas pero de robusta construcción en plástico ABS de forma tubular de 45 x 25 mm. Su perfil ranurado permite un mejor agarre.
Longitud: 37 cm.

AD563 ASIDERA DE BAÑO

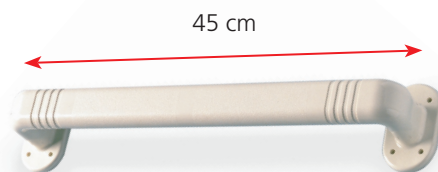

AD549 ASIDERAS GRIPSURE

AD549B 45 cm

AD549A 30 cm



Asideras de tacto blando y con textura a todo lo largo que permite un buen agarre incluso en ambientes húmedos. Son cálidas al tacto y su diseño actual combina bien en cualquier lugar. Fabricadas en plástico, no requieren toma tierra.

Diámetro: 37 mm.
Distancia de la pared: 37 mm.

CAMILLA ABATIBLE PARA DUCHA



Li2403.150

150 x 70 cm / 90 cm altura

Li2403.170

170 x 70 cm / 90 cm altura

Li2403.190


190 x 70 cm / 90 cm altura

Fabricada en acero o en acero inoxidable 304 y recubierta con epoxy de color blanco. Alicatada a la pared, se puede plegar hacia arriba cuando no esté en uso para optimizar el espacio disponible. Incluye un cierre que va en la pared para asegurarla cuando esta plegada.

La cubierta es de un tejido especial de nylon recubierto de material plástico que es especialmente higiénico, de tacto agradable y fácil de limpiar.

Disponible en 3 medidas, todas de 90 cm de altura.

Disponible en acero o en acero inoxidable, especificar al hacer el pedido.

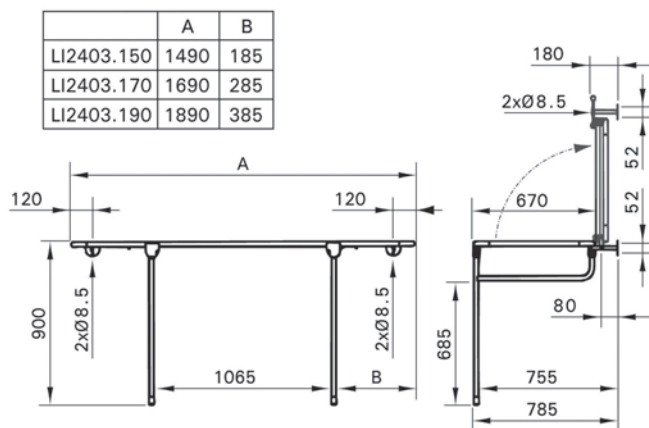

NOTA: Como en algunos casos la camilla se monta sobre una bañera, sobre pedido podemos preparar la camilla con un hueco para salvar los grifos existentes, si éstos fueran un obstáculo para plegar la camilla. Igualmente existe la posibilidad de hacer las patas a medidas. Consúltenos.

H15301 MAMPARA PORTÁTIL DE DUCHA



Para facilitar la tarea del cuidador esta mampara se pliega y es fácil de llevar. Desplegada donde y cuando se precisa impide que el cuidador se salpique de agua durante la ducha.

Medidas: 3 cuerpos (50 cm + 100 cm + 50 cm)
Altura: 90 cm

Camilla NURSING Altura Graduable

En aquellas situaciones que se debe bañar a una persona estirada, es importante que la camilla se pueda bajar hasta la altura más conveniente para la transferencia, por ejemplo a la misma altura de la silla de ruedas, y que luego se pueda elevar hasta una altura cómoda para el trabajo del cuidador. Es igualmente importante que la camilla sea cómoda y sobre todo resulte segura tanto al paciente como al cuidador.

R8518 CAMILLA ELÉCTRICA 180 cm. Con barandilla, pedir R8538

R8513 CAMILLA ELÉCTRICA 130 cm. Con barandilla, pedir R8533



Cuando la camilla está montada la altura adecuada, se puede graduar su altura de 30 a 100 cm simplemente accionando el control remoto. (que tiene un cable de 1,5 m de largo para que cuidador y paciente no pierdan el contacto visual mientras la camilla sube o baja).

PRESSALIT®
care

Confort: La superficie de la camilla esta cubierta de espuma de poliuretano y está ligeramente curvada para mayor confort y seguridad del paciente. Respaldo ajustable a ambos extremos de la camilla.

Barandilla opcional, que se pliega fácilmente hacia la pared cuando no esta en uso para optimizar el espacio disponible.

R8508 CAMILLA ALTURA FIJA 180 cm. Con barandilla, pedir R8528

R8503 CAMILLA ALTURA FIJA 130 cm. Con barandilla, pedir R8523



Tanto la camilla como la barandilla (opcional) se pliega fácilmente contra la pared para optimizar el espacio disponible. Respaldo regulable en ambos lados de la camilla. Manguera de desagüe de 1,5 m incluida.


PRESSALIT®
care

AD828 SILLA DE DUCHA Y WC CLEAN Disponible en dos alturas de asiento: 49 y 55 cm.



CLEAN es lo último en diseño de sillas para la higiene. Cómoda, segura y fácil de usar. Cada detalle de la silla ha estado pensado para que cualquier situación sea de lo más fácil para el usuario y para el cuidador. **CLEAN** no tiene ni soldaduras ni orificios, lo que reduce drásticamente el riesgo de corrosión y hace de **CLEAN** una silla muy resistente y duradera. Las transferencias también son mas fáciles, cómodas y sobre todo seguras: los reposabrazos se pueden desmontar o rotar hacia afuera y los reposapiés se deslizan suavemente debajo del asiento.

Fácil de manejar, gira en espacios estrechos y se coloca fácilmente sobre cualquier WC.

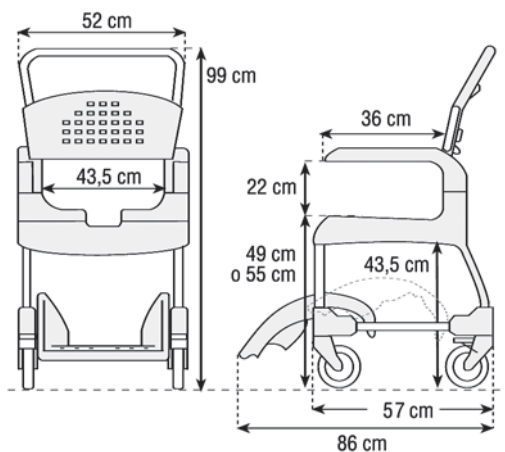

etac



Peso total
14 kg



Peso máximo:
130 kg

modelo	altura asiento
AD828	49 cm
AD828L	55 cm



El asiento está completamente abierto en la parte trasera en vez de en la frontal. Esto facilita la accesibilidad para la higiene íntima, tanto para el cuidador como para el usuario.

A continuación se detallan algunos accesorios para este producto:

A828/1 ASIENTO BLANDO



A828/2 RESPALDO BLANDO



A828/3 ORINAL



A828/4 BARRA DE SEGURIDAD




A828/11 CINTURONES



A828/10 TAPA DE P.U.



A828/13 ROHO EN U

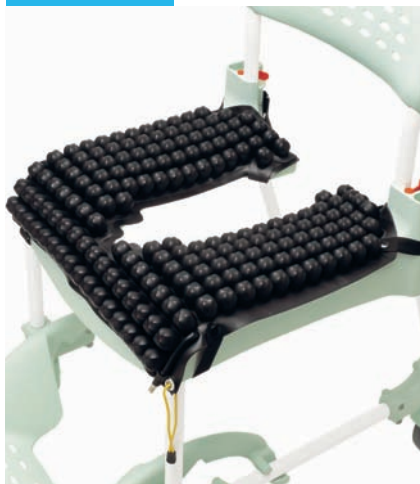

A828/14 ASIENTO DE P.U.




AD826 SILLA AUTOPROPULSABLE MOBILE




La silla Mobile con ruedas de 600 mm para personas activas proporciona a los usuarios la libertad de atender las labores de higiene de forma independiente. El confort ante todo: respaldo blando que se adapta a la espalda y reposapiés ergonómicos, son algunas de las características de esta silla tan funcional. La silla se regula fácilmente de altura y puede ir directamente sobre el inodoro. Los reposapiés son graduables en altura y los brazos abatibles para permitir la transferencia lateral.



Mismos accesorios que
Mobile Tilt AD821
página 69

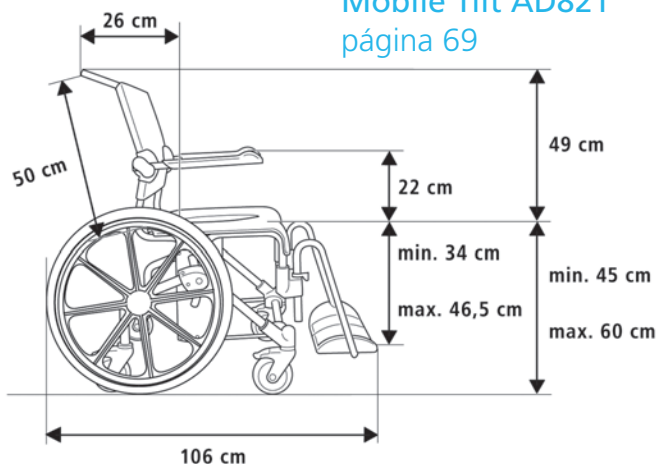

Regulable de altura

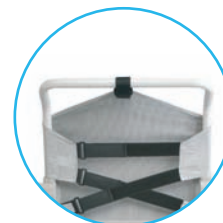

Cómodo respaldo
blando tensable

etac

modelo	ancho total	ancho entre brazos	ancho asiento	peso	peso máximo
AD826	74 cm	48 cm	50 cm	24,4 kg	135 kg

AD820 SILLA BASCULANTE ATLANTIC

Las sillas basculantes son el nuevo concepto imperante en las instituciones europeas para una higiene más cómoda, más digna y en las mejores condiciones tanto para el usuario como para el cuidador.

Esta silla basculante está fabricada en aluminio y acero inoxidable, por lo que es una silla inoxidable y duradera. Reclina gracias a dos pistones de aire, de 6° a 25°.

Es muy maniobrable y lleva freno en las cuatro ruedas. Cuando colocamos la silla, por ejemplo, sobre un inodoro, los frenos en las ruedas delanteras son muy prácticos pudiéndolos accionar fácilmente cuando las ruedas traseras son de difícil acceso.



→ SUPER
ESTRECHO
54 cm ←



Peso total
16 kg



Peso máximo:
120 kg



modelo	ancho total	ancho asiento	peso	peso máximo	altura libre para WC
AD820	54 cm	45 cm	16 kg	120 kg	44 cm

AD829 SILLA AUTOPROPULSABLE CLEAN 600

Clean está fabricada en Suecia por la firma sueca ETAC y es una silla bien equilibrada y fácil de maniobrar. Las ruedas de 600 mm. permiten que el usuario impulse la silla obteniendo libertad de movimientos y mayor independencia durante la higiene.




Disponibles los
mismos accesorios
que Silla Clean
página 65



Peso total
20 kg



Peso máximo:
120 kg

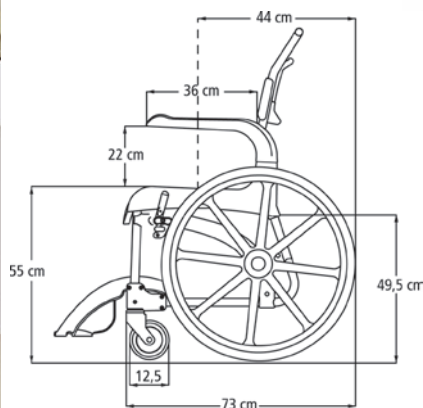

Ancho total: 69 cm.

AD821 SILLA BASCULANTE MOBILE TILT



Esta silla permite llevar a cabo las tareas de higiene de forma más cómoda y segura tanto para el usuario como para el cuidador. El conjunto del asiento y respaldo son regulables en altura y en inclinación. El control de inclinación de la silla está situado de tal manera que el cuidador y el paciente mantienen contacto visual en todo momento, lo que contribuye a una mejor comunicación entre ambos y a crear un ambiente de confianza.

El respaldo blando se adapta a la espalda al reclinar la silla proporcionando una postura cómoda y segura. Los reposabrazos son abatibles para facilitar transferencias.

Las cuatro ruedas llevan freno para mayor seguridad y también para mayor comodidad del cuidador que puede accionar los frenos delanteros cuando los traseros son de difícil acceso, por ejemplo, cuando la silla se coloca sobre un WC.


etac



Peso total
19,7 kg



Peso máximo:
135 kg

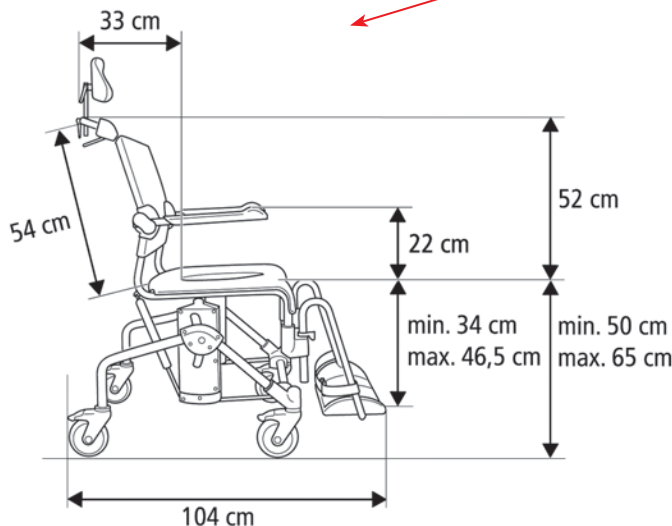

Angulo inclinación ajustable:
de +5° a -30° / de 0° a -35°



modelo	ancho total	ancho entre brazos	ancho asiento	peso	peso máximo
AD821	58 cm	48 cm	50 cm	19,7 kg	135 kg



El respaldo se puede tensar.



Altura fácil de regular. No se necesitan herramientas para regular la altura del asiento entre 50 y 65 cm.



Los reposapiés presentan un suave arqueado que proporciona un apoyo estable y cómodo para los pies. Los bordes están diseñados para proteger los pies de las ruedas.

A821/1 BARRA TRANSVERSAL



A821/5 KIT ORINAL



Kit incluye orinal y guías.

A821/6 BRAZO HEMIPLEJÍA



A821/2 TAPA ASIENTO CONFORT



A821/3 ASIENTO WC CONFORT



A821/4 CINTURÓN DE SEGURIDAD



Sillas REBOTEC

Asientos y respaldos ergonómicos, de tacto cálido y agradable a la piel.
Reposabrazos abatibles para facilitar la transferencia lateral.
Reposapiés abatibles y desmontables.
Sin cantos ni esquinas agresivas.

AD805 SILLA BONN



Esta silla puede colocarse directamente sobre la taza del WC o utilizar la cubeta inodoro incluida (con tapa y asidera para su transporte). 4 ruedas de 125 mm, dos de ellas con freno. VER TABLA DE MEDIDAS

AD805/C BONN COLORS

De iguales características que la silla BONN en tamaño infantil. Ver más información en la sección niños. Página 228.



AD803 SILLA ERFURT

PRODUCTO
INOXIDABLE



Silla resistente al agua, apropiada para la ducha y también útil como silla de WC. Puede ir directamente sobre la taza del inodoro. El asiento en U es muy práctico para la higiene íntima. VER TABLA DE MEDIDAS

A805/8 REPOSABRAZOS PARA REBOTEC



Accesorio para reposabrazos, de tacto blando y cálido, fabricado en poliuretano y compatible con todas las sillas REBOTEC. Suministrado en pares

AD802 SILLA BERLIN

PRODUCTO
INOXIDABLE



Asiento blando de poliuretano, de tacto cálido y agradable, y en forma de U. Silla inoxidable, recomendada para la ducha. Puede ir sobre el WC. Disponible en dos versiones: con abertura delantera o trasera, según las preferencias del personal sanitario y del usuario.

VER TABLA DE MEDIDAS.



El asiento esta completamente abierto en la parte trasera en vez de en la frontal. Esto facilita la accesibilidad para la higiene íntima, tanto para el cuidador como para el usuario.

modelo	descripción
AD802A	Abertura delantera
AD802B	Abertura trasera

AD804 SILLA DENVER



Resistente silla fabricada con materiales sintéticos, ligeros y fáciles de limpiar. Soporta hasta 175 Kg. Cómodo respaldo de PU, de tacto blando y cálido. Reposabrazos abatible para facilitar las transferencias laterales. Cómodo asiento blando en forma de U para facilitar la higiene. Reposapiés desmontables y regulables en altura. 4 ruedas de 125 mm. de diámetro, las traseras con freno.



Peso máximo:
175 kg

ASIENTO
SUPER
ANCHO
58 cm



modelo	ancho total	alto total	ancho asiento	fondo asiento	altura asiento	peso máximo	peso total
AD802	57 cm	100 cm	45 cm	43 cm	54 cm	100 kg	16 kg
AD803	57 cm	100 cm	45 cm	43 cm	51 cm	100 kg	14 kg
AD804	68 cm	100 cm	58 cm	48 cm	57 cm	175 kg	19 kg
AD805	57 cm	100 cm	45 cm	43 cm	52 cm	100 kg	16 kg

SILLA DE DUCHA LEVINA

Una silla de ducha fabricada en aluminio, totalmente inoxidable y resistente. Muy ligera y fácil de maniobrar. Una silla pensada para facilitar las tareas de la higiene personal: la silla se puede colocar directamente encima del inodoro o bien utilizar la cubeta incluida. Una silla cómoda gracias al asiento y respaldo blandos y de tacto cálido. El asiento higiénico en forma de U para facilitar el acceso. Los brazos son acolchados y abatibles para facilitar la transferencia lateral. Los reposapiés, fabricados con espuma de PU, son acolchados y cálidos al tacto para que resulten agradables en contacto con los pies desnudos. La silla de ducha **Levina** está disponible también con ruedas grandes, de 600 mm. y con aros para que el usuario pueda propulsar la silla.

AD809 SILLA DE DUCHA LEVINA

Ruedas de 125 mm.





Peso total
12 kg

AD810 SILLA DE DUCHA LEVINA

Ruedas de 600 mm.



Peso total
18 kg

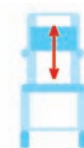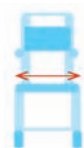

modelo	ancho total	alto total	fondo total	ancho asiento	fondo asiento	altura asiento	altura respaldo	peso máximo
AD809	55 cm	93 cm	80 cm	44 cm	42 cm	54 cm	42 cm	120 kg
AD810	64 cm	93 cm	98 cm	44 cm	42 cm	54 cm	42 cm	120 kg
AD542	58 cm	88 cm	64 cm	40 cm	40 cm	48 cm	40 cm	100 kg
AD542U	58 cm	88 cm	64 cm	44 cm	39 cm	48 cm	40 cm	100 kg
AD545C	56 cm	85 cm	62 cm	45 cm	34 cm	47 cm	40 cm	120 kg

AD542 SILLA PARA DUCHA Y WC



Fabricada en aluminio, es la solución económica para la higiene y el WC y para el traslado de personas con movilidad reducida. El asiento es blando y queda a una altura de 48 cm que permite situar la silla directamente sobre la mayoría de inodoros. Equipada con 4 ruedas. VER TABLA DE MEDIDAS.



AD545C SILLA CON RUEDAS PARA BAÑO

De construcción robusta con bastidor plastificado. Incorpora cuatro ruedas de plástico de 125 mm \varnothing , las traseras, con freno. VER TABLA DE MEDIDAS.



AD542U SILLA PARA DUCHA Y WC



De idénticas características que el modelo [AD542](#) pero con un asiento higiénico en forma de U, que facilita la higiene íntima. VER TABLA DE MEDIDAS.





Los productos de **LINIDO** están fabricados en Holanda y son reconocidos en toda Europa por su extraordinaria calidad y su diseño estéticamente agradable además de funcional, que propicia la seguridad y la independencia al utilizar el baño, la ducha, el WC. La extensa paleta de colores disponibles, la variedad de posibles acabados y gran cantidad de medidas posibles hace que la gama de LINIDO pueda armonizar fácilmente en los más variados entornos. La gama Linido combina bien y está recomendada tanto para su uso domiciliario, como institucional.

Los productos LINIDO pueden fabricarse en:

- Acero pintado
- Acero inoxidable 304 pintado
- Acero inoxidable 304 pulido (recomendado para uso intensivo)

ASIDERAS ERGOGRIP

Li2611.030	ASIDERA ERGOGRIP de 30 cm.	Li2611.050	ASIDERA ERGOGRIP de 50 cm.
Li2611.040	ASIDERA ERGOGRIP de 40 cm.	Li2611.060	ASIDERA ERGOGRIP de 60 cm.



El diseño llevado hasta el detalle y la perfección.

La mano a menudo busca tener consciencia del final de la asidera al agarrarla: el ángulo final a 60° y las tapas blandas de plástico de los extremos de la asidera dan una sensación amablemente segura y cómoda.




Otras medidas consultar
(disponibles desde 18 cm hasta 140 cm).

Las asideras **ERGOGRIP** de Linido están reconocidas en toda Europa por su único diseño ergonómico que facilita adoptar una postura natural con la mano y la muñeca. Un agarre óptimo, gracias al ángulo de 60° (en vez del tradicional de 90° que no se corresponde con la forma de la mano). Un agarre seguro, la distancia a la pared de 75 mm impide dañarse los dedos con la pared al coger la asidera. (tal y como ocurre con muchas otras asideras).

Un agarre firme, 27 mm de diámetro permiten agarrar con firmeza, sin dejar casi espacio entre la mano y la asidera. Un agarre cómodo, las tapas finales de las asideras son redondeadas y blandas. Agradables al tacto.

Se suministran en acero pintado o en acero inoxidable (pulido o de color). Las barras y asideras recubiertas de epoxi disponen de una atractiva gama de colores. Están disponibles además en una variedad de medidas, 30, 40, 50 y 60 cm.


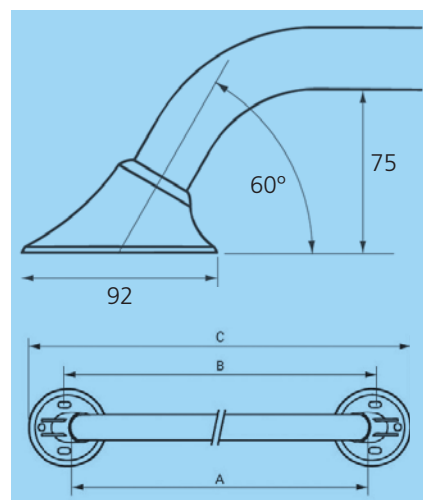


modelo	A	B	C
Li2611.030	30 cm	31,7 cm	40,5
Li2611.040	40 cm	41,7 cm	50,5
Li2611.050	50 cm	51,7 cm	60,5
Li2611.060	60 cm	61,7 cm	70,5

Li2611.003 ASIDERA 90° a izquierda A

Li2611.004 ASIDERA 90° a derecha B

Recomendada para la ducha y el baño. En combinación con el soporte del teléfono de ducha, ref Li2630.200, esta barra es ideal para la ducha y está disponible en una variedad de colores.

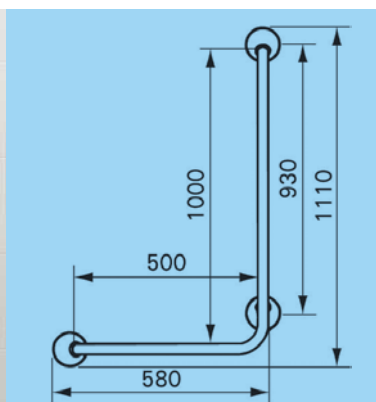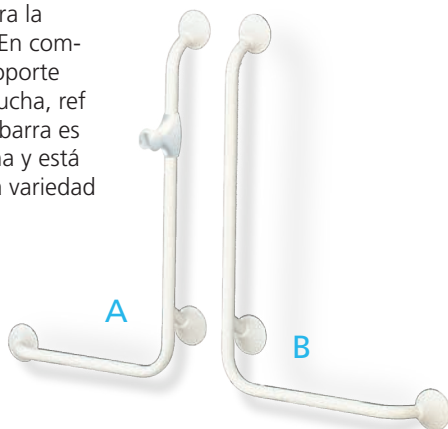

Li2630.200 SOPORTE PARA TELÉFONO DE DUCHA



Prevención de caídas



Ingenioso soporte para teléfono de ducha diseñado a partir de la observación de que las personas que no alcanzan el teléfono en la ducha suelen adoptar posturas incómodas para intentar alcanzarlo y a menudo acaban sujetándose de la manguera. Todo esto puede degenerar en una pérdida del equilibrio en un ambiente resbaladizo. Simplemente estirando de la manguera, este soporte se desliza suavemente por todo el recorrido de la barra hasta la altura deseada.

Subirlo y bajarlo hasta dejarlo en un determinado punto es tan cómodo como sencillo y sus formas redondeadas son agradables al tacto.

Fabricado en plástico, se acopla solo a las barras Ergogrip de Linido. Puede montarse después de haber instalado las asideras.


Li2611.007 ASIDERA DE 45° corta

Li2611.008 ASIDERA DE 45° larga

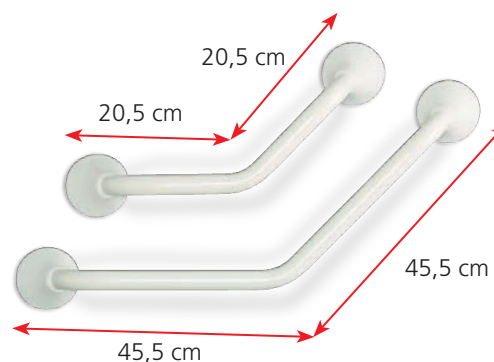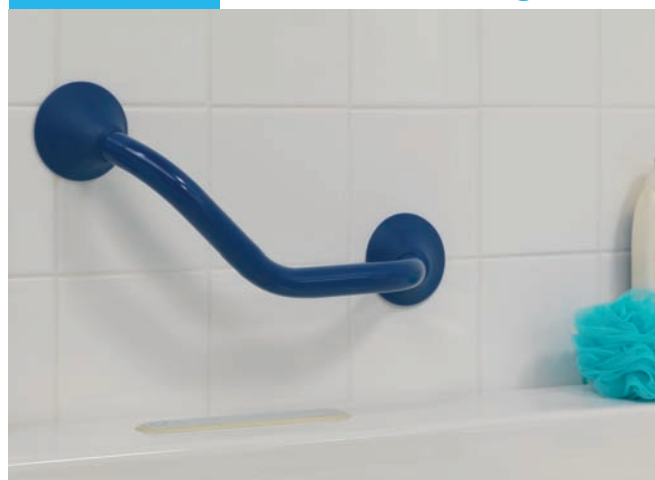

Práctica asidera multiusos, especialmente recomendada para ser montada junta al WC, o en el interior de la bañera. Disponible en una variedad de colores.

Li2642.001 ASIDERAS PARA ESPEJO BASCULANTE

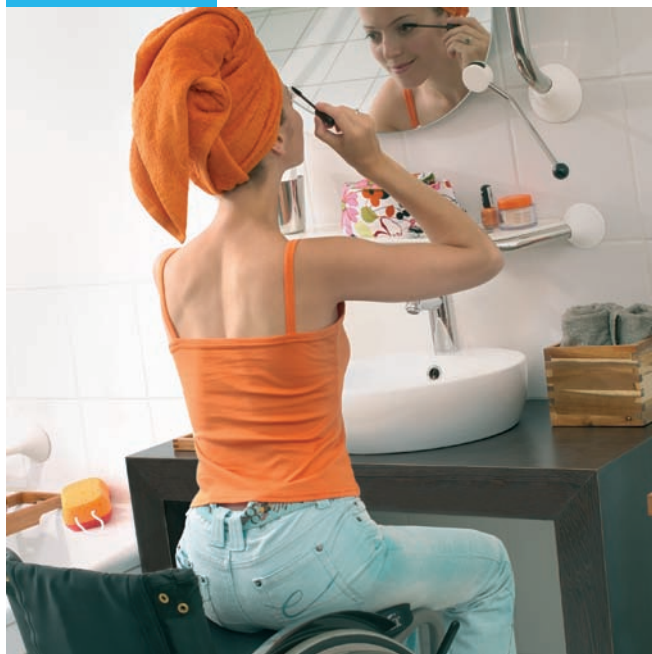

Par de asideras con anclajes para colocar un espejo basculante. Disponibles en varios colores. Espejo no incluido, para que el usuario escoja el que desee.

Recomendación: un espejo debería poderse utilizar tanto por adultos como por niños, sentados o de pie, y preferiblemente debe estar iluminado a ambos lados.


Li2642.002

MANIVELA PARA ESPEJO

Accesorio para bascular el espejo. Se fija directamente en el espejo.



Li2634.000 ESTANTE

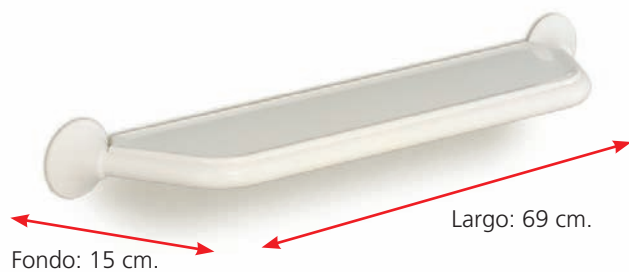

Práctico estante que normalmente va colocado bajo el espejo.

Li2636.000 PERCHERO INDIVIDUAL

Li2636.001 PERCHERO DOBLE



Dos diferentes modelos de percheros disponibles en varios colores para combinar con el ambiente del lavabo..

Li2635.000

SOPORTE PAPEL WC



Soporte para el rollo de papel de WC habitualmente colocado para tener a mano un rollo de recambio. Disponible en una variedad de colores.

Li2631.000

ESCOBILLA DE WC



Cepillo de WC con soporte, totalmente de plástico.

Li2618.000

PORTA-ROLLO PARA UNA SOLA MANO



Li2637.001


ASIDERA TOALLERO 30 cm

Li2637.002

ASIDERA TOALLERO 60 cm



Dos en uno, Linido ofrece aquí una solución creativa. Dado que algunas personas utilizan las asideras como toalleros inutilizándolas para el propósito para el cual se instalaron, ofrecemos aquí unas asideras con toallero incorporado. Esto evita la instalación de más utensilios y los correspondientes taladros en la pared.

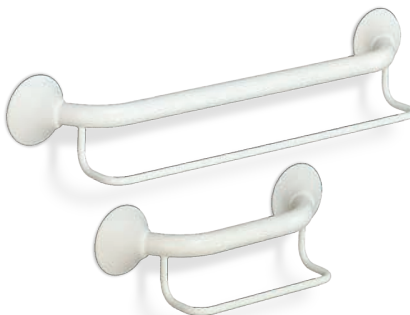

Se suministra sólo en blanco.

Un diseño absolutamente único y ganador de un premio, que responde a las necesidades de tantas personas que sólo pueden utilizar una mano. Desde colocar o sustituir el rollo de papel de WC hasta tirar de él y cortar un trozo de papel es sumamente fácil y cómodo con este ingenioso portarrollos.

Li2201.200 ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE



Recomendaciones referentes al peso máximo:

125 Kg si se monta el asiento directamente a la pared sin patas.

300 Kg si se monta el asiento directamente a la pared con patas.

Ancho asiento: 45 cm.



Recomendamos que la instalación se realice por un profesional

Las ayudas de baño deben transmitir confianza a la persona que debe utilizarlas, y el asiento de ducha de Linido inspira confianza. Está fabricado en plástico de alta resistencia es totalmente inoxidable. Un diseño cómodo y funcional con cuidadas formas curvadas que da seguridad y que invita a relajarse. La silueta curva del asiento impide acumular presiones debajo de las piernas. Se abate hacia la pared cuando no esta en uso para optimizar el espacio disponible.

Disponible en la amplia gama de colores de Linido.

Li2202.200 ASIENTO DE DUCHA CON RESPALDO



Las cuidadas formas curvas del respaldo han sido estudiadas para permitir adoptar cómodamente diferentes posturas, desde una más erguida y atenta, hasta una más relajada.

Asiento de ducha con su respaldo reforzado con acero inoxidable. Como todos los asientos de Linido se trata de un asiento muy duradero y resistente, y totalmente inoxidable.

Disponible en 5 colores:

Blanco. RAL 9010

Crema. RAL 9001

Rojo. RAL 3003

Azul. RAL 5002

Negro. RAL 9005



Para usuarios de **más de 125 Kg** recomendamos utilizar este asiento de ducha sin brazos en combinación con barras abatibles alicatadas a la pared en ambos lados del asiento. También se recomienda poner unas patas.

Li2203.200 ASIENTO DE DUCHA CON RESPALDO Y BRAZOS



Asiento completo, con respaldo y con brazos ergonómicos y abatibles de forma independiente. Ver medidas en gráfico de siguiente página.




Recomendamos este asiento con brazos para usuarios de hasta 125 Kg. Para pesos mayores se recomienda poner unas patas.

Disponible en 5 colores.




Li2214.201 PATAS PARA ASIENTO DE DUCHA (accesorio)

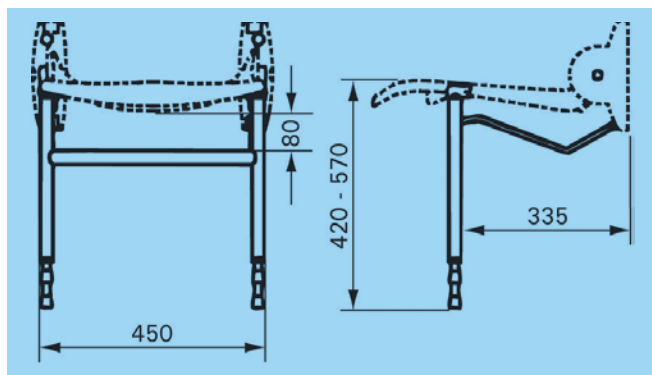

Patatas de altura regulable que se adaptan a los asientos de ducha Linido y sirven para repartir mejor el peso, y se recomienda para usuarios de más de 125 Kg. o cuando la pared disponible lo requiera. Se pliegan junta al asiento. Se pueden montar después de haber instalado el asiento.

Li09506.400 ASIENTO BLANDO PARA ASIENTO DE DUCHA (accesorio)

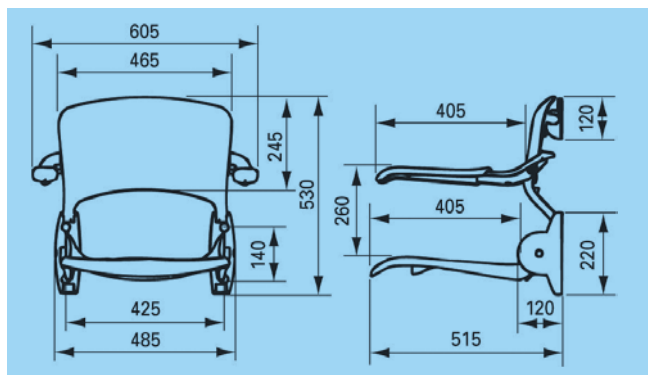

Asiento blando, un accesorio para el asiento de ducha, adecuado para aquellos con piel sensible o que deben permanecer sentados durante largos periodos. Fácil de montar y desmontar con velcros por debajo del asiento. Disponible solo en azul.


Li2216.002 ESTRUCTURA CLICK-ON DE ALTURA GRADUABLE



Peso máximo:
150 kg

Las circunstancias de las personas cambian con el tiempo, y el sistema Linido es flexible y se adapta a estos cambios. Cuando el lavabo deja de ser un lugar cómodo y seguro tan solo con la ayuda de unas asideras se puede acoplar un marco colgante para asiento de ducha regulable en altura, al cual se le acoplan posteriormente asiento y respaldo.

Estructura para montar el asiento de ducha con respaldo, con y sin brazos. Fabricado en acero inoxidable pintado en blanco. Puede montarse en combinación con varias barras Ergogrip, incluso con la angulada a dos paredes.

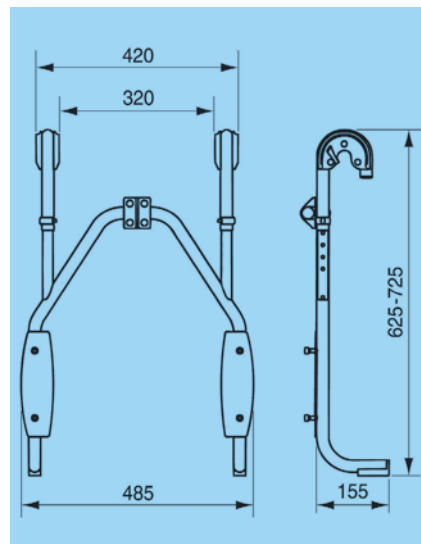

Características:

- Se cuelga y descuelga de las barras fácilmente y sin herramientas.
- Con cierre de seguridad para fijarla a la barra
- La distancia graduable entre la asidera al asiento tiene un recorrido de 10 cm: de 40 a 50 cm.



Li2603 BARRA ABATIBLE LINIDO



La paleta de colores disponible es la misma que las asideras Ergogrip.



Disponible sobre pedido en:
60, 80 y 90 cm. de largo.

Li2603.250 BARRA ABATIBLE, 53 cm. de largo

Li2603.270 BARRA ABATIBLE, 70 cm. de largo

La barra abatible de Linido es también el producto de un elaborado proceso de diseño para conseguir una barra muy estética y a la vez funcional. Estudiadas formas que responden a la observación de cómo las personas se interrelacionan con las barras abatible: permiten agarrarlas desde delante, de la manera que muchas personas realizan transferencias frontales y no siempre laterales. El tubo metálico se inserta totalmente en el bloque de plástico, así no hay peligro de atraparse las manos, tal y como ocurre con las barras que apoyan directamente sobre la pared.

De construcción extremadamente sólida y resistente, el bloque que está en contacto con la pared es de plástico reforzado con fibra de vidrio, y el tubo metálico puede ser de acero o de acero inoxidable. Se fabrica en un gran número de medidas y acabados. Se bloquea cuando está en posición vertical para optimizar el espacio disponible.

Li2618.000

**PORTA-ROLLO
PARA UNA SOLA MANO**
(accesorio)




Li2611.015 ASIDERA ERGOGRIP A DOS PAREDES




Li2611.016 ASIDERA ERGOGRIP A DOS PAREDES CON BARRA VERTICAL



La barra vertical es móvil y se puede montar donde mas convenga, según las necesidades o las preferencias de cada lavabo. Disponibles en una atractiva gama de colores. El conector redondo de plástico esta disponible sólo en color blanco.

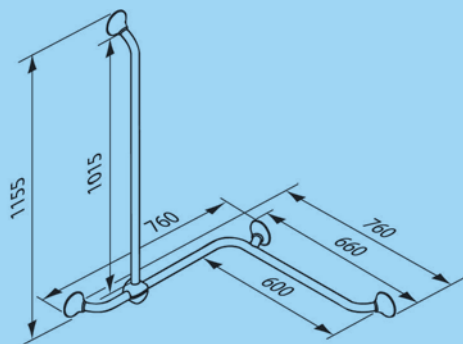

Li2612.000 TRAPECIO DE TECHO

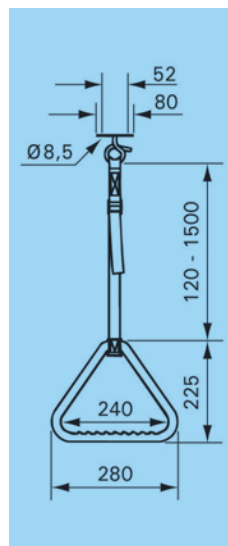

El trapezio de techo es de gran ayuda para las transferencias cuando esta colocado sobre el WC o sobre la cama. Se monta en el techo y lleva una correa de nylon de largo regulable con una asidera de plástico en el extremo.





La instalación debe ser llevada acabo por un profesional.

Li2606.000 ASIDERA CONTORNO DE LAVAMANOS



Proporciona un soporte seguro alrededor del lavamanos.

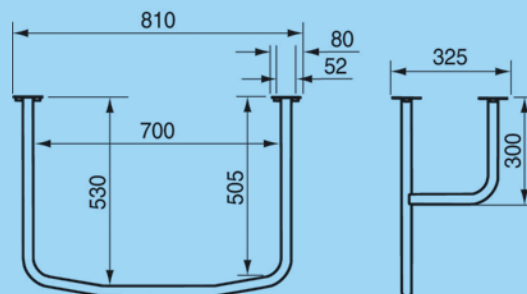

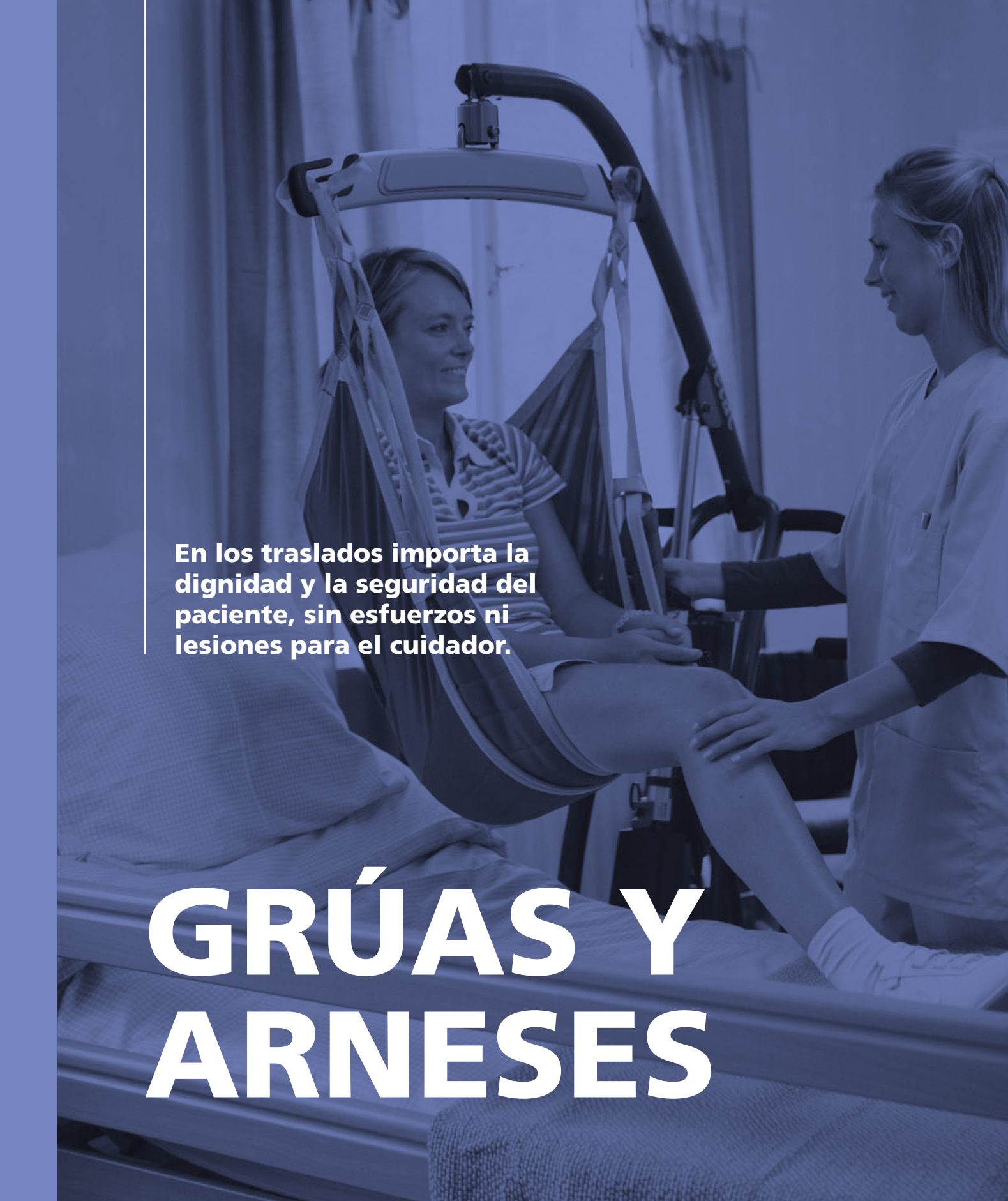A healthcare worker in white scrubs is assisting a patient with a hoist. The patient is seated in a hoist sling, which is suspended from a ceiling-mounted crane. The worker is standing next to the patient, holding their leg. The background shows a hospital room with curtains and a bed.

**En los traslados importa la
dignidad y la seguridad del
paciente, sin esfuerzos ni
lesiones para el cuidador.**

GRÚAS Y ARNESES

El origen de una de cada tres bajas laborales en el personal sanitario es causado por levantar algún peso de manera incorrecta.

Las grúas electrónicas para pacientes son una herramienta imprescindible para los cuidadores. Simplemente apretando un botón se puede levantar a una persona de la cama, del W.C. o incluso del suelo. Esta ayuda tan funcional hace posible que el traslado o movilización de un paciente sea llevado a cabo por una sola persona, de manera segura y con dignidad. Facilita mucho el trabajo del cuidador y le evita lesiones de espalda.

Nuestras grúas electrónicas son compactas y muy maniobrables. Su rango de elevación máxima y mínima permite una gran variedad de movilizaciones y resuelven la mayoría de los problemas que se presentan en la atención domiciliaria o institucional. Hay una gran variedad de grúas móviles para responder a diferentes necesidades o escenarios de trabajo. Desde grúas muy compactas y de reducidas dimensiones para uso domiciliario, hasta grúas mayores y resistentes al uso intensivo en instituciones. Desde grúas de bipedestación, llamadas "cambiapañales" a grúas fijas, montadas en el techo que no ocupan espacio cuando están fuera de uso.



AD918 GRÚA DE ALUMINIO POLARIS MINI


Una grúa ligera de última generación, fabricada en aluminio para facilitar la labor de los cuidadores al proporcionarles una grúa más ligera y muy maniobrable aun en los espacios más reducidos.

Fácil de transportar, desmontable en dos partes, sin herramientas, para que cada parte a transportar pese lo menos posible y quepa por ejemplo en el maletero de un coche pequeño.

Muy maniobrable, POLARIS MINI es una grúa portátil muy estrecha, que pasa por las puertas más pequeñas y gira en espacios muy reducidos. Ruedas de 75 mm de diámetro, las traseras con freno, son especialmente pequeñas para pasar por debajo de camas, sofás, etc,...POLARIS MINI es una grúa muy ligera y maniobrable.

Segura, las patas se abren suavemente por medio de un pedal para mayor seguridad.

Siempre a punto, pistón actuador electrónico con caja de control equipada con paro de emergencia y mando a distancia con cable flexible. La caja de las baterías es de extracción fácil y rápida para lo que disponemos, opcionalmente, de una estación de carga que le permite tener siempre a mano una batería recién cargada.

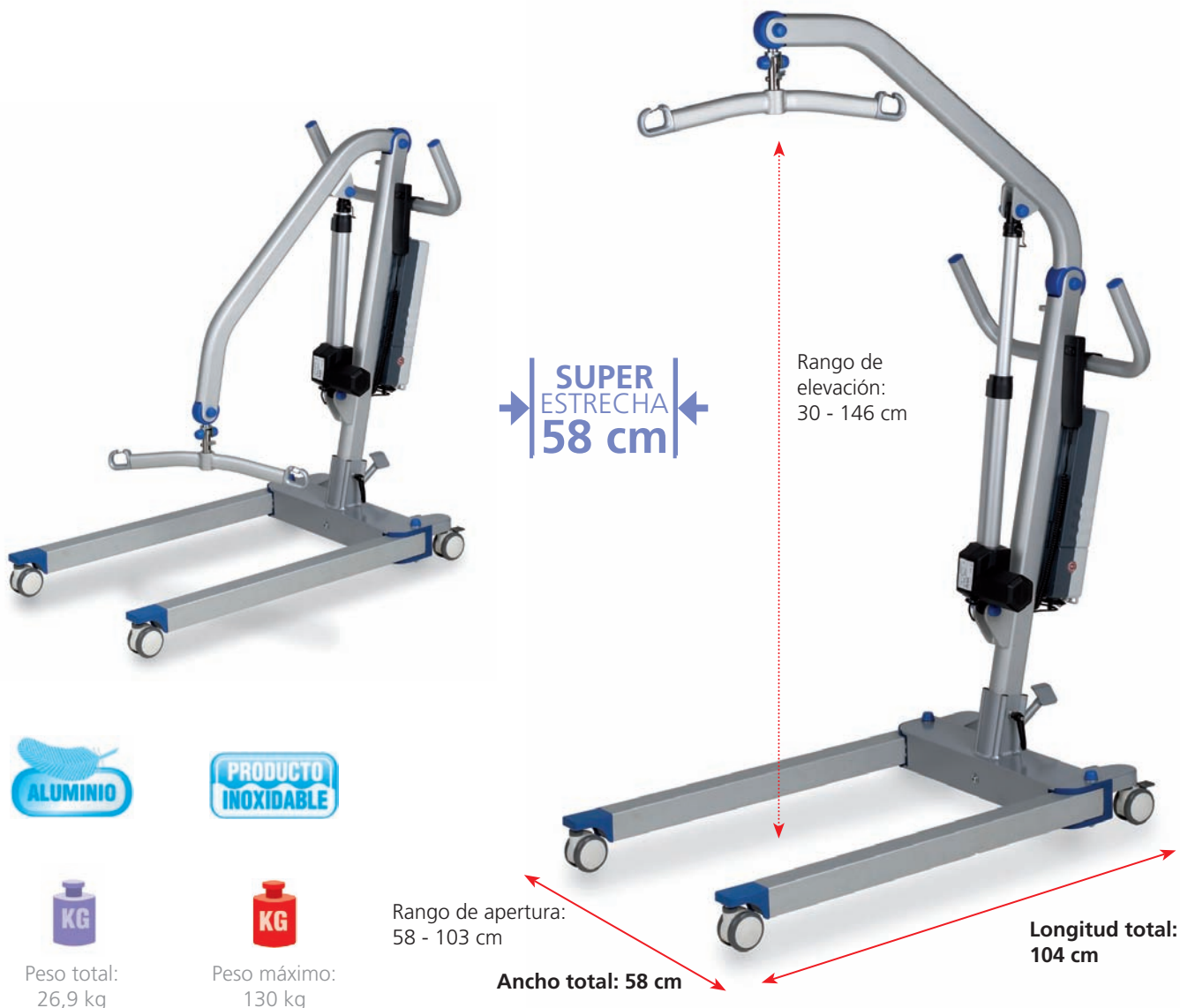

AD919 GRÚA DE ALUMINIO POLARIS MAXI

Grúa ligera de última generación, fabricada en aluminio para facilitar la labor de los cuidadores al proporcionarles una grúa más ligera y fácilmente maniobrable aun en condiciones de uso intensivo

Muy maniobrable, POLARIS MAXI es una grúa portátil muy bien dimensionada y equilibrada que maniobra y gira en espacios reducidos. Ruedas delanteras de 75 mm de diámetro, especialmente pequeñas para pasar por debajo de camas, sofás, etc,... Las ruedas traseras son de 100 mm y con freno para hacer la grúa más ligera y maniobrable.

Ligera, desmontable en dos partes, sin herramientas, para que cada parte a transportar pese lo menos posible y sea muy fácil de guardar cuando esta fuera de uso.

Segura, las patas se abren suavemente por medio de un pedal para mayor seguridad.

Siempre a punto, pistón actuador electrónico con caja de control equipada con paro de emergencia y mando a distancia con cable flexible. La caja de las baterías es de extracción fácil y rápida para lo que disponemos, opcionalmente, de una estación de carga que le permite tener siempre a mano una batería recién cargada.



Peso total:
29 kg



Peso máximo:
150 kg



AD908 GRÚA COMPACTA MICRO

Grúa electrónica especialmente diseñada para su uso en lugares de reducidas dimensiones y para maniobrar a través de puertas estrechas, lavabos, etc... Fácil de transportar: se desmonta en pocos minutos y sin necesidad de herramientas.

Las patas se abren por medio de un pedal para garantizar mayor seguridad cuando levantamos al paciente.

Ruedas delanteras de 75 mm \varnothing , especialmente bajas para pasar por debajo de camas, sofás, etc... Las ruedas traseras son de mayor diámetro, 100 mm y con freno para hacer la grúa mas ligera y fácil de manejar.

Equipada con pistón actuador electrónico, caja de control con dos baterías y paro de emergencia y con mando a distancia mediante cable flexible. Tensión nominal 24V.



SUPER ESTRECHA
55 cm



Peso total:
34 kg



Peso máximo:
130 kg

A910 ESTACIÓN DE CARGA

En condiciones de uso intensivo de la grúa, por ejemplo en instituciones o residencias, es muy útil contar con una estación de carga donde tendremos una batería siempre cargada y a punto de ser utilizada y reemplazar la descargada. Todas nuestras grúas llevan una equipación alemana que permite extraer muy fácilmente la batería de la grúa.


Disponible
estación de
carga adicional



AD910 GRÚA AKS FOLDY

Grúa electrónica especialmente diseñada para su uso en lugares de reducidas dimensiones y para maniobrar a través de puertas estrechas, lavabos, etc..

Fácil de transportar: se desmonta en pocos minutos y sin necesidad de herramientas.

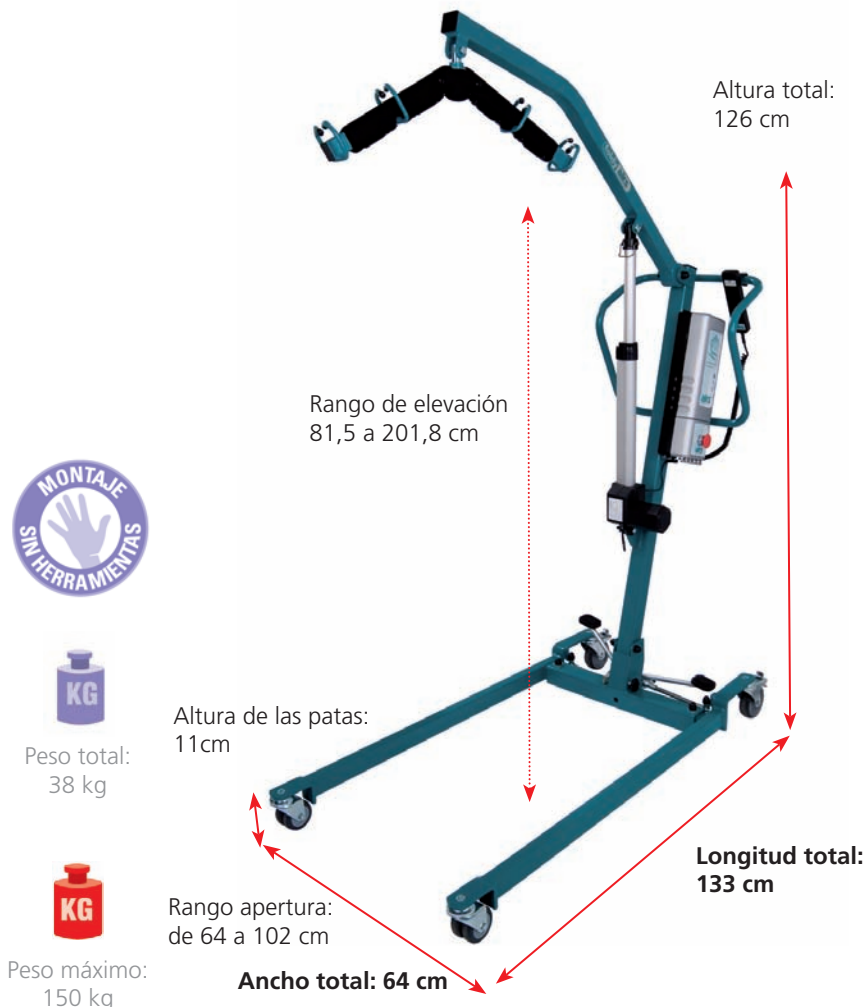

AD911 BÁSCULA ELECTRÓNICA AKS

Compacta (500 gr) y práctica báscula. Trabaja hasta 200 Kg. Funciona con 3 pilas AAA y el display avisa cuando la batería está baja. Desconexión automática con temporizador (4 minutos). Adaptadores para grúas AKS incluidos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS GRÚAS AKS

- Tensión nominal 24 V.
- Capacidad de las baterías: 60 ciclos con las baterías con carga máxima.
- Ruedas de 75 mm Ø, las delanteras dobles y las traseras con freno.
- Garantía de dos años para las partes mecánicas y electrónicas, excepto las baterías.
- Sistema de último descenso manual en caso de agotar batería.



- Plegable y fácil de transportar.



- Paro de emergencia.



AD906 GRÚA BIPEDESTACIÓN WAY UP

La grúa más pequeña y ligera existente. Ultra compacta, 82 cm de largo por 57 cm de ancho y con un peso de apenas 28 Kg. la convierten en una grúa de bipedestación extraordinariamente manio-
brable y versátil.

Entre sus múltiples aplicaciones: vestirse, cambio de pañales, utilizar el WC, entrar o salir de un coche, traslado de la silla a la cama y viceversa...y todo de una manera fácil y sencilla, de hecho, apretando un botón del mando a distancia.



No importa el tamaño del vehículo, gracias sus dimensiones compactas y la capacidad de elevación, la grúa Way Up permite un fácil acceso.
(excepto en los coches demasiado altos, como los 4 x 4)

AD909 GRÚA BIPEDESTACIÓN TORNEO

Una herramienta imprescindible en asistencia institucional y de uso intensivo.

TORNEO es ideal para cambiar pañales, para vestir o desvestir y también es muy práctica para utilizar el WC.

TORNEO es una grúa muy compacta y de reducidas dimensiones lo que la convierte en una grúa extraordinariamente maniobrable incluso en espacios reducidos donde moverse es un problema, por ejemplo en los lavabos.

De fabricación alemana, esta grúa dispone de una estación de carga opcional que permite disponer de una batería siempre cargada y lista para su uso. La capacidad de la batería con carga máxima es de 60 ciclos de subida / bajada.



Peso total:
36 kg



Peso máximo:
150 kg



Sistema de descenso manual en caso de agotar la batería.



la grúa Torneo se puede convertir a posteriori en una grúa convencional adquiriendo el kit de conversión.




AD913 GRÚA DUO

En sólo 30 segundos podemos convertir la grúa electrónica convencional en una grúa bipedestación cambia pañales, y todo sin necesidad de herramientas. Nueva equipación electrónica alemana, que permite tener una estación externa de carga con una batería completamente cargada y lista para su uso.



2
grúas en
uno

Para convertir la grúa sólo debemos cambiar la pieza del mástil que nos permitirá adaptar un arnés A909 (pág. 95) para levantar el paciente por debajo de los brazos. Una plataforma encajada en la parte inferior de la grúa servirá de soporte para los pies y las rodillas.

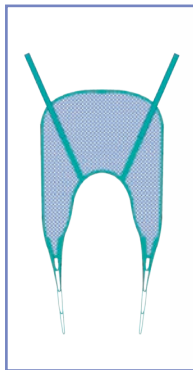

Peso total:
36 kg



Peso máximo:
150 kg

Rango de apertura:
de 64 a 102 cm

Ancho total: de 64 cm

Para convertir la grúa en una cambia pañales solo hay que cambiar una pieza del mástil y colocar la plataforma reposapiés, todo ello sin necesidad de herramientas.



Peso total:
46 kg



Peso máximo:
150 kg



AD924 GRÚA PARA USO INTENSIVO OMNI LIFT

OMNI LIFT es la más compacta de su clase, de dimensiones muy reducidas para ser una grúa maniobrable y versátil en espacios reducidos.

Nueva grúa totalmente electrónica que resuelve las labores más pesadas del personal sanitario, aliviando sus espaldas y facilitando su trabajo.

Construcción sólida y resistente, preparada para un uso intensivo.

Totalmente electrónica, la grúa OMNI LIFT viene equipada con pistones electrónicos tanto para elevar a un paciente como para la apertura de las patas.

Simplemente apretando un botón se abren las patas para aumentar la estabilidad de la grúa y realizar las movilizaciones con total seguridad.

Caja de baterías con cargador integrado (que no se puede perder o dañar como ocurre a menudo) con indicador de nivel de carga y paro de emergencia.



Sistema de bajada de emergencia si se agotasen las baterías



Ancho total: de 59 cm

Rango apertura: de 59 a 116 cm

Apertura electrónica de las patas.



Peso total:
40 kg



Peso máximo:
180 kg

Arneses

Diseñados para realizar transferencias con seguridad y comodidad tanto para el paciente como para el personal auxiliar. Nuestros arneses son regulables a diferentes alturas, están codificados por colores para mayor comodidad, y son compatibles con grúas que tengan la percha de 2 ó 4 puntos de sujeción.

Están fabricados con los mejores tejidos y cosidos por robots, y han sido probados satisfactoriamente con pesos de hasta 480 Kg. que es cuatro veces el peso máximo que recomendamos, de **120 Kg**. Estos arneses son apropiados tanto para la asistencia domiciliaria como institucional.

La gama debe ser extensa, tanto en modelos como en tallas porque en lo referente a trasferencias los detalles importan, y nuestro ánimo es dar una respuesta profesional a diferentes necesidades.

Escoger un arnés y saber usarlo.

Para escoger un arnés hay que tener en cuenta el estado del paciente, el tipo de movilización o transferencia a realizar, además del tipo de grúa utilizada.

Diferentes personas y movilizaciones precisan arneses diferentes y también diferente manera de colocarlos.

Mostramos 3 maneras básicas de colocar un arnés, y ponemos algunos ejemplos de situaciones corrientes, pero la realidad es más compleja y encontraremos una gran variedad de situaciones.



NOTA: Es muy importante para la seguridad del paciente, y también para su dignidad, haber adquirido los conocimientos y la habilidad necesarios antes de movilizar personas con un arnés y una grúa.

Posicionamiento de las cinchas del arnés:

Cruzadas **entre** las piernas

Cruzadas **por debajo** de las piernas

Sin cruzar **entre** las piernas



Tipo transferencia	cama-silla	levantar del suelo	sobre el WC
Hemipléjico	cruzado debajo de las piernas	cruzado debajo las piernas	sin cruzar entre las piernas
Parapléjico activo con lesión baja	cruzado entre las piernas	cruzado entre las piernas	sin cruzar entre las piernas
Amputado simple	cruzado debajo las piernas	cruzado debajo las piernas	sin cruzar entre las piernas

A906 ARNÉS DE AJUSTE RÁPIDO FAST-FIT


Nuevo diseño de arnés de ajuste rápido. Un arnés seguro y muy fácil de poner, con cinturón frontal de ajuste rápido con velcro. Este es el arnés preferido en las instituciones, especialmente para usarlo en el WC.



Cintas de suspensión
de poliéster de 40 mm.
Doble cosido



Tejido de
fácil secado

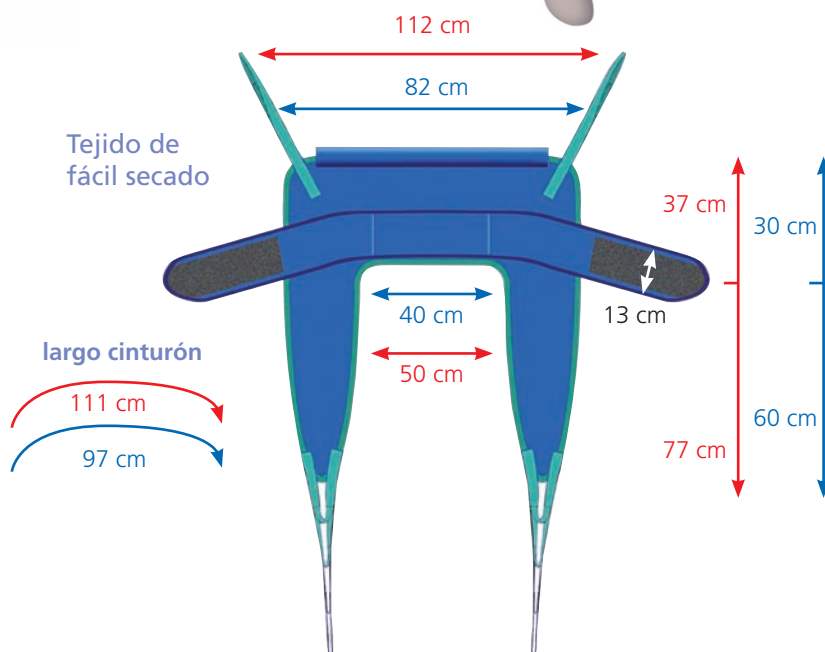

NO USAR CON PACIENTES HIPOTÓNICOS

Disponible en dos tallas

A906M	medidas en azul
A906L	medidas en rojo

A912 ARNÉS UNIVERSAL CONFORT

Para reducir la presión en la parte de las piernas, presentamos el primer arnés acolchado en la parte de las piernas, con espuma termoformada que proporciona mayor comodidad en el paciente y gran resistencia a la abrasión.





A911 ARNÉS CON CABEZAL

Para las transferencias mas delicadas y para ciertos casos puede ser recomendable utilizar un arnés de montaje rápido con cabezal. El paciente apoya la cabeza durante la transferencia y además se siente más arropado, dándole mayor sensación de seguridad.



Cintas de suspensión de poliéster de 40 mm. Doble cosido.

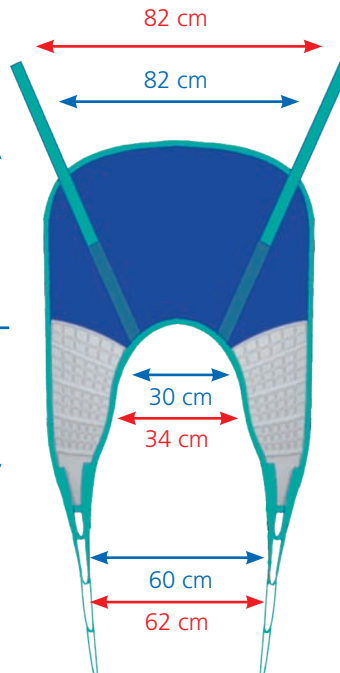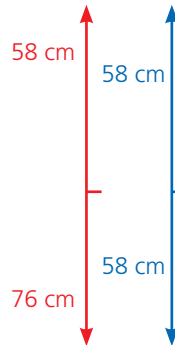

Acolchado especial patentado de espuma termoformada

Disponible en dos tallas

A912M medidas en azul

A912L medidas en rojo

Disponible en dos tallas

A911M medidas en azul


A911L medidas en rojo

A907 ARNÉS DE BAÑO AQUA

Fabricado con tejido de alta tenacidad y gran resistencia que permite un secado rápido. Recomendado para su uso en el baño y en piscinas.



Tejido de secado rápido

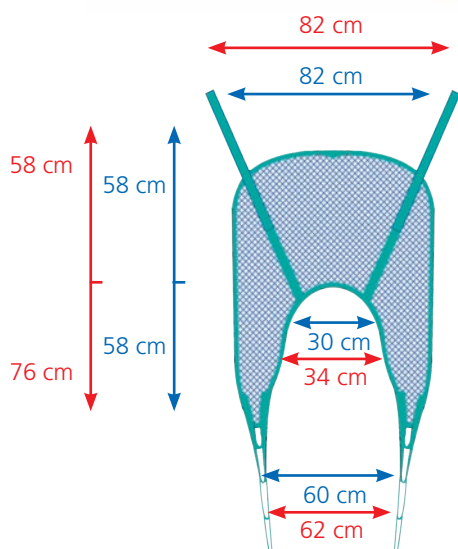


Disponible en dos tallas

A907M	medidas en azul
A907L	medidas en rojo

A909 ARNÉS BIPEDESTACIÓN TORNEO

Apropiado solamente para utilizarlo con grúas de verticalización. Adaptable a prácticamente todas las grúas de bipedestación por tracción. En este arnés se ha tenido especial cuidado en los detalles referentes a la comodidad del paciente incorporando, por ejemplo, un doble acolchado en la parte de las axilas. Un gran cinturón de ajuste rápido por velcro, da mayor seguridad a las transferencias al sujetar a la persona en todo su perímetro.

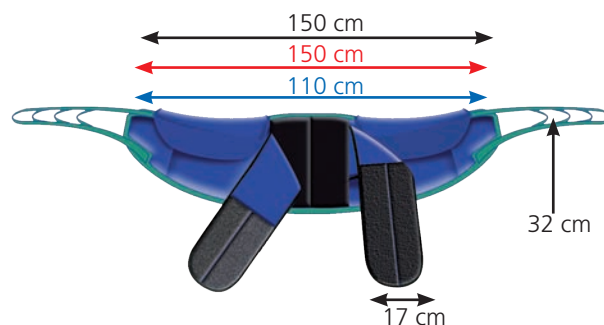

NO USAR CON PACIENTES HIPOTÓNICOS

Disponible en tres tallas	perímetro tórax
A909M	medidas en azul 105 cm
A909L	medidas en rojo 130 cm
A909XL	medidas en negro 150 cm


A914 ARNÉS GOLIATH 250 kg

Arnés especialmente reforzado para realizar las transferencias de personas con gran sobrepeso y hacerlo con seguridad y comodidad tanto para el usuario como para el cuidador.

Talla única.




Peso máximo:
250 kg

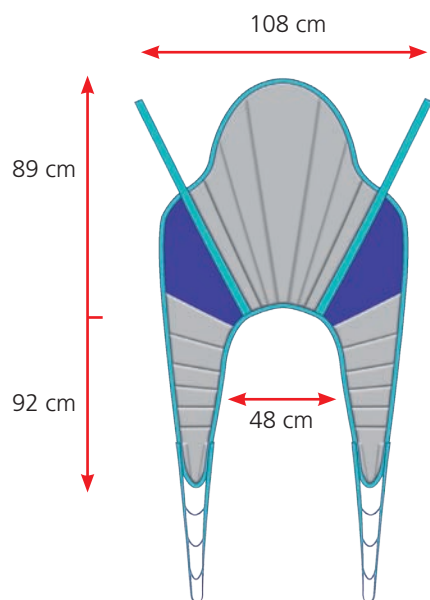

A916 ARNÉS ENVOLVENTE

Su forma envolvente esta concebida para trasladar pacientes inquietos o con ansiedad. El cuidador puede transferir al paciente sentado o recostado.


Talla única.

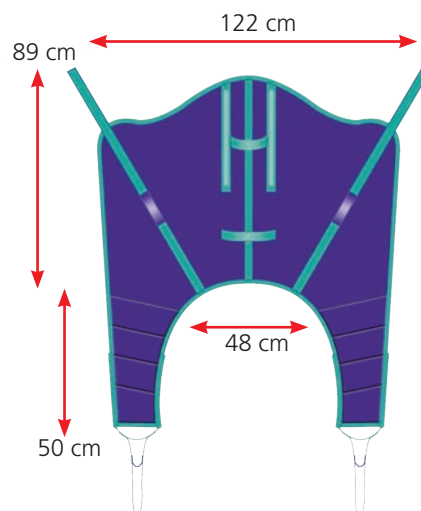

A915 ARNÉS DE AJUSTE RÁPIDO PROFESSIONAL

De forma envolvente y con un respaldo alto y con cabezal que proporciona un buen soporte a la columna vertebral. Extremadamente fácil de poner a pacientes sentados, por ello es ampliamente utilizado en instituciones.


Talla única.

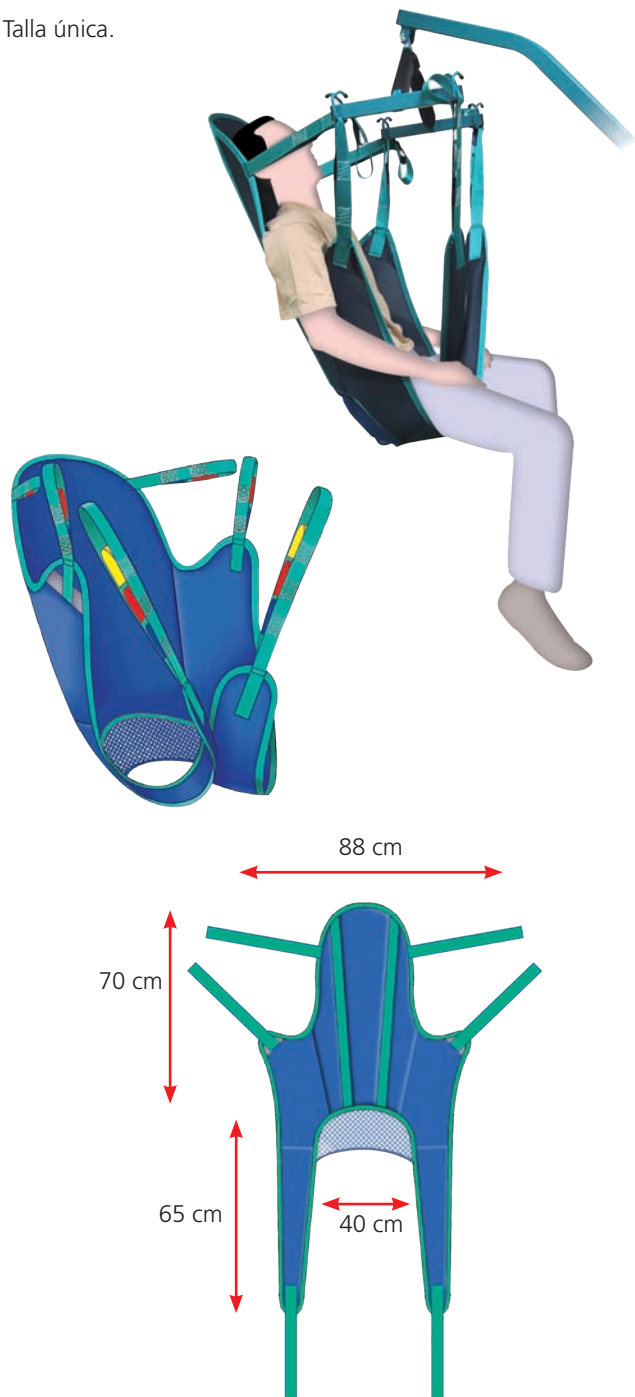

A917 ARNÉS AMPUTADOS

Recomendado para post operados de cadera y para amputados de miembros inferiores. Concebido para las transferencias más delicadas. Su forma envolvente, sin constricciones en las caderas, posibilita las transferencias más difíciles tales como complicaciones en post operados de cadera o amputados.

Talla única.

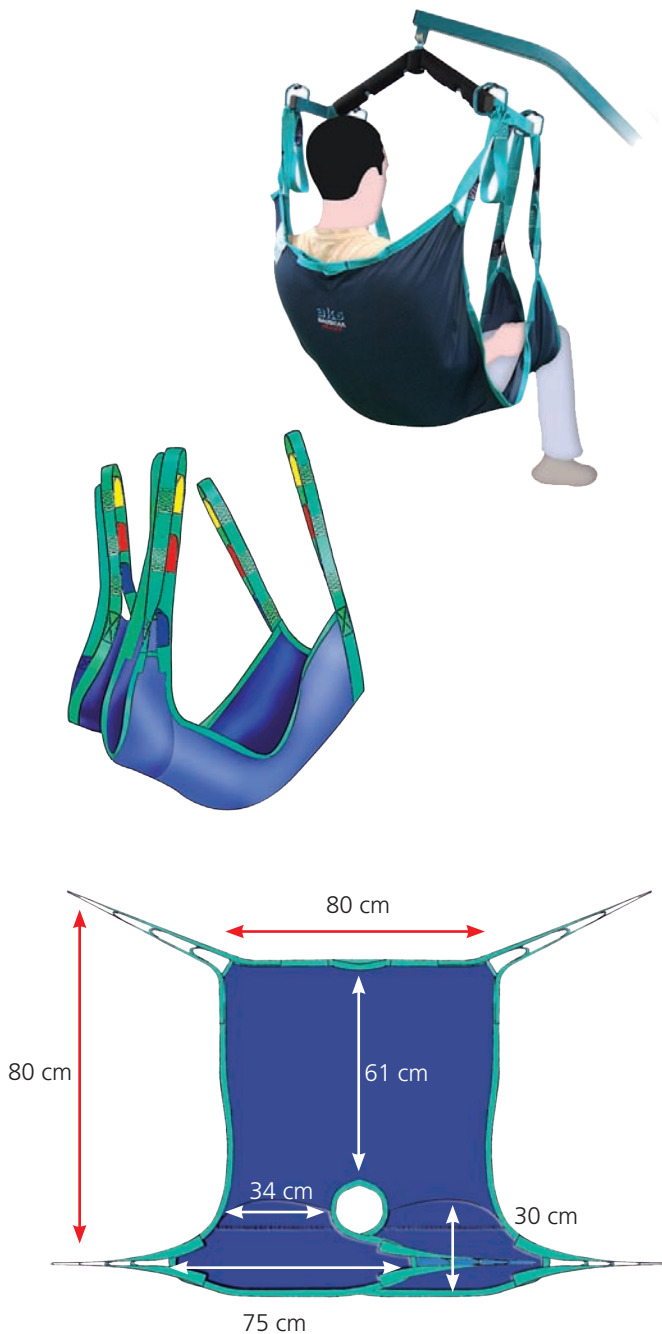

Un cierto grado de independencia es
fundamental para nuestra autoestima

A black and white photograph of a woman with long blonde hair sitting in a wheelchair. She is smiling and holding a young child on her lap. They are seated at a modern dining table. On the table, there is a laptop, a bowl of fruit, and a napkin holder. The woman is pointing at the laptop screen. The background shows a bright room with large windows and a modern interior design.

MOVILIDAD

Muchas son las personas que ven limitada su movilidad y como las necesidades y el entorno de cada persona son diferentes, para dar una respuesta profesional es importante contar con la gama mas amplia posible de ayudas técnicas de calidad, seguras y diseñadas por expertos.

Funcionales. Las ayudas para la deambulaci3n de Ayudas Dinámicas son fáciles de usar, resultan cómodas y sobre todo son funcionales. Están diseñadas para proporcionar el mayor grado de movilidad posible.

Ergonómicas y seguras. Ofrecemos ayudas ergonómicas, que se adaptan bien al usuario y a su entorno. Por otro lado, las ayudas seguras son primordiales para prevenir caídas y dar la confianza que necesita el usuario para desarrollar una determinada habilidad en su uso y mantener un cierto grado de independencia.



Rolators

Los rolators son andadores especialmente diseñados para utilizarlos en exteriores. La personas con movilidad reducida son cada vez más independientes y activas en sus desplazamientos y los rolators son de gran ayuda y permiten trayectos más largos. Tienen cuatro ruedas más grandes que los andadores con dos ruedas que de hecho son para uso exclusivo en interiores y para distancias muy cortas. Tienen sistema de frenado para poder sentarse con seguridad, y todos incorporan un asiento para hacer las pausas necesarias. Cada vez son más ligeros y maniobrables incluso en terrenos irregulares. Una práctica cesta porta objetos es habitual, además de otros posibles accesorios.




AD238 ROLATOR PLEGABLE TAURUS

Los rolators plegables son la última tendencia entre los diseñadores de este tipo de andadores con cuatro ruedas, que opinan que se pliegan más fácilmente.

TAURUS es ligero, de aluminio y fuerte a la vez. Efectivamente se pliega con suma facilidad y tiene una correa de ayuda a estos efectos en mitad del asiento.

El asiento de malla y la correa de respaldo lo hacen especialmente cómodo para sentarse. Sorprende su maniobrabilidad, gracias a un estudiado diseño y a sus cuatro ruedas de 200 mm. Tiene puños anatómicos y frenos con bloqueo, es graduable en altura para adaptarse a usuarios de diferentes alturas.

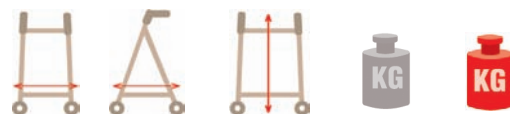

modelo	ancho	fondo	alto graduable	peso total	peso máx.
AD238	59 cm	66 cm	71-84 cm	7,7 kg	100 kg

AD150 ROLATOR DE ALUMINIO ERGO

Versión más ligera y maniobrable del clásico rolator.
Fabricado en aluminio, pesa sólo: 7,5 kg y es muy fácil de plegar y guardar. Adecuado para su uso tanto en interiores como en exteriores. Los frenos especialmente diseñados para accionarse aún con movilidad limitada en las manos, tienen posición de "parking" que bloquea el rolator para mayor seguridad. Soporte para bastones incluido. VER TABLA DE MEDIDAS



AD160 ROLATOR DE ALUMINIO ROLER

Andador rolator muy ligero y maniobrable, fabricado en aluminio.
Fácil de plegar y guardar.
Freno por presión en los puños.
Incorpora un cómodo asiento acolchado de 30 x 30 cm. y una cesta porta objetos.
VER TABLA DE MEDIDAS



Fácil de plegar



modelo	ancho	fondo	alto graduable	peso total	peso máx.
AD150	55,5 cm	72 cm	79-90 cm	7,5 kg	120 kg
AD160	58 cm	58 cm	82-94 cm	5 kg	90 kg

Caminadores ligeros de aluminio

AD185 ROLATOR ESTRECHO LOW

Especialmente diseñado para personas de talla pequeña, el asiento tiene una altura de 47 cm. Además maniobra en espacios muy reducidos porque es muy estrecho: sólo 50 cm de ancho. Debajo del cómodo asiento acolchado de 30 x 30 cm. tiene una práctica bolsa para llevar objetos de manera discreta. VER TABLA DE MEDIDAS.



ESPECIAL PERSONAS PEQUEÑAS



Alto asiento a suelo: 47 cm

AD140 CAMINADOR DE ALUMINIO MINI ROLER

Muy ligero y maniobrable ya que sus cuatro ruedas delateras giran sobre si mismas. Diseño moderno, atractivo y ergonómico, equipado con asiento acolchado de 30 x 30 cm. y puños de altura regulable. Se pliega fácilmente. VER TABLA DE MEDIDAS



Alto asiento a suelo: 52 cm


AD251ALU CAMINADOR DE ALUMINIO

Caminador plegable, con cuatro ruedas y regulable en altura, muy ligero y fácil de plegar. Lleva asiento acolchado de 40 x 20 cm. VER TABLA DE MEDIDAS



Alto asiento a suelo: 52 cm

Linterna no incluida, ver pág. 104.

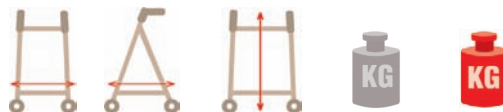

modelo	ancho	fondo	alto graduable	peso total	peso máx.
AD251 ALU	58 cm	62 cm	80-94 cm	3,7 kg	100 kg
AD140	58 cm	54 cm	82-94 cm	3,9 kg	100 kg
AD185	50 cm	61 cm	77-86 cm	6,0 kg	100 kg

AD250 CAMINADOR PLEGABLE MINI ROLATOR 2 RUEDAS

Resistente andador plegable fabricado en acero. Con dos ruedas delanteras de 11 mm de diámetro. Viene equipado con un asiento acolchado de 40 x 20 cm. Al igual que todos los caminadores de dos ruedas, está recomendado utilizarlo en interiores y para desplazamientos cortos, exclusivamente sobre superficies planas y sin desnivel. VER TABLA DE MEDIDAS



Alto asiento
a suelo: 54 cm

AD254 CAMINADOR PLEGABLE TRIAL

Para los que prefieren un caminador resistente y a la vez muy maniobrable, **TRIAL**, fabricado en acero, es un caminador realmente robusto. Sus dos fuertes ruedas de 200 mm, diámetro más generoso de lo habitual, requieren menos esfuerzo para empujar el caminador en los desplazamientos. Puños de altura graduable. Plegable para facilitar su almacén y transporte. VER TABLA DE MEDIDAS




AD245 CAMINADOR CON RUEDAS PLEGABLE

Caminador de acero cromado, con ruedas de 150 mm ø. Puños anatómicos de altura regulable. Se pliega para facilitar su almacén y transporte. VER TABLA DE MEDIDAS



AD246 CAMINADOR INFANTIL

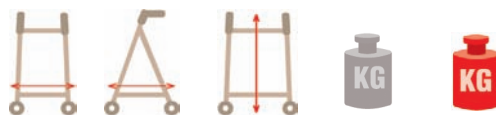


modelo	ancho	fondo	alto graduable	peso total	peso máx.
AD254	56 cm	66 cm	78-98 cm	4 kg	100 kg
AD250	60 cm	63 cm	83-96 cm	5,6 kg	150 kg
AD245	56 cm	71 cm	69-89 cm	6 kg	125 kg
AD246	46 cm	56 cm	49-61 cm	3,8 kg	50 kg

AD240 CAMINADOR EXTRA MANIOBRABLE DELTA

Caminador de tres ruedas diseñado especialmente para maniobrar en espacios reducidos. Con un radio de giro mínimo puede girar sobre si mismo incluso en pasillos estrechos. Los puños son graduables de altura y llevan frenos para controlar mejor la marcha.

Incorpora una práctica cesta y una bandeja para trasladar objetos de un lugar a otro de la casa y también una bolsa para llevar objetos de manera más discreta si los desplazamientos son por exteriores. Se pliega muy fácilmente para guardarlo cómodamente, por ejemplo tras una puerta, o facilitar su transporte.

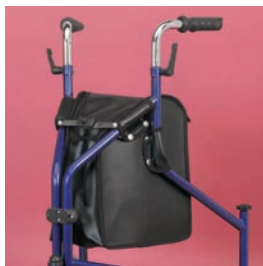

H9400 LINTERNA LED PORTÁTIL


Una abrazadera giratoria que se adapta sin necesidad de herramientas, incorpora una potente linterna de leds. La abrazadera que sujeta firmemente la linterna se abre (y se cierra) fácilmente para liberarla y llevarse la linterna cuando sea preciso. Se adapta a la mayoría de sillas, rolators y andadores. (tubos de 22 a 25 mm. de diámetro)



AD100 CAMINADOR POLIVALENTE PLEGABLE ROLATOR

Con 4 ruedas de 200 x 50 mm. Equipado con un confortable asiento de descanso, y manetas de frenos autoblocantes de seguridad, cesta de la compra y bandeja desmontable para su uso doméstico. El caminador se pliega fácilmente y los puños son de altura graduable.

VER TABLA DE MEDIDAS.

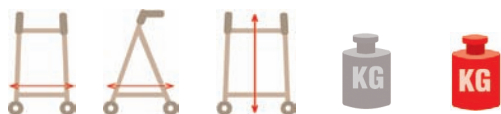

modelo	ancho	fondo	alto graduable	peso total	peso máx.
AD100	60 cm	67 cm	80-100 cm	10,2 kg	100 kg
AD240	64 cm	58 cm	80-93 cm	6,2 kg	150 kg

AD230AD / AD233AD

CAMINADOR DE PASOS DE ALUMINIO / CAMINADOR FIJO DE ALUMINIO



AD230AD Plegable, articulado y muy ligero. Avanza alternativamente a izquierda y derecha. VER TABLA DE MEDIDAS

AD233AD Plegable y de altura graduable. VER TABLA DE MEDIDAS



Peso total:
2,5 kg



Peso máximo:
100 kg

AD231

CESTA PARA CAMINADOR

Cesta metálica plastificada para llevar objetos pequeños y medianos. Incorpora en el fondo una bandeja plástica transparente con compartimiento para vaso o lata y portaobjetos. Se fija a la mayoría de caminadores. Medidas: Ancho: 43 cm, alto: 18 cm. y fondo: 18 cm



AD232

CAMINADOR DE INCORPORACIÓN

Además de caminador, sirve como ayuda para incorporarse desde la posición de sentado. Fabricado en aluminio. Plegable. VER TABLA DE MEDIDAS



Peso máximo:
100 kg



Peso total:
2,8 kg



modelo	ancho	alto graduable
AD230AD	56 cm	79-91 cm
AD233AD	58 cm	79-91 cm
AD232	58 cm	78-90 cm

AD252 MAXI-CAMINADOR AXILAR PLEGABLE

De altura regulable y con 4 ruedas de 125 mm Ø de diámetro, las 2 traseras con freno incorporado.



El soporte axilar almohadillado se regula en todas direcciones y también en altura para adaptarse a cualquier persona. Se pliega fácilmente para su almacenaje o transporte. VER TABLA DE MEDIDAS

AD200RC CAMINADOR CON SOPORTE DE ANTEBRAZO

Fabricado en aluminio y de altura regulable. Ruedas delanteras de 5 cm. Almohadilla para antebrazo. Puños ajustables en largo e inclinación. VER TABLA DE MEDIDAS




AD203 CAMINADOR ATLAS CON SOPORTE DE ANTEBRAZO

De iguales características que el modelo AD203A pero incorporando un soporte acolchado para los antebrazos.

AD203A CAMINADOR ATLAS

Ajustable en altura y dotado de ruedas de 75 x 21 mm, dos con freno. Una parte del cuerpo puede descansar sobre la almohadilla ignífuga. Puños ajustables en largo e inclinación.

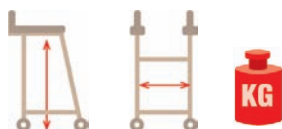

modelo	altura graduable	ancho total	Peso máx.
AD200RC	96-109 cm	74 cm	125 kg
AD203	97-142 cm	63 cm	160 kg
AD203A	97-142 cm	59 cm	160 kg
AD252	98-143 cm	58 cm	100 kg



AD203A



AD203

AD220 CAMINADOR TRIO

Andador muy estable y seguro, con ruedas de 200 x 50 mm antipinchazos.

Ajuste de altura individualizado
Reposabrazos / bandeja de ancho ajustable
Regulable sin herramientas
Frenos autoblocantes a la mano
Maniobrable, pequeño radio de giro



Peso máximo:
150 kg



Cómodo reposabrazos,
graduable en altura y de ancho



AD120 CAMINADOR POLIVALENTE ARTRIS

Este rolator tiene soportes de poliuretano blando para los antebrazos y está especialmente diseñado para responder a las necesidades de movilidad de pacientes con reumatismo o artritis.

Fabricado en acero, es un rolator robusto y resistente. Viene equipado de origen con un asiento de 42 cm de ancho x 22 cm de fondo, cesta portaobjetos y bandeja. Puños con freno de altura graduable y ruedas de 200 mm de PU, antipinchazos.



Peso total:
14 kg




Peso máximo:
120 kg



Bastones de puño anatómico blando PROFISOFT

Bastones con puño blando y anatómico que se adaptan a la palma de mano. Pedir derecha o izquierda. Fabricados en aluminio.

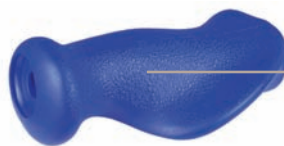

AD112 BASTÓN CON PUÑO ANATÓMICO BLANDO

Codera con 3 puntos de regulación de altura del puño a la codera y 10 ajustes de altura del puño al suelo. Sistema especial de marcha silenciosa. Bastón de gran estabilidad. VER TABLA DE MEDIDAS

modelo

AD112-R	derecha
AD112-L	izquierda



AD116 EXPOSITOR BASTONES SQUARE

Capacidad 12 bastones en el perímetro exterior. Se puede aprovechar en el interior 53x53 cm. Alto: 66 cm.



AD114 BASTÓN CON PUÑO ANATÓMICO BLANDO Y CODERA ABATIBLE

Codera abatible con 3 puntos de regulación de altura del puño a la codera y 10 ajustes de altura del puño al suelo. Sistema especial de marcha silenciosa. Bastón de gran estabilidad. VER TABLA DE MEDIDAS

modelo


AD114-R	derecha
AD114-L	izquierda



modelo	codera a puño	puño a suelo	codera abatible	peso máx.
AD112	24-26,5 cm	75-98 cm	NO	125 kg
AD114	24-26,5 cm	75-98 cm	SI	125 kg

COMO CAMINAR CON UN BASTÓN

1. Use el bastón del lado opuesto a la pierna que tiene débil o herida.
2. Manténgase en pie imaginando una posición triangular. Sitúe su pie "bueno" detrás de su cuerpo y el pie más débil por delante, en el lado opuesto del bastón, formando los tres puntos del triángulo imaginario (ver ilustración). Los dedos de los pies de su pie más debilitado deberían estar alineados con el bastón.
3. Primero adelante el pie "bueno" por delante de su cuerpo, y mantenga el triángulo.
4. Desenlace el pie más débil y el bastón al mismo tiempo hacia delante por delante del pie "bueno".
5. Es preferible que de pasos cortos, aunque depende de su estado general y equilibrio. Por su seguridad, la contera que hay en el extremo del bastón debe apoyarse en el suelo de forma plana. Compruebe periódicamente el estado de conservación de la contera de goma y reemplácela por una nueva tan pronto como observe signos de desgaste.

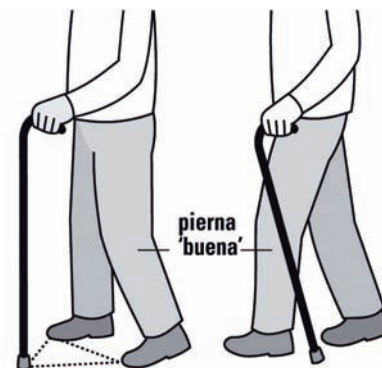

AD111 BASTÓN INFANTIL

Ligero y de colores divertidos. Más información en la sección niños. Ver página 234.



AD102 BASTONES DE ALUMINIO ENCAJABLES MAGIC TWIN

Este nuevo sistema patentado une los dos bastones sin esfuerzo e impide que se caigan al suelo tal y como ocurre habitualmente con las muletas corrientes. Se suministra en pares.

¡NUEVO MODELO!
PUÑOS BLANDOS



Su exclusivo sistema MAGIC TWIN permite mantener juntos los dos bastones cuando no se utilizan.



modelo	codera a puño	puño a suelo	codera abatible	peso máx
AD111	16-21 cm	51-73 cm	NO	125 kg
AD102	24 cm	75-98 cm	NO	130 kg

AD131FUN MULETA AXILAR INFANTIL REBOTEK

Más información en la sección de niños.

AD131LUX MULETA AXILAR REBOTEK

De aluminio y con doble regulación.
Ligeras y seguras.



Peso máximo:
130 kg

Regulable de
118 a 138 cm



Regulable de
68 a 90 cm



Regulable de
83 a 103 cm



Peso máximo:
130 kg

MULETAS AXILARES

De aluminio y con doble regulación.
Ligeras y seguras.
Disponibles en 3 tamaños.



AD131J


AD131

AD131XL

LA MEDIDA CORRECTA



Usar un bastón de la medida adecuada es imperativo. Un bastón regulado a la medida correcta invita a que la persona que lo utiliza mantenga una postura erguida con el codo ligeramente doblado. El peso se apoya de forma natural en el bastón cuando la persona camina. Cuando se mida el bastón, con los zapatos de uso habitual y estando de pie se debe ajustar de manera que la empuñadura esté a la altura de la muñeca de un brazo en reposo. Cuando se necesita utilizar dos muletas o bastones, deben ser ligeramente más largos, ya que se pondrán por delante del cuerpo al caminar.

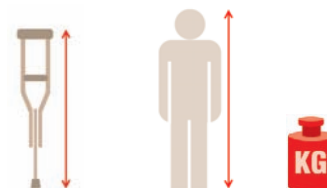

modelo	axila a suelo	altura persona	peso máx.
AD131J	91-112 cm	1,35-1,60 m	125 kg
AD131	112-132 cm	1,60-1,75 m	125 kg
AD131XL	132-152 cm	1,75-1,95 m	125 kg


AD465 BASTÓN CON ASIENTO

Bastón de aluminio de 82 cm de alto. Lleva un asiento de 20 x 20 cm incorporado. Cuando se despliega el asiento queda a 52 cm de altura. Para sentarse sólo a horcajadas.



AD101XL BASTÓN DE ALUMINIO EXTRA LARGO

De iguales características que el modelo AD101 pero más alto.
VER TABLA DE MEDIDAS

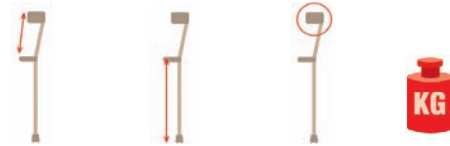

modelo	codera a puño	puño a suelo	codera abatible	peso máx.
AD101	24 cm	75-98 cm	NO	125 kg
AD101XL	24 cm	86-108 cm	NO	125 kg

AD101 BASTÓN DE ALUMINIO


Muy ligero y de gran estabilidad.
10 posiciones de ajuste de altura a suelo.
VER TABLA DE MEDIDAS

AD132 BASTÓN DE APOYO ANTEBRAZO

En aluminio y de altura graduable.
El puño se regula en longitud y en inclinación lateral. El antebrazo descansa sobre una almohadilla acolchada y se sujeta con una banda de skay con velcro.

AD115 EXPOSITOR BASTONES PARA LA PARED LINEAL

Largo: 104 cm.
Para 10 bastones

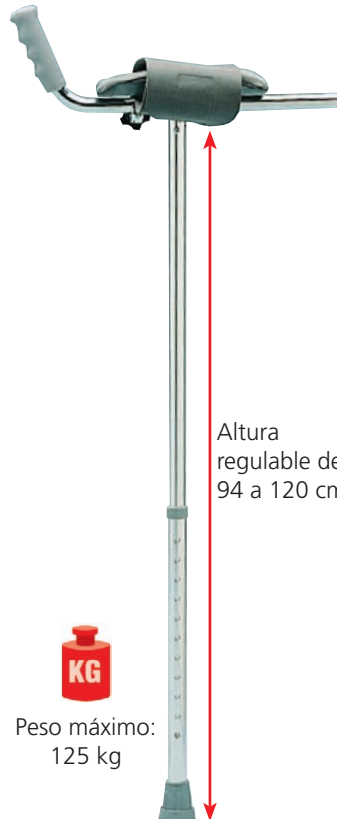

Altura regulable de 94 a 120 cm



Peso máximo:
125 kg



AD413 BASTÓN PLEGABLE

Bastón plegable, fabricado en aluminio, es muy ligero y resistente. De altura graduable de 83 cm a 92 cm con ajuste silenciador que impide el molesto ruido que hacen muchos bastones durante la marcha. Disponible en 10 diferentes diseños y colores. VER TABLA DE COLORES.



modelo	
AD413/A	
AD413/B	
AD413/C	
AD413/D	
AD413/E	
AD413/F	
AD413/G	
AD413/H	
AD413/I	
AD413/J	

AD413/EXPO EXPOSITOR GIRATORIO / 10 BASTONES PLEGABLES

Multicolor y alegre expositor giratorio del que cuelgan 10 bastones AD 413 (uno de cada color disponible) ocupando un espacio mínimo, su base circular apenas tiene 23 cm. de diámetro y una altura de 50 cm.



AD415 BASTÓN DE PUÑO ANATÓMICO



El puño anatómico permite apoyar toda la mano de manera natural y cómoda, aliviando mucho la presión, la tensión y el consiguiente dolor.

Altura graduable de 80 cm. a 102 cm. con ajuste silenciador que impide el molesto ruido que hacen muchos bastones durante la marcha. Disponible para derecha o izquierda, indicar **AD415d** o **AD415i**.



AD416 CINTA PARA BASTÓN



AD414 BASTONES DE ALUMINIO FASHION

Bastón de aluminio muy ligero y resistente. De altura graduable 77 a 100 cm. con ajuste silenciador que impide el molesto ruido que hacen muchos bastones durante la marcha. Disponible en 10 diferentes diseños y colores. VER TABLA DE COLORES.



modelo	color	
AD414/A	NEGRO	
AD414/B	COBRE	
AD414/C	AZUL	
AD414/D	MARRÓN	
AD414/E	NEW YORK	
AD414/F	BALI	
AD414/G	ESCOCIA	
AD414/H	MÓNACO	
AD414/I	HAWAI	
AD414/J	LONDON	

EXPOSITOR GIRATORIO / 20 BASTONES FASHION

Lleno de colorido y alegre expositor giratorio del que cuelgan 20 bastones FASHION ocupa el mínimo espacio. Coronado con una gruesa cartulina que publicita a dos caras las cualidades y el PVP de los bastones expuestos. Disponible en 2 opciones:



AD414/EXPO

20 bastones **AD414**
2 de cada color



AD414/MIX

10 bastones **AD414**
10 bastones **AD413**
1 de cada color

AD474 BASTÓN CUADRÍPODE

Fabricado en aluminio color dorado.



AD474B BASTÓN CUADRÍPODE JACK

Bastón ambidiestro. Con 10 ajustes de altura. Incorpora 4 patas para mayor estabilidad. Sistema confort (antirruido). VER TABLA DE MEDIDAS



AD444 BASTÓN CUADRÍPODE CON CODERA

Fabricado en aluminio y de altura graduable. 4 patas para mayor estabilidad. VER TABLA DE MEDIDAS



AD444N CUADRÍPODE INFANTIL QUADRO

Más información en la sección infantil, página 234.



AD474N BASTÓN CUADRÍPODE INFANTIL

Más información en la sección infantil, página 234.



modelo	puño a suelo	peso máx.
AD444	77-100 cm	100 kg
AD474	70-92 cm	100 kg
AD474B	70-92 cm	100 kg
AD474N	65-88 cm	100 kg
AD444N	65-88 cm	100 kg

BASTONES CLÁSICOS DE HAYA

H0159

Bastón de haya,
puño marrón



H0200

Bastón de haya,
puño flameado



H0201

Bastón de haya



H0453

Bastón de haya nogal,
puño de metacrilato
metalizado jaspeado
cobre / negro



H0454

Bastón de haya negra,
puño de metacrilato
metalizado jaspeado
plata.



MAXI CONTRA

A119

ø 19 mm

A117

ø 17 mm

Contera de gran tamaño para proporcionar la máxima seguridad y adherencia. La gran base de 70 mm da una sensación de mayor seguridad y confianza durante la deambulación y además no se hunde en los terrenos blandos. Fabricada en caucho de alta resistencia y gran duración. Disponible para tubos de diámetro: 19 mm y 17 mm. Se suministra en unidades.



Diámetro: 70 mm

CONTERAS PARA BASTONES

Fabricadas en caucho, disponibles en varios tamaños.



A107

Gris.
ø 17 mm



A100

Gris.
ø 19 mm



A105

Gris.
ø 25 mm



A105N

Negro.
ø 25 mm



A100N

Negro.
ø 19 mm



A100M

Marrón.
ø 19 mm

A109AZUL

Azul.
ø 19 mm

A101

Gris.
ø 22 mm

A108

Gris.
ø 28 mm

A108N

Negro.
ø 28 mm



CANEO

Gama de sillas de ruedas de aluminio, ligeras y con una estabilidad y prestaciones desconocidas hasta ahora.

CANEO – S de Superior Silla ligera con todo el equipamiento y prestaciones de alta gama.



¡NUEVA!

horquilla de rueda
delantera patentada

- Ligera, fabricada en aluminio
- Puños para el acompañante de altura regulable
- Tensión del respaldo regulable con cinchas y Velcro
- Horquilla delantera patentada y de ángulo regulable
- Altura del asiento regulable: 42, 45, 48 y 51 cm
- Fondo del asiento de 41 y 44 cm
- Ángulo del respaldo 3°, ángulo del asiento 3°
- Reposabrazos de altura graduable.
- Reposabrazos largos y cortos en la misma silla.
- Ruedas de 24" antipinchazos de poliuretano con "quick release"
- Disponible con freno de tambor, también para el acompañante
- Ruedas delanteras de 7" antipinchazos de poliuretano
- Reposapiés con plataformas de ángulo regulable
- Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera



Peso máximo
hasta 130 kg

DIETZ
REHA-PRODUKTE
MADE IN GERMANY



Reposabrazos regulables de altura para adaptarse a las medidas cada usuario. Reposabrazos largos y cortos en la misma silla.



Regular los puños a la altura mas conveniente para empujar una silla de ruedas proporciona una gran comodidad al acompañante. Le permite mantenerse erguido mientras empuja la silla, y le evita dolores de espalda.



Tensión del respaldo regulable con cinchas y velcro



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL10A36	36 cm	92 cm	56 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	16,3 kg	120 kg
PL10A39	39 cm	92 cm	59 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	16,6 kg	120 kg
PL10A42	42 cm	92 cm	62 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	16,9 kg	120 kg
PL10A45	45 cm	92 cm	65 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	17,3 kg	120 kg
PL10A48	48 cm	92 cm	68 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	18,0 kg	130 kg
PL10A51	51 cm	92 cm	71 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	18,2 kg	130 kg

CANEO – L de Long

Silla de ruedas ligera especialmente diseñada para personas de más de 180 cm.



MÁXIMA ESTABILIDAD, MÁXIMA MANIOBRABILIDAD

El sistema patentado de la horquilla de la rueda delantera permite graduar de manera muy sencilla la altura del asiento al suelo a 4 diferentes alturas. Además también hace posible graduar la horquilla de la rueda delantera en 3 diferentes ángulos: -3° , 0° , $+3^\circ$

Este inteligente diseño consigue una silla muy maniobrable y proporciona a las sillas **CANEO** el más alto nivel de estabilidad a la vez que da gran comodidad durante la marcha al poder adaptar la silla a las características de cada persona en particular.



- Ligera, fabricada en aluminio
- Doble cruz, soporta hasta 150 kg
- Tensión del respaldo regulable con cinchas y Velcro
- Horquilla delantera patentada y de ángulo regulable
- Altura del asiento regulable: 48, 51, 54 y 57 cm
- Fondo del asiento de 47 y 51 cm

- Ángulo del respaldo 3° , ángulo del asiento 3°
- Reposabrazos de altura graduable.
- Reposabrazos largos y cortos en la misma silla
- Ruedas de 24" antipinchazos de poliuretano con "quick release"
- Disponible con freno de tambor, también para el acompañante
- Ruedas delanteras de 7" antipinchazos de poliuretano
- Reposapiés con plataformas de ángulo regulable
- Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera



La rueda trasera es regulable a 4 diferentes alturas de forma rápida y sencilla para poder así ajustar la altura del asiento de la silla, que es la característica mas destacada de esta silla diseñada desde su inicio para personas de gran talla.

Este sistema junto con el dispositivo patentado de la horquilla de la rueda delantera que permite graduar la altura del asiento de la silla a 4 diferentes alturas y ajustarlo a 3 diferentes ángulos hace de la silla **CANEO L** la única silla de ruedas pensada para personas de mas de 180 cm de altura, que finalmente cuentan con una silla adecuada para su estatura, cómoda, maniobrable y de gran estabilidad.

La rueda trasera viene equipada con "quick release" para desmontar la rueda de forma rápida.

El eje de la rueda y con éste, el centro de gravedad de la silla, se puede adelantar o atrasar si conviene (por ejemplo en el caso de amputados de miembros inferiores).



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL12A45	45 cm	100 cm	65 cm	111 cm	48-57 cm	47-51 cm	46 cm	18,7 kg	150 kg
PL12A48	48 cm	100 cm	68 cm	111 cm	48-57 cm	47-51 cm	46 cm	19,0 kg	150 kg
PL12A51	51 cm	100 cm	71 cm	111 cm	48-57 cm	47-51 cm	46 cm	19,3 kg	150 kg

CANEO – E de Evolution

La estabilidad de una silla ligera y robusta llevada al extremo.



- Ligera, fabricada en aluminio
- Horquilla delantera patentada y de ángulo regulable
- Altura del asiento regulable: 42, 45, 48 y 51 cm
- Fondo del asiento de 41 y 44 cm
- Ángulo del respaldo 3°, ángulo del asiento 3°
- Reposabrazos largos y cortos en la misma silla
- Ruedas de 24" antipinchazos de poliuretano con "quick release"
- Disponible con freno de tambor, también para el acompañante
- Ruedas delanteras de 7" antipinchazos de poliuretano
- Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera



El sistema patentado de la horquilla de la rueda delantera permite graduar de manera muy sencilla la altura del asiento al suelo a 4 diferentes alturas.

Además también hace posible graduar la horquilla de la rueda delantera en 3 diferentes ángulos: -3°, 0°, +3°

Este inteligente diseño consigue una silla muy maniobrable y proporciona a las sillas **CANEO** el más alto nivel de estabilidad a la vez que da gran comodidad durante la marcha al poder adaptar la silla a las características de cada persona en particular.



Peso máximo
hasta 130 kg

DIETZ
REHA-PRODUKTE
MADE IN GERMANY



La rueda trasera viene equipada con "quick release" para desmontar la rueda de forma rápida. La rueda trasera es regulable a 4 diferentes alturas de forma rápida y sencilla para regular la altura del asiento de la silla. El eje de la rueda y con éste, el centro de gravedad de la silla, se puede adelantar o atrasar si conviene. (por ejemplo en el caso de amputados de miembros inferiores)



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL14A39	39 cm	92 cm	59 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	16,4 kg	120 kg
PL14A42	42 cm	92 cm	62 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	16,7 kg	120 kg
PL14A45	45 cm	92 cm	65 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	17,1 kg	120 kg
PL14A48	48 cm	92 cm	68 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	17,8 kg	130 kg
PL14A51	51 cm	92 cm	71 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	18,0 kg	130 kg

CANEO – B de Basic

La silla standard más robusta, (soporta hasta 140 Kg.), y con más estabilidad del mercado.



Peso máximo
hasta 140 kg

- Altura del asiento regulable: 47 y 50 cm
- Ruedas traseras con "quick release".
- Ángulo del respaldo 3°, ángulo del asiento 3°
- Fondo del asiento de 41 y 44 cm
- Reposabrazos largos y cortos en la misma silla
- Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera
- Ruedas de 24" antipinchazos de poliuretano.
- Ruedas delanteras de 7" antipinchazos de poliuretano
- Disponible con freno de tambor, también para el acompañante.

ACCESORIOS disponibles para todas las sillas CANEO:

FRENO DE TAMBOR

El freno de tambor es especialmente práctico cuando se circula con una silla de ruedas por calles con subidas y bajadas y / o con personas con mucho peso, ya que el acompañante tiene el control del freno de la silla en los puños.

El freno de tambor actúa directamente sobre el carrete de la rueda trasera, como frenan algunas motocicletas y es un freno muy efectivo que no depende del estado de la rueda o de lo hinchada que esté.

El diseño inteligente de las sillas CANEO permite graduar la altura de la silla y del freno de tambor de una manera sumamente rápida y sencilla.

Debe especificar si desea su silla con freno de tambor en el momento de pedirla.



410080 REPOSAPIÉS ELEVABLES, DERECHO

410079 REPOSAPIÉS ELEVABLES, IZQUIERDO

410076 REPOSAPIÉS ELEVABLES PARA AMPUTADO, DERECHO

410077 REPOSAPIÉS ELEVABLES PARA AMPUTADO, IZQUIERDO

402101 CINTURÓN DE SEGURIDAD

402584 ANTIVUELCO (PAR)

402206 CUBRE RADIOS TRANSPARENTE (PAR)

400696 AROS DE SILICONA LISOS (PAR)

403048 ALARGADOR DE FRENOS (PAR)



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL15A39	39 cm	90 cm	59 cm	110 cm	50 cm	41-44 cm	40 cm	18,4 kg	130 kg
PL15A42	42 cm	90 cm	62 cm	110 cm	50 cm	41-44 cm	40 cm	18,5 kg	130 kg
PL15A45	45 cm	90 cm	65 cm	110 cm	50 cm	41-44 cm	40 cm	18,8 kg	130 kg
PL15A48	48 cm	90 cm	68 cm	110 cm	50 cm	41-44 cm	40 cm	19,5 kg	140 kg
PL15A51	51 cm	90 cm	71 cm	110 cm	50 cm	41-44 cm	40 cm	19,8 kg	140 kg

PL81 SILLA LIGERA DE ALUMINIO DISCOVERY

Silla de aluminio, muy ligera y de extraordinaria maniobrabilidad. **DISCOVERY** es la silla más versátil y práctica porque se adapta a cualquier situación.



SUPERLIGERA



El freno plegable es una de las últimas mejoras muy remarcable que incorporan solo las sillas de alta gama: se pliega para asegurarse que no molesta (ni tampoco causa ninguna herida) durante las transferencias laterales.

Con sistema de extracción rápida "quick release" se pueden quitar las ruedas grandes en un instante. Al extraer las ruedas grandes de la silla **DISCOVERY** acortamos mucho la silla, más de 20 cm y reducimos sensiblemente el ancho. Al quitar las ruedas grandes quedan en contacto con el suelo unas pequeñas ruedas situadas bajo el asiento que nos permiten ahora maniobrar en espacios antes inaccesibles, como un lavabo, o superar barreras arquitectónicas al pasar a través de una puerta estrecha que antes era infranqueable.

Además, sin las ruedas grandes podemos manejar fácilmente la silla, ahora más pequeña y aún más ligera para transportarla o guardarla, (apenas 11,5 Kg.) por ejemplo en el maletero de un coche pequeño.



Los reposapiés son desmontables y abatibles hacia fuera y hacia adentro, esto último es especialmente práctico en ascensores pequeños, al permitir acortar mucho la silla sin necesidad de extraer los reposapiés. También son graduables en altura para adaptarse a personas de diferentes alturas. Incluso la plataforma de los pies se gradúa en ángulo.

Reposabrazos: con un diseño que permite acercar lo suficiente la silla a las mesas, son además abatibles para posibilitar transferencias laterales.



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso*	peso máximo
PL81A42	42 cm	95 cm	62 cm (57 cm)	105 cm	51 cm	40 cm	45 cm	11,5 kg*	100 kg
PL81A45	45 cm	95 cm	66 cm (61 cm)	105 cm	51 cm	40 cm	45 cm	11,5 kg*	100 kg
PL81A48	48 cm	95 cm	69 cm (64 cm)	105 cm	51 cm	40 cm	45 cm	11,5 kg*	100 kg

* Peso extraídas las ruedas de 600. Con las ruedas de 600 montadas: 15,7 Kg.

PL60 SILLA LIGERA DE ALUMINIO EXPLORER

Fabricada en aluminio, es una silla ligera, pesa solo 12,5 Kg y a la vez resistente. Maniobrable y versátil, se adapta fácilmente a diferentes personas y a diferentes situaciones.

Reposapiés desmontables y graduables en altura, además la plataforma del reposapiés se ajusta también en inclinación. Son abatibles hacia fuera y hacia adentro (característica especialmente práctica en ascensores pequeños). Reposabrazos desmontables para facilitar las transferencias laterales y de diseño que permite acercarse a las mesas.

Disponible en dos medidas.

VER TABLA DE MEDIDAS



SUPERLIGERA

Peso total:
12,5 kg

Ruedas traseras de 12"
(300 mm) poliuretano
antipinchazo



PL80 SILLA LIGERA MINI TRANSFER

Ligera, portátil y compacta

MINI TRANSFER, fabricada en aluminio pesa solo 11 Kg y se pliega fácilmente, también el respaldo es abatible.



Peso total:
11 kg



SUPERLIGERA



De hecho una vez plegada no hay siquiera necesidad de desmontar los reposapiés, quedando tan compacta, que cabe incluso en maleteros pequeños.

Súper estrecha y maniobrable en espacios reducidos, desde 52 cm de ancho total pasa por estrechos pasillos o puertas por donde no pasan sillas convencionales.

Segura y muy práctica para el acompañante que puede accionar los frenos desde los puños cuando empuja la silla.

Tanto las ruedas traseras de 300 mm como las delanteras de 200 mm son antipinchazos.



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL80A41	41 cm	95 cm	52 cm	90 cm	50 cm	41 cm	41 cm	11 kg	100 kg
PL80A45	45 cm	95 cm	57 cm	90 cm	50 cm	41 cm	41 cm	11 kg	100 kg
PL60A41	41 cm	92 cm	56 cm	97 cm	50 cm	40 cm	41 cm	12,5 kg	100 kg
PL60A45	45 cm	92 cm	60 cm	97 cm	50 cm	40 cm	41 cm	12,5 kg	100 kg

PL33 SILLA TRANSIT

Respaldo abatible para reducir aún más sus dimensiones

El respaldo incorpora un amplio bolsillo

Reposapiés de altura graduable

Ruedas traseras macizas de PU antipinchazos de 355 mm ø

Ruedas delanteras macizas de 150 mm ø



SUPERLIGERA
Fabricado en aluminio de aviación



Peso total:
10,3 kg

PL33BOLSA BOLSA DE TRANSPORTE



Práctica bolsa de viaje para la silla de ruedas PL33. Con ruedas y asas

La silla de tránsito más pequeña y más ligera de Europa.
Super estrecha, desde 55 cm, especialmente recomendada para espacios reducidos y para desplazamientos.
Disponible en dos tamaños .
VER TABLA DE MEDIDAS



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL33	40 cm	93 cm	55 cm	90 cm	47 cm	36 cm	47 cm	10,3 kg	90 kg
	45 cm	93 cm	60 cm	90 cm	47 cm	36 cm	47 cm	10,3 kg	90 kg

PL34 SILLA TRANSIT AUTOPROPULSABLE

De idénticas características que el modelo PL33 pero con ruedas de 500 mm ø, que la hace autopropulsable.
Disponible en dos tamaños.
VER TABLA DE MEDIDAS



SUPERLIGERA
Fabricado en aluminio de aviación



Peso total:
11,4kg



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL34	40 cm	93 cm	60 cm	90 cm	47 cm	36 cm	47 cm	11,4 kg	90 kg
	45 cm	93 cm	65 cm	90 cm	47 cm	36 cm	47 cm	11,4 kg	90 kg

PL41 SILLA LIGERA GADES AUTOPROPULSABLE

Con sólo 14,4 kg. de peso es una de las sillas standard más ligeras del mercado. Una gran ayuda tanto para el usuario como para los que lo asisten. Después de incorporar los reposabrazos y reposapiés extraíbles, continúa siendo una silla extremadamente ligera: solo 17,4 kg.

Una silla definitivamente fácil de manejar. A pesar de ser una silla standard incorpora todas las prestaciones que hasta ahora estaban disponibles solamente en las sillas de ruedas de gama y precio superior. Disponible en cuatro tamaños.

VER TABLAS DE MEDIDAS

Tapizado de nylon
de fácil limpieza



Ruedas de 600 mm
de PU antipinchazos

Reposabrazos desmontables
y abatibles montados sobre
la parte trasera del asiento
y no al lado, lo que permite
obtener una silla más estre-
cha: 5 cm menos que otra
silla con el mismo tamaño
de asiento.

KG
14,4 kg
Peso sin
reposabrazos
ni reposapiés

Reposapiés abatibles hacia dentro y
hacia fuera de la silla. Desmontables y
graduables en inclinación y en altura.



Reposabrazos desmontables y abatibles
hacia atrás: permiten las transferencias
laterales sin necesidad de extraerlos.



Reposapiés abatibles (desmontables y
graduables en inclinación) hacia dentro
y hacia fuera de la silla, lo que permite
acortar la silla sin necesidad de desmon-
tarlos para pasar por lugares estrechos y
pequeños que antes resultaban inaccesi-
bles, como ascensores, lavabos, etc...



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL41	40 cm	90 cm	58 cm	105 cm	50 cm	40 cm	43 cm	17,4 kg*	100 kg
	42 cm	90 cm	60 cm	105 cm	50 cm	40 cm	43 cm	17,4 kg*	100 kg
	45 cm	90 cm	62 cm	105 cm	50 cm	40 cm	43 cm	17,4 kg*	100 kg
	48 cm	90 cm	66 cm	105 cm	50 cm	40 cm	43 cm	17,4 kg*	100 kg

* Incluye reposapiés y reposabrazos

www.ayudasdinamicas.com

ACCESORIOS

PL7800 ASIENTO
INODORO

Incorpora una cubeta.



**REPOSAPIÉS
ELEVABLES**



Se ajustan a cualquier posición hasta los 90°, con reposapiernas acolchado que se regula en tres posiciones diferentes. Para sillas fijas y plegables

PL40 SILLA LIGERA GADES CON RUEDAS DE 300 mm

Con solo 12,40 kg de peso es la silla standard mas ligera del mercado. Después de incorporar los reposabrazos y reposapiés extraíbles y de aluminio continúa siendo una silla muy liviana: sólo 15,40 kg. Muy fácil de maniobrar o manejar. Disponible en tres tamaños. VER TABLA DE MEDIDAS

Tapizado de nylon
de fácil limpieza

Reposabrazos desmontables y abatibles montados sobre la parte trasera del asiento y no al lado, lo que permite obtener una silla más estrecha: 5 cm menos que otra silla con el mismo tamaño de asiento.



12,4 kg
Peso sin
reposabrazos
ni reposapiés



Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera de la silla. Desmontables y graduables en inclinación y en altura.

Ruedas de PU
antipinchazos
de 300 mm ø



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL40	40 cm	90 cm	57 cm	92 cm	50 cm	40 cm	43 cm	15,4 kg*	100 kg
	42 cm	90 cm	59 cm	92 cm	50 cm	40 cm	43 cm	15,4 kg*	100 kg
	44 cm	90 cm	61 cm	92 cm	50 cm	40 cm	43 cm	15,4 kg*	100 kg

* Incluye reposapiés y reposabrazos

PL30 SILLA DE RUEDAS PLEGABLE

Adecuada para personas con problemas para autopropulsarse, e ideal para maniobrar en pequeños espacios.
Tapicería lavable de nylon.
Disponible en tres tamaños.
Ver accesorios de la página 125.
VER TABLA DE MEDIDA



PL31 SILLA AUTOPROPULSABLE PLEGABLE

Fabricada en acero y cromada, es una silla económica y de gran resistencia ideal para instituciones.
Disponible en tres medidas
ver accesorios de la página 125.
VER TABLA DE MEDIDAS



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL30	40 cm	91 cm	57 cm	98 cm	50 cm	40 cm	40 cm	17 kg	100 kg
	42 cm	91 cm	59 cm	98 cm	50 cm	40 cm	40 cm	17 kg	100 kg
	45 cm	91 cm	63 cm	98 cm	50 cm	40 cm	40 cm	17 kg	100 kg
PL31	40 cm	91 cm	60 cm	104 cm	50 cm	40 cm	40 cm	21 kg	100 kg
	42 cm	91 cm	62 cm	104 cm	50 cm	40 cm	40 cm	21 kg	100 kg
	45 cm	91 cm	66 cm	104 cm	50 cm	40 cm	40 cm	21 kg	100 kg

TSU SILLA INODORO RESIDENT

Silla inodoro con ruedas. Fabricada en acero cromado es una silla muy duradera y resistente al uso intensivo. Ampliamente utilizada en instituciones y residencias.

Una silla versátil que se puede colocar directamente sobre el inodoro del WC o utilizar la cubeta / orinal con tapa que lleva incorporada para utilizarla en otro lugar.

Los reposabrazos son abatibles para facilitar la transferencia lateral, por ejemplo desde la cama. Reposapiés desmontables y graduables en altura. Lleva 4 ruedas de 125 mm, dos de ellas con freno.
VER TABLA DE MEDIDAS



TS5 SILLA DE INTERIOR RECLINABLE

Silla de ruedas fija con respaldo reclinable. Estructura de acero cromado de alta resistencia. Tapizado anatómico. VER TABLA DE MEDIDAS



Respaldo reclinable en diferentes posiciones hasta 160°.

OPCIONAL

- Reposapiés elevable
- Respaldo alto



Ruedas de 125 mm Ø, las traseras con freno



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
TSU	46 cm	96 cm	56 cm	83 cm	50 cm	42 cm	43 cm	14,2 kg	120 kg
TS5	43 cm	100 cm	54 cm	91 cm	50 cm	45 cm	52 cm	19 kg	100 kg

AD827/12 SILLA BASCULANTE DE RELAX SERENA 300

De similares características que la **SILLA BASCULANTE DE RELAX SERENA** aunque en este caso destinada a usuarios que no pueden autopropulsarse en sus desplazamientos sino que precisan siempre de asistencia. Sus ruedas traseras de 300 mm. de diámetro hacen de **SERENA 300** una silla muy maniobrable aun en espacios reducidos y mas compacta que la versión con grandes ruedas. VER TABLA DE MEDIDAS

Características principales y equipamiento de serie:

- Asiento basculante.
- Respaldo reclinable y graduable en altura.
- Asiento regulable en profundidad y en anchura.
- Reposacabezas regulable.
- Reposabrazos extraíbles, regulables en altura y largo.
- Reposapiés elevables.
- Antivuelco.
- Frenos de tambor en las ruedas traseras.



Sistema de basculación regulado por el acompañante



Soportes laterales opcionales.
Ref. A827/2



Abductor opcional.
Ref. A827/1

AD827/C CHASIS SERENA 300

Cuando es necesario hacer un asiento ortopédico para un paciente con necesidades de sedestación y de soporte especiales, contamos con este chasis basculante.

Al igual que todas las sillas **SERENA** lleva pistones hidráulicos independientes para bascular la silla.

Las ruedas traseras de 300 mm de diámetro tienen frenos de tambor con posición de parking para mayor seguridad, que se accionan desde la posición del cuidador. Se suministra sin reposabrazos, aunque están disponibles como opción.

Opción cabezales ver pág. 142 y 143



Compacto y ligero, el chasis plegado es fácil de transportar

AD827 SILLA BASCULANTE DE RELAX SERENA

La comodidad, la adopción de una buena postura, el alivio de las presiones y la ergonomía han tenido el papel protagonista durante el desarrollo de esta magnífica silla. La silla bascula para adoptar la postura más propicia para un buen descanso y también aliviar las presiones lo que previene la aparición de úlceras por presión. Si se desea, la silla reclina el respaldo independientemente del asiento y sin necesidad de bascular toda la silla. Estos movimientos en combinación con los cómodos reposapiernas elevables hacen de la silla **BASCULANTE RELAX SERENA** la mejor opción para personas que pasan largos periodos de tiempo sentados.

Los cuidadores obtienen beneficios de una silla diseñada también pensando en ellos: La silla bascula sin esfuerzo, independientemente del peso del usuario, mediante un pistón de aire.



La silla bascula para adoptar la postura más adecuada



Asiento regulable en anchura y también en profundidad.

El respaldo se reclina y se incorpora sin esfuerzo también mediante un pistón de aire. La barra posterior para empujar la silla es de altura regulable para adaptarse a la postura mas cómoda para el cuidador y aloja los mandos para reclinar el respaldo o bascular la silla. Ángulo de inclinación del asiento es de -8 a +30 °. Ángulo de inclinación del respaldo es de -9 a +30 °. La silla **BASCULANTE RELAX SERENA** se adapta fácilmente a cualquier persona. VER TABLA DE MEDIDAS



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máx.
AD827	40-43-45 cm	114 a 126 cm	64 cm	131 cm	53 cm	41 a 50,5 cm	53 a 58 cm	45 kg	130 kg
AD827/12	40-43-45 cm	115 a 127 cm	61,5 cm	122 cm	55 cm	41 a 50,5 cm	53 a 58 cm	45 kg	130 kg
AD827/C	41 cm	115 a 127 cm	61,5 cm	90 cm	48 cm	41 a 50,5 cm	53 a 58 cm	20 kg	130 kg

AD824 SILLA DE TRÁNSITO COMPACT

Esta silla está fabricada con una aleación especial de aluminio y es extraordinariamente ligera, sólo 8,9 kilos. Es de gran utilidad para el transporte de personas con movilidad reducida temporalmente o para ancianos. De diseño súper compacto, se pliega en pocos segundos y queda reducida a un tamaño fácil de guardar. Muy confortable gracias a su asiento acolchado y a sus reposabrazos abatibles. VER TABLA DE MEDIDAS



PL20 SILLA SUPERESTERCHA DE ASCENSOR

Esta silla es extraordinariamente estrecha (solo 50 cm.) para poder acceder por puertas y pasos normalmente vetados para las sillas convencionales. Silla plegable, con reposabrazos y reposapiés desmontables. Ruedas traseras autopropulsables de 500 mm ø montadas por debajo del asiento para reducir el ancho total de la silla. VER TABLA DE MEDIDAS



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
AD824	40 cm	94 cm	60 cm	93 cm	52 cm	38 cm	50 cm	8,9 kg	100 kg
PL20	40 cm	96 cm	50 cm	98 cm	56 cm	40 cm	38 cm	17,5 kg	100 kg

AD823

SILLA PARA EVACUACIONES
AMBULANCE CHAIR

Nuevo diseño de la conocida **AMBULANCE CHAIR**, muy utilizada para evacuar personas en casos de emergencia o por lugares estrechos o de difícil acceso, por ejemplo pisos sin ascensor. Por seguridad debe ser atendida en todo momento por dos personas, una delante y otra detrás de la silla, para lo que cuenta con asideras.

Se suministra con cinturón.

Se pliega cuando esta fuera de uso ocupando un mínimo de espacio. VER TABLA DE MEDIDAS



AD825

SILLA PARA EVACUACIONES
ROLL-OVER

Silla para evacuar personas en caso de emergencia o cuando hay necesidad de trasladar personas por lugares estrechos o de difícil acceso, como por ejemplo de pisos sin ascensor. Para facilitar los traslados y en especial cuando hay bordillos o escalones, la silla viene equipada con ruedas traseras triples y giratorias. Por seguridad debe ser atendida en todo momento por dos personas. Los brazos se abaten simultáneamente.

Suministrada con cinturón.

VER TABLA DE MEDIDAS



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
AD823	35 cm	90 cm	52 cm	87 cm	49 cm	25,5 cm	32 cm	7,5 kg	100 kg
AD825	44 cm	96,5 cm	58 cm	77 cm	47,5 cm	43 cm	33,5 cm	13,5 kg	100 kg

AD800 SILLA BASCULANTE SENIOR

La comodidad ha sido la primera condición a la hora de fabricar esta butaca basculante. Un agradable acolchado, que además es de muy fácil limpieza, reposapiernas elevables, reposacabezas y asiento reclinable con un pistón de aire lo hacen ideal para proporcionar confort y descanso. Seguro y funcional: para sentarse y levantarse con facilidad, el sillón bascula hacia adelante y la plataforma del reposapiés se apoya en el suelo. Diseño compacto y fácil de maniobrar en espacios reducidos y desplazar en interiores, equipado con 5 ruedas, 4 de ellas con freno autoblocante. VER TABLA DE MEDIDAS



Reposacabezas y asiento reclinables con un pistón de aire
Mesita opcional ref. A800/1 No incluida



AD811 SILLA BASCULANTE SIESTA

Independencia y confort en el hogar, el sillón se reclina o incorpora fácilmente solo agarrando los aros junto a los reposabrazos. Sin esfuerzo, un ingenioso sistema de muelles que precisan apenas un mínimo esfuerzo.

Las piernas se elevan automáticamente cuando el usuario se reclina y vuelve a su posición original cuando éste se incorpora. De similares características que el modelo AD800 aunque diseñado especialmente para el hogar y para personas independientes. Las prácticas ruedas para desplazar el sillón quedan discretamente disimuladas bajo un embellecedor cuando no se precisan. VER TABLA DE MEDIDAS



modelo	ancho asiento	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
AD800	44 cm	67 cm	98 cm	50-47-44 cm	44 cm	80 cm	25 kg	130 kg
AD811	44 cm	95 cm	98 cm	47-51 cm	44 cm	80 cm	28 kg	130 kg

CINTURONES PARA SILLA

Cinturones de colocación sencilla y rápida. Una banda acolchada sujeta al paciente por la cintura y se abrocha por detrás de la silla con una hebilla de plástico de accionamiento rápido y con velcro. Permiten libertad de movimientos en las extremidades y en el tórax. Indicado para personas con tendencia a deslizarse hacia delante en la silla y evitar caídas.

Existen diferentes opciones para distintas necesidades.

VER CUADRO DE REFERENCIAS



Se abrochan con hebillas de plástico de accionamiento rápido

H3500 CINTURÓN ABDOMINAL




H3501 CINTURÓN ABDOMINAL CON SOPORTE PERINEAL



H3502 CHALECO ABDOMINAL CON TIRANTES



H3503 CHALECO ABDOMINAL CON SOPORTE PERINEAL Y TIRANTES

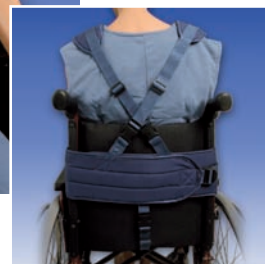

modelo	cinturon abdominal	sopORTE perineal	tirantes
H3500	SI	NO	NO
H3501	SI	SI	NO
H3502	SI	NO	SI
H3503	SI	SI	SI



**“No hay nada malo en el tiempo,
sino en la manera en que vas vestido ”**

La firma sueca ETAC ha implicado a la famosa y reconocida firma escandinava de ropa técnica y deportiva Helly Hansen en el diseño y posterior desarrollo de una gama de ropa exclusiva para usuarios de silla de ruedas.

Aquí enseñamos solo una muestra, el saco termal protector, la más común, por necesaria y versátil de estas prendas. Si este es un tema de su interés, será un placer facilitarle información detallada sobre la ropa de Helly Hansen para ETAC.

SACO TERMAL PROTECTOR PROOF

Ahora se puede estar cómodo y caliente al aire libre, incluso en días lluviosos y fríos. Fabricado con el tejido técnico Helly Tech, las prendas transpiran a la vez que mantienen caliente. Disponible para niños, jóvenes y adultos.



Su diseño tuvo especial cuidado en varios puntos importantes en este tipo de prendas:

- Es muy fácil de poner y quitar.
- No roza con las ruedas.
- El frontal se puede desmontar.
- Reforzado bajo y sobre los pies.
- Con reflectores cosidos es claramente visible en la oscuridad.
- Previsto para abductor y cinturones.



modelo	talla	altura persona
H1370	niños 6-7 años	116-122 cm
H1371	niños 8-11 años	128-146 cm
H1372	XS	163-175 cm
H1373	S	175-181 cm
H1374	M	181-187 cm
H1375	L	187-193 cm
H1376	XL	193-199 cm

H8674 CHUBASQUERO CON MANGAS

Práctico y cómodo impermeable con capucha ajustable y mangas que se pueden ajustar con velcro. Permite impulsar la silla cubriendo además las piernas con un ajuste rápido elástico en los reposapiés de la silla. Bolsillo interior. Nylon 100%. Talla única.



H8680 CAPA

Práctico impermeable de nylon 100% con capucha ajustable. Lleva unos ojales en la parte trasera especialmente diseñados para sacar los puños de la silla y poder empujarla. Se ajusta fácilmente, con un elástico, en los reposapiés de la silla de ruedas. Talla única.



ACOLCHADO INVERNAL

Disponible en los modelos H8674LUX y H8680LUX



H8690 CHUBASQUERO SILLAS ELECTRÓNICAS

Especialmente diseñado para los usuarios de sillas de ruedas electrónicas. Tiene un panel transparente para poder ver los mandos de la silla eléctrica. Tiene unas ranuras con velcro para sacar las manos (a izquierda y derecha). Nylon 100%. Talla única.



H8674LUX CHUBASQUERO ACOLCHADO

De iguales características que el chubasquero con mangas H8674 pero con un atractivo acolchado textil interior para mantenerse caliente durante los meses de invierno.

H8680LUX CAPA ACOLCHADA

De iguales características que el chubasquero capa sin mangas H8680 pero con un atractivo acolchado textil interior para mantenerse caliente durante los meses de invierno.

MBS-1 BOLSA LOGIC



Case Logic ha desarrollado para la firma sueca ETAC unas bolsas prácticas y resistentes pensadas para usuarios de sillas de ruedas. Un diseño moderno y funcional llevado al detalle, por ejemplo las cremalleras son fáciles de encontrar y de abrir incluso para personas con una movilidad muy limitada en las manos.



MAO-1 BOLSA POLIVALENTE SIDE PACK

Diseño actual de la prestigiosa firma Case Logic, **SIDE PACK** es una bolsa para facilitar la vida de la gente activa y organizada. Se coloca fácilmente en el reposabrazos de una silla, y también se puede colocar debajo del asiento de la silla de ruedas para llevar objetos de forma discreta y segura.



Peso total: 400 gr

MLO-1 BOLSA BLACK PACK



Diseñada por Case Logic para personas dinámicas y activas. La cinta de ajuste se puede regular de 35 a 56 cm de largo. Fondo: 2 cm.



Peso total:
200 gr



H8615 BOLSA SECURITY

Bolsita imitación piel, ideal para tener a mano pequeños objetos. Conveniente y discreta por seguridad. Unas cinchas ajustables permiten ponerla bajo la silla de ruedas. Suministrada en color negro.



H8633 BOLSA BAJO ASIENTO

Esta ingeniosa bolsa proporciona un práctico compartimiento debajo del asiento de la silla de ruedas. Queda fácilmente asegurada a la silla y de un modo simple se desmonta para su transporte. Esta bolsa es una alternativa más segura que otras bolsas para sillas de ruedas.

Su posición no afecta al centro de gravedad de la silla.



H8630 BOLSA AUXILIAR

Práctica bolsa impermeable. Se puede colgar de los puños en la parte trasera de la silla de ruedas y también tiene unas asas largas para llevarse la.

Con cremallera y alojamientos laterales.

Tiene 2 bandas reflectantes para la seguridad vial.



H8620 BOLSA SCOOTER

Amplia y resistente, esta bolsa está especialmente pensada y fabricada para scooters y se adapta de manera firme y segura al asiento, con o sin cabezal. Color: negro.



H8640 BOLSA DE LUXE

Fuerte, muy resistente y espaciosa bolsa para scooters o silla de ruedas.

Muy práctica, que incorpora dos alojamientos laterales para las muletas o bastones.

Se suministra en color negro.



H8700 PARASOL PARA SILLA

Parasol de 51 cm de diámetro que protege del sol. Se ajusta fácilmente a los puños de la silla de ruedas con un anclaje rápido en el que va montado un mástil flexible para orientar el parasol a voluntad.



AD812 MESITA TRANSPARENTE

Bandeja de regazo de plástico transparente que proporciona excelente visibilidad de las extremidades inferiores. Se adapta a la mayoría de sillas de ancho exterior de 47 a 56 cm, siempre que tengan reposabrazos largos. Diseño ergonómico envolvente, con pestaña frontal.



H8755 PARASOL PROFIT

Protección contra el sol y la lluvia, que permite mantener ambas manos en el rolator. Resistente al viento. Paraguas de apertura automática y de dimensiones generosas, 105 cm de diámetro. Altura graduable y montado en un mango que se inclina y se ajusta solo apretando un botón. Viene preparado para montarse en tubo de 22 mm y se suministra con anclajes para tubos de diferentes diámetros: 18, 20 y 25 mm. También se puede instalar en sillas de ruedas.



H8610 TENSOR PARA RESPALDO


Muchos tapizados de silla de ruedas ceden en exceso con el uso y este tensor proporciona mayor soporte y confort a la espalda. Se instala y desmonta fácilmente girando la barra. Graduable en anchura de 34 a 53 cm.



H4110 POSICIONADOR DE BRAZO PARA SILLA

Mantiene el brazo dentro del soporte.

Elemento de soporte que se adapta a la curva natural de la pierna.

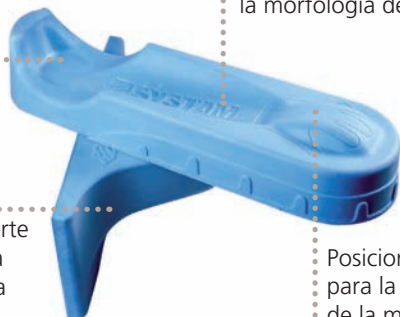

Forma curva que se adapta a la morfología del antebrazo.

Posicionador para la palma de la mano.

Posicionador fabricado en espuma viscoelástica con inserto rígido. Funda de poliuretano. La cómoda espuma viscoelástica y las formas curvas, que se adaptan a la posición natural del brazo, de la mano, y en especial el ángulo natural del codo y de la muñeca proporcionan gran confort al paciente.

Un nuevo concepto totalmente independiente de la silla de ruedas.

- Fácil y rápida instalación y regulación, sin herramientas.
- Se adapta a los cambios de postura del paciente.
- Se puede utilizar en cualquier tipo de silla de ruedas o asiento.
- Se adapta a todas las tallas y morfologías del paciente.
- Facilita las transferencias.
- Válido para derecha o izquierda.
- Impermeable y fácil de limpiar.



H3980 ACOLCHADO COMPLETO PARA SILLA

Asiento acolchado con fibra que además de proporcionar gran comodidad, cubre el asiento, el respaldo y los brazos de la silla para aliviar las presiones y prevenir la aparición de ulceraciones. Talla única.



Se adapta a los cambios de postura del paciente.

H4255 ABDUCTOR SYSTEM

Cuña abductora de formas curvadas y dimensiones cuidadosamente estudiadas para usarlo en la silla de ruedas. De tacto blando y fácil de instalar, suministrado con funda impermeable y cincha de ajuste rápido.



H4300 ABDUCTOR SILLA

Separador de rodillas. Cómodamente separa las piernas 10 cm. Las cinchas tienen 117 cm de largo.



PORTA BASTONES

Se acoplan a tubos de 22 a 25 mm silla de ruedas para llevar un bastón o muleta. Suministrados con cinta para sujetar el bastón por arriba.

H7611

Para un solo bastón o muleta.



H7622

Para un par de bastones o muletas.



402101 CINTURÓN DE SEGURIDAD



Accesorio para silla de ruedas. Se adapta a la mayoría de sillas de ruedas.



H8660 CESTITA PARA LA COMPRA

Accesorio para silla de ruedas que se cuelga en el respaldo de la silla para llevar objetos.



Accesorios para llevar colgado sueros o medicaciones o para llevar colgada una bombona de oxígeno. Se instalan fácilmente en la mayoría de sillas de ruedas.

H7400 PORTASUERO



H7550 PORTA OXÍGENO



H7600 ALARGADOR DE FRENO

Accesorio para silla de ruedas. Para alcanzar los frenos mas fácilmente cuando la palanca de frenos standard es demasiado corta.



SISTEMAS DE FIJACIÓN DE CABEZALES DE POLIURETANO

HA.KO.ALU SISTEMA DE FIJACIÓN PARA LOS PUÑOS


Sistema regulable de soporte para cabezal blando de PU.

Fabricado en aluminio de alta calidad.


Se fija a los puños del respaldo de la silla de tubos de 22 y 25 mm de diámetro.



Cabezal no incluido.

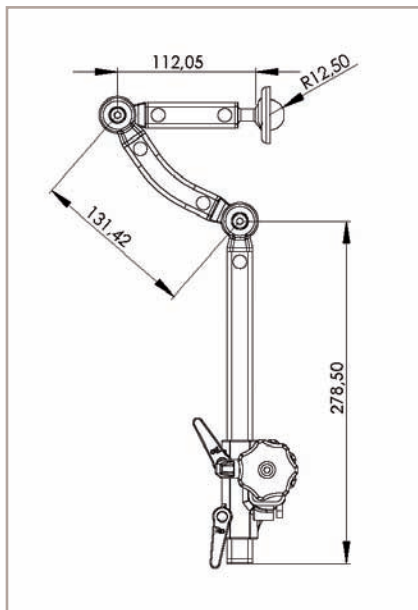

Fijación de puños

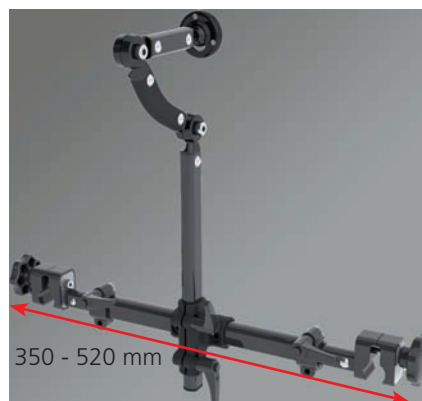

HA.KO.ALU.R SISTEMA DE FIJACIÓN PARA EL RESPALDO



Sistema regulable de soporte para cabezal blando de PU.

Fabricado en aluminio de alta calidad, se fija al respaldo de la silla con una pletina de aluminio de 8 orificios.

Cabezal no incluido.



Regulación máxima de altura: 350 mm.

PLCAB REPOSACABEZAS PLEGABLE

Reposacabezas para silla plegable.

Se monta fácilmente sobre una silla de ruedas y se pliega cuando plegamos la silla sin necesidad de desmontarlo.



Sólo apto para sillas con el tubo de los puños de 22 mm Ø.





CABEZALES BLANDOS DE POLIURETANO

Cabezales fabricados en poliuretano blando con alojamiento en la parte posterior para poderlos montar en los sistemas de fijación mostrados en la página anterior.



CB11

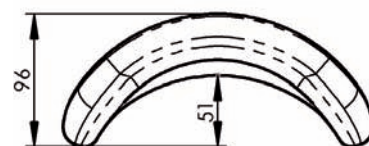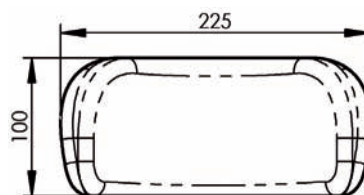



CB22

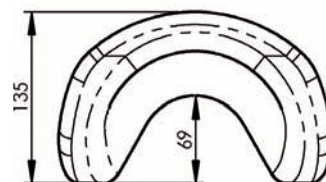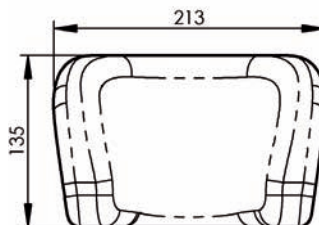

CB33

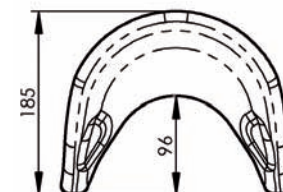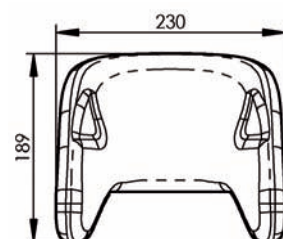

CB44

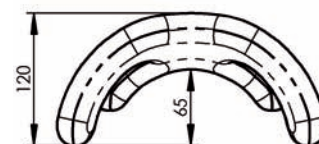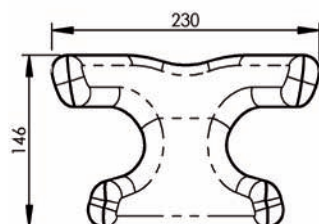

RUEDA OUTDOOR



La rueda completa más resistente para los más activos. Aro de aluminio. Cubierta Landcruiser negra todo terreno que no deja marca.

CUBIERTAS LAND CRUISER

Cubierta todoterreno, con una buena adherencia y muy resistente, gracias a la banda de rodamiento cross que distingue a esta cubierta.



PP620 **RUEDA OUTDOOR**
24 x 1.90" hinchable

P617 **CUBIERTAS TODOTERRENO**
LAND CRUISER 24 x 1,90"

PP601 **RUEDA MACIZA**
24 x 1-3/8" poliuretano

PP602 **RUEDA HINCHABLE**
24 x 1-3/8" neumática



RUEDA NEW YORK



Moderna rueda de 24 radios, llanta ligera de doble pared con neumático de alta presión. Aro de aluminio. Cubierta maratón plus negra que no deja marca.

CUBIERTAS MARATON PLUS

Los pinchazos son cosas del pasado.

Combina la comodidad y la rapidez de las cubiertas hinchables con la seguridad de las cubiertas macizas de PU. La versión negra tiene una mayor duración respecto a la de color gris y el compuesto único Black'n Roll no deja marcas negras en el suelo.



PP640 **RUEDA NEW YORK**
24 x 1" hinchable

P615R **CUBIERTAS NEUMÁTICAS**
ANTIPINCHAZOS
MARATON PLUS de SWALBE 24 x 1"

CUBIERTA

modelo	descripción
P611	24 x 1-3/8" normal
P615	24 x 1" estrecha
P615R	MARATON PLUS

CÁMARAS

modelo	descripción
P610	24 x 1-3/8" válvula recta
P614	24 x 1" válvula recta

RUEDAS DE POLIURETANO, llanta de plástico.



PP100

PP150/PP160/PP170

modelo	descripción
PP100	rueda, 72 x 24
PP150	rueda de poliuretano, 72 x 24
PP160	rueda de poliuretano, 100 x 24
PP170	rueda de poliuretano, 125 x 24

RUEDAS DE POLIURETANO, iluminadas con LED, llanta de plástico.



PP180

PP190

modelo	descripción
PP180	rueda de poliuretano, 100 x 24. Iluminada con led
PP190	rueda de poliuretano, 125 x 24. Iluminada con led

RUEDAS DE DISEÑO BLACK IN BLACK

Con llantas de aluminio y cubiertas negras



no dejan rastro...
no marcan.

LLANTA DE ALUMINIO



No dejan rastro...no marcan.
Moderno diseño de ruedas con llanta de aluminio y cubierta negra que no deja rastro, que no marcan el suelo. Disponible con cubiertas de poliuretano blando o con goma.

modelo	descripción
PP210	100 x 24 goma
PP220	125 x 24 goma
PP230	100 x 32 poliuretano
PP240	125 x 32 poliuretano

LLANTA DE ALUMINIO NEGRO



No dejan rastro...no marcan.
Moderno diseño de ruedas con llanta de aluminio y cubierta de goma negra que no deja rastro, que no marcan el suelo.

modelo	descripción
PP250	100 x 24 goma
PP260	125 x 24 goma

PP615 12½ x 2¼" (315 mm)

PP616



Diámetro de 315 mm

RUEDAS

modelo	descripción
PP615	hinchable
PP616	maciza

CÁMARAS

modelo	descripción
P630	válvula recta
P630L	válvula 90/90º

CUBIERTAS

modelo	descripción
P633	perfil grueso

PP507 140 x 140 mm



RUEDAS

modelo	descripción
PP507	maciza

PP501 200 x 32 mm



RUEDAS

modelo	descripción
PP501	maciza
PP505	hinchable

CÁMARAS

modelo	descripción
P511	válvula 90/45º
P511L	válvula 30/90º

CUBIERTAS

modelo	descripción
P512	normal

PP503 180 x 50 mm



RUEDAS

modelo	descripción
PP503	hinchable llanta negra

CÁMARAS

modelo	descripción
P517	válvula 90/90º
P517L	válvula 30/90º

CUBIERTAS

modelo	descripción
P518	normal

PP502 200 x 50 mm



RUEDAS

modelo	descripción
PP500	maciza
PP502	hinchable

CÁMARAS

modelo	descripción
P505	válvula 90/90º
P505L	válvula 30/90º

CUBIERTAS

modelo	descripción
P506	normal

PP504 150 x 32 mm

PP506



RUEDAS

modelo	descripción
PP506	maciza
PP504	hinchable

CÁMARAS

modelo	descripción
P515	válvula 90/35º

CUBIERTAS

modelo	descripción
P516	normal

No dejan rastro... no marcan.

PP110 100 x 32 mm



RUEDAS

modelo	descripción
PP110	rueda de 100 x 32 mm

PP120 125 x 32 mm



RUEDAS

modelo	descripción
PP120	rueda de 125 x 32 mm

PP130 125 x 40 mm

PP140 140 x 40 mm



RUEDAS

modelo	descripción
PP130	rueda de 125 x 40 mm
PP140	rueda de 140 x 40 mm

PP508 125 x 37 mm



RUEDAS

modelo	descripción
PP508	maciza

PP509 100 x 32 mm



RUEDAS

modelo	descripción
PP509	maciza

PP510 125 x 40 mm



RUEDAS

modelo	descripción
PP510	maciza

H8865 DISCO GIRATORIO EASYTURN




Diámetro: 40 cm

Aunque su diseño original es para utilizarlo en el coche, puede ser muy útil como disco giratorio de ayuda para movilizar pacientes de forma segura, por ejemplo para entrar o salir de la cama. La base es de un material antideslizante para que no se desplace involuntariamente y está acolchado. En su interior hay dos discos de nylon encarados que reducen la fricción al mínimo y hacen girar el disco con el mínimo esfuerzo. Lavable a 40°.



H8800 TRANSFER FLEXIBLE

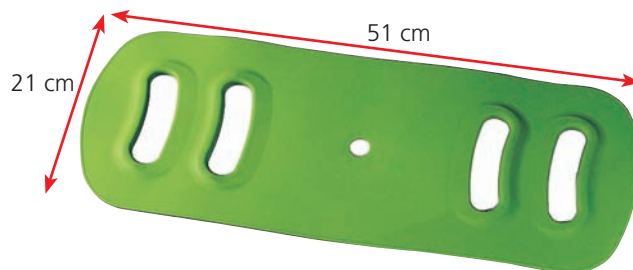


Cabestrillo flexible de gran ayuda para los asistentes al transferir y volver a colocar pacientes. Permite sujetarlos por detrás o por debajo según la situación, y ya se trate de uno o dos asistentes. Reduce considerablemente el esfuerzo y aumenta la seguridad de las transferencias.



Peso total:
400 gr




Peso máximo:
110 kg

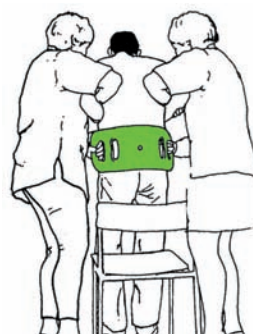

H21100 ALCANZA CINTURÓN EASY REACH

La solución inteligente que proporciona la manera más fácil de llegar al cinturón de seguridad del coche cuando este nos queda demasiado lejos. Dispositivo de una sola pieza, flexible y ligero, además de fosforescente en la oscuridad. A pesar de ser muy práctico para cualquier persona, las personas de menor talla o con problemas de movilidad en los brazos o la espalda son las que más agradecen este práctico y económico dispositivo.

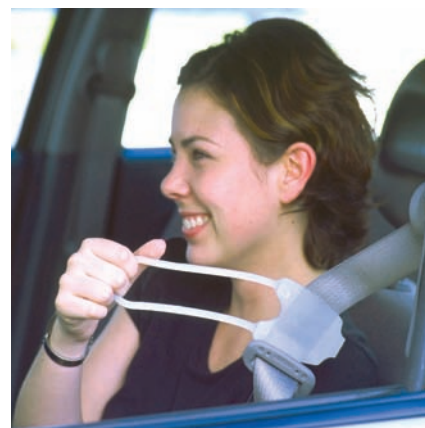

H8864LUX DISCO GIRATORIO PROFESIONAL PEDITURN

PEDITURN es un disco giratorio blando recomendado para uso profesional, que gira fácilmente sin apenas fricción para reducir el stress en las rodillas y los tobillos durante las transferencias, por ejemplo, de la silla a la cama, tal como muestran las fotos.



Peso máximo:
150 kg



Diámetro: 40 cm.



H8805 CINTURÓN PARA MOVILIZAR

El cinturón universal está diseñado para facilitar el trabajo de los cuidadores cuando movilizan a un paciente, en especial en los desplazamientos a domicilio. Un solo cinturón se adapta a cinturas desde 50 cm hasta 145 cm por lo que los cuidadores, en sus desplazamientos no necesitan llevar varios cinturones de diferentes tallas. Para las tallas más grandes simplemente hay que suplementar el cinturón para movilizar con la extensión incluida.



H8864 DISCO GIRATORIO ECONÓMICO

Ligero y resistente, gira 360° con facilidad.



Peso máximo:
125 kg



Diámetro: 40 cm.

H8900 TRANSFER PROFESIONAL 2 MOVE



Tabla especialmente diseñada para facilitar las transferencias horizontales de pacientes, por ejemplo, de cama a camilla, a una mesa de operaciones, a mesa de rayos X, a carro de lavado, y multitud de aplicaciones.



Usando la tabla 2 MOVE se reduce la fricción a la mínima expresión facilitando mucho cualquier movilización. Es fácil de llevar o guardar, se pliega por la mitad y tiene asa.

H8902R ROLLO DE MATERIAL ESPECIAL DESLIZANTE DE UN SOLO USO PARA TRANSFER 2 MOVE

Disponible rollo de material especial deslizante, 75 unidades de un solo uso, para el control anti- bacterias y evitar el contagio de infecciones.



H8820 AYUDA TRANSFERENCIA TURNER

Un alivio para la espalda del cuidador y una práctica ayuda para transferir mediante giros a pacientes con seguridad.

TURNER es una herramienta esencial para la prevención de caídas y fácil de utilizar para los cuidadores.

Cómodo de transportar gracias a sus ruedas. Es además desmontable y fácil de guardar. TURNER está concebido para transferencias mediante giro de una posición de sentado a otra de sentado también. Por ejemplo de la cama a una silla de ruedas. El paciente tiene control de sus movimientos y esto le da tranquilidad y seguridad. Por su parte el cuidador mantiene una postura más ergonómica y puede trabajar de manera correcta, además mantiene en todo momento el contacto visual con el paciente. TURNER reduce el riesgo de caídas.



Advertencia:

Es imprescindible que el usuario tenga la estabilidad suficiente en las piernas y la fuerza para levantarse para utilizar el TURNER.



Peso máximo:
150 kg

etac



H8810 TABLA DE TRANSFERENCIA E-BOARD

Una tabla ligera a la vez que muy resistente, fácil de transportar y fácil de usar. La superficie es suave y es muy fácil deslizarse sobre ella, mientras que el reverso, la base, es antideslizante para que no se resbale del sitio. Los flaps flexibles a los lados son de gran ayuda, doblado el posterior hacia arriba y hacia a bajo el delantero, facilitan colocar la tabla delante de las ruedas de una silla de ruedas protegiendo la piel de las mismas y por delante facilitan el deslizamiento.

Doblado hacia arriba para posicionar la tabla delante de las ruedas de la silla de ruedas.



Doblado hacia abajo para más confort

H8830 TABLA DE TRANSFERENCIA E-BOARD MINI

La tabla preferida de las personas activas y dinámicas, por lo fácil que es llevarla en sus desplazamientos. Cabe en cualquier bolsa, en cualquier sitio y está siempre a mano cuando se precisa hacer una transferencia con seguridad y sobre todo evitando dañarse la piel. La superficie es suave y es muy fácil deslizarse sobre ella, mientras que el reverso, la base, es antideslizante para que no se resbale del sitio.



H9971 SÁBANA SUPERDESILIZANTE

Ideal para movilizar pacientes gracias a su forma de tubo y al material especial que ofrece una bajísima fricción. Reduce también la fricción en la piel del paciente y el esfuerzo del cuidador al mínimo. Medidas: 120 x 71 cm.



Antes de usar cualquier material para movilizar y manejar pacientes es esencial estar familiarizado con el equipo que debería ser utilizado solo por personal cualificado.

H8840 TABLA DE TRANSFERENCIA TRES B

Tabla de forma curvada utilizada para una gran variedad de situaciones, en la cama, la silla de ruedas, el baño, el coche, etc. Su silueta curvada y la superficie deslizante permiten y facilitan las transferencias, con o sin la ayuda de una asistente, dependiendo de la fuerza en los brazos y del equilibrio de la persona.




TABLAS DE TRANSFERENCIA CON DISCO GIRATORIO

Este producto innovador incorpora un asiento giratorio integrado en la tabla que se desplaza sobre la tabla rígida. Esto reduce la fricción a la mínima expresión ya que el asiento se desplaza con el usuario. El usuario se desliza literalmente sobre el asiento giratorio, que gira 360°, lo que significa que es muy fácil de usar y extremadamente práctico. Fabricado en un material plástico excepcionalmente resistente, y a la vez ligero y fácil de transportar, por lo que se puede utilizar con personas de hasta 180 Kg.

H1100 TABLA TRANS

Tabla especialmente larga. Ideal para entrar y salir del coche, además de para otras transferencias más habituales del día a día en las que una tabla es de gran ayuda.

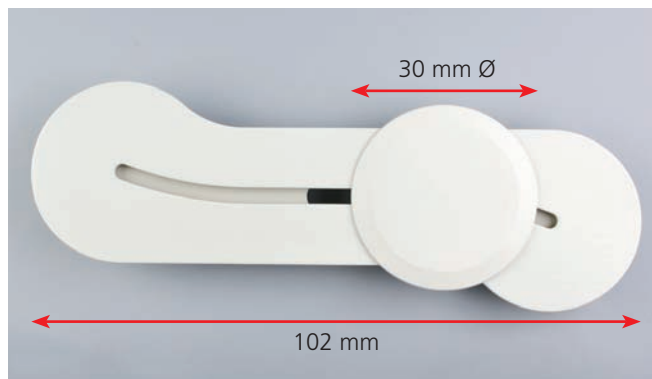

H1100 BOLSA BOLSA TABLA TRANS




Peso total:
2,9 kg



Peso máximo:
180 kg

H1300 TABLA GLYDER

Tabla sumamente práctica y versátil para diferentes situaciones, si bien por su forma y diseño es especialmente apropiada para superar los brazos de sillas de ruedas y obstáculos similares.

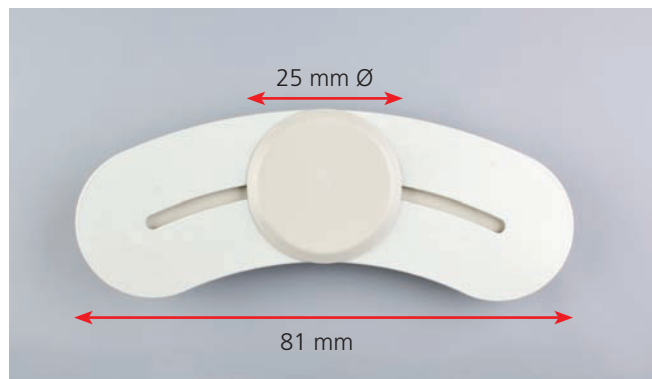

H1300 BOLSA BOLSA TABLA GLYDER



Peso total:
2,1 kg




Peso máximo:
180 kg

H8835 TABLA DE TRANSFERENCIAS CURVA

De forma curvada para salvar fácilmente la rueda grande de las sillas de ruedas. Sus cantos redondeados y superficie lisa permiten deslizarse cómodamente sobre la tabla.

De plástico macizo y reforzado, resiste al agua y al astillado. Las almohadillas antideslizantes de los extremos de la parte inferior aumentan la estabilidad durante la transferencia.

VER TABLA DE MEDIDAS

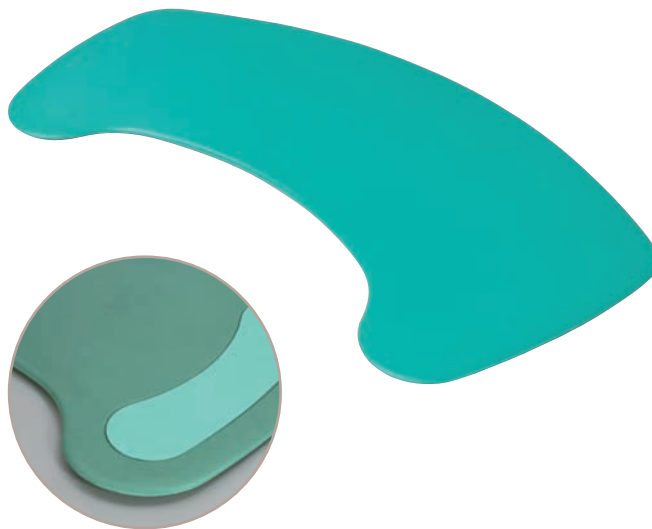

Incorpora unas almohadillas antideslizantes en la parte inferior que aumentan la seguridad

H8814 TABLA DE MADERA

Fabricada en madera laminada con sección que disminuye en los extremos para deslizar suavemente la tabla por debajo del paciente. Con orificios asidera en ambos extremos para facilitar su agarre y transporte. VER TABLA DE MEDIDAS.




H8811 TABLA PLEGABLE

Tabla de transferencia plegable fabricada en plástico polipropileno que ofrece muy poca fricción para facilitar las transferencias. Se pliega para facilitar su almacenamiento y transporte, quedando sus dimensiones reducidas a la mínima expresión.



Dimensiones abierto: 64 cm de largo y 35 cm de ancho

				
modelo	ancho	fondo	peso tabla	peso máx.
H8814	76 cm	21 cm	1 kg	100 kg
H8835	70 cm	37 cm	2,3 kg	150 kg

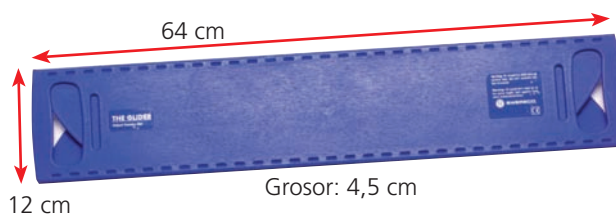

El mundo esta lleno de desniveles que se pueden superar con un poco de ayuda.

COMO SELECCIONAR LA LONGITUD DE LA RAMPA

- Seleccione siempre la rampa más larga posible, cuánto más larga sea la rampa, menor será la pendiente a superar.
- Para usuarios independientes de silla de ruedas se recomienda una pendiente máxima de 1:7, y para sillas de ruedas manuales empujadas por un ayudante y sillas electrónicas, una máxima de 1:5.
- EJEMPLO: Para superar un desnivel de 30 cm, con una pendiente máxima de 1:5, la rampa apropiada debería tener 150 cm ($30 \times 5=150$). Si la pendiente fuera de 1:7 ($30 \times 7=210$), debería ser de 210 cm.

Altura a salvar

60 cm

50

40

30

20

10

0

EJEMPLO:
para salvar 30 cm con ayudante:
 $30 \times 5=150$. Rampa de 150 cm

para salvar 30 cm sin ayudante:
 $30 \times 7=210$. Rampa de 210 cm

longitud de la rampa (en cm)

— sillas de ruedas empujadas por un ayudante
..... usuarios independientes


R700 RAMPA PARA UMBRAL

El umbral de la puerta es un obstáculo para las sillas de ruedas, andadores, etc.

Se puede superar fácilmente colocando una rampa sobre el umbral existente de la puerta para facilitar el paso por ambos lados, haciendo las estancias accesibles.

Rampa plataforma de aluminio super resistente de 3 mm de grueso, que puede soportar hasta 350 Kg y lleva un revestimiento antideslizante en la superficie.

Ancho: 67 cm Largo 60 cm y 2,5 cm de alto.

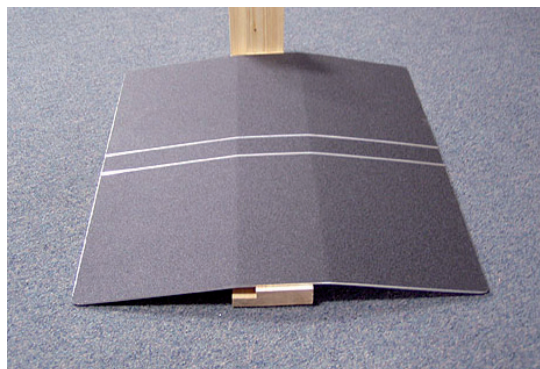

Peso total:
3,4 kg



Peso máximo:
350 kg



RAMPAS ULTRALIGERAS LITE

La combinación de fibra de vidrio y fibra de carbono les confiere ligereza y resistencia.

Para viajar, de vacaciones o simplemente de paseo por la ciudad, las "peso pluma" de las rampas son absolutamente las mas ligeras del mercado.

Esto es posible gracias a la combinación de dos materiales, la fibra de vidrio y la fibra de carbono. Esta combinación de composites tiene las mismas propiedades que las raquetas de tenis: fuerza y ligereza.

Su reducidísimo peso es de gran ayuda tanto para el usuario como para su acompañante.

modelo	longitud máxima	ancho interior	peso	peso máx.
R70LITE	70 cm	73 cm	3,5 kg	300 kg
R125LITE	125 cm	78 cm	6 kg	300 kg
R165LITE	165 cm	78 cm	7,5 kg	300 kg
R205LITE	205 cm	78 cm	9,5 kg	300 kg



Peso total:
3,5 kg



Peso máximo:
300 kg



SELECCIONAR LA RAMPA DE ALUMINIO MAS ADECUADA

Las rampas de aluminio son extraordinariamente resistentes y duraderas a la vez que ligeras de peso. Las rampas que aquí se muestran están fabricadas en los países escandinavos con el mejor aluminio.

Diferentes tipos de rampas:



RAMPAS DE UNA PIEZA


Recomendada cuando la rampa se utiliza habitualmente en el mismo lugar y se desea tener la rampa más ligera posible.

RAMPAS TELESCÓPICAS

Las rampas telescópicas son las más versátiles. Pueden usarse en diferentes lugares y situaciones donde tanto el desnivel como la longitud de las rampas sean variables. Son muy fáciles de guardar y de transportar cuando están fuera de uso.

RAMPAS DE UNA PIEZA

Recomendada cuando lo más importante es tener la rampa lo más ligera posible y la rampa se suele utilizar en el mismo lugar. Disponible en 3 medidas.

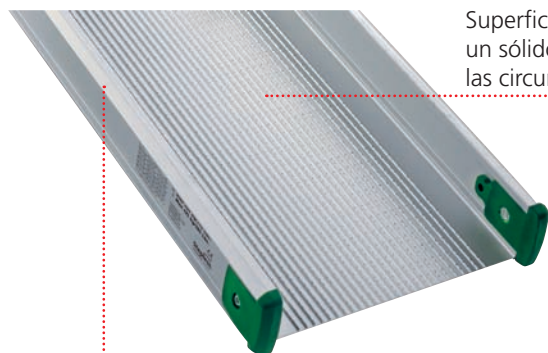

Superficies antideslizantes permiten un sólido punto de apoyo en todas las circunstancias y no se desgastan.

Los perfiles de aluminio extrusionados y anodizados no necesitan mantenimiento y ofrecen estabilidad y resistencia.

modelo	longitud máxima	ancho interior	peso de una rampa	peso máx.
RF1000	1 m	18,2 cm	3,2 kg	350 kg
RF1550	1,55 m	18,2 cm	4,7 kg	350 kg
RF2000	2 m	18,2 cm	6 kg	350 kg



RAMPAS TELESCÓPICAS DE ALUMINIO



Estas rampas fabricadas en aluminio son extraordinariamente resistentes, robustas y muy ligeras.

Las rampas telescópicas son especialmente versátiles: pueden utilizarse en diferentes lugares y situaciones donde el desnivel o la longitud de las rampas sean variables.

Una vez plegadas son fáciles de transportar y de guardar.

Disponible en 4 tamaños.

VER TABLA DE MEDIDAS



Una vez plegadas resultan muy fáciles de transportar y guardar

modelo	longitud máxima	longitud plegada	ancho interior	peso de una rampa	peso máx.
RT1500	1,5 m	0,95 m	16,3 cm	5,7 kg	350 kg
RT2000	2 m	1 m	19,5 cm	5,6 kg	300 kg
RT2500	2,5 m	1,45 m	16,3 cm	8,6 kg	200 kg
RT3000	3 m	1,5 m	18 cm	8,2 kg	250 kg

RAMPAS TIPO MALETA, PLEGABLES



Se pliegan a lo ancho y se transportan cómodamente como una maleta.

Una vez desplegadas ofrecen un ancho generoso, de 76 cm. adaptado para el uso de sillas de ruedas manuales o electrónicas, así como de scooters.

Como todas nuestras rampas de aluminio, son ligeras, robustas y muy resistentes: hasta 325 kg.

VER TABLA DE MEDIDAS



Peso máximo:
325 kg



modelo	tipo de rampa	longitud máxima	ancho interior	longitud plegada	anchura plegada	peso total	peso máx. por par
RM120	Plegable	122 cm	76 cm	122 cm	40 cm	9,6 kg	325 kg
RM180	Plegable	183 cm	76 cm	183 cm	40 cm	14,3 kg	325 kg

RAMPAS TIPO MALETA, TELESCÓPICAS Y PLEGABLES

Fabricadas en aluminio, son muy ligeras y fáciles de llevar. Rampas plegables y telescópicas al mismo tiempo, ocupan el mínimo espacio para transportarlas o guardarlas: son telescópicas a lo largo y luego plegables a lo ancho.

- Sin mantenimiento: perfil de aluminio estrusionado y anodizado.
- Ligeras y resistentes a la intemperie
- Superficie antideslizante

VER TABLA DE MEDIDAS



Estas rampas son telescópicas a lo largo y plegables a lo ancho

R900 RAMPA ENROLLABLE

Rampa ligera y portátil. Su diseño compacto permite enrollarla para guardarla y transportarla y se monta en segundos. Superficie ranurada antideslizante.

VER TABLA DE MEDIDAS



modelo	tipo de rampa	longitud máxima	ancho interior	longitud plegada	anchura plegada	peso total	peso máx. por par
RM210	Telescópica plegable	213 cm	76 cm	127 cm	40 cm	19 kg	325 kg
RM300	Telescópica plegable	305 cm	76 cm	173 cm	41 cm	26 kg	200 kg
R900	Enrollable	150 cm	76 cm	—	76 cm	13 kg	100 kg

Scooters

INDEPENDENCIA, nada mejor que ser capaz de desplazarse cuando uno quiera con total libertad. Los Scooters son la mejor manera de moverse con comodidad y seguridad.

Aquí le mostramos cinco modelos, tres ligeros y portátiles especialmente diseñados para maniobrar en espacios reducidos y dos especialmente confortables para desplazamientos más largos.



Scooter mostrado ST3 FLAMINGO

ST.1 SCOOTER COMPACTO DE ALUMINIO LUGGIE



Anchura total:
45 cm.

Distancia mínima
al suelo: 6,4 cm.

Longitud total: 100 cm.

LUGGIE es muy ligero gracias a su chasis fabricado en aluminio. Fácilmente plegable, cabe dentro de un pequeño maletero de coche o de una maleta (opcionalmente suministrada junto al scooter). **LUGGIE** es único para viajar.

Este scooter de pequeñas dimensiones es muy maniobrable y proporciona una gran versatilidad en espacios reducidos. Es ideal para desplazarse por la oficina o el hogar, se puede acercar a las mesas tanto como quiera, al bajar el volante telescópico.

COMPACTO Y LIGERO
Asiento regulable en altura e inclinación. Baterías de Litio y de extracción rápida. Columna de dirección de rápido ajuste en altura e inclinación.



Peso total:
26 kg



Peso máximo:
115 kg

ESPECIFICACIONES

Ruedas delanteras/traseras: 150/180 mm
Radio de giro: 90 cm
Motor: 24 voltios DC
Velocidad máx.*: 6 Km/h
Baterías de Litio: 24 V / 10 Ah
Autonomía*: 15 Km.
Grado de pendiente: 6°

*La autonomía esta calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y la autonomía.



ST.2 / ST.3 SCOOTERS LIGEROS Y PORTÁTILES JAMAICA Y FLAMINGO

Los scooters JAMAICA y FLAMINGO proporcionan una conducción cómoda tanto en interiores como en exteriores gracias a sus dimensiones reducidas y compactas, y su gran maniobrabilidad. Desmontables en cinco partes sin esfuerzo para facilitar su transporte y almacenamiento.

Con sus contornos suaves y sus paragolpes integrados, JAMAICA y FLAMINGO son unos scooters con estilo. Han sido diseñados para ser extremadamente fácil de desmontar y montar. Compactos y ligeros, caben en el maletero del coche, y ya está listo para ir de compras o realizar una excursión, etc... Son también ideales si necesita un scooter que quepa en ascensores o pueda guardar de forma compacta cuando no se utiliza.

- Asiento giratorio y regulable en altura de 40 a 45 cm.
- Se puede colocar en posición vertical para que sea más fácil almacenar.
- Baterías desmontables, se pueden cargar tanto en scooter como aparte.



ST.2 JAMAICA



ST.3 FLAMINGO



modelo	grado de pendiente	ruedas	radio de giro	potencia del motor	velocidad máxima	baterías	autonomía
ST2 JAMAICA	8°	200 x 50 cm	127 cm	250 W	8 km/h	(2) x 12 v / 12 Ah	15 km
ST3 FLAMINGO	8°	210 x 60 cm	127 cm	250 W	8 km/h	(2) x 12 v / 18 Ah	21 km

* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso).

ST.4 SCOOTER ROBUSTO Y VERSÁTIL ARUBA



El scooter **ARUBA** ofrece mayores prestaciones gracias a su construcción robusta y resistente, diseñado para trayectos más largos, proporciona la máxima facilidad a la hora de moverse por cualquier espacio. Su altura y sus ruedas de 260 mm de diámetro hacen de **ARUBA** un scooter versátil y de gran autonomía.

Con un excelente manejo, se distingue por su dirección suave y su gran maniobrabilidad. **ARUBA** es un scooter potente, sube pendientes de hasta 8° y soporta hasta 130 Kg.

ESPECIFICACIONES

Grado de pendiente: 8°
Ruedas: 260 x 85 mm.
Radio de giro: 132 cm.
Potencia del motor: 250 W
Velocidad máx.: 6 Km/h
Baterías: (2)x12V / 36Ah
Autonomía: 32 Km.
Baterías de gel.



Peso total:
78 kg



Peso máximo:
130 kg

En muchas circunstancias es preciso contar con la ayuda de un scooter con más autonomía y con más potencia.

Para desplazamientos más largos o en zonas rurales por ejemplo, cuando hay que superar pendientes o el terreno es irregular, debemos recurrir a modelos más robustos y potentes como **ARUBA** con un motor de 250 W y 32 Km. de autonomía o **AGIN**, con autonomía de 46 Km. y una potencia de 400 W. o **BARBADOS** con autonomía de 40 km. y una potencia de 700 W.



Comodidad y confort.

Cómodo asiento acolchado con respaldo envolvente con cabezal y brazos regulables de ancho y abatibles para facilitar la entrada y salida del scooter. El asiento se regula en profundidad y en altura (38 – 47 cm.) Incorpora luces delanteras, para poder conducir con más seguridad.

ST.5 / ST.6 SCOOTER DE GRAN AUTONOMÍA AGIN y BARBADOS

Los scooters **AGIN** y **BARBADOS** proporcionan una gran libertad de movimientos por su excelente maniobrabilidad gracias las cuatro ruedas neumáticas y con amortiguación para garantizar un viaje confortable. El potente motor eléctrico permite superar pendientes de hasta 10° y las 2 baterías proporcionan gran autonomía en estos robustos scooters y los hacen ideales para los trayectos largos.

- Amortiguación delantera y trasera.
- Columna de dirección ajustable en inclinación.
- Baterías sin mantenimiento.
- Incorpora luces delanteras y luces traseras e intermitentes para una conducción segura.
- Comodidad y confort.
- Cómodo asiento acolchado con respaldo envolvente, con cabezal y brazos regulables de ancho y abatibles para facilitar la entrada y salida del scooter.
- El asiento se regula en profundidad y en altura.
- Fácil de desmontar en 7 partes.

ST.5 AGIN



Peso total:
80 kg



Peso máximo:
135 kg

ST.6 BARBADOS




Peso total:
98 kg



Peso máximo:
150 kg

modelo	grado de pendiente	ruedas	radio de giro	potencia del motor	velocidad máxima	baterías	autonomía
ST5 AGIN	12°	260 x 85 cm	130 cm	400 W	6 km/h	(2) x 12 v / 40 Ah	46 km
ST6 BARBADOS	12°	290 x 85 cm	156 cm	700 W	12 km/h	(2) x 12 v / 50 Ah	40 km

* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso).



**Deberíamos conseguir un alivio en las presiones
y un descanso reparador con independencia de
nuestra condición física.**

DESCANSO Y PREVENCIÓN

Descansar y dormir se complica con la edad, y aun más si hay patologías asociadas. Por otro lado, un cierto número de personas deben pasar largos periodos de tiempo encamados con las consecuencias que esto conlleva tanto para ellas mismas como para las personas de su entorno.

En Ayudas Dinámicas prestamos especial atención al alivio de las presiones y la integridad de la piel que precisa de gran cuidado y prevención para evitar las úlceras por presión.

Seleccionamos productos eficientes y seguros con los que se pueda mantener el mayor grado de independencia posible, aliviar la tensión en el paciente y hacer más llevadera la labor de los cuidadores.



Camas electrónicas

Las camas de altura graduable electrónicamente son una gran ayuda para los cuidadores y familiares de pacientes. Pueden elevar la cama, simplemente apretando un botón, a la altura más conveniente para las transferencias, y los cuidados y atenciones necesarios se pueden realizar en una postura mas cómoda. Para el descanso del paciente podemos bajar la cama hasta la mínima altura, ya que estudios realizados demuestran que las camas demasiado altas favorecen la desorientación ya habitual en personas encamadas durante largos periodos de tiempo.

AD962 "BED IN BED" ANDREA



Podemos tener una cama electrónica de altura regulable con carro elevador y no renunciar al mobiliario habitual o nuestro estilo particular de decoración. La cama **ANDREA** se puede colocar dentro de la cama habitual o cualquier otra cama y pasa totalmente desapercibida.

La altura regulable es de gran ayuda para entrar y salir de la cama ya que podemos colocar la cama a la altura más conveniente simplemente apretando un botón del mando a distancia. La cama tiene 4 planos que se regulan de forma totalmente electrónica.

Fácil de montar y fácil de guardar

modelo	medida somier
AD962	90 x 200 cm

Una cama funcional y versátil sin renunciar a su mobiliario actual



Peso
máximo:
150 kg



Altura graduable
electrónicamente
de 35 a 80 cm




AD974 CAMA PARA USO INTENSIVO CLASSIC PLUS

La cama **CASSIC PLUS** es un buen ejemplo de la flexibilidad del sistema de camas diseñadas a la carta que se muestra en la página 170.

En este caso proponemos una cama especialmente configurada para uso intensivo. Fácil de transportar y de montar por una sola persona y sin al ayuda de herramientas. Robusta y resistente aun en condiciones de uso intensivo. Versátil, ya que podemos variar la configuración de la cama para adaptarla a los cambios en las circunstancias del paciente o las diferentes necesidades de la institución.

- Regulación electrónica de altura de la cama con un carro elevador (de 40 cm a 80 cm).
- Regulación electrónica del respaldo y de las piernas con un sencillo mando.
- Barandillas abatibles incluidas.
- Cabezal y piecero de madera incluidos.
- Trapecio incluido
- Máximo confort: 4 planos articulados con somier de lamas de madera.
- Cuatro ruedas de 125 mm con freno

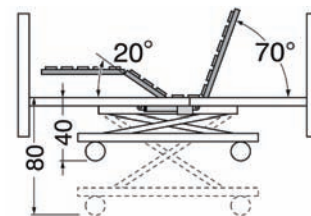

Fácil de montar y fácil de guardar



modelo	medida somier
AD974	90 x 200 cm



KG
Peso
máximo:
150 kg


Altura graduable
electrónicamente
de 40 a 80 cm



AD980M CAMA ELECTRÓNICA DE ALTURA REGULABLE ANTARES

Permite la regulación electrónica con mando a distancia de la altura de la cama, del respaldo y de las piernas. Función Trendelenburg y Antitrendelenburg (opcional).

- Somier de 90 x 200 cm
- Máximo confort: 4 planos articulados con lamas de madera.
- Cabezal, piecero y barandillas de madera
- Fácil transporte: el somier se desmonta por la mitad en dos partes, por lo que todos sus componentes caben incluso en un coche.
- 4 ruedas con freno
- Trapecio incluido

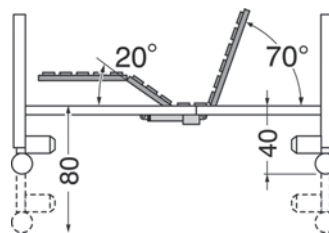

Peso máximo:
150 kg

Fácil de montar y fácil de guardar



Longitud total: 210 cm

Ancho total: 102 cm



Altura graduable
electrónicamente
de 40 a 80 cm


AD960 CAMA ELECTRÓNICA CON CARRO ELEVADOR ORION

Regulación electrónica de la altura de la cama con carro elevador.

- Regulación electrónica del respaldo y de las piernas, todo con un sencillo mando a distancia.
- Máximo confort: 4 planos articulados con lamas de madera.
- Cabezal, piecero y barandillas de madera.
- Cuatro ruedas con freno.
- Trapecio incluido.

Disponible en 2 medidas


Fácil de montar y fácil de guardar

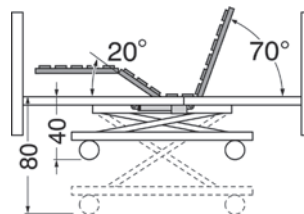

modelo	medida somier
AD960M	90 x 200 cm
AD960L	105 x 200 cm



Peso
máximo:
150 kg

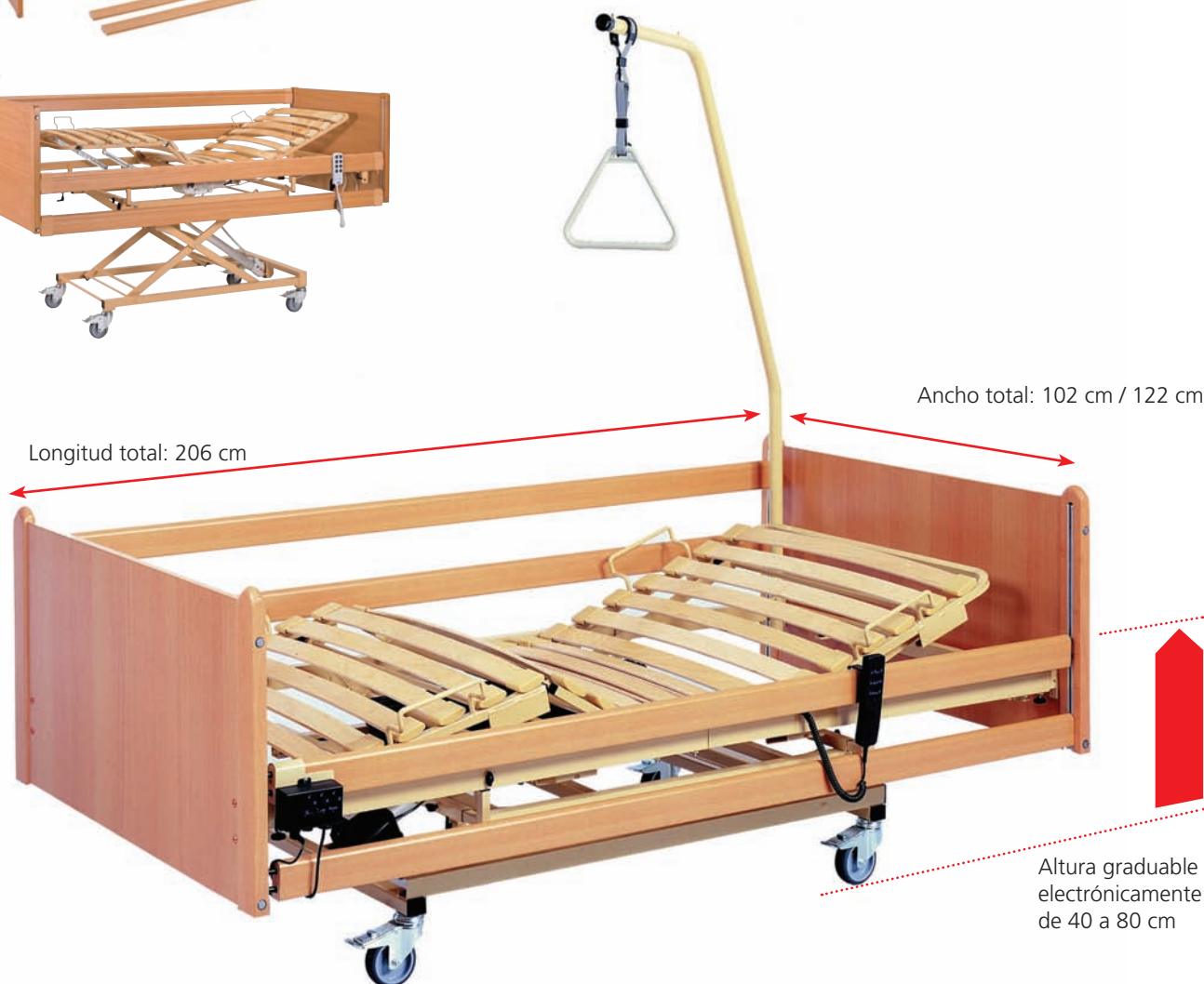


CAMAS A LA CARTA

AD970 CAMA ELECTRÓNICA DE ALTURA GRADUABLE CLASSIC

Cama electrónica con carro elevador, regulación electrónica de altura de la cama de 40 cm a 80 cm.

- Regulación electrónica del respaldo y de las piernas, con un mando.
- Máximo confort : lamas de madera
- Ergonómica: 4 planos articulados
- Cuatro ruedas de 125 mm con freno
- Fácil de transportar y guardar
- Fácil montaje, sin herramientas

VER OPCIONES EN PÁGINA SIGUIENTE.

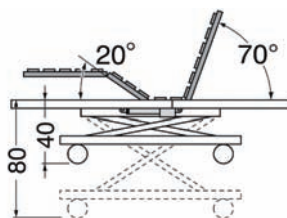

El somier se desmonta en dos mitades para facilitar su transporte que puede ser realizado por una sola persona.

modelo	medida somier
AD970	90 x 200 cm



Altura graduable electrónicamente de 40 a 80 cm



Peso máximo: 150 kg


AD985 CAMA DE ALTURA GRADUABLE GALA

Altura variable manualmente de 31 a 46 cm para adaptarse a diferentes individuos y necesidades.

- Somier de lamas de madera de 4 planos de apoyo controlado por un mando a distancia mediante cable flexible.
- Motor de baja tensión de 24 V
- Estructura muy resistente, diseñada específicamente para su utilización en instituciones, para la asistencia domiciliaria así como para el mercado de alquiler.

Disponible en 2 medidas

VER OPCIONES EN PÁGINA SIGUIENTE.

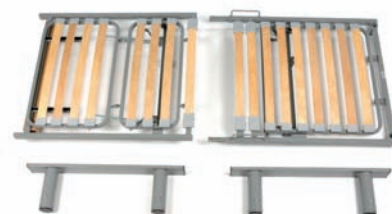

El somier se desmonta en dos mitades para facilitar su transporte que puede ser realizado por una sola persona.

modelo	medida somier
AD985M	90 x 200 cm
AD985L	105 x 200 cm



Ancho total sin cabezales: 90 o 105 cm

Longitud total: 200 cm (sin cabezales)

Altura graduable manualmente de 31 a 46 cm



Peso máximo: 150 kg


CAMAS A LA CARTA

Las circunstancias de cada persona son diferentes y con toda probabilidad cambiarán con el tiempo. Este versátil sistema le permite configurar una cama de acuerdo al entorno y las circunstancias de cada individuo y podrá adaptar la cama a los futuros cambios que experimente el paciente.

Un sistema flexible:

A partir de una cama de altura graduable, (tanto si regula de forma manual como electrónica, camas GALA o CLASSIC) que es una condición indispensable para el cuidador, se pueden añadir las opciones que aquí se muestran y que convengan a cada persona según sus necesidades y gustos particulares.

AD952/4 BARANDILLAS ABATIBLES ALTAS (PAR)

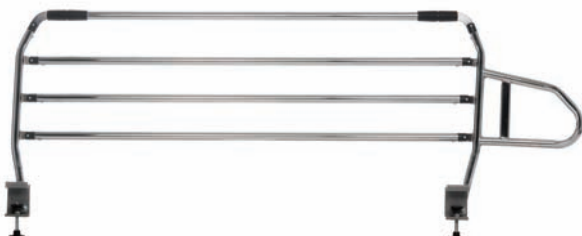

AD952 BARANDILLAS ABATIBLES (PAR)



AD955 BARANDILLA ABATIBLE UNIVERSAL



A960/12 TRAPECIO



AD985W CABEZALES DE MADERA, CONJUNTO




RC900 PROTECTOR DE BARANDILLA



AD951 PAR DE BARANDILLAS TELESCÓPICAS


Fabricadas en acero cromado. Se deslizan fácilmente hacia abajo para facilitar su acceso a la cama. Fácil montaje. Su sistema de anclajes, se adapta con seguridad a la mayoría de camas, especialmente las articuladas.

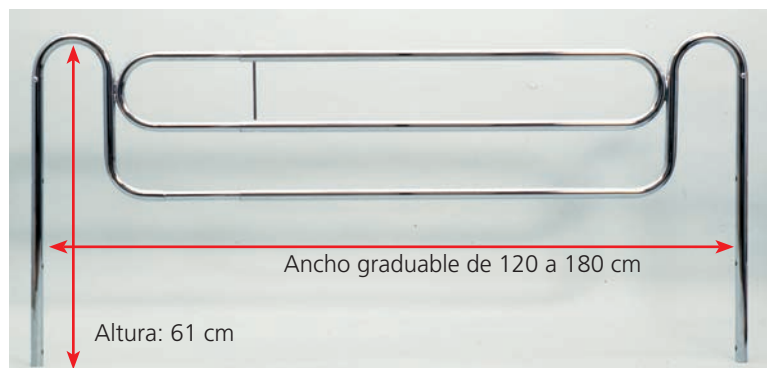

AD952 PAR DE BARANDILLAS ABATIBLES



Fabricadas en acero cromado. Se adaptan a la mayoría de las camas y no precisan ninguna herramienta para su instalación. Se suben y quedan aseguradas de forma automática. Para bajarlas solo hay que desbloquear el seguro tirando de un pomo. Se suministra en pares. Admite anclaje ancho y estrecho

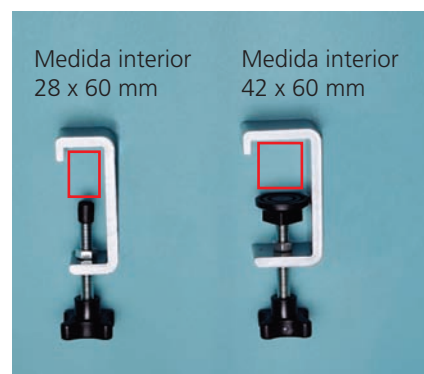

Disponible con anclaje
ancho y estrecho

AD952/4 PAR DE BARANDILLAS ABATIBLES ALTAS




De iguales características que las barandillas abatibles AD952 pero recomendadas en aquellos casos que se precisan unas barandillas más altas de lo habitual. Por seguridad, hemos colocado un cuarto barrote, conservando la distancia entre ellos.

Se suministra en pares.
Admite solamente anclaje ancho

AD955 BARANDILLA ABATIBLE UNIVERSAL

Estas barandillas universales se adaptan a un gran número de camas, en especial a aquellas en las que no podemos acoplar las barandillas corrientes, ya que tienen un anclaje muy versátil que permite una gran variedad de opciones. Se suministra por unidades.

Anclajes Universales

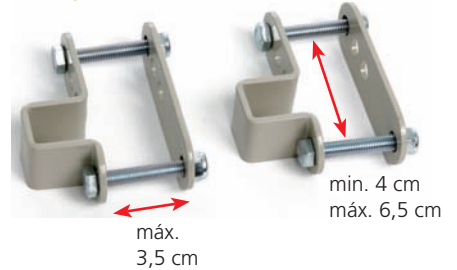

AD940 ASIDERA FRIDA



Asidera barandilla de cama, de tacto cálido que ayuda a mantener el equilibrio cuando se está junto a la cama y da confianza y estabilidad para entrar y salir de la cama.

Se asegura fácilmente al somier con las cinchas incluidas, quedando debajo del colchón.



RC900 PROTECTOR DE BARANDILLA

Protector acolchado para barandillas de cama. Protege al paciente de golpes contra la barandilla e impide introducir los brazos o las piernas entre las barras. Fabricado en espuma de alta densidad forrado con tapicería ignífuga y lavable. El protector debe retirarse antes de bajar la barandilla. Medidas: 140 x 35 x 3 cm.



AD942 BARANDILLA BEDCANE

Práctica y de diseño atractivo, esta asidera ayuda al entrar y salir de la cama. Plegable y fácil de instalar. Incluye una cincha de seguridad para asegurar la barandilla a la cama.



ancho 38 cm
dimensiones base: 58 cm x 48 cm
peso 5,4 Kg

AD943 BARANDILLA TRAVELLER

Nueva barandilla portátil. Ideal para viajes: es plegable y solo pesa 3 kg. Se adapta a cualquier cama en el domicilio, el hotel o en instituciones.

Incluye cincha de seguridad y cuatro prácticos bolsillos




Ancho 39 cm
dimensiones de la base 58 x 48 cm



AD945 BARANDILLA PIVOT RAIL

Esta barandilla es extensible para alargarla o acortarla a conveniencia, y además se puede abatir para salir y entrar en la cama con más comodidad. Cuenta con unos prácticos bolsillos para guardar las cosas que se desea tener a mano. Plegable y fácil de llevar.

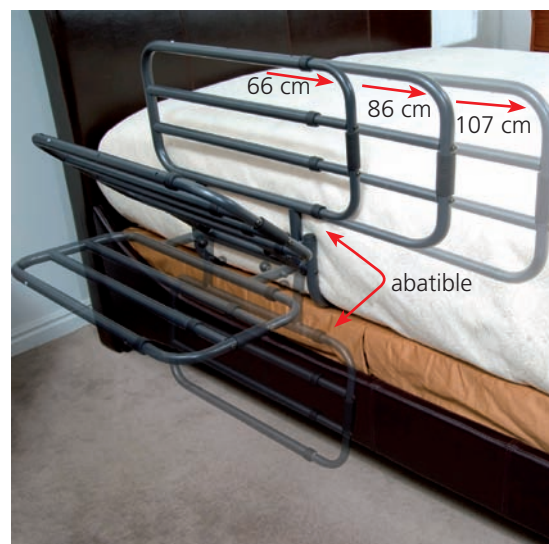

AD944 INCORPORADOR CON MESITA COUCH TRAY

Una práctica ayuda para incorporarse o sentarse que se adapta a cualquier silla, sillón, butaca o sofá. De diseño atractivo y elegante además de discreto, incorpora una mesita, de 40 x 46 cm, que gira para tenerla a mano cuando se precisa y no ser un obstáculo cuando esta fuera de uso.

De construcción muy robusta y estable. Se puede regular la profundidad de la base para adaptarla a cualquier asiento.

Altura regulable de la mesita:
66-81 cm y de la asidera: 87-102 cm

Peso máximo:
14 kg



AD690 MESITA PARA CAMA NANI

Práctica y atractiva mesita auxiliar, fabricada en madera y ajustable en 5 diferentes ángulos de inclinación para come, leer, escribir, etc...
Plegable y fácil de guardar.
Superficie de 54 x 31 cm, laminada y fácil de limpiar.



AD589 CONOS ELEVADORES ECO

Conos elevadores económicos, ligeros y extremadamente fuertes.
Suministrados en juegos de 4 unidades.
Altura: 9 cm
Peso máx. total: 220 Kg



CONOS PATAS DE ELEFANTE

Juego de 4 conos elevadores que elevan 9 o 14 cm las camas corrientes, para que resulte más fácil entrar o salir, especialmente en las transferencias.



Peso máx. total: 380 Kg



modelo	altura	diámetro
AD581	9 cm	9 cm
AD582	14 cm	9 cm

AD750 SILLÓN ELEVADOR RELAX







Los sillones elevadores y de relax tienen un funcionamiento totalmente electrónico. Simplemente pulsando un botón del mando el sillón eleva suavemente las piernas para adoptar una postura de auténtico descanso, si continuamos presionando el botón del mando el respaldo se reclina hasta la posición deseada de máximo confort.

Las butacas de relax tienen además otra función: el sillón se eleva suavemente inclinándose hacia delante como una ayuda para incorporarse. De esta manera levantarse es mas fácil y seguro. Las orejeras son el complemento ideal para una butaca realmente cómoda.

VER TABLA DE MEDIDAS

modelo	color
AD750B	beige
AD750M	marrón


El sillón sirve de ayuda para incorporarse, así levantarse es mas fácil y seguro.

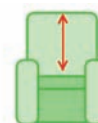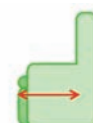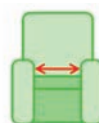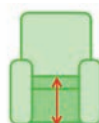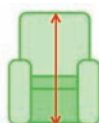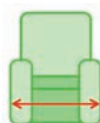

modelo	ancho	alto	fondo	alto asiento	ancho asiento	fondo asiento	altura respaldo
AD750	75 cm	100 cm	80 cm	48 cm	48 cm	50 cm	65 cm

AD941 ARCO DE CAMA

Arco protector para que las sábanas o mantas no entren en contacto con los pies o las piernas. Ancho: 55 cm. Alto: 34 cm.

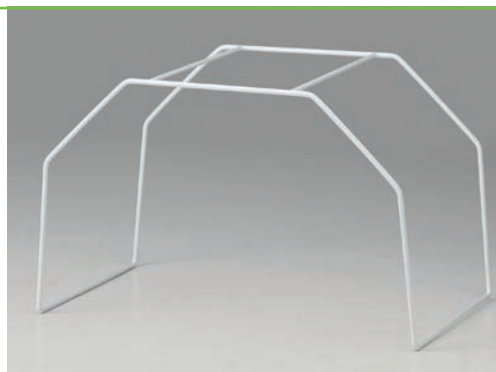

AD948 COLUMNA ASIDERA


Esta columna se fija al suelo y al techo, sin necesidad de tornillos, simplemente por presión.

La asidera ondulada gira sobre la columna pudiéndose bloquear cada 45° Es muy práctica como ayuda para incorporarse de un asiento, junto a la cama o en el baño donde es especialmente importante la prevención de caídas.



H3612 RESPALDO AJUSTABLE

Fabricado en acero plastificado y tapizado en nylon transpirable incorpora un cojín para mayor comodidad.

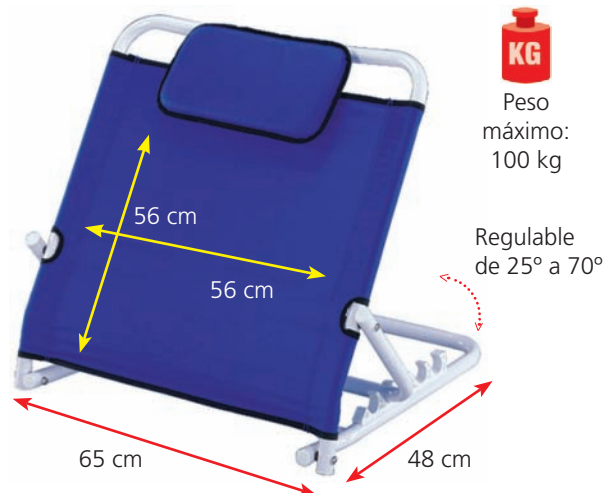

AD688 MESITA AUXILIAR PLEGABLE

Elegante mesita graduable en altura y plegable. El tablero bascula hasta 90° en ambos sentidos y la mesa se pliega quedando plana para guardarla o transportarla. Además el mástil bascula hasta 80° para acercarlo mas al usuario si es preciso. Suministrada con cuatro ruedas, dos de ellas con freno.



modelo	color
AD688B	blanca
AD688M	marrón



Peso total:
9 kg

AD681 MESITA DOBLE TABLERO

El plano mayor es basculante hasta 90° en ambas direcciones, y el pequeño, fijo. Borde externo para evitar la caída de los objetos.

Mesita fija
20 x 28 cm



AD683 MESITA AUXILIAR

Mesita de un plano basculante que permite una inclinación de hasta 90° en ambas direcciones. El tablero tiene un borde externo para evitar la caída de los objetos.



modelo	color tablero
AD683G	Gris
AD683M	marrón

AD979 MESITA STELLA

El complemento perfecto para una cama de altura graduable electrónicamente. De fabricación robusta, diseñada especialmente para instituciones. De madera de haya natural y provista de 4 ruedas además de cajón, estante y armario con estante interior. Incluye una gran mesita auxiliar abatible que puede ir sobre la cama. Se puede colocar tanto a la derecha como a la izquierda de la cama.



H96160 MESITA MULTIUSOS PLEGABLE

Mesa muy práctica y versátil de altura e inclinación graduable. Su diseño funcional permite utilizarla para una gran variedad de actividades, incluso desde una silla de ruedas. Se pliega fácilmente para guardarla o transportarla.




Peso total:
9 kg

Se pliega fácilmente para guardarla o transportarla



AD689 MESA EXTRA GRANDE SUPERMESITA

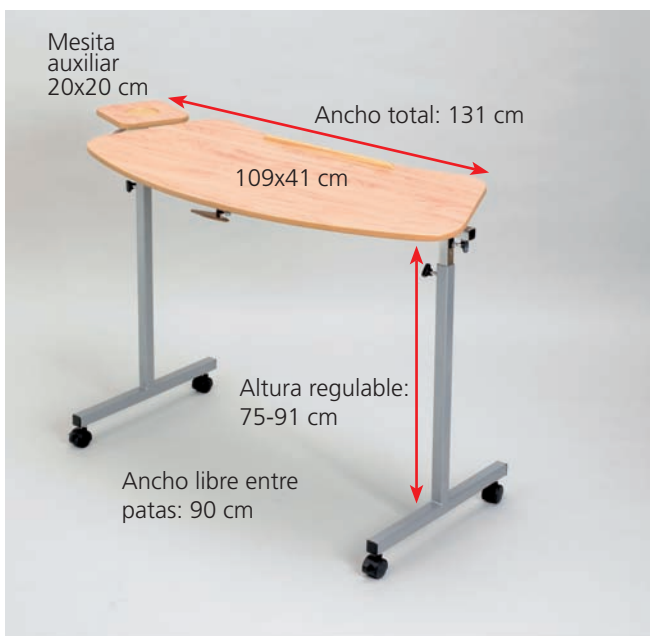


Mesa auxiliar de dimensiones generosas y más alta de lo habitual para poderla utilizar sobre un sofá o sillón con brazos. El tablero bascula sin esfuerzo con la ayuda de un pistón de aire para utilizarla a modo de atril, mientras que una pequeña mesita auxiliar que se puede montar a derecha o izquierda, queda plana para colocar por ejemplo, una tacita de café...



AD950 TRAPECIO

Diseñado para ayudar a las personas a sentarse en la cama. La base en forma de "H" queda debajo de la cama.

AP367 RECAMBIO DE TRIÁNGULO Y CINCHA

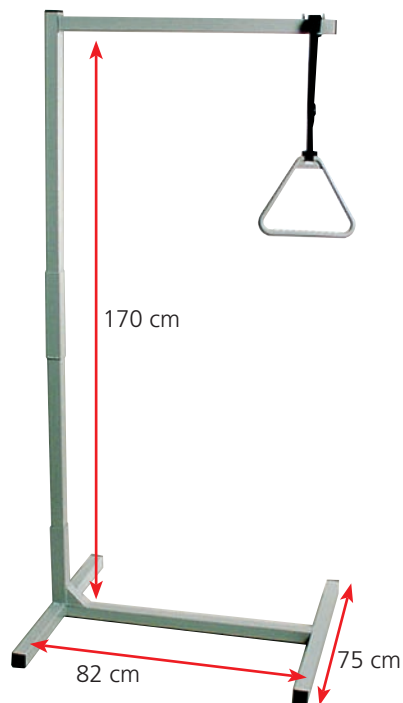

Peso
máximo:
90 kg



Peso
total:
11 kg



AD400 ASA ERGONÓMICA NORMA

Asa de forma ergonómica para trapecios especialmente diseñada de acuerdo con las últimas normas de la CE para mejorar la seguridad en las instituciones.

Muy resistente y con gran capacidad de carga, provista de una tira graduable de 200 mm a 450 mm con protección de goma antideslizamiento en la parte superior



AD949 TRAPECIO DE PARED


Trapezio de acero para alicatarlo a la pared. Especialmente útil para utilizarlo en el lavabo o en la cama. El asidero triangular se ajusta a la medida más conveniente (de 48 cm a 64 cm)



Li2612.000 TRAPECIO DE TECHO

El trapecio de techo es de gran ayuda para las transferencias cuando esta colocado sobre el WC o sobre la cama.

Se monta en el techo y lleva una correa de nylon de largo regulable con una asidera de plástico en el extremo.

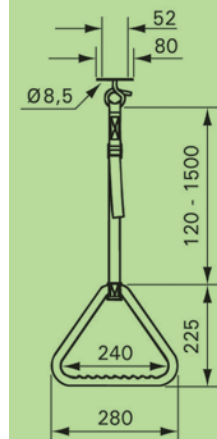

La instalación debe ser llevada a cabo por un profesional.

RC004 SÁBANA DE SUJECCIÓN AJUSTABLE

Impide al paciente levantarse o caerse de la cama, así como manipular los empapadores, sondas etc.

Permite sentarse en la cama, girarse y mover libremente brazos y piernas.

Fabricada en algodón 100% semiplástico, para soportar tirones sin rasgarse.


Cremallera reforzada con cierre en los pies y tope superior protegido del contacto de la piel.

Goma de ajuste de tensión fuerte que sujeta la sábana bajo el colchón aprovechando el propio peso del paciente.

Aperturas laterales para permitir el uso de sondas vesicales.

Disponible en tallas especiales para obesos.

Ancho de cama: 90 cm

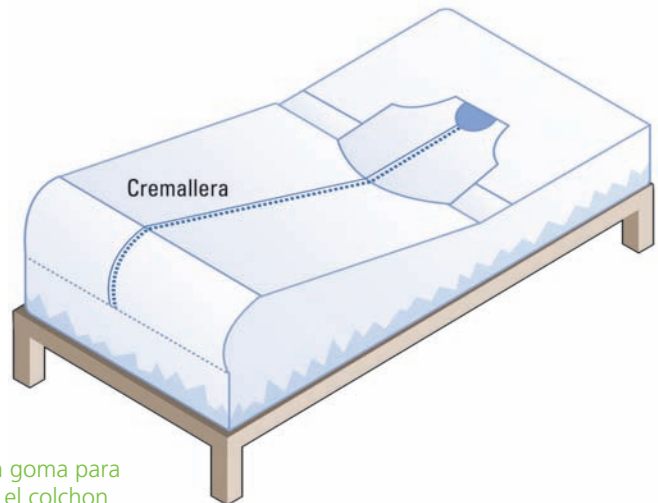

Ribeteada con goma para ajustarse bajo el colchón

H3660 ESCALERILLA

Permite a una persona incorporarse en la cama. Consta de cuatro peldaños separados 20 cm entre sí y atados a una cuerda de nylon que se sujeta a los pies de la cama.



Permite a una persona incorporarse en la cama.

RC001 PIJAMA SENIORS

Especialmente indicado para pacientes con incontinencia y/o demencia y para proteger la piel a los pacientes que se autolesionan rascándose.

Incorporan una cremallera (protegida del contacto directo con la piel) en la parte interior de las piernas, cosida de manera que el paciente no puede abrirla y manipular los empapadores; sin embargo el personal auxiliar puede cambiar fácilmente los pañales sin necesidad de quitar el pijama. Disponibles en tres tallas.

modelo	color
RC001	Pequeña
RC002	Mediana
RC003	Grande

67% Poliéster
33% Algodón



SISTEMAS DE SUJECCIÓN RÁPIDA, CON CIERRE MAGNÉTICO

Sistema indicado para limitar los movimientos de personas encamadas según las necesidades particulares de cada caso, para evitar las caídas y también las autolesiones en personas con agitación nerviosa. El botón de cierre es de colocación rápida. Queda inmediatamente cerrado tan pronto como se inserta en el vástago metálico. Sólo se puede abrir con la llave magnética, así se impide la apertura incontrolada de las sujeciones por la manipulación del paciente o por personas no autorizadas.



H3403

H3401

H3400

H3402

H3402 TOBILLERAS

Para sujetar ambos tobillos de forma rápida y eficaz.
Fácil de colocar.
Incluye 4 botones magnéticos de cierre y una llave magnética.

modelo	circunferencia tobillo
H3402-M	19-28 cm
H3402-L	25-35 cm



H3401 MUÑEQUERAS

Cinchas que permiten sujetar de manera muy rápida y eficaz una o ambas manos. Fáciles de colocar, la parte inferior se fija a la cama o camilla.
Incluye 4 botones de cierre magnético y una llave magnética.

modelo	perímetro muñeca
H3401-M	12-22 cm
H3401-L	17-27 cm



RECAMBIOS

H3410 LLAVE MAGNÉTICA




H3411 CIERRE



Vástago metálico
y botón magnético

H3400 CINTURÓN ABDOMINAL

Cinturón de sujeción abdominal con sistema de desplazamiento controlado, que permite limitar y controlar los giros hacia ambos lados, incorporarse parcialmente y sentarse en la cama sin riesgo de caerse. Bandas de sujeción laterales incluidas.

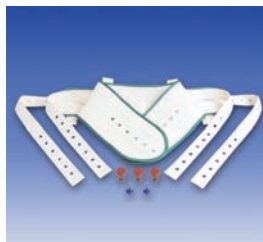

Diámetro regulable.

Se suministra con 3 botones de cierre magnéticos y con dos llaves magnéticas. Disponible en 3 tallas.

CONSULTAR CUADRO DE MEDIDAS

modelo	perímetro abdomen
H3400-S	50-75 cm
H3400-M	70-110 cm
H3400-L	105-145 cm
H3400-XL	120-162 cm




H3403 TIRANTES PARA EL TÓRAX

Sistema de sujeción rápida de la parte superior del cuerpo. Los tirantes se pueden utilizar solamente en combinación con el cinturón abdominal para impedir que el paciente se deslice hacia arriba.

Se suministra con 5 botones de cierre magnéticos y 1 llave magnética.

modelo	perímetro tórax
H3403-L	85-124 cm
H3403-XL	109-146 cm

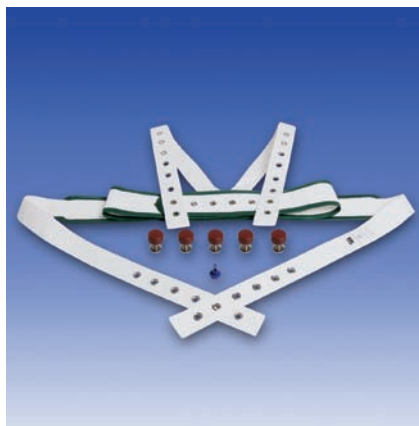

H3405 MANOPLAS BIO CARE

Guantes de fijación rápida con cierre magnético para prevenir autolesiones o lesiones a terceros. Se suministra en pares y con 2 botones de cierre magnéticos y una llave magnética.



RC010 MANOPLA

Producto de protección desarrollado para evitar que el paciente inquieto pueda autolesionarse o se quite las protecciones para la incontinencia. Manopla transpirable y con buena ventilación para evitar que de un calor excesivo.

Composición:
poliéster, algodón y nylon.

Se suministra en pares.



RC011 TALONERAS DE BORREGUITO

Muy indicadas para la prevención de escaras.

Están especialmente recomendadas para personas encamadas durante largos periodos.

Lavado a mano o a máquina con jabón líquido neutro, a 30°C.



RC22 BOTAS DE BORREGUITO

Fabricadas con piel de cordero natural, de tacto suave y agradable.

La calidad del borreguito natural es incomparable con el sintético.

Proporcionan relajación y alivio del dolor. Botas para personas con problemas de circulación o que se quejan de pies fríos.

Lavado a mano o a máquina con jabón líquido neutro, a 30°C.

Disponibles en 4 tallas.

modelo	talla
RC22A	38-39
RC22B	40-41
RC22C	42-43
RC22D	44-45



H8039 BOTA DE SUSPENSIÓN

Alivia la presión en el talón al mantenerlo en suspensión. Previene las úlceras por presión y es adecuado para tratamiento de diabetes y dolencias cardiovasculares, entre otras patologías.

Lavable a mano. Talla única.



H8010 BOTA VISCOELÁSTICA

Fabricado en espuma viscoelástica con efecto memoria. Sus formas anatómicas y curvadas y el suave tacto del visco consiguen una bota muy confortable.


Indicado en casos de inmovilización de los miembros inferiores por cirugía de la cadera, cuidados intensivos, etc...para prevenir la aparición de úlceras por presión o como parte del tratamiento si éstas ya han aparecido.



El tendón de Aquiles, una zona de alto riesgo, queda protegido

El talón queda suspendido en una cavidad para prevenir la fricción.

Distribuye las presiones en la pantorrilla

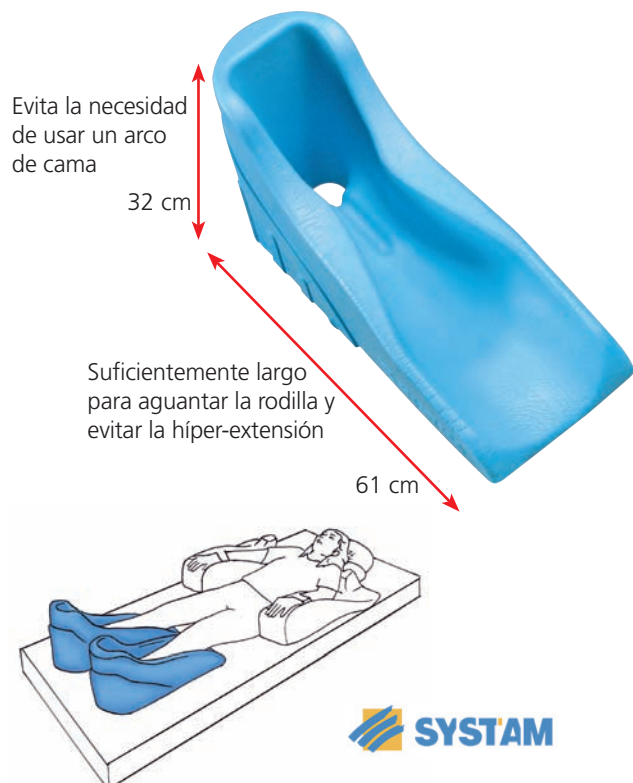

H8020 SOPORTE TALÓN VISCOELÁSTICO


Fabricado en espuma viscoelástica con efecto memoria. Forma anatómica y suave al tacto. Soporte de talón adecuado para prevenir las escaras en pacientes con riesgo medio-alto y con buena movilidad.

También apropiado para pacientes agitados o en constante movimiento de los miembros inferiores.



El tendón de Aquiles queda protegido

El talón queda suspendido en una cavidad para prevenir la fricción.

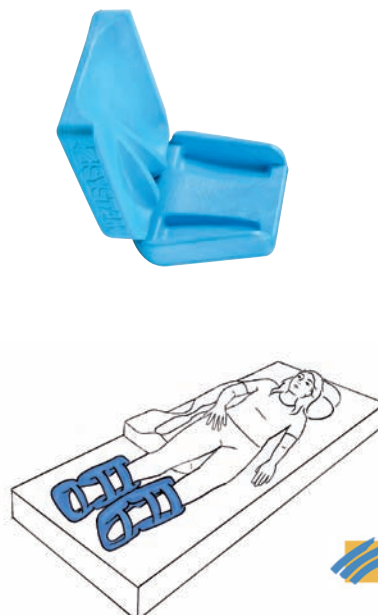


COJINES DE POSICIONAMIENTO A BASE DE MICRO BOLITAS

Estos cojines facilitan enormemente la adopción de diferentes posturas que contribuyen a una reducción significativa de las presiones de apoyo sobre los tejidos y la piel, para prevenir la aparición de escaras.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Material muy ligero: las microbolitas de poliestireno expandido son de muy pequeño diámetro para un mejor confort y una gran adaptabilidad a la morfología de los pacientes.

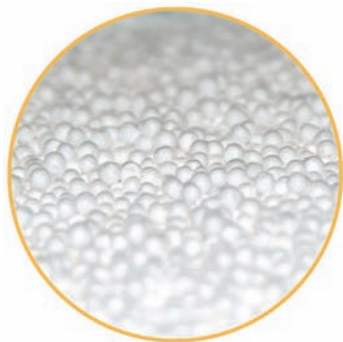


DOBLE FUNDA

Los cojines de posicionamiento se suministran con dos fundas para una mejor higiene, para más seguridad y para alargar la vida del producto.

Funda Polymaille®:

Poliuretano bi-extensible: reduce los efectos de la fricción y del cizallamiento. Transpira y reduce los efectos de la maceración. Totalmente impermeable. Lavable a 95°C, e ignífuga.

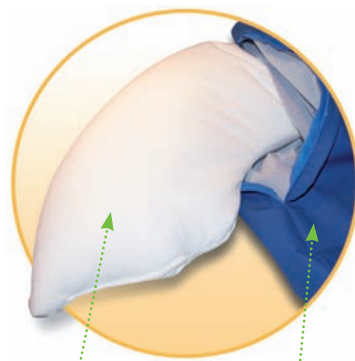

Funda de algodón totalmente cerrada que contiene las microbolitas


Funda de protección Polymaille® desenfundable y lavable.

H8500 COJÍN POSICIONAMIENTO MEDIA LUNA

H8511 CABEZAL PARA CONJÍN MEDIA LUNA

Un cojín muy versátil que permite la adopción de una gran variedad de posturas para aliviar las presiones de apoyo a diferentes niveles del cuerpo. Su forma de media luna se puede abrir o cerrar fácilmente según convenga a la morfología de cada persona gracias a un ingenioso sistema patentado. Para mayor comodidad se puede utilizar el cojín almohada opcional **H8511**.


La **MEDIA LUNA** puede utilizarse también invertida para descansar las piernas tal como muestra la ilustración. También se puede emplear en una silla de ruedas.

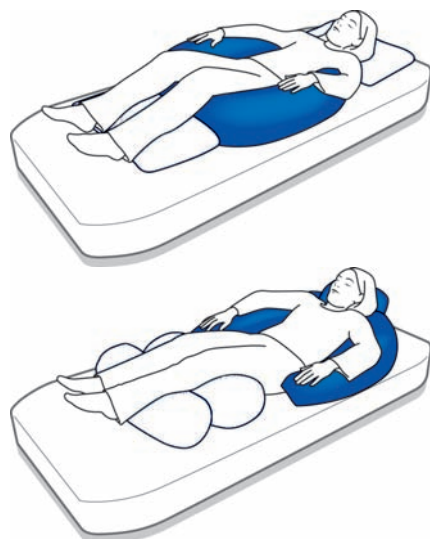

SYSTEM

RELEVANCIA DE LA POSICIÓN SEMI-LATERAL A 30°

- Generalmente la prevención y tratamiento de las úlceras por presión está basada en el principio de reducir las presiones en los tejidos incrementando la superficie de contacto o transfiriendo las presiones a zonas de menor riesgo.
- La mayoría de unidades médicas incluyen los cambios posturales, con lateralizaciones a 90° como parte de la estrategia de prevención y tratamiento de úlceras en pacientes con riesgo alto o muy alto.
- Mientras que esta posición es efectiva para reducir las presiones en el sacro, incrementa las presiones en la zona del trocánter.
- El uso de esta posición es a menudo la causa del desarrollo de múltiples úlceras por presión empeorando el diagnóstico y alargando la hospitalización.
- Conclusión: los cambios frecuentes de posición, con lateralizaciones a 90° no son suficientes para prevenir el riesgo de úlceras por presión en el trocánter.

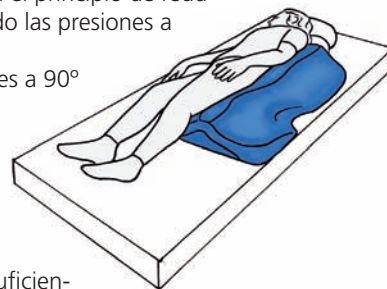

LA SOLUCIÓN: POSICIÓN SEMI-LATERAL A 30°

- Diversos autores y estudios defienden y recomiendan encarecidamente la posición semi lateral a 30° para sustituir la estrategia de lateralizaciones a 90° dado el riesgo para el trocánter.
- El principio detrás de la posición a 30° es el traslado de las presiones a zonas de menor riesgo, sin protuberancias óseas y bien vascularizadas.

H4290 CUÑA POSICIONADORA 30°



Fabricado en espuma viscoelástica con efecto memoria y especialmente recomendada para la prevención o tratamiento de las úlceras por presión en la zona del sacro y trocánter.



H8520 COJÍN DECÚBITO SEMILATERAL 30°

Un cojín de posicionamiento extraordinariamente versátil indicado para la prevención de úlceras por presión, en especial en la zona del sacro y del trocánter. Lleva una almohada integrada para un confort óptimo. Asegura un posicionamiento con gran comodidad en decúbito lateral a 30°. Gracias al sistema **easyshape** se adapta a diferentes morfologías de cada paciente, una sola talla es compatible con todas las tallas del paciente.



180 cm

55 cm



H4200 ABDUCTOR CAMA



Abductor de espuma blanda de 36 cm de largo.

Separa las piernas 15 cm el extremo proximal y 33 cm en el distal.

Recomendado para el uso de un solo paciente.

H4255 ABDUCTOR SYSTEM


Cuña de formas curvadas y dimensiones cuidadosamente estudiadas, para usarlo en la cama o en la silla de ruedas.

De tacto blando y fácil de instalar, suministrado con funda impermeable y cincha de ajuste rápido.



H8550 COJÍN DE POSICIONAMIENTO CILÍNDRICO CON ARCO ABDUCTOR

Utilizados conjuntamente estabilizan y mantienen una cómoda postura decúbito dorsal y actúan como abductor. El cilindro puede utilizarse individualmente para diversos posicionamientos y de diferentes maneras, en especial debajo de las rodillas.

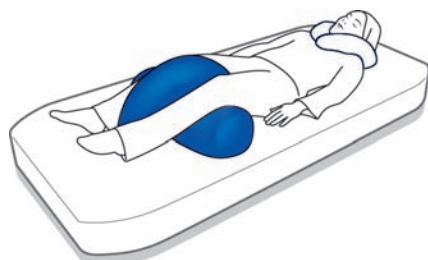

H4240 CUÑA POSICIONADORA DE BRAZOS

Fabricada en espuma viscoelástica con efecto memoria, de formas blandas y redondeadas para un óptimo confort, lo que permite mantener una determinada postura durante un periodo de tiempo.


Esta cuña posicionadora está indicada para reducir o prevenir edemas, lo que ocurre en una gran variedad de situaciones. Apropia para pacientes hemipléjicos y además resulta muy práctica para cateterización intravenosa.



Curvas de forma anatómica

Posicionador para la palma de la mano

Simétrica: puede usarse a derecha o izquierda

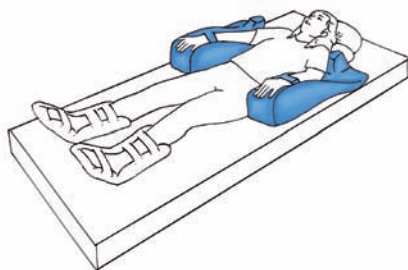


Puede utilizarse con la persona semi sentada y/o las piernas levantadas.




H8560 COJÍN POSICIONADOR DE CUELLO

Ayuda a mantener una posición confortable de la cabeza tanto cuando la persona está estirada, recostada o sentada. Lleva un sistema de fijación de velcro.

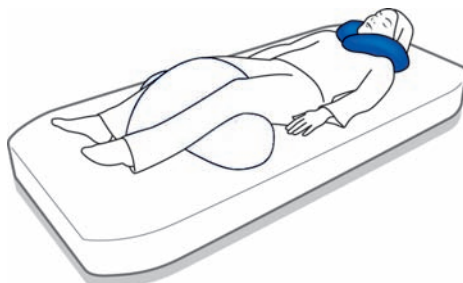


¿QUÉ ES UNA ESCARA?

Zona localizada de necrosis del tejido isquémico que se desarrolla debido a una compresión durante un periodo de tiempo prolongado de los tejidos blandos que hay entre una prominencia ósea y una superficie externa.

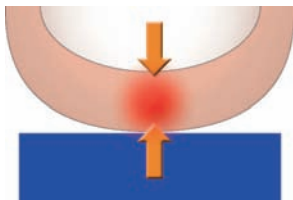

DIFERENTES ESTADIOS DE UNA ESCARA

- A. Piel sana
- B. Enrojecimiento de la piel
- C. Pérdida de tejido epitelio
- D. Necrosis
- E. Úlcera

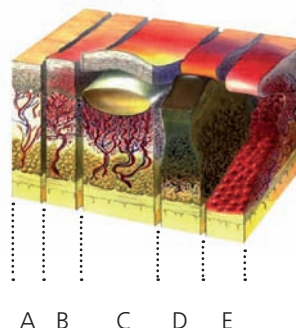

TOPOGRAFÍA DE LA ESCARA

Primera zona amenazada por el riesgo de escaras:

La zona Sacra acumula el 50% de las escaras (sacro, isquión, trocánter)

Segunda zona de riesgo:


Los talones, 35%

Tercera zona:

El occipital, 10%

Cuarta zona:

Los omoplatos, 5%

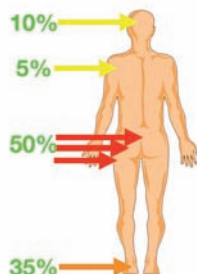

ETIOLOGÍA, (causas)

Inmovilización, mas de 2 o 3 horas de compresión prolongada.

Morfología y peso.

Edad y Estado nutricional.

Maceración por decúbito, hipertermia, déficit inmunitario. Falta de sensibilidad, parálisis, neuropatías.

Problemas circulatorios.

NIVEL DE RIESGO

Para determinar el nivel de riesgo hay que tener en cuenta los factores fisiológicos intrínsecos: morfología, edad, movilidad, incontinencia (maceración), nutrición, patologías.

Definimos el riesgo, (podemos utilizar el test de Braden, Norton o Waterlow) clasificandolo en 4 categorías: leve, medio, elevado y muy elevado.

Recuerde que escoger un cojín no solo es un asunto de eficacia, sino también de confort y estabilidad.

La prevención es con seguridad la mejor estrategia contra las úlceras por presión, y para ello contamos con dos ayudas de gran efectividad por sus resultados contrastados: los sistemas dinámicos de colchón de aire con compresor alternante y los cojines antiescaras.

AD995 COLCHÓN DINÁMICO DE CONTROL ELECTRÓNICO LEGACY MAX

Sistema de tratamiento y prevención de las úlceras de decúbito gracias a la alternancia de las presiones que evita una compresión vascular prolongada en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo y que presenten un riesgo de escaras elevado.

CARACTERÍSTICAS DEL COLCHÓN

- 18 tubos de 13 cm de alto
- CPR. Desinflado rápido (para atención en caso de parada cardiorrespiratoria)
- Sistema de ventilación por microporos
- Función cojín
- Conectores rápidos ('quick release')
- Colchón nylon / PU de 90 x 190 cm, funda con cremallera



Peso
máximo:
130 kg

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR

- Rango de presión regulable de 10-70 mm Hg* (en milímetros de mercurio)
- Flujo de aire de 8 litros/ minuto
- Función Estática (que sustituye a la alternante)
- **Función Autofirm** (ver recuadro)
- Dimensiones 34 x 12 x 25cm
- Led indicador de presión baja
- Led de indicador de presión normal
- Alarma sonora (desconectable)
- Conectores rápidos ('quick release')
- Ciclo regulable en 10, 15, 20 o 25 minutos (2 leds para cada nivel)



SISTEMA AUTOFIRM

El cuidador cambia el sistema de alternante a estático para, por ejemplo, movilizar al paciente. Si después el cuidador olvidase volver a poner el colchón de nuevo en alternante tendríamos un serio problema ya que el colchón en estático no cumple la función para la que ha sido diseñado: la prevención de úlceras de decúbito. Esta situación no es posible con el Legacy Max si presionamos el botón Autofirm. El compresor se pone en estático, trabaja a su máximo nivel (70mmHg) pero a los 30 minutos vuelve automáticamente a alternante y a los niveles anteriormente seleccionados.

AD990 COLCHÓN DINÁMICO DE CONTROL ELECTRÓNICO LEGACY

Colchón dinámico de prevención de úlceras de decúbito. Sistema de tratamiento y prevención de las úlceras de decúbito gracias a la alternancia de las presiones que evita una compresión vascular prolongada en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo y que presenten un riesgo de escaras de medio a elevado.

CARACTERÍSTICAS DEL COLCHÓN

- 18 tubos de 10 cm de alto
- CPR. Desinflado rápido (para atención en caso de parada cardiorrespiratoria)
- Sistema de ventilación por microporos
- Función cojín
- Conectores rápidos ('quick release')
- Colchón nylon / PU de 90 x 190 cm, funda con cremallera



Peso
máximo:
130 kg

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR

- Rango de presión regulable de 30-80 mm Hg* (en milímetros de mercurio)
- Ciclo de 12 minutos
- Flujo de aire de 8 litros/ minuto
- Led de indicador de presión normal
- Led indicador de presión baja
- Conectores rápidos ('quick release')




AD992 COMPRESOR REGULABLE GENESIS+ COLCHÓN

Este equipo es especialmente potente (8 litros de aire por minuto) y muy silencioso. Se regula en un margen de presión de 50 a 105 mm Hg. El colchón de células de aire que se hinchan alternativamente (ciclo de 6 minutos) gracias a este compresor regulable, sirve para prevenir la aparición de úlceras de decúbito en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo.

Recomendado tanto para su uso domiciliario como institucional. VER MEDIDAS



Tamaño del colchón:
200 x 90 cm

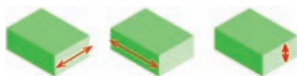

modelo	ancho	fondo	alto	peso
AD992	13 cm	26 cm	8 cm	1,5 kg
AD993	17 cm	8 cm	16 cm	1,1 kg



Peso
máximo:
100 kg

AD993 COMPRESOR COMPACTO REGULABLE METRO+ COLCHÓN

Este equipo tiene el compresor mas compacto y de medidas más reducidas del mercado, indicado para su uso en la atención domiciliaria. Potente, ligero (4 litros de aire por minuto) y muy silencioso.

El colchón de células de aire que son hinchadas alternativamente por un compresor regulable sirve para prevenir la aparición de úlceras de decúbito en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo.

VER MEDIDAS



Peso
máximo:
100 kg



AD996 COLCHÓN VISCOFLEX



Colchón de espuma viscoelástica moldeada con efecto memoria, inserto en espuma HR. Con funda integral de poliuretano.




modelo	ancho	fondo	alto
AD996A	90 cm	190 cm	14 cm
AD996B	90 cm	200 cm	14 cm
AD996C	105 cm	200 cm	14 cm
AD996D	135 cm	200 cm	14 cm

CONCEPTO INNOVADOR ideal para camas articuladas.

Forma anatómica:

Incorpora una forma anatómica en la zona del sacro (aumento del espesor de espuma viscoelástica), para incrementar la superficie de contacto y contribuyendo a la reducción de las presiones máximas.

Proporciona en todo momento el espesor adecuado independientemente de la posición que se encuentre el colchón.

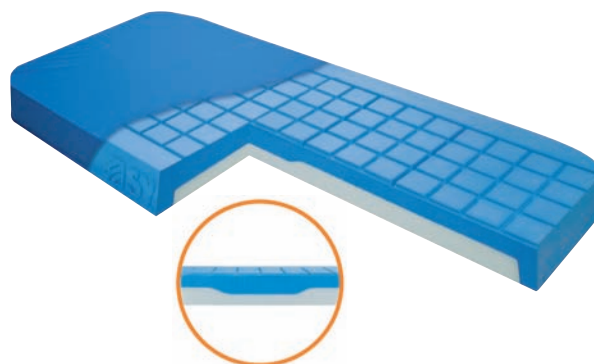


Colchón Viscoflex® con inserto




Colchón en posición plana


Colchón Viscoelástico convencional

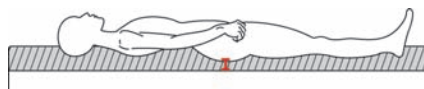

Colchón en posición plana

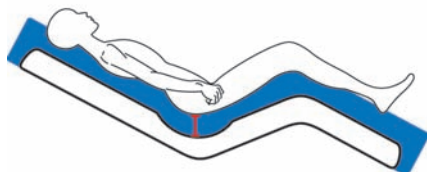

Colchón en posición articulado.
La zona del sacro no pierde la altura de espuma viscoelástica.

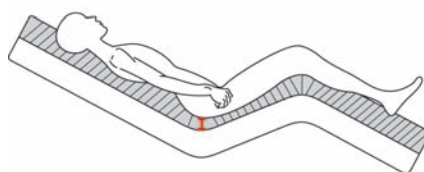

Colchón en posición articulado.
La zona del sacro pierde la altura de espuma viscoelástica y aumenta el riesgo de escaras.

Suministrado comprimido y enrollado

- Fácil de enviar y transportar.
- Reduce el espacio de almacenamiento.




Esquinas Redondeadas.

Ideal para la colocación de trapecios de potencia.


Canales de circulación del aire.

Los canales que hay entre los bloques, permiten la circulación del aire facilitando la oxigenación de la piel.

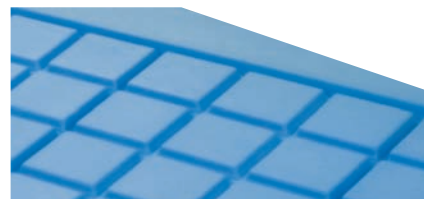


Funda integral de poliuretano.

Los colchones Viscoflex incorporan una funda fabricada en poliuretano, hipoaérgico, anti-bacterial, anti-gérmenes y anti-hongos. Transpirable e impermeable a los líquidos y con base anti-deslizante.

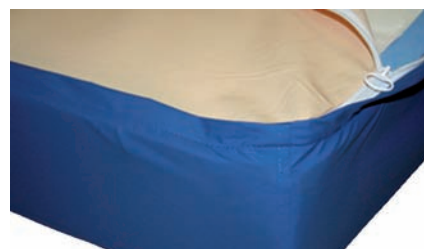

AD953PACK COLCHÓN VISCOELÁSTICO MEMORY


Colchón para la profilaxis de las úlceras de decúbito, previene la aparición de llagas en las personas encamadas durante largos periodos. La espuma viscoelástica, con efecto memoria, es sensible a la forma y al calor, por lo que resulta un colchón sumamente cómodo. Funda impermeable de poliuretano. Transpirable. Se desenfunda con cremallera y es lavable. Base antideslizante. También disponible sin funda. ref. AD953

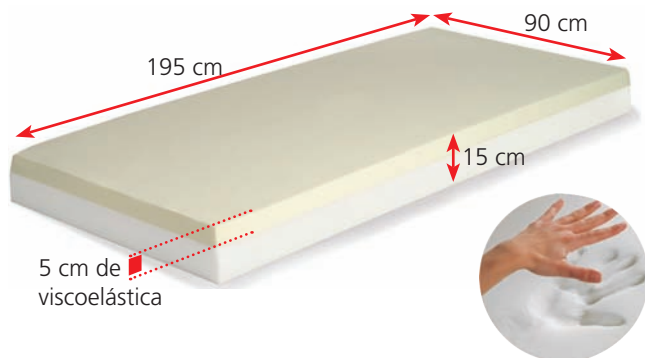

AD956 COLCHÓN STANDARD

Espuma de poliuretano. Suministrado con funda de algodón lavable a 60°. Se envía envasado al vacío para facilitar su transporte y almacenamiento.

Densidad 32-40 Kg/m³

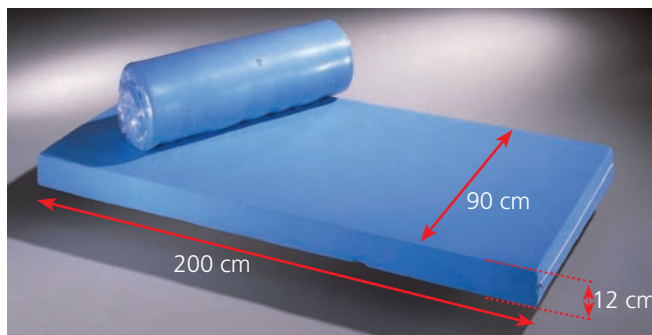

AD997 COLCHÓN POLYPLOT


Para prevenir la aparición de úlceras por presión, moldeado en espuma de poliuretano de Alta Resistencia de 40 Kg / m³ permite la ventilación entre los bloques independientes, ayudando a mantener la piel seca y facilitando su oxigenación. Los bloques de espuma acompañan los movimientos del cuerpo minimizando la maceración de la piel y los roces.



Facilita el transporte y almacén: ocupa menos volumen



Esquinas Redondeadas.
Facilita la instalación de trapecios o barandillas

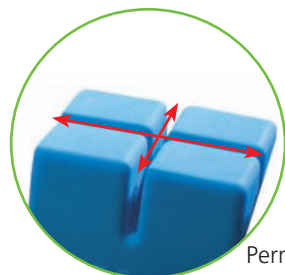

Permiten una buena ventilación

modelo	ancho	fondo	alto
AD997A	90 cm	190 cm	14 cm
AD997B	90 cm	200 cm	14 cm




Suministrado con funda integral impermeable y transpirable, de poliuretano hipoalérgico, anti-bacterias y anti-hongos



COLCHONES DE LÁTEX

El látex es un material perfectamente morfológico que reacciona al contacto con el cuerpo y sus movimientos amoldándose a sus formas. En vez de causar un excesivo hundimiento, sosteniente todos los músculos que se relajan y el cuerpo se beneficia de un descanso verdaderamente reparador. Por su estructura micro-alveolada compuesta por millones de células abiertas, el látex es transpirable. Antialérgico: el látex constituye un ambiente hostil a los ácaros del polvo causantes de las alergias más comunes, además el látex no retiene la humedad. Es la garantía de una higiene perfecta.

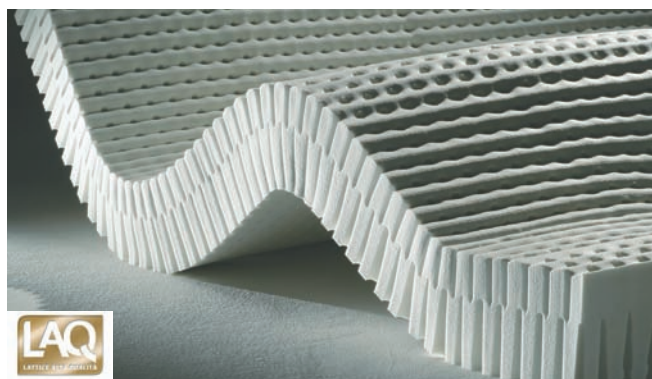

AD930 COLCHÓN DE LÁTEX CON FUNDA SANITARIA. 15 cm FOUR SEASONS

Bloque de **15 cm de alto**, 90 x 190 cm. Desenfundable y con 5 zonas de sustentación diferenciadas.

Funda impermeable y transpirable de poliuretano incluida.

Fácil de limpiar con una esponja húmeda y lavable en lavadora, máx. 90°. Anti-bacterias y anti-hongos.


Cumple normativa ignífuga BS 5852 CRIB 5



Colchón 100% látex alta calidad

AD958 COLCHÓN DE LÁTEX. 15 cm CLASSIC

Bloque de látex 100% bialveolado de **15 cm de altura** con 5 zonas de sustentación diferenciadas. Analérgico y sanforizado. Funda interior en mezcla de algodón y poliéster. Funda extraíble en tejido de puro algodón entrelazado.

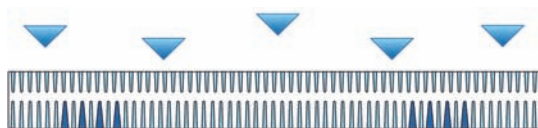


modelo	ancho	largo
AD958A	90 cm	190 cm
AD958B	135 cm	190 cm
AD958C	150 cm	190 cm
AD958D	90 cm	200 cm
AD958E	135 cm	200 cm
AD958F	150 cm	200 cm

AD935 COLCHÓN DE LÁTEX. 20 cm ROYAL

Bloque de látex 100% bialveolado de **20 cm de altura** con 7 zonas de sustentación diferenciadas y 3 de firmeza. Funda interior en jersey de algodón. Tejido stretch.

Capa de fibra hueca analérgica de alta termorregulación 100 g/m²

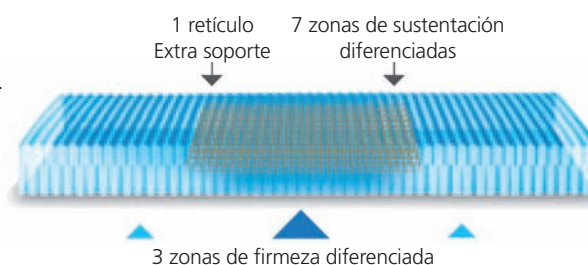

modelo	ancho	largo
AD935A	90 cm	190 cm
AD935B	105 cm	190 cm
AD935C	135 cm	190 cm
AD935D	150 cm	190 cm
AD935E	90 cm	200 cm
AD935F	105 cm	200 cm
AD935G	135 cm	200 cm
AD935H	150 cm	200 cm

PROTECTORES Y FUNDAS COMPLETAS DE COLCHÓN

RC114P RIZO DE ALGODÓN + POLIURETANO

Fundas completas y protectores de rizo de 100% algodón y poliuretano.

Gracias a las extraordinarias cualidades del poliuretano inducido (microporoso, impermeable y transpirable) se evita el calor excesivo y el sudor.


Antialérgico y reciclable.

Alarga la vida del colchón y lo mantiene seco.

Los protectores tienen un elástico en todo su perímetro y las fundas completas tienen cremallera con solapa, fáciles de colocar y de desfundar.

Lavables a 90°.

Disponibles: en protectores o fundas completas

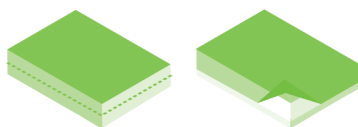

material	funda 90 cm ancho	protector 90 cm ancho *
Rizo	RC114F	RC114P
Poliuretano	RC115F	RC115P

* Compatibles para largos de 190 a 200 cm.

RC115P POLIURETANO IGNÍFUGO

Fundas completas y protectores fabricados en poliuretano microporoso, impermeable y transpirable.

Material ignífugo y antialérgico (no retiene el polvo ni los ácaros).

Higiénico y reciclable.

Lavable a 90° y fácil de colocar, con elásticos en todo el perímetro en el caso de los protectores y cremallera con solapa para las fundas completas.

Evita el calor y el sudor.

Alarga la vida del colchón y lo mantiene seco.

Disponible: en protectores o fundas completas




COJINES ANTI ESCARAS

La función principal de los cojines anti-escaras es la prevención de úlceras por presión mediante la efectiva distribución y alivio de las presiones. Además favorecen la adopción de la postura adecuada y los posibles beneficios de facilitar una buena postura son innumerables: buena integridad de la piel, comodidad, seguridad, mayor movilidad, mejores funciones de autoayuda e independencia, minimizar dolores y deformidades, etc. En definitiva, estimulan el mantenimiento de la salud y previenen futuras discapacidades.

TOPOGRAFIA DE LA ESCARA

La zona más amenazada por el riesgo de escaras es la zona sacra, que acumula el 50% de las escaras (sacro, isquión, trocánter)

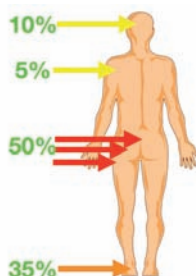

ESCOGER UN COJIN ANTI ESCARAS

El cojín universal no existe, ya que ningún cojín puede convenir en todas las situaciones. Escoger un cojín depende únicamente del paciente, su patología, su morfología y los factores de riesgo.

NIVEL DE RIESGO:

Para determinar el nivel de riesgo hay que tener en cuenta los factores fisiológicos intrínsecos: morfología, edad, movilidad, incontinencia (maceración), nutrición, patologías. Definimos el riesgo, (podemos utilizar el test de Braden, Norton o Waterlow) clasificándolo en 4 categorías: leve, medio, elevado y muy elevado.

Recuerde que escoger un cojín no solo es un asunto de eficacia, sino también de confort y estabilidad.

EL PAPEL DE LOS COJINES ANTI-ESCARAS

Repartir las presiones

Las zonas de riesgo mas elevado de escaras están donde las presiones ejercidas sobre los tejidos por el asiento y el hueso son máximas.

El papel de los cojines anti escaras consiste en reducir las presiones donde éstas son mayores, repartiéndolas de la manera más armoniosa posible sobre la superficie del cojín. Transferir la presión a zonas de menor riesgo permite una reducción de las presiones máximas y reduce al mismo tiempo el riesgo de úlceras de decúbito.

La transferencia de presiones a zonas de menor riesgo en un cojín se produce gracias a:


- Utilizar materiales blandos
- La elasticidad de los materiales
- El aumento de la superficie de contacto con el asiento.
- La reducción de la fricción

Reducir la maceración

La humedad y los efectos de la maceración constituyen un factor mayor en la aparición de escaras. El papel de los cojines anti-escaras es la prevención gracias a:

- La ventilación del cojín
- La transpiración de la funda del cojín.

COJINES DE AIRE CONFORM

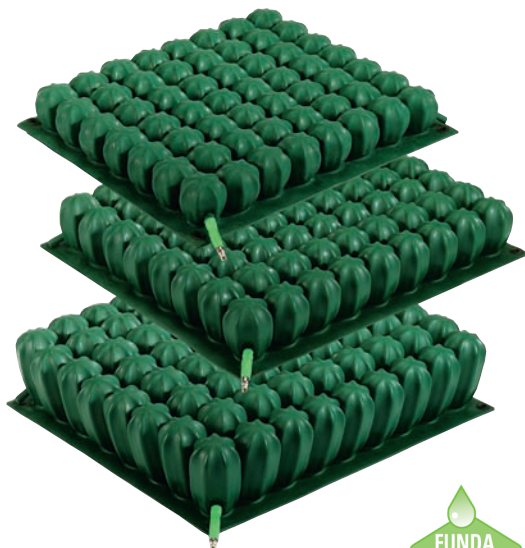

Su eficacia terapéutica en la prevención de úlceras de decúbito ha sido clínicamente probada. Células flexibles, conectadas entre sí, que disminuyen y reparten mejor las presiones, y facilitan la circulación de la sangre en los capilares. Fabricado en caucho natural, especialmente elástico y resistente.

La incidencia de posibles pinchazos, será sensiblemente menor con el caucho, y sus reparaciones mas cómodas y sencillas que con otros cojines de materiales sintéticos. Fácil de limpiar y desinfectar. El cojín puede ser inflado y desinflado de acuerdo con el peso de cada persona.

Se suministra con una funda de algodón, una bomba para hincharlo, y un kit para reparaciones.

modelo	ancho	fondo	alto
CH3939	39 cm	39 cm	10 cm
CH4539	45 cm	39 cm	10 cm
CD3939	39 cm	39 cm	7,5 cm
CD4539	45 cm	39 cm	7,5 cm
CN3939	39 cm	39 cm	5 cm
CN4539	45 cm	39 cm	5 cm



Peso máximo:
100 kg


COJÍN DE CELDAS DE AIRE CON DOS VÁLVULAS POLYAIR



Prevención de las úlceras por presión con riesgo elevado o con trastorno de la estabilidad, mejorando el control postural.


El Laxprene, un material moderno

Una fórmula especial a base de neopreno para conseguir un material moderno muy flexible y de tacto extraordinariamente suave. Un material antialérgico, resistente y duradero. Fácil de reparar (con un parche de caucho)

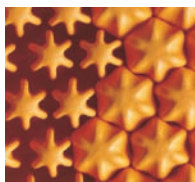

Diseño en “nido de abeja”

Esta composición aumenta el número de celdas (densidad), y por lo tanto aumenta la superficie de contacto mejorando sensiblemente el reparto de las presiones.

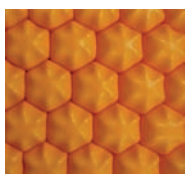

Funda específicamente estudiada

Fabricada en P.U., transpirable e impermeable a los líquidos:

- Adecuado para pacientes con incontinencia.
- Disminuye los efectos de la maceración y facilita la transpiración cutánea. La funda está confeccionada a partir de tejidos totalmente antialérgicos y en la parte inferior incorpora un tejido antideslizante.

Aspecto práctico: dispone de un bolsillo desmontable, situado en la parte delantera del cojín para guardar pequeños objetos.




Dos zonas separadas (doble válvula)

Los cojines Polyair disponen de dos zonas totalmente independientes para hinchar cada una a la presión deseada. Este diseño hace posible la correcta rectificación de los desequilibrios (pelvis) en la persona, mientras que proporciona el restablecimiento de la estabilidad y control postural.



POLYAIR 6 cm (perfil bajo):

modelo	dimensiones	peso recomendado
C3636-6	36 x 36 cm	60 kg
C4040-6	40 x 40 cm	80 kg
C4043-6	40 x 43 cm	90 kg
C4343-6	43 x 43 cm	110 kg
C4640-6	46 x 40 cm	120 kg

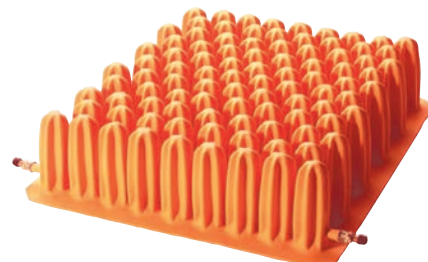

POLYAIR 10 cm (perfil alto):

modelo	dimensiones	peso recomendado
C4040-10	40 x 40 cm	80 kg
C4043-10	40 x 43 cm	90 kg
C4343-10	43 x 43 cm	110 kg
C4640-10	46 x 40 cm	120 kg
C5146-10	51 x 46 cm	160 kg

Efectivo, ergonómico y confortable

- Las celdas de aire se adaptan a la morfología de la persona y optimizan la superficie de contacto, transfiriendo la presión a zonas de menor riesgo permitiendo registrar una reducción de las presiones máximas.
- Respeta y se adapta a todas las anatomías gracias a su sistema de doble zona, permitiendo en cualquier momento realizar un rápido ajuste del cojín a la morfología de cada persona.
- Efectivo contra los efectos de la maceración, gracias a:
 - Una mejor ventilación en las zonas de riesgo.
 - La transpiración de la funda del cojín, (fabricada en P.U., transpirable e impermeable a los líquidos).




Un dispositivo eficaz y preciso de hinchado

- Un nivel inadecuado de hinchado reduce la eficacia de los cojines de celdas de aire.
- Las variaciones de hinchado de las distintas zonas (en varios mmbar) no son detectables por la mano. La única manera de hinchar correctamente una zona del cojín de aire, es mediante un manómetro. Sólo con el manómetro es posible tener en cuenta el peso y la superficie de contacto para cada persona, siendo una garantía de prevención eficaz.



Desequilibrio de la pelvis

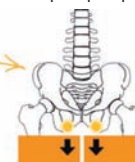


Reequilibrio a través de sistema de dos zonas: restablecimiento de la estabilidad



C9 COJÍN ERGONÓMICO VISCOFLEX- PLUS POSTURAL



Cojín anatómico fabricado en espuma viscoelástica con efecto memoria y con inserto ergonómico

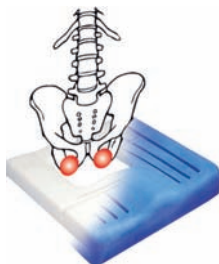

Reduce las presiones en las zonas de mayor riesgo: sacro e isquión.

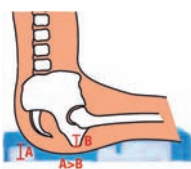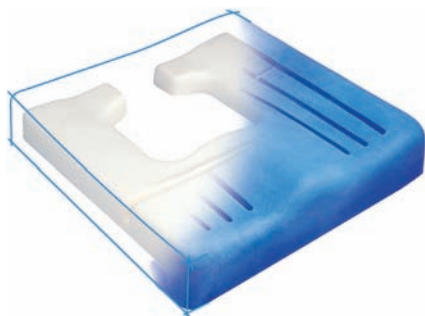

El inserto está dimensionado en relación al isquión. Se ha considerado incluso la frecuente adopción de una incorrecta postura, que de hecho este cojín intenta prevenir bloqueando el isquión cuando se desliza hacia adelante.

Forma anatómica

- Favorece una buena postura y una mejor estabilidad
- Aumentar la superficie de contacto para reducir las presiones.
- Un asiento cómodo y que proporciona confort al paciente



El inserto ergonómico: un nuevo concepto en prevención. Permite la inserción óptima de las protuberancias de los huesos (sacro, isquión) en el cojín. Al mismo tiempo favorece la estabilidad.

modelo	medidas	peso máximo
C9C	32 X 32 cm	50 kg
C9D	36 X 36 cm	70 kg
C9E	38 X 38 cm	90 kg
C9A	42 X 42 cm	100 kg
C9B	45 X 42 cm	110 kg
C9F	51 X 46 cm	150 kg



La adopción de una mala postura al deslizarse hacia adelante es muy frecuente. Mientras las escaras o úlceras de decúbito, se han atribuido tradicionalmente de forma exclusiva a la posición supina, deslizarse hacia adelante cuando se está sentado es ahora reconocido como un importante factor de riesgo.


Los terapeutas defienden apasionadamente la importancia de una buena postura al sentarse, lo que llaman sedestación y es que esto no solo influye en la salud del paciente sino también en su actitud y su forma de relacionarse con el entorno.

C10 COJÍN ANATÓMICO VISCOFLEX

Cojín anatómico fabricado en espuma viscoelástica con efecto memoria



Reducción de las presiones

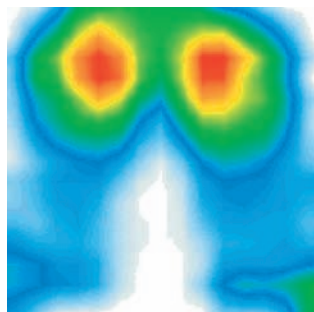


Sin cojín



Con VISCOFLEX

Forma anatómica. Favorece una buena postura y una mejor estabilidad además de aumentar la superficie de contacto para reducir las presiones.

El diseño del cojín favorece una mejor ventilación y además acompaña los movimientos del cuerpo reduciendo la fricción y la maceración.

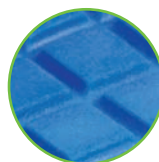

Funda impermeable y transpirable. Fácil de limpiar e ideal en casos de incontinencia.

modelo	medidas	peso máximo
C10C	36 X 36 cm	70 kg
C10D	38 X 38 cm	90 kg
C10A	42 X 42 cm	100 kg
C10B	45 X 42 cm	110 kg
C10E	48 X 43 cm	130 kg
C10F	51 X 46 cm	140 kg
C10G	56 X 46 cm	230 kg (bariátricos)
C10H	61 X 50 cm	270 kg (bariátricos)

C11 COJÍN VISCOFLEX CON ABDUCTOR

Cojín anatómico fabricado con espuma viscoelástica con efecto memoria que incorpora un abductor estabilizador graduable.



Un abductor de forma anatómica. Se adapta a las formas curvas de las piernas, con formas redondeadas y suave al tacto. Especialmente diseñado para el confort del paciente.

El abductor es completamente independiente al cojín y se regula fácilmente en profundidad (aprox. 10 cm) por medio de velcro, para adaptarse a la morfología de cualquier paciente.

Funda impermeable resistente a la orina y transpirable.

Prevención de caídas: mantiene el cojín en posición, independientemente de la presión ejercida en la parte delantera del cojín.

modelo	medidas	peso máximo
C11A	42 X 42 cm	100 kg
C11B	45 X 42 cm	110 kg


C12 COJÍN ANATÓMICO DUOFORM

Lo último en el diseño de cojines para la prevención de úlceras por presión: innovadora combinación de dos tipos de gel y espuma de alta densidad para conseguir un cojín anatómico de óptima prevención de las úlceras por presión y que a la vez favorezca una buena estabilidad y proporcione confort.

Los diferentes materiales se moldean a la vez, son totalmente solidarios entre sí de manera que no se mueven dentro de la funda del cojín.



modelo	medidas	peso máximo
C12A	42 x 42 cm	110 kg
C12B	45 x 42 cm	120 kg

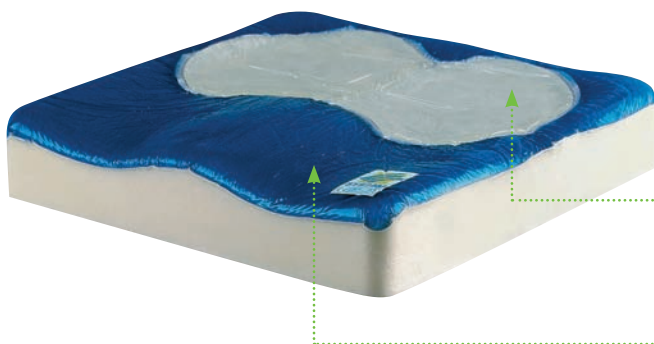

Nuevo concepto multidensidad:

ZONA BLANCA: gel fluido de última generación, visco elástico y de menor densidad que garantiza un buen reparto de las presiones en las zonas de mayor riesgo: isquion y sacro.

ZONA AZUL: gel fluido de mayor densidad para las partes del cuerpo con menor riesgo, para garantizar una buena estabilidad y el máximo confort.

H8870 CUBRE COJÍN ANTIDESLIZANTE ONE-WAY

ONE-WAY resbala solamente en una dirección, cosido en forma de tubo, es muy práctico para usarlo en la silla, en la cama o en el asiento del coche. Permite a la persona mantenerse erguida y favorece una buena postura. Impide resbalarse hacia delante de forma tan habitual en personas que permanecen sentadas durante largos periodos.



Como hemos mencionado en páginas anteriores, la adopción de una mala postura no solo favorece la aparición de escaras sino que afecta en la manera de percibir y de relacionarse con el entorno. Conforme la persona se desliza hacia delante, la cabeza y consiguientemente la mirada baja adoptando una actitud poco comunicativa y ausente.

C8 COJÍN VISCOELÁSTICO POSTURAL

Cojín viscoelástico que proporciona gran estabilidad, alivia las presiones y previene la aparición de escaras, a la vez que ayuda a mantener una buena postura ya que impide que la persona se deslice hacia adelante y adopte una postura perjudicial, caso muy frecuente en las personas que permanecen sentadas durante largos periodos de tiempo.

Funda de PU (poliuretano) transpirable e impermeable a la vez.

Medidas: 44 x 41 cm




ESPUMA
VISCOELÁSTICA



H9685 COJÍN CUÑA PARA COXIS

Ideales para el coche o la oficina, alivia los dolores de la parte baja de la espalda y de las piernas. Hace bascular la pelvis hacia delante y ayuda a colocar la columna en la posición correcta. Tiene un corte en la parte trasera para que el coxis quede liberado de cualquier presión.

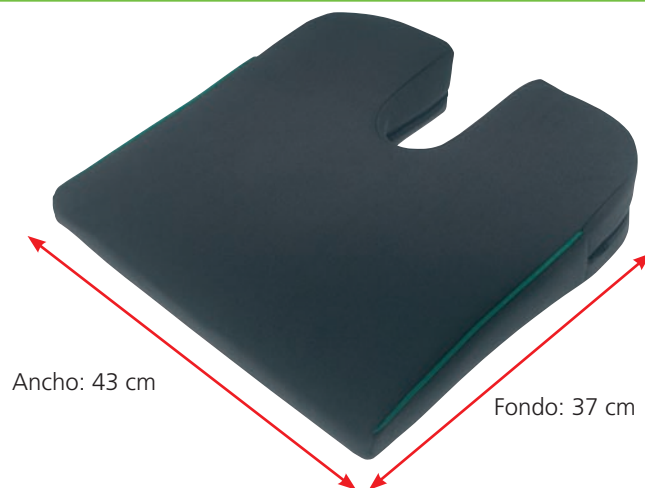

C7 COJÍN VISCOELÁSTICO ANATÓMICO

Cojín viscoelástico anatómico que alivia las presiones, actuando para prevenir la aparición de escaras en las personas que permanecen sentadas durante largos periodos de tiempo a la vez que, gracias a su forma anatómica, proporciona una gran estabilidad y ayuda a mantener una buena postura. Funda de PU, (poliuretano), transpirable e impermeable a la vez.

Disponible en dos medidas:

modelo	ancho	fondo	alto
C7A	41 cm	41 cm	7 cm
C7B	45 cm	41 cm	7 cm



ESPUMA
VISCOELÁSTICA



C2 COJÍN DE GEL DE SILICONA




Cojín de flotación que distribuye de forma uniforme el peso para aliviar la presión continuada en los puntos de apoyo, minimizando el riesgo de formación de úlceras de decúbito en personas que permanecen sentadas largos periodos de tiempo. Funda de poliuretano con base antideslizante. Disponible en dos tamaños. VER MEDIDAS

modelo	ancho	fondo	alto
C2A	40 cm	40 cm	3 cm
C2B	45 cm	43 cm	3 cm



Peso
máximo:
100 kg

C6 COJÍN DE SILICONA SÓLIDA STRATUS

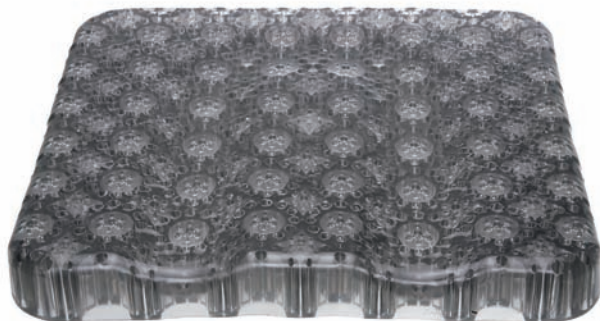

modelo	ancho	fondo	alto
C6	43 cm	40 cm	5,5 cm

Fabricado con gel de silicona sólida, su especial diseño distribuye las presiones de forma uniforme para aliviar la presión, hasta un 80%. y minimiza el riesgo de formación de úlceras de decúbito. La distribución de sus celdas, mantiene el cojín aireado y tiene un comportamiento excelente disipando la temperatura. Stratus se puede utilizar durante largos periodos y en cualquier temperatura ambiente. Funda transpirable de poliuretano.



Peso
máximo:
100 kg

C5 COJÍN DE FLOTACIÓN LÍQUIDA

Cojín antiescaras de flotación líquida. Gran eficacia y prestaciones. Funda de terciopelo con asa. Disponible también con asiento en herradura.



Peso
máximo:
100 kg




modelo	ancho	fondo	alto
C5C	42 cm	42 cm	4 cm
C5H	42 cm	42 cm	4 cm

Lumbar Rolls

Cuidado efectivo de los dolores de espalda de la mano de profesionales.

Nadie sabe tanto de esta dolencia tan común como el reconocido fisioterapeuta Robin McKenzie, autor de varios libros sobre el tema y que ha dedicado más de 40 años a encontrar soluciones efectivas para el alineamiento de la espalda y el cuello.

Los cojines originales McKenzie LUMBAR ROLLS ayudan en la prevención del dolor de espalda al reducir la presión sobre los discos vertebrales, si se colocan correctamente en el respaldo del asiento, a la altura de la cintura. Los cojines tienen una cincha ajustable y una funda lavable.

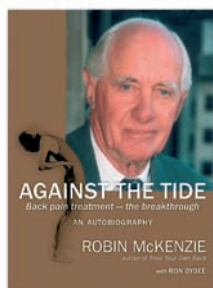

“Todos sabemos lo seriamente que el dolor de espalda y de cuello puede afectar nuestras vidas, pero no tiene porque ser así”

Robin McKenzie

H6101

COJÍN LUMBAR McKenzie ORIGINAL

Este fue el primer cojín lumbar del mundo. Es de densidad media, y aunque parece algo grande se comprime fácilmente dando el soporte apropiado a la columna vertebral.



H6102

COJÍN LUMBAR McKenzie ALTA DENSIDAD

Un cojín de densidad firme y en forma de D que se recomienda utilizarlo en asientos acolchados, o blandos tales como sofás o butacas. También aconsejado para aquellas personas de complexión robusta o voluminosa que requieren gran soporte.



H6103

COJÍN LUMBAR McKenzie MINI ROLL

Densidad media y de diseño más plano que el Original, diseñado para usarlo en asientos modernos con algo de soporte lumbar. También recomendable para personas mayores o de talla pequeña que no toleran fácilmente cojines lumbares de mayor tamaño.



Conserve su independencia vaya donde vaya

El cojín elevador portátil que transforma una silla o butaca en asiento elevador automático.

Seat Assist es un cojín auto-propulsado (con la ayuda de un pistón hidráulico) que ayuda a sentarse y a levantarse con suavidad de una silla o butaca. Levanta hasta el 70% del peso del usuario. Ligero y portátil, ayuda a mantenerse independiente y activo.

up^{easy}
Seat Assist

UL.100 COJÍN ELEVADOR SEAT ASSIST

Dimensiones asiento:

43 cm de ancho
48 cm de fondo



Sistema de elevación por pistón hidráulico, sin enchufes, ni pilas ni cables.

Ligero y portátil con asa integrada

Base antideslizante
38 x 41 cm.



Peso total:
5,4 kg



Peso máximo:
100 kg



Para levantarse, sencillamente inclínese hacia delante con normalidad y empiece a levantarse; el pistón hidráulico del mecanismo de elevación se activa automáticamente y le levanta suavemente de la silla o butaca de manera estable y levantando hasta el 70% del peso. Cuando alguien se deja caer en la silla el cojín acompaña sus movimientos y amortigua el peso evitando posibles daños.



NOTA: Utilizar solamente en sillas o butacas que tengan al menos un reposabrazos para agarrarse. No se recomienda el uso en sillas de ruedas, automóviles, sillones reclinables o sillas de oficina con ruedas.



Para mantener una vida independiente en el hogar

Power Seat es un cojín elevador eléctrico que colocado en un asiento, sube y baja suavemente para ayudar a levantarse y sentarse.

up^{easy}
Power Seat™

UL.500 COJÍN ELEVADOR POWER SEAT



Una palanquita, que se puede colocar a derecha o izquierda, actúa como interruptor. Simplemente tirando de ella hacia arriba hace subir el asiento. Presionándola el asiento bajará, y en la posición intermedia parará el asiento en cualquier posición. Práctico para las personas que quieren seguir usando su sillón o butaca preferida. Útil para personas que ya tienen un sillón elevador pero necesitan una ayuda en otra habitación. Imprescindible para mantener la independencia de aquellos que viven solos y necesitan ayuda para levantarse de la silla o el sofá. Indicado para aquellas personas que necesitan ayuda para levantarse o sentarse.




Peso total:
5,4 kg



Peso máximo:
130 kg

H4202 REPOSAPIÉS PLEGABLE

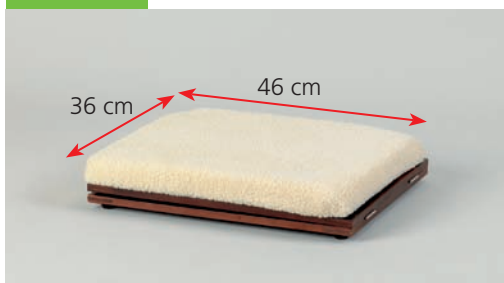

Chasis de madera que se ajusta en altura y en inclinación para descansar las piernas, y para mayor comodidad lleva un acolchado de borreguito.



Almohadas Viscoelásticas

La espuma viscoelástica, también llamada Memory Foam, se adapta a la forma de la cabeza y el cuello para proporcionar soporte y comodidad personalizados. Sensible a la presión y el calor del cuerpo.



ELEGIR BIEN UNA ALMOHADA

La almohada debe responder a una doble función: sostener la nuca respetando la curva de la espalda en la posición más cómoda y correcta posible y también repartir las presiones para favorecer una buena circulación.

Cuidando las cervicales al dormir es posible evitar dolores al levantarse, aliviar ronquidos y evitar sueños agitados.

La espuma viscoelástica, también llamada memory foam es sensible a la presión y al calor del cuerpo, por lo que se adapta a la forma de la cabeza y el cuello proporcionando un confort personalizado.



H4028 ALMOHADA EXTRA-GRANDE

Muchas personas encuentran estas almohadas mas grandes de lo habitual muy beneficiosas para su descanso y consiguen un sueño reparador con ellas. Fabricada con memory foam. 65 x 45 x 12 cm.

H4028S ALMOHADA PLUS 70 x 40 cm.

H4028M ALMOHADA PLUS 90 x 40 cm.

El último logro en ayudas para el descanso, la espuma viscoelástica sensible al calor y a la presión se adapta de forma armoniosa a la formas del cuello y cabeza. Disponible en dos medidas.

H4046 ALMOHADA CERVICAL

Diseño contorneado que soporta la cabeza y el cuello para el alineamiento natural de la columna. Fabricada con memory foam. 50 x 30 cm

Características de nuestras almohadas



H4030 ALMOHADA MUSIC PILLOW

Fabricada en espuma viscoelástica con dos inapreciables y pequeños altavoces incorporados durante el proceso de fabricación. Un discreto jack que sale de la parte posterior, se puede conectar a un equipo de música. Muy práctica para una gran cantidad de situaciones, como ayudar a conciliar el sueño, tranquilizar a pacientes encamados inquietos, escuchar la radio o la TV o simplemente por placer.

Medidas: 55 x 35 cm
(reproductor de música no incluido)



H4070 ALMOHADA DOS METROS

Casi dos metros de almohada para relajarse. Soporta y alivia las presiones en todo el cuerpo, facilitando un descanso reparador y menos agitado. Se adapta a cualquier postura y resulta muy placentera para muchas personas a las que les gusta de colocar un cojín entre las piernas o debajo de las rodillas, por ejemplo.

Medidas 180 x 20 cm.



H4060 ALMOHADA LONG BODY

Una almohada muy versátil para dar soporte a varias partes del cuerpo a la vez. Resulta muy cómoda en la cama para estabilizar todo el cuerpo y proporcionar gran confort.

Permite una gran variedad de usos, en el suelo o en la cama para aguantar la cabeza y el cuello, o sentados para rodear la zona lumbar o incluso entre las piernas para mantener las caderas alineadas, una postura agradable y habitual para muchas mujeres.

Medidas: 170 x 35 cm.



Esta almohada se conoce también con el nombre de maternity pillow, ya que es muy popular entre las madres.

H4101 RESPALDO RELAX DE ESPUMA VISCOELÁSTICA

Previene las úlceras por presión, al mejorar significativamente la distribución de las presiones, a la vez que su forma anatómica proporciona un gran confort.

Los soportes laterales protegen la zona dorsal y el soporte lumbar favorece la adopción de la postura correcta.



FORMA ANATÓMICA

Dos tipos de viscoelástico:
Mejora la distribución de las presiones.



modelo	ancho de la silla
H4101	de 36 a 45 cm
H4101L	de 42 a 50 cm

Viscoelástico BLANCO:

Viscoelástico blando, libera las presiones de la zona vertebral, favorece un correcto ajuste dorsal y proporciona una gran comodidad.

Viscoelástico AZUL:

Viscoelástico firme, transfiere la presión de las zonas de alto riesgo de escaras a zonas de menor riesgo y ayuda a mejorar la estabilidad lateral.



Funda con 3 materiales:

Poliuretano de gran elasticidad y muy resistente. Impermeable y transpirable

Tejido resistente a la abrasión y al uso intensivo.

Tejido técnico altamente resistente en la zona de mayor desgaste



H4040 COLLARÍN VISCOELÁSTICO TRAVEL

De tacto cálido y agradable. Fabricado en espuma viscoelástica, se adapta bien al cuello y aguanta la cabeza cómodamente cuando se está sentado, por ejemplo haciendo la siesta o viendo la televisión. Ideal para los viajes.



ESPUMA
VISCOELÁSTICA



H4115 COJÍN LUMBAR



Cómodo y agradable al tacto, este respaldo de espuma viscoelástica, sensible a la temperatura, se adapta a la forma de la zona lumbar proporcionando una sensación de bienestar y ayuda a mantener la curva natural de la columna vertebral. Previene el dolor de espalda al propiciar una postura correcta y es muy apropiado para aquellos que permanecen largo tiempo sentados en el coche, la oficina o en casa. Medidas: 37 X 34 cm



ESPUMA
VISCOELÁSTICA

H4050 COJÍN TUBULAR ROLLING CUSHION

Cojín tubular cervical de fibra de poliéster. Relleno de fibra de poliéster de alta densidad. Proporciona el adecuado soporte para el cuello y favorece la correcta alineación cervical.

Medidas: 44 x 17 cm



Sirve de soporte para la parte baja de la espalda, entre las piernas o debajo de las rodillas, facilitando el descanso

H9935 COJÍN AMORTIGUADOR RING CUSHION

Cojín amortiguador de espuma de alta densidad para el tratamiento de las hemorroides.

Ayuda a aliviar la presión en la zona perineal, especialmente si debe permanecer sentado por períodos largos de tiempo.

El cojín amortiguador **RING CUSHION** se adapta a la forma del cuerpo proporcionando un alivio duradero en el caso de hemorroides, escaras, fístulas postparto, etc. Fabricado en espuma de alta densidad de una sola pieza, conserva la forma aún en períodos prolongados de uso. Ideal para su uso en casa, coche oficina, etc.

Medidas: 48 x 36 x 7 cm



XXL

The image shows a man with a large build sitting on a specialized medical chair. A healthcare professional is seated next to him, adjusting his leg. The man is wearing a dark t-shirt, dark pants, glasses, a watch, and a ring. The healthcare professional is wearing a white polo shirt and light-colored pants. The background is a solid blue color.

Ofrecemos ayudas con un diseño profesional que aporta no solo movilidad sino también dignidad

Por diversos motivos socio-económicos y culturales ya es un hecho que la población de personas con sobrepeso aumenta rápidamente. Un cierto número de estas personas llegarán a ser obesas. Como prueba de esta nueva situación cada vez hay más hospitales con unidad de obesidad mórbida.

Las personas obesas o de gran tamaño necesitan durante su proceso de rehabilitación ayudas seguras y, sobre todo, que ellos mismos perciban como fiables. Ayudas Dinámicas le ofrece una selección de algunos productos especialmente diseñados con este propósito. Han sido fabricados expresamente y desde el inicio del proceso mismo de su diseño pensando en estas personas, y no limitándose a sobredimensionar ayudas ya existentes, causa frecuente de un diseño incorrecto y poco eficiente. De hecho, algunos de los productos que ponemos a su disposición vienen firmados por reconocidos expertos en lo que se ha acordado en llamar internacionalmente Bariatrics.



SILLAS PARA HIGIENE

Ligeras y funcionales, estas sillas están diseñadas por el experto danés Keld Jorgensen especialmente pensadas para usuarios de tallas grandes teniendo muy en cuenta la morfología particular de este grupo de personas y la ergonomía, esto es, su relación muchas veces difícil con los asientos.

AD547 SILLA FIJI



Fabricadas con un tubo especial de alta tecnología muy resistente (soportan 325 Kg.) a la vez que muy ligero (las sillas apenas pesan 8 Kg.).



Los brazos, que ofrecen un buen agarre, van más allá del asiento para que sea más fácil incorporarse y sentarse. Hemos asumido la dificultad que representa sentarse con comodidad para usuarios grandes y nuestras banquetas se regulan de

AD548 SILLA CALEDONIA



altura de 42 a 55 cm y dado que algunas veces los asientos son poco fondos y otras veces demasiado y no se llega al respaldo, nuestros respaldos se gradúan en profundidad (+ - 6 cm.)

Fáciles de limpiar: los asientos se desmontan para su limpieza y mantenimiento sin necesidad de herramientas. **Disponibles en dos anchos de asiento: 61 y 71 cm.**

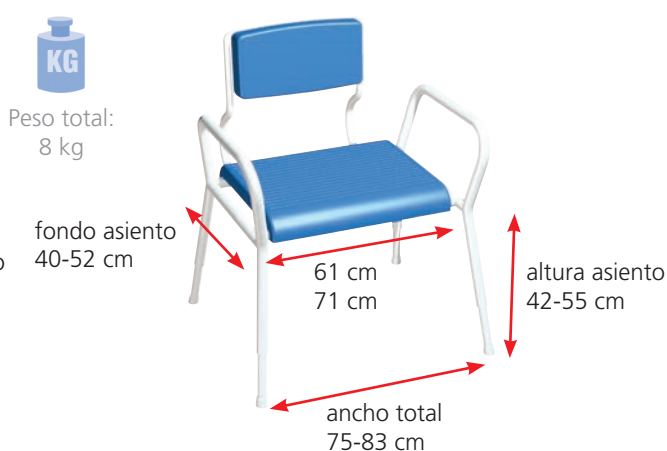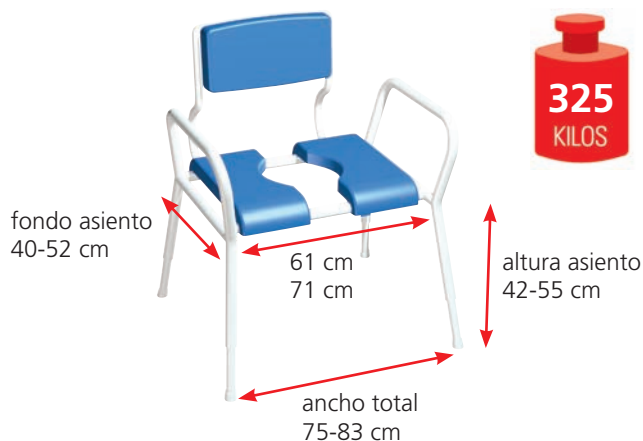

modelo	ancho asiento
AD547-61	61 cm.
AD547-71	71 cm.

modelo	ancho asiento
AD548-61	61 cm.
AD548-71	71 cm.

AD546XL SILLA DUCHA XL SAMOA

Sillas de ducha para personas obesas de un diseño realmente único del danés Keld Jorgensen, fabricadas con un acero especial muy resistente y ligero a la vez, que soportan hasta 325 Kg.

El asiento de poliuretano de tacto calido y agradablemente blando, tiene un diseño especial que facilita enormemente el acceso tanto al usuario como al personal auxiliar.

El respaldo, también de blando PU, está retrasado 32cm con respecto del asiento dejando espacio libre para la zona glútea, a menudo hipertrofiada, y facilitando además la labor del cuidador en la posible colocación de un arnés de grúa.

Los brazos acolchados también con PU, sobresalen del asiento para que sea mas fácil incorporarse y sentarse y son extraíbles para facilitar las transferencias laterales.

Los reposapiés, que suelen ser un punto débil en el diseño de este tipo de sillas, no sólo soportan 100 Kg cada uno sino que además se regulan en ancho, lo que permite tener soporte en los pies a las personas que tienen las piernas separadas al sentarse a causa de su obesidad.
Disponible en dos tallas.

modelo	ancho asiento	ancho total
AD546XL-61	61 cm.	67 cm.
AD546XL-71	71 cm.	77 cm.



AD555XL SILLA DUCHA XL CON RUEDAS

Disponible también con ruedas de 600 mm. Mayores son las ruedas mas fácil será empujar la silla, en especial cuando la usa una persona con un peso importante. Ruedas con aros que proporcionan autonomía a usuarios independientes.



modelo	ancho asiento	ancho total
AD555XL-61	61 cm.	87 cm.
AD555XL-71	71 cm.	97 cm.

XXL REHAB
BY COBI

AD517 ASIENTO WC BIG JOHN



Para aquellas personas que requieren un asiento de mayores dimensiones cuando utilizan el WC este asiento tiene un 75% más de superficie que los asientos standard. Dimensiones generosas, 48 x 48 cm con una apertura de orificio de 29 x 22 cm. La tapa es muy resistente y puede utilizarse como asiento. Bridas de acero inoxidable aseguran el asiento a la porcelana del WC sin necesidad de herramientas.



AD526XL ASIENTO ABATIBLE EXTRA GRANDE



Asiento de ducha abatible en acero inoxidable con cojín acolchado. Diseñado especialmente para grandes tallas.



AD551 SILLA SUPERSILLA

A menudo sentarse cómodamente es un problema para personas de tallas grandes, a veces el asiento es demasiado corto y a veces demasiado fondo y no consiguen llegar al respaldo. Se ha diseñado una silla que se pueda ajustar a cada individuo para más confort. El respaldo se puede mover 6 cm adelante / atrás para adaptarlo a cada uno.

La silla es fácil de mover de un sitio a otro porque utilizando acero ligero especial se ha conseguido una silla muy resistente a la vez que ligera, que pesa solo 7,7 Kg. y aguanta 325 Kg. Disponible en dos tamaños.



Peso total:
7,7 kg



modelo	ancho asiento	ancho total	fondo	altura
AD551-61	61 cm.	75 cm.	40 cm.	42 cm.
AD551-71	71 cm.	83 cm.	52 cm.	55 cm.

AD150XL MAXI ROLATOR XL

Alto graduable
de 77 a 99 cm.



Rolator plegable y diseñado con dimensiones y resistencia para personas con un peso de hasta 295 Kg. El asiento es blando y de mayores dimensiones de lo habitual, con respaldo. Lleva una cesta desmontable incorporada. Puños de altura graduable con frenos autoblocantes. Ruedas de 200 x 32 mm de diámetro que lo hacen maniobrable y fácil de empujar.

XXL REHAB
BY COBI



Peso total:
17 kg



AD103 BASTÓN XL

Diseñado especialmente para usuarios bariátricos de hasta 325 Kg de peso. El soporte de antebrazo está también sobredimensionado con un ancho de 15 cm.

Altura
graduable:
68-110 cm



AD230XL CAMINADOR BARIÁTRICO

Chasis ligero pero muy resistente y estable. Plegable para guardarlo o transportarlo fácilmente.



Peso total:
3 kg



AD474XL BASTÓN CUADRIPODE XL

Altura graduable:
71 – 93 cm



Peso total:
1 kg



Peso total:
1,5 kg



PL MAX

SILLA PLEGABLE MINIMAX

La silla de ruedas plegable MINIMAX se pliega fácilmente y es fácil de transportar. Su sistema especial de plegado hace de MINIMAX una silla rígida y muy estable cuando esta desplegada, sobre todo en comparación con sillas de ruedas plegables convencionales.



COJINES ANATÓMICOS
BARIÁTRICOS
(Ver pág. 201)



Fabricada con un tubo de acero especialmente fuerte y ligero (usado en las mountain bikes de alta gama) esta silla tiene una característica poco corriente: sólo pesa el 9% del peso que soporta, 325 Kg. y aun así continúa siendo una silla muy maniobrable.

Las ruedas traseras están posicionadas de tal manera que soportan la mayor parte del peso del usuario y un diseño no vedoso y muy ergonómico de los puños permiten empujar esta silla que soporta hasta 325 Kg. con un mínimo de esfuerzo.

Los reposapiés son graduables en altura y en anchura, ideales para usuarios con piernas muy gruesas y separadas al sentarse, aun así pueden apoyarse en estos reposapiés que aguantan hasta 100 Kg cada uno. Disponible en 4 tallas.

modelo	ancho asiento
PL MAX-56	56 cm.
PL MAX-61	61 cm.
PL MAX-66	66 cm.
PL MAX-71	71 cm.

Ancho total:
Ancho asiento + 20 cm.

XXL REHAB
BY COBI

Única silla bariátrica
plegable



Puños ergonómicos
para maniobrar mejor



Tensión respaldo
regulable.



Peso total:
33 kg



PLXXL SILLA DE RUEDAS XXL ECLIPSE

Diseñada por expertos canadienses, especialmente concebida para personas obesas o de gran tamaño. Esta silla es única y puede seguir la evolución de la persona que la usa tanto si gana peso como si lo pierde ya que se regula el ancho, la altura y la profundidad.

El asiento se puede regular fácilmente en profundidad y en altura, pudiendo adaptar la silla a cada usuario y a su evolución posterior.



COJINES ANATÓMICOS
BARIÁTRICOS
(Ver pág. 201)

Reposabrazos desmontables
y graduables en altura.

Fondo de asiento
regulable de 42-56 cm.

Brazos regulables:
29-34 cm.

Altura asiento:
35-51 cm.

Reposapiés desmontables

Ruedas traseras de extracción
rápida "quick release".

**FABRICACIÓN
A MEDIDA**



Peso total:
27 kg



**Reforzable
hasta**

Anchos asientos disponibles: 55, 61, 66, 72, 82, 92, 102, 112 cm.
Ancho total de la silla: ancho del asiento + 18 cm.

NIÑOS

Los más pequeños buscan
respuestas innovadoras.



Hemos puesto especial cuidado y cariño en la selección de las ayudas técnicas infantiles.

El diseño de ayudas para los más pequeños conlleva una especial dificultad por la naturaleza misma del crecimiento. Intentamos desarrollar productos duraderos que se adapten lo mejor posible a la morfología cambiante de los niños. fáciles de mantener y de limpiar aún bajo condiciones de uso intensivo. Ergonómicos, pensados en los pequeños y en sus cuidadores, sin olvidar los aspectos estéticos.

Son productos de formas redondeadas, materiales blandos con textura y tacto agradable pensados para que funcionen en una gran variedad de situaciones cotidianas, como en el colegio o en el hogar.



SPECIAL TOMATO. Sistema de posicionamiento blando y confortable

La gama de **Special Tomato** ha sido diseñada para proporcionar a los niños un soporte apropiado y cómodo y sirve para una gran variedad de aplicaciones terapéuticas.

Hemos empleado un nuevo sistema de fabricación para conseguir un nuevo material blando y cómodo, impermeable y duradero para niños con necesidades especiales.



ASIENTOS BLANDOS SOFT-TOUCH

Estos asientos blandos proporcionan el soporte adecuado y son una alternativa cómoda de sedestación para niños y adultos jóvenes. Todos los asientos pueden fijarse con seguridad a la sillas o ser posicionados sobre la cuña basculante para un mejor soporte postural.

Cuando el asiento **SOFT TOUCH** se pone sobre la cuña basculante se puede colocar directamente en el suelo de casa o en la escuela para realizar una gran variedad de tareas, tales como jugar, comer, terapias motoras o sensoriales. Esta configuración de asiento ayuda a promover las actividades participativas así como a mejorar la atención del niño y la interacción, tan decisiva para el desarrollo físico, social y emocional.



Disponible en 5 tallas: para niños de 9 a 90 kg y de 75 a 185 cm de altura

El asiento blando envolvente ofrece soporte postural en las caderas, tronco, cuello y cabeza. Promueve una postura erguida.

Un arnés de 5 puntos de anclaje va incluido para proporcionar mejor soporte de tronco, hombros y caderas.

El abductor integrado, junto con el diseño del asiento, impide el deslizamiento del cuerpo hacia delante para favorecer el alineamiento óptimo del tronco y las caderas de niños con poco tono muscular o espasmos.

Las cuñas permiten bascular el asiento hasta 25° para proporcionar un mejor soporte postural.



Unas cinchas ajustables permiten asegurar el asiento a sillas y a cuñas fijas o móviles.

Los asientos **SOFT TOUCH** están disponibles en 3 opciones:

- Asiento solo
- Asiento + cuña
- Asiento + cuña con ruedas

Ventajas y beneficios del asiento blando **SOFT-TOUCH**

- No contiene látex, material anti microbios que es extremadamente blando al tacto.
- Promueve una postura correcta, alineando cabeza, cuello y tronco.
- Puede reclinarse y es muy confortable
- Ofrece una solución integral que evita comprar múltiples equipamientos.



ASIENTO Y RESPALDO POSTURAL BLANDO SPECIAL TOMATO

Los asientos y respaldos posturales son una buena alternativa que evita transportar pesados sistemas de sedestación. Están fabricados con un material blando a la vez que agradable y cálido al tacto, anti-microbios y sin látex que resultan higiénicos y cómodos.

Los asientos y respaldos anatómicos facilitan la adopción de una buena postura en niños con necesidades posturales de media a moderada.

Los asientos y respaldos anatómicos pueden adaptarse a una gran variedad de sillas y carritos usando las correas ajustables que vienen incluidas.

- Asiento y respaldo anatómico blando
- Soporte lateral integrado en el respaldo
- Abductor integrado en el asiento
- Cinturón ajustable para mas seguridad
- Correas ajustables para fijarlos en cualquier silla
- Portátiles y ligeros
- Duradero y fácil de limpiar
- Apto para usarlo en sillas de ruedas, buggys...



Se pueden usar en sillitas, buggys, en casa, en el restaurante o en el colegio.

modelo	descripción	tamaño	color	ancho interior asiento	fondo interior asiento	ancho total asiento	fondo total asiento	ancho interior respaldo	ancho total respaldo	altura total respaldo
09 116 4979	asiento	pequeño	rojo	20 cm	20 cm	28 cm	27 cm	—	—	—
09 116 4987	respaldo	pequeño	rojo	—	—	—	—	19 cm	27 cm	25 cm
09 116 4995	asiento	mediano	rojo	25 cm	25 cm	32 cm	32 cm	—	—	—
09 116 5000	respaldo	mediano	rojo	—	—	—	—	22 cm	31 cm	34 cm
09 116 5018	asiento	grande	rojo	31 cm	31 cm	39 cm	39 cm	—	—	—
09 116 5026	respaldo	grande	rojo	—	—	—	—	25 cm	34 cm	37 cm

091158575 SILLA HEIGHT RIGHT

La postura correcta es muy importante para los niños de 6 meses a 15 años. Se ha comprobado que las habilidades de las personas para atender y realizar tareas mejoran mucho cuando el tronco, la pelvis, las piernas y los pies están colocados apropiadamente y en la postura correcta.

La silla **HEIGHT RIGHT** que podríamos llamar "silla de la altura correcta" es la solución perfecta para sentar a niños y adolescentes jóvenes en la casa, la escuela o durante sesiones de terapia.

El respaldo está ligeramente curvado para conformar cómodamente la forma natural del cuerpo.

La silla ha sido específicamente diseñada para proporcionar un soporte postural seguro a niños y adolescentes con desarreglos físicos de leves a moderados.

Con asientos y reposapiés ajustables en altura y profundidad, la silla **HEIGHT RIGHT** proporciona el asiento correcto y seguro para niños de diferentes medidas y puede usarse en mesas de diferentes alturas.

La silla está pensada para durar, se adapta al crecimiento del niño, así no hay necesidad de costosas compras de sucesivos asientos.

Totalmente fabricada en resistente madera, es fácil de limpiar con una solución de desinfectante suave.



Peso total:
7,3 kg



Peso máximo:
68 kg



**SPECIAL
TOMATO**

ACCESORIOS

091164953 BARRA DELANTERA DE SEGURIDAD



091164334 MESITA 47 x 20 cm

La mesita queda instalada a 66 cm del suelo



091182138 SPECIAL TOMATO BUGGY

El BUGGY de **SPECIAL TOMATO** es de construcción fuerte y duradero a la vez que ligero, ya que está fabricado en aluminio. Puede acomodar desde niños recién nacidos hasta los 25 Kg.

El cómodo arnés graduable, con hombros acolchados permite al buggy "crecer" con el niño alargando la vida útil de este cochecito.

Para niños con necesidades de posicionamiento ligeras a moderadas, se puede acoplar al buggy los asientos Soft-Touch o los asientos y respaldos blandos **SPECIAL TOMATO**.

Características y equipamiento incluido:

- Respaldo con 3 posiciones (30°, 45° y 65°)
- Reposapiernas con 2 posiciones
- Arnés de 5 puntos de anclaje.
- Tiras acolchadas en los hombros.
- Reposacabezas acolchado.
- Ruedas de 150 mm, blandas de EVA y con suspensión.
- Ruedas delanteras giratorias y con bloqueo.
- Freno de un solo toque
- Cestita de la compra.
- Capota regulable, desmontable y con ventana.



Peso total:
7,25 kg



Peso máximo:
25 kg



Altura máxima del usuario 1,12 m



El **SPECIAL TOMATO BUGGY** es fácil de plegar y de guardar para llevarlo en los desplazamientos. Fabricado en aluminio, es muy ligero (solo pesa 7,25 Kg.) a la vez que fuerte y puede llevar niños de hasta 25 Kg.



El respaldo se puede reclinar en 3 diferentes posiciones, a 30°, 45° y 65°
Capota desmontable, con ventana, viene incluida



Opcionalmente: este Buggy puede llevar un asiento **Soft Touch** de **SPECIAL TOMATO**, de talla 1 y también admite un asiento y respaldo postural blando Special Tomato de talla pequeña.



091203033 SILLITA EIO

La silla **EIO** de **SPECIAL TOMATO** ha sido diseñada por profesionales americanos con dilatada experiencia en USA y con la intención de acompañar al niño durante su crecimiento hasta los 8 años de edad, aproximadamente.

Como partes standard en el equipamiento de la silla encontramos soportes de cadera o laterales que se pueden desmontar a medida que el niño crece para hacer mas ancho el asiento.

Los asientos **Soft Touch** y los asientos-respaldos **SPECIAL TOMATO** proporcionan mas soporte para los niños más pequeños. Conforme el niño crece podemos retirarlos y tener al instante un asiento mas ancho y mas fondo.

La silla proporciona gran confort con un respaldo reclinable de 25° a 75° y unos reposapiernas elevables graduables de +15° a -55°

La silla **EIO** tiene una evidente vocación práctica y dispone de dos alojamientos para botellas de agua, bolsillos para las llaves o el teléfono móvil, así como una gran bolsa de la compra portaobjetos debajo del asiento.

CARACTERISTICAS:

- Asiento reclinable y reposapiernas elevable para más confort
- Ruedas giratorias con bloqueo de giro
- Ligera y fácil de llevar y guardar, solo pesa 10 Kg.
- Arnés de 5 puntos, cómodo y acolchado en los hombros.
- Suspensión por muelles
- Freno de un solo toque
- Puño para empujar la silla graduable de -65° a + 65°
- Se pliega súper compacta, sin ruedas traseras: ancho/fondo/alto: 56 x 94 x 46 cm.

MEDIDAS:

- Ancho asiento variable, con pads y en el punto más estrecho: 23 cm hasta 35cm
- Fondo el asiento: 30 cm.
- Alto del respaldo: 61 cm.



OPCIONALMENTE: Se pueden acoplar asientos blandos **Soft Seats** talla 1 y 2. También asiento-respaldo postural blando de **SPECIAL TOMATO** tallas pequeña y mediana.

091158336 BUGGY JOGGER SPECIAL TOMATO

Triciclo de jogging, todo terreno, ligero y maniobrable que proporciona un óptimo soporte y confort a niños con pocas a moderadas necesidades de posicionamiento. **JOGGER** tiene suspensión en las ruedas traseras para una marcha suave sobre la mayoría de superficies, mientras que la rueda delantera giratoria permite maniobrar en espacios reducidos. Para desplazarse por terrenos mas irregulares se puede bloquear la rueda delantera en posición recta.

El **SPECIAL TOMATO JOGGER** fue específicamente diseñado para solventar las necesidades de soporte y comodidad de cada niño con un sistema fácil de usar, compacto y conveniente para padres y cuidadores. Su fácil y rápido sistema de plegado junto con las ruedas traseras desmontables. ("quick release") lo hacen fácil de guardar en la mayoría de maleteros de coche y con un esfuerzo mínimo.

El respaldo acolchado se inclina de 100°-140° para aumentar el apoyo postural y la estabilidad. Para una mejor sedestación y un mayor apoyo lateral y pélvico, se pueden utilizar los asientos y respaldos de tacto blando **SPECIAL TOMATO Soft Touch** (opcional). **JOGGER** se puede plegar con el asiento y respaldo instalados.

ACCESORIOS

091158351 CABEZAL



091158344 BOLSA PORTAOBJETOS



RESPALDO BLANDO SPECIAL TOMATO

Ver página 223.

ASIENTO BLANDO SPECIAL TOMATO

Ver página 223.

Altura puños/suelo: graduable 89-109 cm

El asiento y el respaldo **Soft Touch** son opcionales

Medidas asiento:
Ancho: 38 cm
Fondo: 31 cm
Altura respaldo: 56 cm

Reclinable:
100°-140°

Alto total:
109 cm

Asiento a
reposapiés:
38 cm

Ancho total:
66 cm

Largo: 107 cm



CARACTERÍSTICAS:

- Ruedas traseras neumáticas de 300 mm
- Rueda delantera neumática de 300 mm, giratoria para mejor maniobrabilidad.
- Freno delantero de disco
- Reposapiés con protecciones laterales
- Suspensión trasera
- Freno de parking en ruedas traseras
- Fácil de plegar
- Puño de empuje de altura regulable
- Acolchado del asiento-respaldo reversible verano / invierno
- Arnés con 5 puntos de sujeción
- Respaldo reclinable
- Capota que se pliega con la silla

Tamaño plegado
(sin ruedas traseras):
53x84 cm




AD822N NUEVA SILLA MACLAREN MAJOR



Peso total:
7,5 kg



Peso máximo:
50 kg

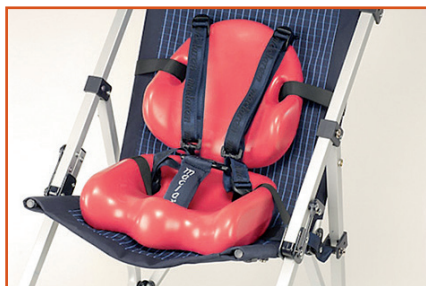

Se pueden utilizar asiento-respaldos posturales blandos de SPECIAL TOMATO, tallas pequeña y mediana.

Diseño modernizado del clásico buggy de la firma británica Maclaren, especialmente diseñado para niños con movilidad reducida.

El **MAJOR BUGGY** de Maclaren fue diseñado para responder a las necesidades de movilidad, y en especial para recorridos cortos, como ayuda a los padres de niños discapacitados. Precisan una silla lo mas ligera posible y fácil de plegar, de transportar y de guardar...y a la vez que resistente al uso intensivo.

El original y sencillo de accionar sistema de plegado Maclaren deja el buggy en escasos 117 x 25 x 21 cm.

Equipamiento standard:

- Resistentes y grandes ruedas de 180 mm de diámetro. Las delanteras son giratorias para maniobrar en espacios reducidos y las traseras con freno.
- Cinturón arnés de 5 puntos.
- Reposapiés rígido, graduable en 3 posiciones y desmontable.
- Frenos independientes en las ruedas traseras.

Capota para el sol

Sopotes-insertos laterales

Cesta de la compra



ACCESORIOS

A822N/3 CESTA DE LA COMPRA

A822N/4 SOPOTES-INSERTOS LATERALES

A822N/5 CAPOTA PARA EL SOL

A900 BUGGY BASCULANTE Y DINÁMICO ITO

Terapeutas y diseñadores han formado equipo para desarrollar un buggy versátil y ergonómico pensando tanto en los pequeños como en sus cuidadores.


Ligera y manejable, el ángulo del asiento bascula fácilmente, incluso con el niño sentado en la silla. En tres simples pasos ITO se pliega fácilmente de forma compacta y cabe en cualquier maletero. Extensa gama de accesorios.



Peso máximo:
40 kg




Peso total:
12,5 kg

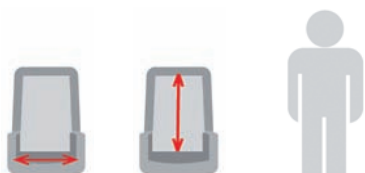


modelo	ancho asiento	alto graduable	altura máx. niño
ITO 1	20-28 cm	50-62 cm	1,20 m
ITO 2	26-34 cm	58-72 cm	1,45 m



Asiento basculante
Ligero y manejable
Extensa gama
de accesorios

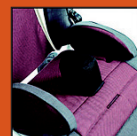

60101220
Taco abductor

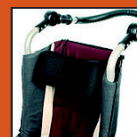

60101380 Pequeña
60101381 Grande
Cabezal



60101124 Pequeña
60101125 Grande
Capota Sol y Viento
(sólo combinado con
Capota sol)



60101120 Pequeña
60101121 Grande
Capota Sol



60102520 Pequeña
60102521 Grande
Soporte lateral
de tronco



60102320 Pequeña
60102321 Grande
Cesta



60102120 Pequeña
60102121 Grande
Protector de viento



60101620 Pequeña
60101621 Mediano
60101622 Grande
Cinturón Chaleco



60101820
Cinturón en "H"



60101825 Pequeño
60101826 Grande
Cinturón en "X"



60101420 Pequeño
60101421 Grande
Barra de seguridad

SISTEMA DE CONTROL POSTURAL SNUG SEAT

El sistema de control postural **SNUG SEAT** está diseñado para corregir o variar la sedestación en niños con problemas de postura. Esta silla es especialmente beneficiosa para aquellos pequeños con tono muscular disminuido, problemas de espasmos y para los que precisan un mejor apoyo en el tronco, en la zona lumbar o en la pelvis. **SNUG SEAT** incorpora varios accesorios para una mayor polivalencia de la silla. Disponible en tres medidas. VER TABLA DE MEDIDAS



SNUG SEAT incorpora varios accesorios para una mayor polivalencia de la silla.



modelo	tamaño	alto respaldo	ancho asiento	fondo asiento	peso máximo
SS6000	pequeño	56 cm	30 cm	25 cm	20 kg
SS6100	mediano	61 cm	34 cm	32 cm	38 kg
SS6500	grande	66 cm	39 cm	38 cm	52 kg

ACCESORIOS

CINTURONES PARA COCHE



Disponemos de cinturones homologados para utilizar **SNUG SEAT** como sillita de coche.

CHASIS DE INTERIORES

La silla se separa del carrito plegable y se puede colocar en el suelo o sobre un pequeño carro de interiores para mayor movilidad en espacios reducidos de casa o del colegio.



MESITA GRADUABLE EN ALTURA E INCLINACIÓN

CAPOTA PARA LA LLUVIA


Tumble Forms²

With Anti-Microbial Protection
Odour Resistance, Increased Durability

TF4542 ASIENTO FEDDER Y CUÑA

Esta silla es ideal para cualquier actividad de corta duración en casa o en el colegio y como alternativa a la silla de ruedas. El asiento proporciona una postura correcta sin ajustes complicados. El diseño interior del asiento moldeado tiene un ángulo asiento- respaldo de 90°.

Muy duradero y de tacto blando y cálido. Lavable y ligero. El cinturón y el arnés en forma de H se ajustan fácilmente a cada niño y ayudan a mantener la postura correcta. La cuña puede utilizarse para poner el asiento en posición reclinado o sentado. VER TABLA DE MEDIDAS

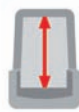


modelo	altura del niño	altura total	anchura total	fondo asiento	altura respaldo
TF4542S	hasta 91 cm	52 cm	27 cm	20 cm	46 cm
TF4542M	hasta 122 cm	69 cm	36 cm	24 cm	59 cm
TF4542L	hasta 155 cm	86 cm	43 cm	33 cm	73 cm
TF4542X	hasta 183 cm	104 cm	53 cm	42 cm	89 cm

ASIENTO FEDDER CON BASE MÓVIL

Permite trasladar al usuario de un lugar a otro sin necesidad de reposicionar.

modelo	descripción
4444M	Talla mediana
4542M	Talla grande
4542P	Talla extra-grande

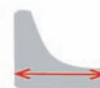

modelo	largo	alto	ancho
Cuña pequeña*	56 cm	30 cm	40 cm
Cuña grande**	56 cm	48 cm	71 cm

*La cuña pequeña va con los asientos pequeños, medianos y grandes. **La cuña grande va sólo con el asiento extra grande.

M012 SILLA INFANTIL DE BAÑO

Diseñada para el baño, aunque igualmente práctica para la sala de estar o para llevarla a la playa. Un reposacabezas, de altura regulable sostiene la cabeza en una postura cómoda y segura. La silla tiene un asa en la parte posterior para facilitar su transporte.



AD801 SILLA INFANTIL REBOTEC

Respaldo y asiento cálido y suave al tacto, fabricados en poliuretano. Asiento con tapa, abierto en U para facilitar la higiene íntima. Ruedas de 100 mm, las traseras con freno. Reposabrazos abatibles para facilitar la transferencia lateral. Reposapiés abatibles y desmontables. Ligera y fácil de limpiar.



Ancho asiento: 40 cm
Fondo Asiento: 34 cm



CAMILLA ABATIBLE

Más información en la página 62.



AD815 SILLA BASCULANTE SANICHAIR

Con un diseño ganador de premios a la innovación como el del Británico Independent Living, la silla basculante **SANICHAIR** es la respuesta profesional a las necesidades de higiene y WC de niños y adolescentes. Fabricada en aluminio en dos tamaños de silla, cada uno de ellos disponible en dos tallas de funda blanda interior.

El sistema basculante proporciona varias posiciones diferentes para la ducha y el aseo.

Silla fácilmente graduable a diferentes alturas de asiento, de 50 a 63 cm, que se puede situar sobre la mayoría de WC.

Taco abductor desmontable para un mejor acceso durante la higiene íntima. Reposacabezas de espuma blanda para mas confort y multiposición para un buen soporte.



modelo	fondo asiento	ancho delantero	ancho trasero	altura respaldo
AD815P	30 cm	29 cm	25 cm	43 cm
AD815M	35 cm	34 cm	29 cm	43 cm
AD815G	41 cm	38 cm	34 cm	54 cm
AD815XL	43 cm	42 cm	37 cm	54 cm



AD515 ASIENTO INODORO INFANTIL

Fabricado en plástico de gran resistencia. Se fabrica en tres medidas para edades de 2 a 13 años. Con cinturón de seguridad incorporado.

modelo	altura respaldo	ancho e/brazos	peso máx.
AD515P	30 cm	23 cm	60 kg
AD515M	41 cm	28 cm	60 kg
AD515G	50 cm	34 cm	60 kg



AD515G

AD515M

AD515P

AD111 BASTÓN INFANTIL

Ligero y de colores divertidos.
3 ajustes de altura del puño a la codera y 10 regulaciones de altura del puño al suelo.
Ajuste especial de marcha silenciosa.
Puño con reflectante para mayor seguridad.
VER TABLA DE MEDIDAS



AD131FUN MULETA AXILAR INFANTIL




Alto total:
83-103 cm



AD444N CUADRÍPODE INFANTIL QUADRO

Ligero y de colores divertidos. 3 ajustes de altura de codera a puño y 10 ajustes de altura de puño al suelo.
Ajuste especial de marcha silenciosa.
Puño reflectante para mayor seguridad. Altura variable de codera a puño de 16 a 21 cm.
VER TABLA DE MEDIDAS.

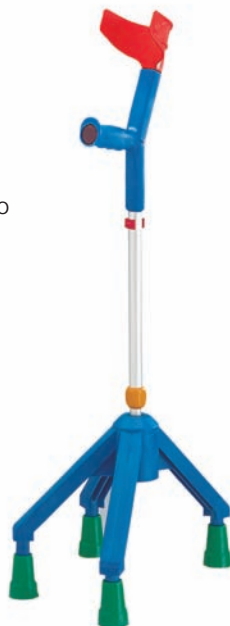

AD474N BASTÓN CUADRÍPODE INFANTIL

Ambidiestro.
Aluminio.
10 ajustes de altura.
Sistema confort (antirruido).
VER TABLA DE MEDIDAS



modelo	puño a suelo	codera a puño	peso máximo
AD111	51-73 cm	16-21 cm	100 kg
AD444N	65-88 cm	17-22 cm	100 kg

modelo	puño a suelo	peso máximo
AD131FUN	65-88 cm	100 kg
AD474N	48-70 cm	100 kg

AD247

CAMINADOR INFANTIL HOPLA



Barra de seguridad
60201300

Soporte tronco
60201200 Talla 1
60201205 Talla 2

Soporte Trasero
60201400 Talla 1
60201405 Talla 2

Maneta para
empujar
60201600

Sillón
60201100

Separador de piernas
60201500



Peso total:
10 kg



Peso máximo:
35 kg

AD248

ROLATOR INFANTIL PLUTO

PLUTO es un caminador de los llamados "reverse". Las ruedas traseras tienen un dispositivo de freno que evita que el rolator se desplace hacia atrás. El rolator queda situado detrás del niño y facilita la postura correcta para caminar y estar de pie. Recomendado para ejercicios terapéuticos para aprender los movimientos más naturales e incrementar el equilibrio. Disponible en dos medidas. VER TABLA DE MEDIDAS



modelo	largo	ancho	alto graduable	peso total	peso máx.
AD248-1	75 cm	66 cm	42-72 cm	6,2 cm	60 kg
AD248-2	80 cm	68 cm	50-80 cm	6,6 cm	80 kg

AD246

CAMINADOR INFANTIL

Caminador infantil fabricado en acero.



Peso total:
3,8 kg



Peso máximo:
50 kg

Altura regulable: 49 a 61 cm



Ancho total:
46 cm

Fondo total:
56 cm

VIDA DIARIA

**El día a día esta lleno de
barreras que se pueden
superar fácilmente con
un poco de ayuda**



La gran variedad de ayudas técnicas disponibles facilitan mucho la vida de las personas con alguna limitación y a menudo también beneficia a las personas de su entorno. Animamos a llevar una vida independiente a la vez que mejora la autoestima.

Ponerse los calcetines sin agacharse, simplemente abrocharse los botones o comer con una sola mano, recoger las cosas del suelo sin doblar la espalda, abrir un tarro que se resiste...tantas y tantas actividades sencillas y cotidianas pueden dejar de ser un obstáculo y hacernos la vida un poco mas fácil,...un poco mas independiente.

Hemos constatado una gran falta de información que impide beneficiarse de muchos de los dispositivos y ayudas disponibles. Ante este desconocimiento consideramos que nuestra responsabilidad compartida consiste en darlas a conocer, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de estas ayudas técnicas son prácticas, sencillas de utilizar y económicas.

Desde estas páginas les animamos a compartir esta responsabilidad y participar en su difusión.



AD334 MÓVIL CON FUNCIÓN DE EMERGENCIA HANDLE PLUS



Manténgase en contacto en cualquier lugar que esté gracias a este teléfono móvil tan fácil de usar. Con sólo presionar una tecla puede atender las llamadas o marcar cualquier número de los 4 programados previamente, incluso llamar al servicio de emergencia (112) o activar la llamada de alerta y enviar un SMS a sus 4 números de contacto. Pantalla para poder guardar y elegir los nombres y números, así como observar el estado de la batería y del bloqueo de teclado. Incluye base de carga y auriculares "manos libres" con cable. Compatible con audífonos.



Características técnicas:

- Autonomía en espera: 280 horas
- Autonomía en conversación: 180 horas
- Batería: Li-ion de 850 mAh
- Dimensiones: 125 x 52 x 15 mm.
- Peso: 99 gr.

AD338 MÓVIL CON TECLAS GRANDES Y AGENDA



Un teléfono móvil ideal para personas que no quieren complicaciones a la hora de marcar y recibir llamadas.

Dispone de 3 teclas de memoria directa y tecla de fácil acceso a la agenda.

Teclas separadas con números grandes para facilitar su uso y visión.

Agenda para 50 nombres y números.

Su superficie es suave al tacto.

Contiene auriculares "manos libres" con cable.

Tecla directa de alarma que llama al servicio de emergencia (112).

Compatible con audífonos.

Base de carga incluida.



Características técnicas:

- Autonomía en espera: 280 horas
- Autonomía en conversación: 180 horas
- Batería: Li-ion de 850 mAh
- Dimensiones: 125 x 52 x 15 mm
- Peso: 99 gr

AD410 MÓVIL CON TAPA Y TECLAS GRANDES



Un teléfono móvil fácil de usar y muy elegante.

Con tapa para proteger el teclado. Teclas y caracteres grandes que facilitan hacer llamadas y escribir mensajes.

Entre otras funciones dispone de timbre vibratorio, Bluetooth, SMS y MMS, y permite recibir fotos.

Compatible con audífonos. Incluye auriculares "manos libres" con cable.

Características técnicas:

- Autonomía en espera: 280 horas
- Autonomía en conversación: 240 horas
- Batería: Li-ion de 850 mAh
- Dimensiones: 98 x 50 x 19 mm
- Peso: 110 gr.



AD336W TELÉFONO INALÁMBRICO FÁCIL DE USAR

Teléfono inalámbrico de teclas grandes y de muy fácil uso para todos, con tecnología DECT para un sonido más nítido.

Altavoz, identificador de llamadas y una agenda que almacena tanto nombres como números.

Marcado más fácil gracias a los números grandes que aparecen en una pantalla retroiluminada y a un gran botón de encendido y apagado.



AD311 TELÉFONO DE TECLAS GRANDES PHONE EASY 311C

Características principales que lo hacen muy práctico y fácil de utilizar:

- Teclas grandes
- Compatible con aparatos auditivos
- 3 memorias directas (+10 indirectas)
- Volumen de auricular regulable (6 niveles)
- Volumen del timbre regulable (3 niveles)
- Led avisador de llamada entrante



AD331 TELÉFONO DE TECLAS GRANDES Y BOTONES FOTOGRÁFICOS

Diseñado para simplificar al máximo el uso del teléfono fijo. Botones grandes en un teclado numérico claro y amplio que facilita el marcado más que nunca, mientras que las memorias fotográficas lo ponen en contacto con la gente especial con una simple presión sobre el botón. Regulación del timbre de llamada y del volumen del auricular. Apto para personas con audífono.



AD309 TECLADO CON FOTOS MEMORYPLUS 309DP

Solo hay que conectar el teclado con fotos a su teléfono habitual para llamar a los números preferidos simplemente tocando un botón.

- Súper fácil de usar
- Funciona con su teléfono habitual
- Teclas grandes con foto



AD340 AMPLIFICADOR DE TIMBRE CON FLASH ESTROBOSCÓPICO RING PLUS



Llama la atención mediante una luz estroboscópica tipo flash que se percibe en la distancia, incluso cuando no se visualiza el dispositivo.

Además, emite un potente timbre con sonido que se puede amplificar hasta 91dB.

Ring Plus es un accesorio universal, que se puede utilizar con casi cualquier teléfono.



AD335 LOCALIZADOR DE OBJETOS ELEPHANT MEMORY

Ideal y recomendado para aquellos con problemas de memoria o despistados. Adjuntar los 4 sensores inalámbricos a las llaves, billetera u otros objetos y usar el mando a distancia para localizar los objetos de manera fácil y rápida.



AD321 MANDO A DISTANCIA PARA TV

Diseñado para personas que desean un mando a distancia lo más simple posible para cambiar de canal o ajustar el volumen de la televisión, radio, DVD o cualquier otro aparato similar. Botones grandes y bien visibles.




AD333 RELOJ DESPERTADOR CON VIBRADOR DE ALMOHADA

Combina una muy fuerte señal acústica (con volumen graduable) de alerta con vibración de almohada y flashes de luz, todo para asegurarse que la persona se despierte. Números grandes, visualización e indicador on/off para simplificar la configuración y para apagar / encender la alarma. Reloj automático y ajuste de hora por radio control, puede además conectarse a la línea telefónica avisando de las llamadas entrantes con sonido, luz y vibración.



H4650 CALZADOR DE MEDIAS Y CALCETINES

Ligera, económica y flexible ayuda para colocarse las medias o los calcetines.

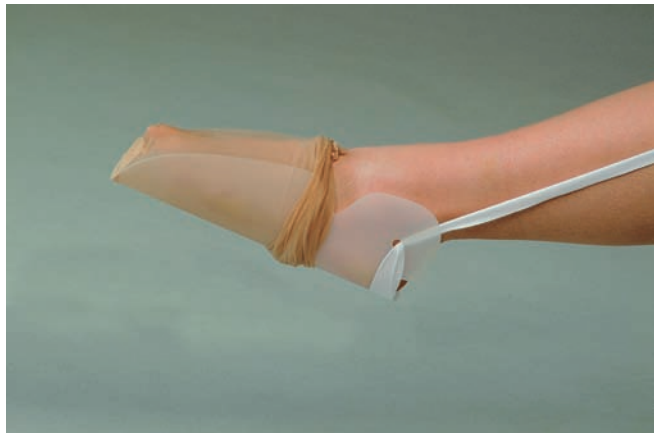

H4658 CALZADOR DE MEDIAS DE COMPRESIÓN

Al fin un dispositivo que realmente funciona con medias compresivas. Las medias de compresión se ponen independientemente, con el mínimo esfuerzo y sin doblar la cadera.



H4666 PONEMEDIAS Y CALZADOR BREVETI




Diseñado para personas con movilidad reducida, les permite ponerse los calcetines sin mayor problema y sin agacharse. También se puede utilizar con las medias. En el otro extremo tiene un calzador con una hendidura que sirve para quitarse los calcetines con suma facilidad.



Peso total:
380 gr

Largo: 74 cm

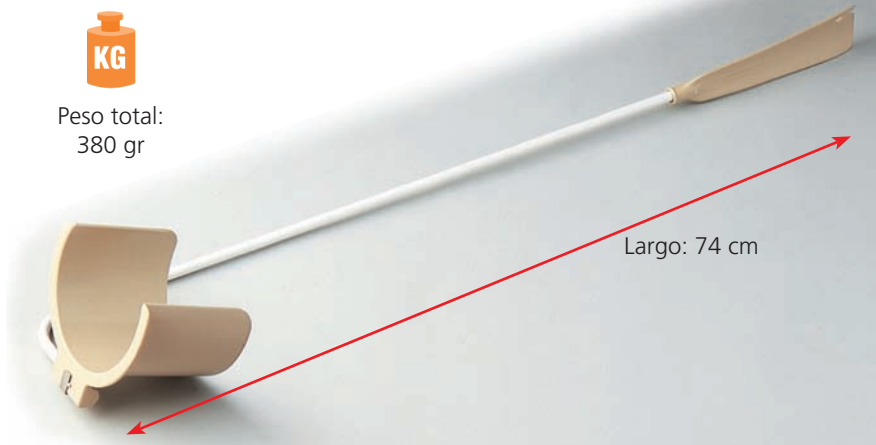

H2092 PONEMEDIAS DE COMPRESIÓN JOB

Diseñado para que personas con movilidad o fuerza limitada puedan ponerse las medias de compresión con facilidad. Ligero y compacto. El tubo recubierto de epoxy hace que las medias se deslicen fácilmente y sin hacer carreras.



H4640 CALZADOR DE CALCETINES TERRY



Esta ayuda para poner calcetines es flexible y rodea fácilmente el talón.

El interior de nylon resbala y reduce la fricción y el material exterior mantiene el calcetín en su lugar.

Largo: 23 cm



H4690 SUBE SLIPS GANTE

Para ponerse la ropa interior con independencia para aquellas personas con dificultad para agacharse. Sube la ropa hasta las rodillas.



AD856 MANGA PONECALCETINES ETAC

Ingenioso y muy práctico dispositivo diseñado en Suecia para aquellos con limitación de movimientos en la espalda, la cadera o la rodilla.

Se introduce el calcetín o media dentro de la manga y se estira hacia arriba.

La manga es fácil de transportar, es pequeña y ligera. Largo 40 cm. Pesa solo 96 gr.



H4654 CALZADOR DE MEDIAS 'PANTYS'

Igual que el modelo H4650 pero doble, lo que facilita enormemente la colocación de los 'pantys'.



H4677 ABROCHABOTONES

Para abrocharse con una sola mano.

Con mango anatómico y alambre de acero inoxidable.



H4680 AYUDA PARA VESTIRSE


Barra de madera con unos ganchos en los extremos que sirve de ayuda para poner y quitar la ropa.



H4675 ABROCHABOTONES Y SUBCREMALLERAS


Permite abrocharse con una sola mano.

El gancho ayuda también a subir cremalleras.

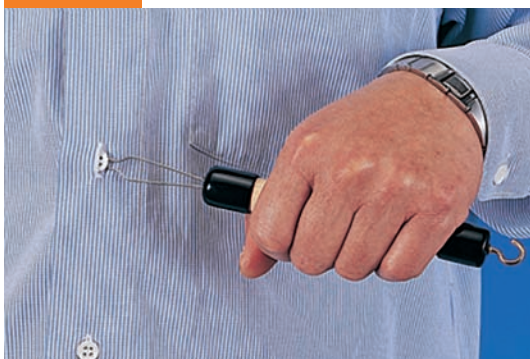

H4600 CALZADOR DE PLÁSTICO

Su longitud lo hace especialmente adecuado para aquellas personas que no pueden agacharse lo suficiente para ponerse los zapatos con comodidad. Peso: 42 gr

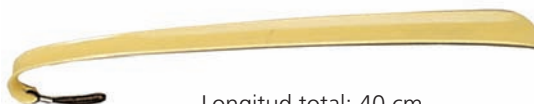

Longitud total: 40 cm



H4608 CALZADOR CROMADO

Calzador metálico con mango recubierto de cuero y muelle en la base que permite bascular el calzador a la posición adecuada. Peso: 132 gr



Longitud total: 60 cm

H5112 CALZADOR EXTRA LARGO



Calzador metálico extra largo, 61 cm para personas con dificultad para doblarse. Tiene un asa de vinilo antideslizante para un buen agarre. Peso: 140 gr.



Longitud total: 61 cm

TIJERAS

Extremadamente ligeras, con mango de plástico y hojas de acero inoxidable. El mango continuo reabre automáticamente la tijera en cuanto se deja de presionar. Como requieren un mínimo esfuerzo para cortar se pueden utilizar con los dedos y el pulgar o con los dedos y la palma de la mano. Disponible con hoja en punta o redondeada. VER TABLA DE MEDIDAS

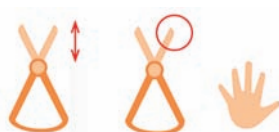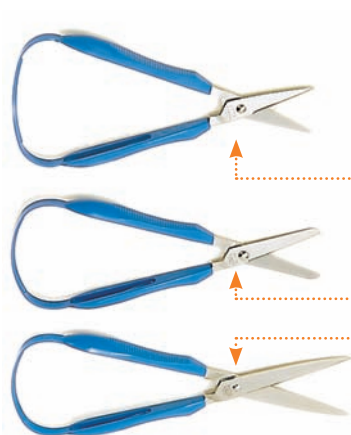

modelo	longitud	forma	para surdos
H6714	45 mm	en punta	NO
H6710	45 mm	redonda	NO
H6710L	45 mm	redonda	SI
H6716	75 mm	en punta	NO
H6716L	75 mm	en punta	SI

H6730 TIJERAS DE PRESIÓN

Diseñadas para ser utilizadas como tijeras de sobremesa. Se usan con una sola mano, con una simple presión. Hoja de acero inoxidable.



H6766 TIJERAS DE PEDICURA



Con grandes asas que permiten utilizar toda la mano para controlar mejor la tijera. La tijera es extralarga para los que tienen dificultad en agacharse. Las cuchillas curvadas de acero inoxidable ofrecen una buena posición para cortar. La cuchilla superior está ligeramente dentada para que no se resbale en la uña. Longitud total: 20 cm. Hoja de 3 cm



H4734 CORTAÚÑAS

Montado sobre una base de plástico con patas antideslizantes, este cortaúñas de acero inoxidable es sobredimensionado y es ideal para aquellas personas que no pueden agarrar o utilizar los habitualmente pequeños cortaúñas. Para cortar basta con apretar la palanca que es especialmente grande.



PINZAS PROFESIONAL REACHER

Un accesorio absolutamente necesario para una mayor independencia.

Probablemente la pinza mas funcional y práctica del mercado ya que actúan ambas mordazas simultáneamente y esto permite una gran precisión a la hora de alcanzar una variedad de objetos sin necesidad de agacharse o de encaramarse.

Puño de diseño ergonómico que permite accionar la pinza con todos los dedos (a diferencia de otras pinzas) y requiere un esfuerzo y recorrido mínimos.

modelo	longitud
H8060	60 cm
H8063	75 cm



La pinza tiene un imán en la punta para recuperar horquillas o alfileres.



La cabeza gira 360° y permite un fácil acceso sin tener que girar la muñeca

PINZAS HANDI-REACHER



Pinza económica y ligera a la vez que resistente.

Al final de la mordaza lleva un pequeño imán para recoger pequeños objetos metálicos, como un alfiler, un imperdible, etc. Tiene integrado un gancho de ayuda para vestirse.

modelo	longitud
H8054	60 cm
H8056	75 cm

PINZAS AKTIV



Probablemente una de las más veteranas y reconocidas empresas dedicadas al diseño de ayudas técnicas sea la firma sueca ETAC.

Sus diseñadores han desarrollado unas pinzas realmente útiles y prácticas para un gran número de actividades de la vida diaria.

Gracias a sus bien estudiadas pinzas con un imán en el extremo proporcionan la habilidad necesaria a personas con disminución de la fuerza o la capacidad de agarre.

Las pinzas rotan y así no hay necesidad de girar el brazo.

La pinza con garfio combina varias funciones y es especialmente útil para vestirse.



modelo	características
H8080	pinza de 70 cm
H8082	pinza de 45 cm con garfio

La pinza con garfio es especialmente útil para vestirse

PINZA REVOREACH

Mínimo esfuerzo: el diseño ergonómico del mango reduce la tensión y el esfuerzo en muñecas y la extensión en los dedos.

Ligera y equilibrada, su peso bien repartido la hace fácil de controlar cuando se usa.

Las pinzas son giratorias en intervalos de 30° y permiten agarrar objetos desde diferentes ángulos.

Disponible en dos medidas. La corta para recoger objetos cuando se está sentado y la larga preferiblemente cuando se está de pie.



modelo	longitud
H8090	66 cm
H8092	80 cm

H6146 PUÑO MULTIUSOS

Diseñado por profesionales tiene muchos posibles usos. Permite utilizar una gran variedad de utensilios, cubiertos, lápices, cepillos... Hay un orificio en cada extremo del puño, uno mayor que el otro, y los objetos se pueden emplazar en cualquiera de los dos según convenga.

H6146B máx. Diámetro: 40 mm. Largo: 90 mm

H6146C máx. Diámetro: 50 mm. Largo: 105 mm



M015 MANOPLA



Ajustable al tamaño de la mano de un adulto. Sujeta cubiertos, cepillos de dientes y pequeños utensilios.



CUBIERTOS SPECIAL

Diseñados para aquellos con problemas de agarre. Utensilios de acero inoxidable que tienen un mango recubierto de plástico vinilo. El mango es flexible para adaptarse a cada usuario. Pueden ir al lavavajillas. VER REFERENCIAS



modelo	descripción
H55014	tenedor
H55015	cuchara

CUCHILLOS REFLEX

Su diseño ergonómico minimiza el esfuerzo necesario para cortar y facilita el agarre con su mango cerrado y anatómico.

VER REFERENCIAS



modelo	descripción	hoja
H5245	chef	20 cm
H5240	de preparación	13 cm
H5246	rebanador	25 cm
H5244	trinchante	20 cm



H5597 CUCHILLO NELSON

Fabricado en acero inoxidable.

Diseñado para comer con una sola mano.

La hoja puede usarse con una acción de mecedora y el extremo con dientes, como tenedor.

La parte de la hoja cercana al mango no está afilada.



H5533 CUCHILLO MECEDORA

Para cortar con el mínimo esfuerzo.

Recomendado para personas con debilitamiento de las extremidades superiores o movimiento debilitado de la muñeca.



H5506 CUCHILLO ROCKER

Mango blando y de gran diámetro para agarrarlo cómodamente y con seguridad. Adecuado para personas con Parkinson, espasticidad y debilidad muscular.

Apto para cortar con una sola mano.


Hoja angulada para cortar con el mínimo esfuerzo.

H5505 CUCHARA FLEXIBLE

Tiene una sección flexible para poder doblarlo en cualquier ángulo. Muy práctico tanto para personas diestras como zurdas, así como aquellas con movilidad reducida en la muñeca.

H5504 TENEDOR FLEXIBLE

De idénticas características que el modelo **H5505**

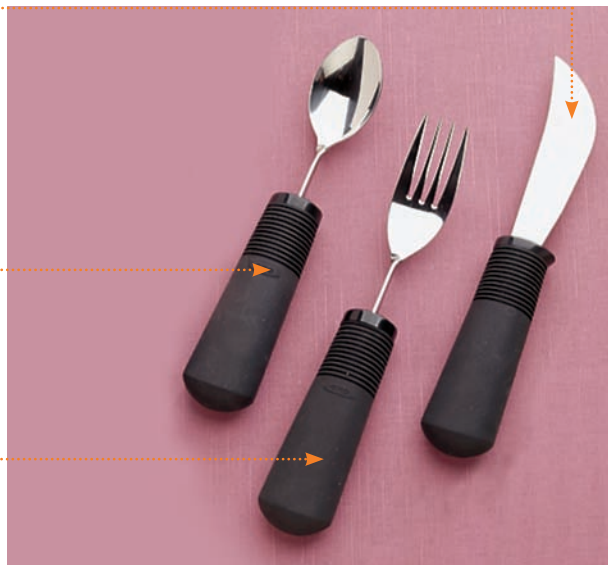

H5548 MALETÍN PROFESIONAL DE EVALUACIÓN



Un atractivo maletín con un juego de 33 piezas modulares que responde virtualmente a todas las necesidades posibles, de tipo funcional, estético, ergonómico, económico... Ideal para evaluar a pacientes de manera individual.



La gama incluye cubiertos Standard, angulados, con mas peso, ligeros, delgados, gruesos, utensilios para hacer cubiertos especiales...

Este es un producto profesional, por favor consúltenos si desea información detallada de todos y cada uno de los utensilios contenidos, que no están descritos en este catalogo.

- gran variedad de utensilios
- adaptadores multi funcionales
- gran variedad de mangos

H5517 CUBIERTOS QUEENS



Juego de 4 cubiertos de acero inoxidable montados sobre unos mangos cilíndricos de 30 mm diámetro para facilitar el agarre. Fáciles de limpiar y aptos para el lavavajillas. Mangos de 98 mm de largo. Peso: 45 gr. Juego de 4 cubiertos

CUCHARAS BLANDAS QUEENS



En los mangos especiales de la gama QUEEN se han montado unas cucharas plastificadas para personas con un problema del reflejo de mordida y para personas con boca muy sensible. Debido a estas circunstancias extremas de uso, solo tienen 3 meses de garantía.

CUBIERTOS ANGULADOS QUEENS



Cucharas y tenedores curvados a izquierda o derecha y cuchillo mecedora.

modelo	descripción	peso
H5510A	cuchillo angulado	45 gr
H5511LA	tenedor izquierda	45 gr
H5511RA	tenedor derecha	45 gr
H5512LA	cuchara izquierda	55 gr
H5512RA	cuchara derecha	55 gr

CUBIERTOS ESPECIALES QUEENS



Pensados para personas que utilizan una sola mano. El tenedor-cuchara tiene cantos cortantes que actúan como un cuchillo, y una forma cóncava similar a la cuchara. El Nelson es un cuchillo con un tenedor en el extremo.

modelo	descripción	peso
H5507A	tenedor-cuchara	45 gr
H5508A	cuchillo Nelson	55 gr

CUBIERTOS AMEFA



Forma especial de los mangos para personas con limitación de movimientos en la muñeca o en los dedos. El cuchillo está disponible también de tipo mecedora, el resto de cubiertos están curvados para minimizar el giro de la muñeca. Hojas de acero inoxidable y apto para lavavajillas. Los mangos miden 114 mm.

modelo	descripción	peso
H5580	cuchillo	75 gr
H5584	cuchillo curvado	78 gr
H5585L	tenedor izquierdo	48 gr
H5585R	tenedor derecho	48 gr
H5586L	cuchara izquierda	54 gr
H5586R	cuchara derecha	54 gr

CUBIERTOS MANOY



Estos cubiertos, de gran ayuda para personas con control limitado de las extremidades, son un clásico entre los profesionales de la terapia ocupacional. Los mangos facilitan el agarre tanto como es posible. El diseño especial del cuchillo permite cortar tanto de forma clásica como con movimiento mecedora. Van al lavavajillas hasta 80°.

modelo	descripción
H1438	cuchillo
H1439	tenedor
H1440	cuchara derecha
H1441	cuchara izquierda
H1442	tenedor derecha
H1443	tenedor izquierda

CUBIERTOS CARING



Diseñados por terapeutas, los famosos cubiertos CARING están pensados para personas con poco agarre y movilidad limitada de la muñeca o los dedos.

Su estudiada forma ayuda a estabilizar el utensilio y mejora sensiblemente el control direccional. Ver fotos. Fáciles de limpiar y aptos para el lavavajillas. Largo del mango: 127mm.

modelo	descripción
H5570	cuchillo
H5571	tenedor
H5572	cuchara



PLATOS MANOY



Platos con fondo en pendiente ideales para personas que sólo pueden utilizar una mano. Lavable en lavavajillas. No apto para microondas.

modelo	descripción
H5610	pequeño
H5612	grande

M007 PLATOS CON COMPARTIMENTOS



Tres compartimientos de 38 mm de profundidad. Dos pequeños de 200 ml. y uno mayor de 375 ml. Platos apilables unos dentro de otros y con tapadera. Aptos para lavavajillas y microondas.

H5608 PLATO HOMECRAFT



Plato con fondo en pendiente. Su base de goma impide que se deslice. Ideales para personas que sólo pueden utilizar una mano. Lavable en lavavajillas. Apto para microondas.

H5662 REBORDE PARA PLATOS




Se fija rápidamente a cualquier plato estándar para ayudar a comer con una sola mano. Fácil de limpiar. Apto para platos de 13 a 25 cm de diámetro.

H5276 SISTEMA DE PREPARACIÓN PARA ALIMENTOS



Duradera tabla de cortar de poliestireno adecuada para personas con dificultad en el agarre o que sólo pueden usar una mano. Pies antideslizantes tipo ventosa. Medidas: 30 x 32 cm

etac

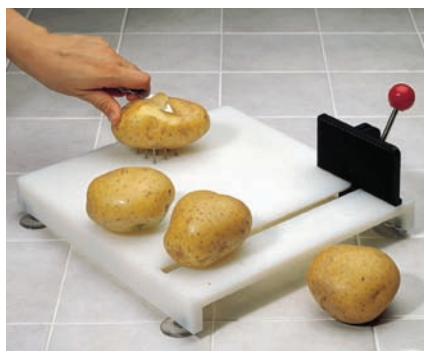

- Las púas de acero inoxidable sostienen los vegetales, por ejemplo, para pelarlos.



- Muy práctica para sujetar los alimentos para cortarlos.

H5306 COGE PLATOS CALIENTES COOLHAND



Diseñado por la famosa terapeuta ocupacional Chris Clarke el COOLHAND sujeta y suelta platos calientes como si lo hiciéramos con la mano pero evitando la posibilidad de quemarse los dedos.

Su gran brazo de palanca lo hace apropiado para personas con artritis. Ideal para manipular platos en el microondas.

Apto para platos de hasta 8 mm de grueso.

No debe usarse en hornos donde los platos alcanzan temperaturas muy altas. Apto para lavavajillas hasta 65°



H5710D VASO PERSONALIZABLE DUAL



Similar al vaso H5710 solo que una de las asas se puede situar fácilmente en cualquier lugar alrededor del vaso para adaptarse a las necesidades de agarre de cada individuo. Recomendado para personas con temblores o que no pueden sentarse erguidos para beber.

H5740 VASO ETAC



Vaso transparente con tetina de la firma sueca ETAC, el diseño especial del soporte permite agarrar el vaso firmemente con las dos manos. Apto para microondas.

H5282 UNTADOR PARA UNA MANO



Untar rebanadas o tostadas con una sola mano es fácil con este sencillo y práctico untador que situado en el borde de la encimera las mantiene en su lugar.



Capacidad:
400 ml

etac

H5193 ABRELATAS DE ANILLA

Abrir las latas con anilla es más fácil con este instrumento de plástico que proporciona un buen brazo de palanca para estirar de la anilla y con una gran mango para agarrarlo mejor.

El extremo plano se desliza fácilmente debajo de la anilla para romper el sellado antes de estirar de la anilla con el otro extremo en forma de gancho.

Largo: 16 cm.
Peso: 18 gr.



M010 VASO NOSEY

Ideal para aquellas personas con artritis o movilidad reducida de la cabeza, el cuello o las extremidades superiores. Su diseño permite utilizarlo con collarín cervical y también con gafas. Capacidad 230 ml.



H5720 VASO DE PLÁSTICO CON DOS ASAS

Incluye dos tapas: una antiderrame y otra en pico para beber. Apto para microondas y lavavajillas (el vaso, las tapas, no). Capacidad: 250 ml



H5700 VASO DE POLICARBONATO

Resistente vaso plástico con un asa grande.



Capacidad:
300 ml

Incluye dos tapas: una antiderrame y otra en pico para beber.



TAZA DE ALIMENTACIÓN CON TETINA REGULABLE

La tetina puede colocarse vertical o en una posición angulada, en la que se requiere menor inclinación de la cabeza.

Se suministra en paquetes de dos unidades.



modelo	descripción
H5754	tetina con orificio de 4 mm ø
H5756	tetina con orificio de 8 mm ø

H5710 VASO DE PLÁSTICO CON DOS ASAS

Este vaso es muy estable por su base ancha y tiene dos asas anatómicas e inclinadas para beber en la posición más cómoda.

Tapa con tetina incluida. El vaso puede ir al microondas y al lavavajillas.



Peso total:
176 gr.



Capacidad:
300 ml



H5703 VASO NOVO CUP



No derrama el contenido aunque el vaso se caiga

Recomendado para pacientes encamados que quieren beber sin ayuda de otros. Se tiene un control total del flujo aun estando estirado y no hacen falta almohadas extra o ayuda de otras personas. Ideal para aquellos con limitación de movimientos en la cabeza o cuello. No se derrama el contenido aunque el vaso se caiga. Transparente y con marcas de capacidad, hasta 250 ml. Apto para microondas, lavavajillas y autoclave.



Capacidad:
250 ml

H5725 VASO ERGONÓMICO



Vaso prácticamente irrompible que resulta muy fácil de agarrar, aun con manos pequeñas o con poco tono muscular. Apto para lavavajillas, congelador y microondas.



Capacidad: 250 ml
Marcas en 100 y 200 ml

modelo	descripción
H5725A	tetina con orificio de 4 mm ø
H5725B	tetina con orificio de 8 mm ø

H4266 PAJITAS ANTI-RETORNO PAT-SAUNDERS

Los terapeutas encuentran estas pajitas de gran utilidad para un gran número de pacientes con necesidades especiales.

Pajitas con válvula anti-retorno que mantienen el líquido dentro de la pajita aún después de dejar de succionar.

Esta válvula impide ingerir demasiado aire al beber. Las pajitas llevan un clip para sujetarlos al vaso.

El pack contiene dos pajitas de diferente largo: 25 cm. y 18 cm.



H5723 SOPORTE PARA PAJITA





GOOD GRIPS®

OXO es una marca americana dedicada a ofrecer productos de menaje con un diseño ergonómico y práctico, para hacer más fácil la vida diaria en el hogar. GOOD GRIPS significa "buen agarre" y son utensilios pensados específicamente para que sean cómodos y fáciles de usar.

H5290 PELADOR PIELES GRUESAS OXO

Mango grueso y ergonómico que se adhiere incluso con las manos mojadas. Cuchilla de acero inoxidable.



H5180 CEPILLO CON DISPENSADOR DE JABÓN

Mango suave y antideslizante, incluso mojado. Dosificación perfecta del jabón simplemente apretando un botón. Fácil de rellenar.



H5460 ABRELATAS SNAP



Sistema que sujeta la lata para que no se suelte. Grande y fácil de girar.


CONTAINERS POP

Cierre hermético apretando un simple botón. Sistema modular y apilable para aprovechar el espacio.



modelo	capacidad	dimensiones
H5440	0,9 litros	11x11x16 cm
H5441	1,4 litros	11x11x25 cm
H5442	1,4 litros	16x11x16 cm

JARRA MEDIDORA

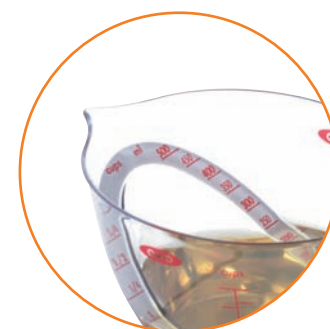

modelo	descripción
H5400	jarra de 1 litro
H5410	jarra de ½ litro

Sistema patentado de lectura inmediata. Mientras vertimos leche, aceite, etc. La jarra nos informa de la cantidad que estamos añadiendo sin necesidad de agacharnos. Ya no hay necesidad de llenar, agacharse para comprobar y ajustar las medidas cada vez. Asa antideslizante. Lectura métrica y por tazas.

H5435 TIJERA DESMONTABLE

Mango acolchado que absorbe la presión.
Desmontable para facilitar su lavado.
Hojas con microsierras que cortan bien sin que resbalen los alimentos, Interior dentado para separar hierbas frescas del tallo.

Desmontable para facilitar su lavado.



modelo	peso
H5435	113 gr

ESCURRE ENSALADAS

Centrifugadora de fácil manejo con una sola mano y con un sistema giratorio y botón de freno patentados.
El botón pulsador se cierra para almacenar el escurridor.
Base antideslizante y estable.



modelo	capacidad	diámetro
H5425	6 litros	25 cm
H5420	3 litros	20 cm



SOPORTES TETRABRICK

Un asa que se acopla a los tetra briks facilitando su manipulación.

modelo	disponible para envases de:
H2181	1 y 1½ litros
H2171	½ litro



H5990 CARRITO CON ASIENTO FOX



Práctico carrito con asiento plegable fabricado en Alemania, es ligero y resistente y va equipado con: bolsillo interior con cremallera, departamento isotérmico, bolsillo para paraguas, reflectantes y bolsa de 43 litros extraíble. Medidas de la bolsa: alto 57 cm, fondo 22 cm, ancho 36 cm.



Peso total: 5,1 kg. Peso máximo: 120 kg



H5972 CARRITO GEMINI

Muy estable y fácil de maniobrar en espacios reducidos. Las bandejas de plástico son muy prácticas para llevar una gran variedad de objetos por la casa.



Altura de los puños: 82-96cm

Ancho total: 46cm.

Fondo total: 53cm

AD925 BANQUETA MULTIFUNCIÓN PRIMA



Banqueta versátil y funcional, muy práctica para gran variedad de situaciones domésticas, tales como cocinar, planchar, etc... Ligeramente levantada de la parte trasera (inclinada hacia delante) para que sea más fácil incorporarse. Altura graduable y ligera de peso para trasladarla sin esfuerzo.



Peso total: 4,7 kg. Peso máximo: 190 kg.

Muy práctica para gran variedad de situaciones domésticas, como planchar o cocinar.



Ancho entre brazos: 43 cm

Ancho asiento: 40 cm

Altura graduable de 50 a 67 cm

H6210 GIRAGRIFOS CRISTAL



Este ingenioso instrumento se agarra fuertemente a los grifos cilíndricos y proporciona un buen brazo de palanca para abrir y cerrar el grifo con facilidad y sin apenas esfuerzo. Se puede utilizar en grifos de hasta 60 mm de diámetro. Largo 190 mm. Peso 112 gr.

RC008 BABEROS VALA FIT



Los baberos y servilletas **VALA FIT** de un solo uso ayudan a mantener pacientes y cuidadores limpios durante las comidas, protegiendo camas y ropas. Con banda adhesiva en los hombros.

Se suministra en cajas de 100 unidades.



RC006 BABERO DE POLIURETANO

Impermeable y a la vez transpirable; este babero para adultos es el preferido por los profesionales más exigentes. Cierre por "clip" de acero inoxidable, ajustable en 2 posiciones. Material: Poliuretano sobre poliéster. Color: azul. Medidas: 45 x 90 cm. Temperatura máxima de lavado a 90° C. No utilizar lejía. Secado: a 60° y máximo 10 minutos.

RC007 BABERO DE RIZO

Protege la ropa de vestir de incómodas manchas. Fácil de poner, ahora van con corchetes (clip). Lavable, impermeable, absorbente, suave y flexible. Rizo 100% algodón absorbente con PVC inducido. Lavable a 90° C.



DYCEM ANTIDESLIZANTE

DYCEM es un material polímero desarrollado para conseguir el material más antideslizante del mercado. Los productos fabricados con DYCEM están diseñados para solventar los problemas de estabilización y agarre que podemos encontrar en el hogar, hospitales, residencias de mayores, etc.

Los terapeutas encuentran en Dycem una de sus herramientas tradicionales para ayudar a personas con una sola mano, con debilidad muscular o coordinación limitada, entre otras.

Es ideal también para todo tipo de personas: cualquier objeto queda firmemente inmovilizado sobre una superficie, por ejemplo un plato sobre la mesa, aunque el plano esté inclinado (mesita auxiliar inclinada...) o incluso en movimiento (una bandeja...)


DYCEM es un material duradero, no es tóxico, no tiene olor y se puede lavar fácilmente.



TAPETES DYCEM



Se utiliza como superficie antideslizante para estanterías, debajo de platos y vasos, teléfono, etc.. Muy prácticos para las mesas basculantes

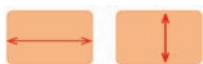

modelo	ancho	largo	color
H6814B	18 cm	25 cm	azul
H6816B	25 cm	35 cm	azul
H6818B	45 cm	38 cm	azul
H6820	19 cm de diámetro		azul



ROLLOS DYCEM

Están fabricados de tela sin trama revestida a ambos lados con Dycem. Muy prácticos para cubrir áreas grandes o para cortarlos a medida



modelo	ancho	largo	color
H6830B	20 cm	2 m	azul
H6834B	20 cm	9 m	azul
H6840B	44 cm	2 m	azul
H6844B	10 cm	9 m	azul



H6813 POSAVASOS DYCEM



Muy práctico para inmovilizar un vaso o una taza sobre una mesa, incluso estando inclinada, o sobre una bandeja cuando la lleva de un lugar a otro. El posavasos queda fijado al vaso o la taza.

H5501 ABREBOTELLAS DYCEM

Dycem antideslizante moldeado en forma cónica que permite un buen brazo de palanca para la apertura de botellas. Muy adecuado para personas con debilidad en los miembros superiores o artritis.



H5000 ABRETARROS DYCEM

H5000 de iguales características que el modelo H5501 pero de mayor tamaño, para abrir tarros.



TUBO DE ESPUMA PLASTAZOTE



Especial para integrar mangos a utensilios, herramientas, cubiertos, bolígrafos etc...
Color blanco.
Lavable en lavavajillas.

modelo	diámetro externo	diámetro interno	largo
H6104	30 mm	6 mm	1 m
H6106	30 mm	9 mm	1 m
H6108	30 mm	12 mm	1 m

H5800 ALARMA BORDER PATROL

El transmisor y el receptor crean un rayo infrarrojo invisible de hasta 20 metros y la alarma suena y avisa si alguien traspasa el rayo.

Tiene 3 niveles acústicos de alarma

Funciona con una pila de 9V cada unidad, no incluidas.

Dimensiones: 10 x 7 x 2,5 cm



H7110 ENHEBRADOR DE AGUJAS

Sencillo dispositivo de plástico que facilita el enhebrado de agujas aún en condiciones de visión disminuida o manos temblorosas.

Apto para agujas de dos tamaños distintos.



H6242 LLAVERO GIRADOR

Proporciona una buena sujeción al girar la llave y un mayor brazo de palanca por lo que el esfuerzo para girar es menor.




AD854 BOLÍGRAFO CONTOUR

CONTOUR es un bolígrafo ligero especialmente recomendado para personas que padecen reuma. Sus dimensiones lo hacen fácil de agarrar. Descansa sobre la base del pulgar disminuyendo el estrés en el dedo índice. Su único diseño ergonómico permite al usuario escribir durante períodos más largos.



Peso total:
71 gr.

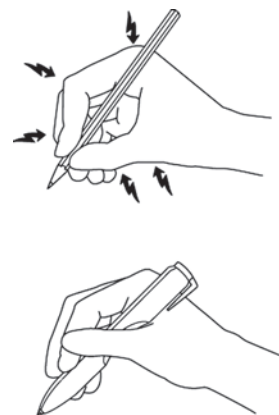

H7200 MANGUITO ERGONÓMICO PARA ESCRIBIR

Contiene 3 unidades por paquete



H7280 ATRIL

Sujeta libros y revistas abiertas sin necesidad de utilizar las manos



Peso total:
670 gr.

H7246 LUPA DE CUELLO

Lupa de plástico que se apoya en el cuerpo para poner el visor en posición sin utilizar las manos. El área central de gran aumento es ideal para el trabajo a corta distancia



H7311 SOPORTE PARA NAIPES

Algunas personas encontrarán más cómodo utilizar este soporte que aguantar varias cartas con la mano. La ranura está diseñada de tal manera que poner o sacar las cartas resulta muy fácil.



H9925 PASTILLERO SEMANAL TUTIFRUTI

Atractivo y funcional diseño escandinavo. Cada uno de los siete pastilleros diarios es de un color que los diferencia claramente y están rotulados con los días de la semana.



H9925/EXPO DISPLAY DE 10 PASTILLEROS TUTIFRUTI

Display promocional que llena de color su mostrador. Contiene 10 pastilleros semanales.



H9920/EXPO PASTILLERO MINIMIZER DIARIO

Display de sobremesa con 28 pastilleros diarios de variados y atractivos colores.

Cada pastillero tiene cuatro compartimentos rotulados con las diferentes tomas del día: "desayuno, comida, cena, noche". Especialmente práctico para llevar la medicación en el bolsillo o en el bolso.



H9931 PASTILLERO SEMANAL MEDIDOS

Contiene siete recipientes, uno para cada día de la semana. Cada recipiente tiene cuatro divisiones móviles adaptables a diferentes dosis y tamaños de tabletas. Incluye funda para transporte de un recipiente individualmente. Tarjeta para anotar el historial médico y la dosificación. Estuche plástico con cierre de velcro.



H9931/EXPO


EXPOSITOR MEDIDOS

Atractivo display promocional para su mostrador.
Contiene 12 unidades del PASTILLERO SEMANAL MEDIDOS.



H9932 PASTILLERO SEMANAL MEDIMAX

Especial para pacientes con dosis de medicación muy elevada, con problemas de movilidad o de vista. Ocho recipientes, uno para cada día de la semana y uno de repuesto. Base satinada para anotaciones. Estuche plástico con cierre de velcro.

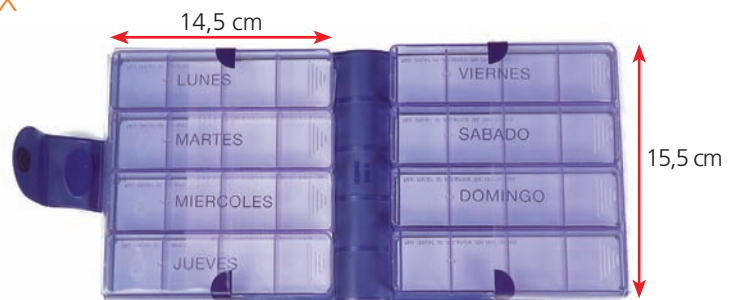

H9933

PASTILLERO DIARIO MEDIMAX

Recipiente con divisiones para desayuno, comida, cena y noche. Base satinada para anotaciones. Sirve también de recambio para el PASTILLERO SEMANAL MEDIMAX.



H9910 PASTILLERO SEMANAL ANABOX



Ingenioso y práctico, para simplificar y hacer más fácil la toma de medicamentos y mas difícil olvidar una toma. El pastillero diario vacío se coloca al final de la bandeja y delante aparece el pastillero diario de día siguiente. De un solo vistazo se puede comprobar si todavía quedan medicamentos en el pastillero. Se suministra con los colores del arco iris. Debido a la alta calidad del plástico utilizado, los pastilleros diarios y las bandejas son aptas para el lavavajillas.



H9915/EXPO EXPOSITOR DE PASTILLEROS DIARIOS ANABOX 1x7

Siempre hay un pequeño lugar donde llevar el pastillero semanal 1x7. Siete compartimientos guardan los medicamentos de una semana. Ideal para la oficina y para personas que siempre están viajando.

Cada compartimiento se cierra independientemente para que no se caigan las pastillas de forma accidental.

Para abrir los compartimientos es suficiente con presionar ligeramente en medio de la tapa.

Suministrado en expositor de sobremesa con 12 unidades de variados y atractivos colores.

Apto para el lavavajillas.



Largo: 13,5 cm



Expositor sobremesa, 12 unidad

H9936 PARTIDOR Y TRITURADOR

Tritura las pastillas para mezclarlas con bebidas o alimentos. Sirve también para partir las por la mitad. La parte superior incluye un compartimento para las pastillas con un separador. Sacando la parte superior, ésta puede utilizarse como vasito. Fácil de limpiar. Cabe en un bolsillo.



partidor



vasito



pastillero



tritador

AD9935 PASTILLERO TRITURADOR

Tritura pastillas hasta convertirlas en polvo. Se puede llevar en un bolsillo y es fácil de limpiar.



H9930 PARTIDOR DE PASTILLAS

Permite partir las pastillas para obtener la mitad de la dosis o para tragarlas más fácilmente. Sirve también para guardarlas.



H9937 PASTILLERO

Un compartimento general y tres más pequeños para repartir y memorizar las diferentes tomas diarias.



DIAGNÓSTICOS

Determinar la temperatura corporal y la presión sanguínea es una de las medidas de diagnóstico más usadas. Estas mediciones deben ser lo mas fiables posible, ya que unos datos erróneos pueden tener graves consecuencias.

TENSOVAL DUO CONTROL



El único tensiómetro del mercado con microestetoscopio incorporado. La tranquilidad de saber que los datos de medición son precisos y fiables, incluso en los casos de pacientes con trastornos cardiacos tan frecuentes como las arritmias. Disponible en dos medidas.

Doble memoria de 30 lecturas cada una y valores medios para dos usuarios.

Diseño ergonómico para una conexión fácil y manejable.

Lecturas más cómodas gracias a su gran pantalla.

Encendido / apagado automático.



modelo	características
900 206	Manguito de 22-33 cm.
900 212	Manguito de 32-42 cm. ideal Brazos Grandes

900112

TENSOVAL MOBIL



Medición rápida con sincronización de pulso. 2 memorias con capacidad para 60 lecturas cada una. Manguito hasta 22,5 cm de circunferencia. Perímetro de la muñeca de 12,5 cm a 20,5 cm. Estuche protector rígido.

Manguito hasta 22,5 cm de circunferencia.




925 054

THERMOVAL RAPID FLEX


Termómetro con tiempo de medición de sólo 10 segundos. Punta flexible y de tacto cálido. Fácil lectura con display extra grande. Señal acústica, memoria y pila de larga duración. Se suministra en cajas de 9 unidades.



AD704 PEDALIER BÁSICO

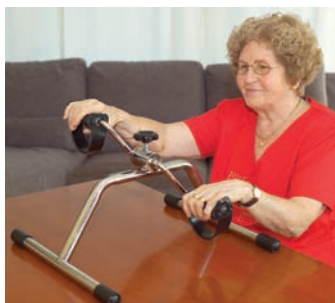

Aparato de ejercicio. Se puede graduar el esfuerzo para pedalear. Puede utilizarse también con las manos colocándolo sobre una mesa.

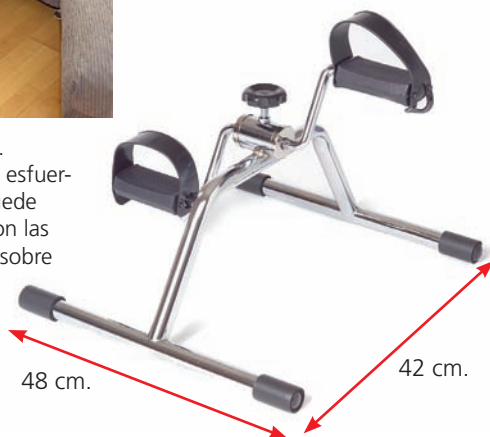

AD703 PEDALIER PLEGABLE

Pedalier de ejercicio plegable. Se puede graduar el esfuerzo para pedalear. Puede utilizarse para ejercitar brazos y manos.



PLEGABLE



AD705 PEDALIER DIGITAL

Este pedalier lleva un display digital para monitorizar los progresos del usuario, mostrando, tiempo, revoluciones y calorías quemadas. Una manera fácil de ejercitar piernas o brazos, regulando la resistencia. Un pomo permite que el usuario incremente la dificultad a medida que los músculos se refuerzan. Además es plegable.



PLEGABLE



AD700 PEDALIER DUAL-BIKE

Único pedalier con sistema de resistencia magnético patentado. Apto para su uso tanto sobre una mesa como en el suelo, de marcha suave y regulable. Muy estable y de patas extensibles. Tiene un display que muestra velocidad, tiempo, calorías consumidas y distancia.



Peso total:
8,3 kg



H9088 BLOQUES DE ESPUMA ROLYAN

Bloques de espuma viscoelástica de lenta recuperación que ayudan a fortalecer los dedos y las manos. Ideal para personas con artritis. Suministrado en cuatro resistencias para diferentes niveles y para permitir una progresión de ejercicios. Los bloques son de 4,4 x 4,4 x 7,6 cm.

Lavar con agua templada y jabón suave y dejar secar al aire. Se suministran 12 bloques (3 de cada color).


Amarillo	super blando.
Rosa	blando.
Azul	medio.
Verde	firme.



MASILLAS DE EJERCICIO

Esta masilla de ejercicio es fácil de manejar porque es menos grasienta que otras masillas tradicionales. Con un sistema de codificación por colores, los 4 niveles de resistencia son fáciles de identificar y adaptar a los niveles de habilidad de cada paciente. Se sirve en dos tamaños: 50 y 450 gr.

color	nivel	ref.	peso	ref.	peso
amarillo	blando	H9938	50 gr.	H9942	450 gr.
rojo	semi-blando	H9939		H9943	
verde	semi-duro	H9940		H9944	
azul	duro	H9941		H9945	

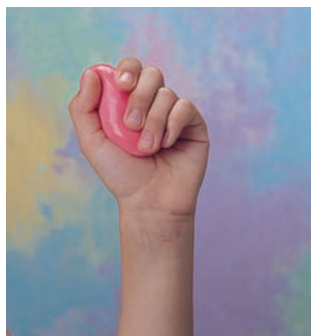

BOLAS EJERCICIO DE GEL


Para el entrenamiento de manos, dedos y brazos estas bolas de gel están codificadas por colores según diferentes resistencias. De tacto agradable, retornan a su forma original después de apretarlas. Ideales para la clínica y el hogar.

color	nivel	ref.
rosa	super blanda	H9800
azul	blanda	H9801
verde	media	H9802
naranja	firme	H9803
negra	superfirme	H9804
juego de 5 bolas		H9805



H3488 EJERCITADOR ERGONÓMICO ROLYAN

Para ejercitar progresivamente la fuerza en las manos. Se adapta a diferentes tamaños de mano. La resistencia se adapta a cada usuario y necesidad con un juego de 3 pares de gomas elásticas codificadas por colores.

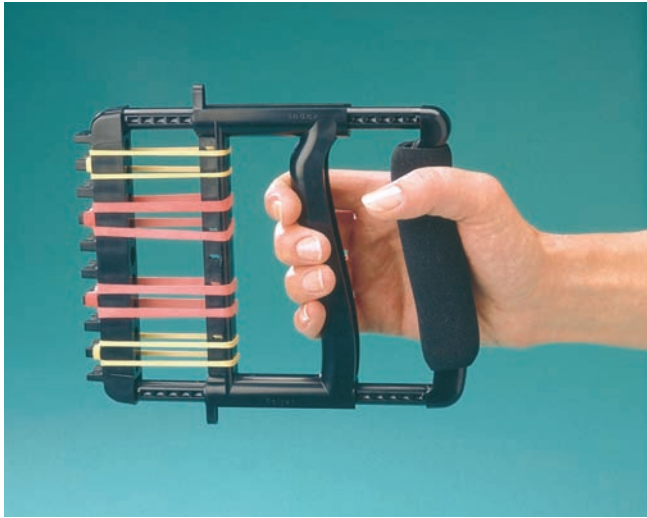

H3486 Juego de 4 gomas de recambios

BALONES DE TERAPIA

Una gama de balones hinchables de colores vivos desarrollada para actividades terapéuticas y de entretenimiento. Son muy ligeros y de tacto cálido.

ref.	Ø
H3000A	45 cm
H3000B	55 cm
H3000C	65 cm
H3000D	75 cm
H3000E	85 cm
H3000F	95 cm



H9200 POLEA DE EJERCICIO

Para aumentar el tono muscular y aumentar el rango de movimientos de los brazos. Se coloca en las puertas y es fácil de usar.



H9518 ESCALERA PLEGABLE

Fabricadas en dos secciones que rápidamente se pueden ajustar una dentro de la otra para ahorrar espacio. Escalones de 15 cm de fondo forrados de moqueta de alta resistencia. Las barandillas se regulan de altura de 40 a 90 cm.



Peso máximo:
140 kg



H6550 BANQUETA ESCALÓN



Metálica y cromada, con superficie antideslizante de 28 x 36 x 22,5 cm de altura.



Peso máximo:
120 kg

H6551 ESCALÓN CON BARANDILLA


De idénticas características que el escalón **H6550** incorporando una barandilla de ayuda que da confianza al usuario.



H9552 ESCALONES NIDO



Juego de escalones de madera ideales para terapia postural y biomecánica. Superficie antideslizante para mayor seguridad. Se guardan uno dentro del otro para ahorrar espacio.

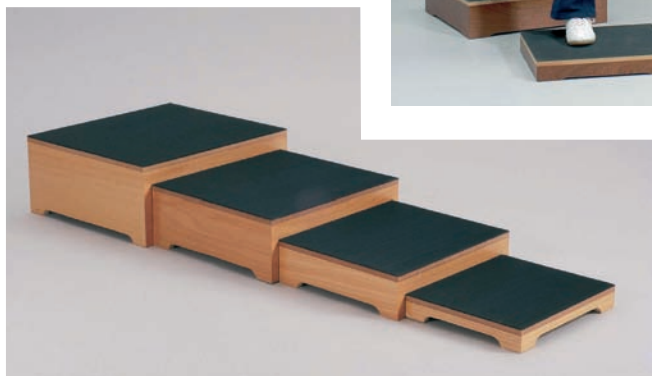

Juego de 4 escalones:

alto	ancho	fondo
20 cm.	50 cm.	45 cm.
15 cm.	45 cm.	40 cm.
10 cm.	40 cm.	35 cm.
5 cm.	35 cm.	30 cm.



Peso máximo:
180 kg

H95085 RAMPA Y ESCALONES



Fabricado en madera. Rampa y escalones en uno que se pueden usar para una gran variedad de actividades de rehabilitación incluyendo entrenamiento con rampas, educación postural y ejercicios de biomecánica.

Cubierta con goma antideslizante por seguridad y para mayor confianza del usuario.

Escalones:

alto	ancho	fondo
5 cm.	70 cm.	40 cm.
10 cm.	80 cm.	40 cm.
15 cm.	90 cm.	40 cm.
20 cm.	100 cm.	100 cm.

Rampa: 100 x 120 cm.
Inclinación: 1:6



Peso máximo:
180 kg

H9562 PARALELAS PLEGABLES

Paralelas muy robustas y duraderas, que proporcionan una excelente estabilidad.
Se pueden plegar para ahorrar espacio lo que es muy práctico para salas de terapia multiusos o gimnasios.
Altura graduable: 69-100 cm. Largo: 230 cm. Ancho 66 cm
Diámetro de la barra: 45 mm.
Peso máx.: 145 Kg.



H9517 PARALELAS DE ANCHO Y ALTO GRADUABLE

Tanto el ancho como la altura se pueden graduar, y además se pueden plegar para guardarlas.
Ancho graduable: 40 a 61 cm
Altura graduable: 69-100 cm. Largo: 230 cm.
Diámetro de la barra: 45 mm.
Peso máx.: 145 Kg.



H5026 EJERCITADOR PORTÁTIL GRAHAM

Este aparato portátil combina diferentes ejercicios estándar de rehabilitación en un solo aparato y está especialmente recomendado para post mastectomía, para programas de ejercicios en casa y para la clínica. Una cuña posterior permite colgarlo de una puerta de 3 cm de grueso.

Incluye una escalera para dedos de 22 escalones. Cuerda de nylon de 73 cm de recorrido con una polea giratoria, asideros de 9 cm que sobresalen 25 cm. También incluye una rueda de cuerda para hombros, regulable de altura y con 91 cm de cuerda de nylon. Etc.

Un metro de alto por 35 cm de ancho.
Peso: 8,5 Kg.



H8860 BOLÍGRAFO QUE ALIVIA EL DOLOR PAINGONE



Fácil de usar.
No requiere pilas ni mantenimiento

Ventajas de Paingone con relación a otros analgésicos son:

- Puede utilizarlo tantas veces como sea necesario, sin peligro de sobredosisificación.
- No tiene efectos secundarios, es un tratamiento totalmente natural fácil de usar. Su tratamiento dura tan solo 30 segundos.
- Puede utilizarlo directamente en el sitio del dolor.
- No requiere mantenimiento ni necesita pilas.
- De uso discreto, no llama la atención cuando se utiliza en público.

Pruebas médicas independientes revelan que el uso del Paingone reduce el dolor en hasta el 87% de los casos, aumentando la movilidad y reduciendo el consumo de analgésicos.

H8110 MINI MASSAGER

Compacto y la vez potente vibrador de masaje que incluye 3 cabezales diferentes para aplicar un masaje reparador en diversas partes del cuerpo. Funciona con pilas y vibra a unos 5500 ciclos por minuto.



GEL FRÍO POLAR FROST

Fórmula especialmente preparada para el rápido alivio del dolor en una gran variedad de casos, tales como tensión muscular, inflamación, artritis... fabricado en Laponia, Finlandia con Aloe Vera, tiene un efecto antiinflamatorio. El gel se absorbe con facilidad y actúa rápidamente.



H9715B

Tubo 150 ml

H9715A

ROLL-ON 75 ml

091158336	BUGGY JOGGER SPECIAL TOMATO	227	A821/4	ACCS. SILLA MOBILE TILT - CINTURÓN DE SEGURIDAD	69
091158344	BOLSA PORTAOBJETOS	227	A821/5	ACCS. SILLA MOBILE TILT - KIT ORINAL	69
091158351	CABEZAL	227	A821/6	ACCS. SILLA MOBILE TILT - BRAZO HEMIPLEJÍA	69
091158575	SILLA HEIGHT RIGHT	224	A822N/3	CESTA DE LA COMPRA	228
091164334	MESITA 47 x 20 cm.	224	A822N/4	SOPOTES-INSERTOS LATERALES	228
091164953	BARRA DELANTERA DE SEGURIDAD	224	A822N/5	CAPOTA PARA EL SOL	228
09116****	ASIENTOS Y RESPALDOS POSTURAL SPECIAL TOMATO	223	A828/**	ACCESORIOS SILLA CLEAN	65
091182138	SPECIAL TOMATO BUGGY	225	A828/12	ESTANTE BANDEJA	32
091203033	SILLITA EIO	226	A852C	TOALLITA DE RECAMBIO PARA EL CUERPO	40
161 182	EMPAPADORES DESECHABLES MOLINEA PLUS 60x60	45	A852L	TOALLITA DE RECAMBIO PARA LA ESPALDA	40
161 184	EMPAPADORES DESECHABLES MOLINEA PLUS 60x90	45	A900	BUGGY BASCULANTE Y DINÁMICO ITO	229
168 600	MOLIMED FOR MEN ACTIVE	44	A906	ARNÉS DE AJUSTE RÁPIDO FAST-FIT	93
168 634	MOLIMED FEMENINO MINI	44	A907	ARNÉS DE BAÑO AQUA	95
168 644	MOLIMED FEMENINO MIDI	44	A909	ARNÉS BIPEDESTACIÓN TORNEO	95
168 654	MOLIMED FEMENINO MAXI	44	A910	ESTACIÓN DE CARGA (GRUAS)	86
400696	AROS DE SILICONA LISOS (PAR) (SILLA CANEO)	119	A911	ARNÉS CON CABEZAL	94
402101	CINTURÓN DE SEGURIDAD (SILLA CANEO)	119	A912	ARNÉS UNIVERSAL CONFORT	94
402206	CUBRE RADIOS TRANSPARENTE (PAR) (SILLA CANEO)	119	A914	ARNÉS GOLIATH	96
402584	ANTIVUELCO (PAR) (SILLA CANEO)	119	A915	ARNÉS DE AJUSTE RÁPIDO PROFESSIONAL	97
403048	ALARGADOR DE FRENOS (PAR) (SILLA CANEO)	119	A916	ARNÉS ENVOLVENTE	96
410076	REPOSAPIÉS ELEV/AMPUTADO, DCHA (SILLA CANEO)	119	A917	ARNÉS AMPUTADOS	97
410077	REPOSAPIÉS ELEV/AMPUTADO, IZO (SILLA CANEO)	119	A960/12	TRAPECIO	171
410079	REPOSAPIÉS ELEVABLES, IZQUIERDA (SILLA CANEO)	119	AD100	CAMINADOR POLIVALENTE PLEGABLE ROLATOR	104
410080	REPOSAPIÉS ELEVABLES, DERECHA (SILLA CANEO)	119	AD101	BASTÓN DE ALUMINIO	111
4444M	ASIENTO FEDDER CON BASE MÓVIL T. MEDIANA	231	AD101XL	BASTÓN DE ALUMINIO EXTRA LARGO	111
4542M	ASIENTO FEDDER CON BASE MÓVIL T. GRANDE	231	AD102	BASTONES ALUMINIO ENCAJABLES MAGIC TWIN	109
4542P	ASIENTO FEDDER CON BASE MÓVIL T. EXTRA GRANDE	231	AD103	BASTÓN XL	217
900 206	TENSOVAL DUO CONTROL MANGUITO DE 22-33 CM.	270	AD111	BASTÓN INFANTIL	109/234
900 212	TENSOVAL DUO CONTROL MANGUITO DE 32-42 CM.	270	AD112	BASTÓN CON PUÑO ANATÓMICO BLANDO	108
900112	TENSOVAL MOBIL	270	AD114	BASTÓN PUÑO ANATÓMICO BLANDO+CODERA ABATIBLE	108
915 123	MOLICARE MOBILE MEDIANA	45	AD115	EXPOSITOR BASTONES PARA LA PARED LINEAL	111
915 127	MOLICARE MOBILE GRANDE	45	AD116	EXPOSITOR DE BASTONES SQUARE	108
925 054	THERMOVAL RAPID FLEX	270	AD120	CAMINADOR POLIVALENTE ARTRIS	107
995 235	TOALLITAS HÚMEDAS 50 uds.	49	AD131	MULETAS AXILARES	110
995 801	JABÓN LÍQUIDO 500 ml.	49	AD131FUN	MULETA AXILAR INFANTIL REBOTEC	110/234
995 861	LOCIÓN CORPORAL 500 ml. CUIDADO PROFESIONAL	49	AD131LUX	MULETA AXILAR REBOTEC	110
995 871	CREMA PROTECTORA 200 ml.	49	AD132	BASTÓN DE APOYO ANTEBRAZO	111
995 912	ESPUMA PROTECTORA 100 ml.	49	AD140	CAMINADOR DE ALUMINIO MINI ROLER	102
A10*	CONTERAS	115	AD150	ROLATOR DE ALUMINIO ERGO	101
A11*	MAXI CONTERAS	115	AD150XL	MAXI ROLATOR XL	217
A805/8	REPOSABRAZOS PARA REBOTEC	70	AD160	ROLATOR DE ALUMINIO ROLER	101
A821/1	ACCS. SILLA MOBILE TILT - BARRA TRANSVERSAL	69	AD185	ROLATOR EXTRECHO LOW	102
A821/2	ACCS. SILLA MOBILE TILT - TAPA ASIENTO CONFORT	69	AD200RC	CAMINADOR CON SOPORTE DE ANTEBRAZO	106
A821/3	ACCS. SILLA MOBILE TILT - ASIENTO WC CONFORT	69	AD203	CAMINADOR ATLAS	106

AD203A	CAMINADOR ATLAS CON SOPORTE DE ANTEBRAZO	106	AD501EL	REPOSABRAZOS AUXILIARES DE ALUMINIO	17
AD220	CAMINADOR TRIO	107	AD502LUX	BARRA DE BAÑO ABATIBLE SOBRE MÁSTIL	53
AD230AD	CAMINADOR DE PASOS DE ALUMINIO	105	AD503D	BARRA OPTIMA	52
AD230XL	CAMINADOR BARIÁTRICO	217	AD505LUX	DOBLE BARRA ABATIBLE CORTA 55 cm.	53
AD231	CESTA PARA CAMINADOR	105	AD506A	DOBLE BARRA ABATIBLE	53
AD232	CAMINADOR DE INCORPORACIÓN	105	AD506AI	DOBLE BARRA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	54
AD233AD	CAMINADOR FIJO DE ALUMINIO	105	AD506D	BARRA ABAT.ACERO INOX. CON PATA REGULABLE	54
AD238	ROLATOR PLEGABLE TAURUS	100	AD506LUX	DOBLE BARRA ABATIBLE LARGA 76 cm.	53
AD240	CAMINADOR EXTRA MANIOBRABLE DELTA	104	AD50**	ELEVADORES WC DERBY	12
AD245	CAMINADOR CON RUEDAS PLEGABLE	103	AD50****	ELEVADORES DE WC ASHBY CON TAPA	12
AD246	CAMINADOR INFANTIL	103/235	AD509	ELEVADORES DE WC ECONÓMICOS	10
AD247	CAMINADOR INFANTIL HOPLA	235	AD509BIDET	BIDET ACOPLABLE ECONÓMICO	10
AD248	ROLATOR INFANTIL PLUTO	235	AD510	ELEVADOR WC DE ALTURA REGULABLE CON BRAZOS	9
AD250	CAMINADOR PLEGABLE MINI ROLATOR 2 RUEDAS	103	AD510S	ELEVADOR WC DE ALTURA REGULABLE SIN BRAZOS	9
AD251ALU	CAMINADOR DE ALUMINIO	102	AD511	ELEVADOR DE WC BLANDO BLUE	11
AD252	MAXI-CAMINADOR AXILAR PLEGABLE	106	AD512	SUPPORTER REPOSABRAZOS ABATIBLES	17
AD254	CAMINADOR PLEGABLE TRIAL	103	AD513	ELEVADOR DE WC BLANDO SOFT	11
AD309	TECLADO CON FOTOS MEMORYPLUS 309DP	240	AD515	ASIENTO INODORO INFANTIL	233
AD311	TELÉFONO DE TECLAS GRANDES PHONE EASY 311C	240	AD516	ELEVADORES DE WC HI-LOO	11
AD321	MANDO A DISTANCIA PARA TV	241	AD517	ASIENTO WC BIG JOHN	216
AD331	TELÉF. TECLAS GRANDES Y BOTONES FOTOGRÁFICOS	240	AD518	ELEVADORES WC EASY-ACCES	12
AD333	RELOJ DESPERTADOR CON VIBRADOR DE ALMOHADA	241	AD519	ASIENTO FAMILY	12
AD334	MÓVIL CON FUNCIÓN DE EMERGENCIA HANDLE PLUS	238	AD520	SILLA DE BAÑO PLEGABLE ACUARIO	36
AD335	LOCALIZADOR DE OBJETOS ELEPHANT MEMORY	241	AD520LUX	SILLA DE BAÑO PLEGABLE ACOLCHADA ARIES	36
AD336W	TELÉFONO INALÁMBRICO FÁCIL DE USAR	239	AD525	ASIENTO DE BAÑERA ABBEY	27
AD338	MÓVIL CON TECLAS GRANDES Y AGENDA	238	AD526XL	ASIENTO ABATIBLE EXTRA GRANDE	216
AD340	AMPLIFICADOR DE TIMBRE CON FLASH RING PLUS	240	AD527LUX	ASIENTO ABAT.+RESPALDO+BRAZOS AJUSTABLES	26
AD400	ASA ERGONÓMICA NORMA	180	AD528MAXI	ASIENTO ABAT.COMPACTO+ACOLCHADO	25
AD410	MÓVIL CON TAPA Y TECLAS GRANDES	239	AD528MINI	ASIENTO ABAT.COMPACTO+ACOLCHADO-REDUCIDO	25
AD413	BASTÓN PLEGABLE	112	AD529	ASIENTO ABATIBLE DE MADERA	26
AD413/EXPO	EXPOSITOR GIRATORIO / 10 BASTONES PLEGABLES	112	AD530I	SILLA GIRATORIA DE ACERO INOXIDABLE	31
AD414	BASTONES DE ALUMINIO FASHION	113	AD531	ASIENTO ABATIBLE EN U	26
AD414/****	EXPOSITOR GIRATORIO / 20 BASTONES FASHION	113	AD532	BANQUETA DE BAÑO GEMINIS	34
AD415	BASTÓN DE PUÑO ANATÓMICO	112	AD536ALU	ASIENTO GIRATORIO DE ALUMINIO	30
AD416	CINTA PARA BASTÓN	112	AD536INOX	ASIENTO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE	30
AD444	BASTÓN CUADRÍPODE CON CODERA	114	AD537A	SILLA DE ALUMINIO PARA BAÑO SAMBA	35
AD444N	CUADRÍPODE INFANTIL QUADRO	114/234	AD537AS	TABURETE DE ALUMINIO PARA BAÑO SAMBA	35
AD465	BASTÓN CON ASIENTO	111	AD537C	SILLA DE ALUMINIO BAÑO CON ASIENTO EN U SAMBA	35
AD474	BASTÓN CUADRÍPODE	114	AD537CS	TABURETE DE ALUMINIO BAÑO CON ASIENTO EN U SAMBA	35
AD474B	BASTÓN CUADRÍPODE JACK	114	AD537P	TABURETE PLEGABLE LEO	34
AD474N	BASTÓN CUADRÍPODE INFANTIL	114/234	AD538	ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE	24
AD474XL	BASTÓN CUADRÍPODE XL	217	AD538D	ASIENTO ABATIBLE CON PATAS	24
AD500	COMODE PRÁCTICA	16	AD538U	ASIENTO ABATIBLE EN "U" CON PATAS	25
AD500E	BIDET ACOPLABLE UNIVERSAL	11	AD539	BANCO DE BAÑERA	31

AD540	TABURETE DE BAÑO MILANO	33	AD703	PEDALIER DE EJERCICIO PLEGABLE	271
AD541	BANQUETA GIRATORIA TURIN	33	AD704	PEDALIER DE EJERCICIO BÁSICO	271
AD542	SILLA PARA DUCHA Y WC	73	AD705	PEDALIER DE EJERCICIO DIGITAL	271
AD542U	SILLA PARA DUCHA Y WC ASIENTO EN U	73	AD750	SILLÓN ELEVADOR RELAX	176
AD543	TABURETE ENTRADO	34	AD800	SILLON BASCULANTE SENIOR	132
AD545C	SILLA CON RUEDAS PARA BAÑO	73	AD801	SILLA INFANTIL REBOTEC	232
AD546XL	SILLA DUCHA XL SAMOA	215	AD802	SILLA BERLIN	71
AD547	SILLA FIJI	214	AD803	SILLA ERFUT	70
AD548	SILLA CALEDONIA	214	AD804	SILLA DENVER	71
AD549	ASIDERAS GRIPSURE	61	AD805	SILLA BONN	70
AD551	SILLA SUPERSILLA	216	AD805/C	SILLA BONN COLORS	70
AD555XL	SILLA DUCHA XL CON RUEDAS	215	AD809	SILLA DE DUCHA LEVINA (RUEDAS DE 125 mm.)	72
AD557	TABLA DE BAÑERA EXTRAPLANA	39	AD810	SILLA DE DUCHA LEVINA (RUEDAS DE 600 mm.)	72
AD559	TABLA PARA BAÑERA FRESH	39	AD811	SILLA BASCULANTE SIESTA	132
AD560	ASIDERA DE ENTRADA Y SALIDA DE LA BAÑERA	57	AD812	MESITA TRANSPARENTE	139
AD562	ASIDERAS TELESCÓPICAS CON VENTOSAS ROTH	58	AD815	SILLA BASCULANTE SANICHAIR	233
AD563	ASIDERA DE BAÑO	61	AD820	SILLA BASCULANTE ATLANTIC	67
AD565	ASIDERA GORDON	61	AD821	SILLA BASCULANTE MOBILE TILT	68
AD566	ASIDERAS ESTRIADAS	56	AD822N	NUEVA SILLA MACLAREN MAJOR	228
AD569	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE	55	AD823	SILLA PARA EVACUACIONES AMBULANCE CHAIR	131
AD571	BARRA SOPORTE CORTINA	59	AD824	SILLA DE TRÁNSITO COMPACT	130
AD571C	CORTINA BLANCA 120 x 80 cm.	59	AD825	SILLA PARA EVACUACIONES ROLL-OVER	131
AD572	SOPORTE POLIVALENTE	59	AD826	SILLA AUTOPROPULSABLE MOBILE	66
AD573	SOPORTE PARA TELÉFONO DE DUCHA	59	AD827	SILLA BASCULANTE DE RELAX SERENA	129
AD576	ASIDEROS ERGONÓMICOS REFORZADOS NATURAL GRIP	55	AD827/12	SILLA BASCULANTE DE RELAX SERENA 300	128
AD577	ASIDERA ANGULAR PARA DUCHA	61	AD827/C	CHASIS SERENA 300	128
AD579	ASIDERA INOXIDABLE DE EXTREMO PLANO	54	AD828	SILLA DE DUCHA Y WC CLEAN	64
AD581	CONOS PATAS DE ELEFANTE 9 cm.	175	AD829	SILLA AUTOPROPULSABLE CLEAN 600	67
AD582	CONOS PATAS DE ELEFANTE 14 cm.	175	AD830	TABURETE SWIFT	32
AD589	CONOS DE ELEVACION ECO	175	AD831	TABURETE Y SILLA SWIFT	32
AD590	ELEVADOR DE BAÑERA BATH MASTER	29	AD832	SILLA MULTIFUNCIÓN CÓMODA-SWIFT	21
AD601	ASIDERO PLÁSTICO DE 1 ASA	60	AD833	TABURETE EDGE	33
AD602	ASIDERO PLÁSTICO DE 2 ASAS	60	AD834	SILLA WC PORTÁTIL VOYAGER	36
AD603	ASIDERO PLÁSTICO DE 3 ASAS	60	AD850	PEINE BEAUTY	41
AD605A	ASIDERA DE TACTO SUAVE 30 cm. PRIMA	60	AD851	CEPILLO BEAUTY	41
AD605B	ASIDERA DE TACTO SUAVE 45 cm. PRIMA	60	AD852	TOALLITA PARA CUERPO Y ESPALDA BEAUTY	40
AD606B	ASIDERA DE TACTO SUAVE ANGULADA 40 cm. PRIMA	60	AD853	CEPILLO PARA LAVARSE EL PELO BEAUTY	41
AD610	ASIDERA CON VENTOSAS	58	AD854	BOLÍGRAFO CONTOUR	265
AD681	MESITA DOBLE TABLERO	178	AD855	PINZA PARA PAPEL HIGIÉNICO TORKEL	13
AD683	MESITA AUXILIAR	178	AD856	MANGA PONECALCETINES ETAC	243
AD688	MESITA AUXILIAR PLEGABLE	178	AD857	EASYWIPE	13
AD689	MESA EXTRA GRANDE SUPERMESITA	179	AD858	EASYWIPE COMPACT	13
AD690	MESITA PARA CAMA NANY	175	AD859	MANGO ERGONÓMICO PARA LIMAS	43
AD700	PEDALIER DE EJERCICIO DUAL-BIKE	271	AD901	SILLA DE SERVICIO	19

AD902	BANQUETA ASHBY	20	AD993	COMPRESOR REGULABLE METRO + COLCHÓN	193
AD903	SILLA DE SERVICIO CASA	18	AD9935	PASTILLERO TRITURADOR	269
AD904	SILLA WC DE MADERA ROYAL	20	AD995	COLCHÓN DINÁMICO DE CONTROL ELECT. LEGACY MAX	191
AD905	SILLA WC 3 EN 1	18	AD996	COLCHÓN VISCOFLEX	194
AD906	GRÚA BIPEDESTACIÓN WAY UP	88	AD997	COLCHÓN POLYPLOT	195
AD908	GRÚA COMPACTA MINI	86	AP367	RECAMBIO DE TRIÁNGULO Y CINCHA	180
AD909	GRÚA BIPEDESTACIÓN TORNEO	89	ASIENTOS BLANDOS	ASIENTOS BLANDOS SOFT-TOUCH	222
AD910	GRÚA AKS FOLDY	87	C	COJÍN DE AIRE CON 2 VÁLVULAS POLYAIR	199
AD911	BÁSCULA ELECTRÓNICA AKS	87	C10	COJÍN ANATÓMICO VISCOFLEX	201
AD913	GRÚA DUO	90	C11	COJÍN VISCOFLEX CON ABDUCTOR	201
AD917	SILLA COMMODE	19	C12	COJÍN ANATÓMICO DUOFORM	202
AD918	GRÚA DE ALUMINIO POLARIS MINI	84	C2	COJÍN DE GEL DE SILICONA	204
AD919	GRÚA DE ALUMINIO POLARIS MAXI	85	C5	COJÍN DE FLOTACIÓN LÍQUIDA	204
AD920	SILLA CLUB	19	C6	COJÍN DE SILICONA SÓLIDA STRATUS	204
AD924	GRÚA PARA USO INTENSIVO OMNI LIFT	91	C7	COJÍN VISCOELÁSTICO ANATÓMICO	203
AD925	BANQUETA MULTIFUNCIÓN PRIMA	260	C8	COJÍN VISCOELÁSTICO POSTURAL	203
AD930	COLCHÓN LÁTEX+FUNDA SANITARIA 15 cm	196	C9	COJÍN ERGONÓMICO VISCOFLEX PLUS POSTURAL	200
AD935	COLCHÓN DE LÁTEX ROYAL 20 cm.	196	CB**	CABEZALES BLANDOS DE POLIURETANO	143
AD940	ASIDERA FRIDA	173	CD/CH/CN	COJINES DE AIRE CONFORM	198
AD941	ARCO DE CAMA	177	H0***	BASTÓN CLÁSICO DE HAYA	115
AD942	BARANDILLA BEDCANE	174	H1093	TABLA EXTRAGRANDE	39
AD943	BARANDILLA TRAVELLER	174	H1100	TABLA TRANS	152
AD944	INCORPORADOR CON MESITA COUCH TRAY	175	H1100BOLSA	BOLSA TABLA TRANS	152
AD945	BARANDILLA PIVOT RAIL	174	H1155	BANQUETA SAVANA	27
AD948	COLUMNAS ASIDERA	177	H1180	BANQUETA DE BAÑO MEDICI	27
AD949	TRAPECIO DE PARED	180	H1300	TABLA GLYDER	152
AD950	TRAPECIO	180	H1300BOLSA	BOLSA TABLA GLYDER	152
AD951	PAR BARANDILLAS TELESCÓPICAS	172	H137*	SACO TERMAL PROTECTOR PROOF	134
AD952	PAR BARANDILLAS ABATIBLES	171/172	H14**	CUBIERTOS MANOY	252
AD952/4	PAR BARANDILLAS ABATIBLES ALTAS	171/172	H15301	MAMPARA PORTÁTIL DE DUCHA	62
AD953PACK	COLCHÓN VISCOELÁSTICO MEMORY CON FUNDA	195	H1803	ALFOMBRA PARA DUCHA CUADRADA 54 x 54 cm.	31
AD955	BARANDILLA ABATIBLE UNIVERSAL	171/173	H1805	ALFOMBRA PARA BAÑERA RECTANGULAR 95 x 35 cm.	31
AD956	COLCHÓN STANDARD	195	H1818	APLICADOR DE CREMA	43
AD958	COLCHÓN DE LÁTEX 15 cm. CLASSIC	196	H1831	ESPONJA DE BAÑO CON MANGO PLÁSTICO	43
AD960	CAMA ELECTRÓNICA CON CARRO ELEVADOR ORION	169	H1833	ESPONJA CON MANGO FLEXIBLE	43
AD962	BED IN BED ANDREA	166	H1870	LAVACABEZAS PARA SILLA	37
AD970	CAMA ELECTRÓNICA DE ALTURA GRADUABLE CLASSIC	170	H1872	LAVACABEZAS DE CAMA	37
AD974	CAMA PARA USO INTENSIVO CLASSIC PLUS	167	H1874	LAVACABEZAS HINCHABLE	37
AD979	MESITA STELLA	179	H2092	PONEMEDIAS DE COMPRESIÓN JOB	242
AD980M	CAMA ELECTRÓNICA DE ALTURA GRADUABLE ANTARES	168	H21100	ALCANZA CINTURÓN EASY REACH	148
AD985	CAMA DE ALTURA GRADUABLE GALA	170	H2171	SOPORTES TETRABRIK ½ LITRO	259
AD985W	CABEZALES DE MADERA, CONJUNTO	171	H2181	SOPORTES TETRABRIK 1 Y 1½ LITROS	259
AD990	COLCHÓN DINÁMICO DE CONTROL ELECT. LEGACY	192	H3000	BALONES DE TERAPIA	273
AD992	COMPRESOR REGULABLE GENESIS + COLCHÓN	193	H3400	CINTURÓN ABDOMINAL	183

H3401	MUÑEQUERAS	182	H5000	ABRETARROS DYCEM	263
H3402	TOBILLERAS	182	H5026	EJERCITADOR PORTÁTIL GRAHAM	276
H3403	TIRANTES PARA EL TÓRAX	183	H5112	CALZADOR EXTRA LARGO	244
H3405	MANOPLAS BIO CARE	183	H5180	CEPILLO CON DISPENSADOR DE JABÓN	258
H3410	LLAVE MAGNÉTICA	182	H5193	ABRELATAS DE ANILLA	255
H3411	CIERRE	182	H5240	CUCHILLOS REFLEX - DE PREPARACIÓN	249
H3486	RECAMBIO JUEGO 4 GOMAS	273	H5244	CUCHILLOS REFLEX - TRINCHANTE	249
H3488	EJERCITADOR ERGONÓMICO ROLYAN	273	H5245	CUCHILLOS REFLEX - CHEF	249
H3500	CINTURÓN ABDOMINAL	133	H5246	CUCHILLOS REFLEX - REBANADOR	249
H3501	CINTURÓN ABDOMINAL CON SOPORTE PERINEAL	133	H5276	SISTEMA DE PREPARACIÓN PARA ALIMENTOS	254
H3502	CINTURÓN ABDOMINAL CON SOPORTE TIRANTES	133	H5282	UNTADOR PARA UNA MANO	255
H3503	CINTURÓN ABDOMINAL+SOPORTE PERINEAL+TIRANTES	133	H5290	PELADOR PIELS GRUESAS OXO	258
H3612	RESPALDO AJUSTABLE	177	H5306	COGE PLATOS CALIENTES COOLHAND	254
H3660	ESCALERILLA	181	H5400	JARRA MEDIDORA 1 L.	258
H3980	ACOLCHADO COMPLETO PARA SILLA	140	H5410	JARRA MEDIDORA ½ L.	258
H4028	ALMOHADAS VISCOELÁSTICAS	208	H5420	ESCURRE ENSALADAS 3 L.	259
H4030	ALMOHADA MUSIC PILLOW	209	H5425	ESCURRE ENSALADAS 6 L.	259
H4040	COLLARÍN VISCOELÁSTICO TRAVEL	210	H5435	TIJERA DESMONTABLE	259
H4046	ALMOHADA CERVICAL	208	H5440	CONTAINER POP 0,9 L.	258
H4050	COJÍN TUBULAR ROLLING CUSHION	211	H5441	CONTAINER POP 1,4 L. 11X11X25 CM.	258
H4060	ALMOHADA LONG BODY	209	H5442	CONTAINER POP 1,4 L. 16X11X16 CM.	258
H4070	ALMOHADA DOS METROS	209	H5460	ABRELATAS SNAP	258
H4101	RESPALDO RELAX DE ESPUMA VISCOELÁSTICA	210	H5501	ABREBOTELLAS DYCEM	263
H4110	POSICIONADOR DE BRAZO PARA SILLA	140	H5501*	CUBIERTOS SPECIAL	248
H4115	COJÍN LUMBAR	211	H5504	TENEDOR FLEXIBLE	250
H4200	ABDUCTOR CAMA	188	H5505	CUCHARA FLEXIBLE	250
H4202	REPOSAPIÉS PLEGABLE	207	H550**	CUCHARAS BLANDAS QUEENS	251
H4240	CUÑA POSICIONADORA DE BRAZOS	189	H5506	CUCHILLO ROCKER	250
H4255	ABDUCTOR SYSTEM	140/188	H550**	CUBIERTOS ESPECIALES QUEENS	251
H4266	PAJITAS ANTI-RETORNO PAT-SAUNDERS	257	H551***	CUBIERTOS ANGULADOS QUEENS	251
H4290	CUÑA POSICIONADORA 30°	187	H5517	CUBIERTOS QUEENS	251
H4300	ABDUCTOR SILLA	140	H5533	CUCHILLO MECEDORA	249
H4600	CALZADOR DE PLÁSTICO	244	H5548	MALETÍN PROFESIONAL DE EVALUACIÓN	250
H4608	CALZADOR CROMADO	244	H557*	CUBIERTOS CARING	252
H4640	CALZADOR DE CALCETINES TERRY	243	H558**	CUBIERTOS AMEFA	252
H4650	CALZADOR DE MEDIAS Y CALCETINES	242	H5597	CUCHILLO NELSON	249
H4654	CALZADOR DE MEDIAS "PANTYS"	243	H5608	PLATO HOMECRAFT	253
H4658	CALZADOR DE MEDIAS DE COMPRESIÓN	242	H5610	PLATO MANOY PEQUEÑO	253
H4666	PONEMEDIAS Y CALZADOR BREVETI	242	H5612	PLATO MANOY GRANDE	253
H4675	ABROCHABOTONES Y SUBECREMALLERAS	244	H5662	REBORDE PARA PLATOS	253
H4677	ABROCHABOTONES	244	H5700	VASO DE POLICARBONATO	256
H4680	AYUDA PARA VESTIRSE	244	H5703	VASO NOVO CUP	257
H4690	SUBE SLIPS GANTE	243	H5710	VASO DE PLÁSTICO CON DOS ASAS	256
H4734	CORTAÚÑAS	245	H5710D	VASO PERSONALIZABLE DUAL	255

H5720	VASO DE PLÁSTICO CON DOS ASAS	256	H7622	PORTA PAR DE BASTONES	141
H5723	SOPORTE PARA PAJITA	257	H8010	BOTA VISCOELÁSTICA	185
H5725	VASO ERGONÓMICO	257	H8020	SOPORTE TALÓN VISCOELÁSTICO	185
H5740	VASO ETAC	255	H8039	BOTA DE SUSPENSIÓN	184
H575*	TAZA DE ALIMENTACIÓN CON TETINA REGULABLE	256	H8054	PINZAS HANDI-REACHER DE 60 CM.	246
H5800	ALARMA BORDER PATROL	264	H8056	PINZAS HANDI-REACHER DE 75 CM.	246
H5972	CARRITO GEMINI	260	H8060	PINZAS PROFESIONAL REACHER DE 60 CM.	246
H5990	CARRITO CON ASIENTO FOX	260	H8063	PINZAS PROFESIONAL REACHER DE 75 CM.	246
H607*	ASIDERAS RAIL SYSTEM	57	H8080	PINZAS AKTIV DE 70 CM.	247
H6101	COJÍN LUMBAR MCKENZIE ORIGINAL	205	H8082	PINZAS AKTIV DE 45 CM. CON GARFIO	247
H6102	COJÍN LUMBAR MCKENZIE ALTA DENSIDAD	205	H8090	PINZAS REVOREACH DE 66 CM.	247
H6103	COJÍN LUMBAR MCKENZIE MINI ROLL	205	H8092	PINZAS REVOREACH DE 80 CM.	247
H610*	TUBO DE ESPUMA PLASTAZOTE	264	H8110	MINI MASSAGER	277
H6146	PUÑO MULTIUSOS	248	H8500	COJÍN POSICIONAMIENTO MEDIA LUNA	186
H6210	GIRAGRIFOS CRISTAL	261	H8511	CABEZAL PARA CONJÍN MEDIA LUNA	186
H6242	LLAVERO GIRADOR	264	H8520	COJÍN DECÚBITO SEMILATERAL 30°	187
H6550	BANQUETA ESCALÓN	274	H8550	COJÍN POSICIONAMIENTO CILÍNDRICO ARCO ABDUCTOR	188
H6551	ESCALÓN CON BARANDILLA	274	H8560	COJÍN POSICIONADOR DE CUELLO	189
H671**	TIJERAS	245	H8610	TENSOR PARA RESPALDO	139
H6730	TIJERAS DE PRESIÓN	245	H8615	BOLSA SECURITY	137
H6766	TIJERA DE PEDICURA	245	H8620	BOLSA SCOOTER	138
H6813	POSAVASOS DYCEM	263	H8630	BOLSA AUXILIAR	138
H681**	TAPETES DYCEM	262	H8633	BOLSA BAJO ASIENTO	137
H6820	TAPETE DYCEM REDONDO Ø 19 cm.	262	H8640	BOLSA DE LUXE	138
H683**	ROLLOS DYCEM	263	H8660	CESTITA PARA LA COMPRA	141
H7110	ENHEBRADOR DE AGUJAS	264	H8674	CHUBASQUERO CON MANGAS	135
H7151	CEPILLO PARA PIES GÉNOVA	42	H8674LUX	CHUBASQUERO ACOLCHADO	135
H7152	LAVAPIÉS 3 EN 1 FONTANA	42	H8680	CAPA	135
H7153	LAVAPIÉS ISOLA	42	H8680LUX	CAPA ACOLCHADA	135
H7154	SHOWER SANDAL	42	H8690	CHUBASQUERO SILLAS ELECTRÓNICAS	135
H7155	CEPILLO CON VENTOSAS	43	H8700	PARASOL PARA SILLA	139
H7200	MANGUITO ERGONÓMICO PARA ESCRIBIR	265	H8755	PARASOL PROFT	139
H7246	LUPA DE CUELLO	265	H8800	TRANSFER FLEXIBLE	148
H7247	ORINAL MASCULINO	47	H8805	CINTURÓN PARA MOVILIZAR	149
H7248	ORINAL FEMENINO	47	H8810	TABLA DE TRANSFERENCIA E-BOARD	151
H7249	SOPORTE PARA ORINALES	47	H8811	TABLA PLEGABLE	153
H7250	ORINAL MASCULINO PORTÁTIL URIBAG	47	H8814	TABLA DE MADERA	153
H7251	ORINAL FEMENINO PORTÁTIL URIFEM	47	H8820	AYUDA TRANSFERENCIA TURNER	150
H7280	ATRIL	265	H8830	TABLA DE TRANSFERENCIA E-BOARD MINI	151
H7311	SOPORTE PARA NAIPE	265	H8835	TABLA DE TRANSFERENCIAS CURVA	153
H7400	PORTASUERO	141	H8840	TABLA DE TRANSFERENCIA TRES B	151
H7550	PORTA OXÍGENO	141	H8860	BOLÍGRAFO QUE ALIVIA EL DOLOR PAINGONE	277
H7600	ALARGADOR DE FRENO	141	H8864	DISCO GIRATORIO ECONÓMICO	149
H7611	PORTA BASTÓN UNITARIO	141	H8864LUX	DISCO GIRATORIO PROFESIONAL PEDITURN	149

H8865	DISCO GIRATORIO EASYTURN	148	LI2403.150	CAMILLA ABATIBLE 150 X 70 CM.	62/232
H8870	CUBRE COJÍN ANTIDESLIZANTE ONE-WAY	202	LI2403.170	CAMILLA ABATIBLE 170 X 70 CM.	62/232
H8900	TRANSFER PROFESIONAL 2 MOVE	150	LI2403.190	CAMILLA ABATIBLE 190 X 70 CM.	62/232
H8902R	ROLLO MATERIAL ANTIDESLIZANTE UN SOLO USO	150	LI2603	BARRA ABATIBLE	80
H9088	BLOQUES DE ESPUMA ROLYAN	272	LI2603.250	ASIDERO ABATIBLE DE PARED 53 cm.	80
H9200	POLEA DE EJERCICIO	273	LI2603.270	ASIDERO ABATIBLE DE PARED 70 cm.	80
H9400	LINTERNA LED PORTÁTIL	104	LI2603INOX	BARRA ABATIBLE INOXIDABLE	52/80
H95085	RAMPA Y ESCALONES	275	LI2606.000	ASIDERA CONTORNO DE LAVAMANOS	81
H9517	PARALELAS DE ANCHO Y ALTO GRADUABLE	276	LI2611.003	ASIDERA 90° A IZQUIERDA A	75
H9518	ESCALERA PLEGABLE	274	LI2611.004	ASIDERA 90° A DERECHA A	75
H9552	ESCALONES NIDO	275	LI2611.007	ASIDERA DE 45° CORTA	75
H9562	PARALELAS PLEGABLES	276	LI2611.008	ASIDERA DE 45° LARGA	75
H96160	MESITA MULTIUSOS	179	LI2611.015	ASIDERA ERGOG RIP A DOS PAREDES	81
H9685	COJÍN CUÑA PARA COXIS	203	LI2611.016	ASIDERA ERGOG RIP DOS PAREDES+BARRA VERT.	81
H9715	GEL FRÍO POLAR FROST	277	LI2611.030	ASIDERA ERGOG RIP 30 cm.	74
H980*	BOLAS EJERCICIO DE GEL	272	LI2611.040	ASIDERA ERGOG RIP 40 cm.	74
H9910	PASTILLERO SEMANAL ANABOX	268	LI2611.050	ASIDERA ERGOG RIP 50 cm.	74
H9915/EXPO	EXPOSITOR DE PASTILLEROS DIARIOS ANABOX 1x7	268	LI2611.060	ASIDERA ERGOG RIP 60 cm.	76
H9920/EXPO	PASTILLERO MINIMIZER DIARIO	266	LI2611INOX	ASIDERAS INOXIDABLES ERGOG RIP	54/74
H9925	PASTILLERO SEMANAL TUTIFRUTI	266	LI2612.000	TRAPECIO DE TECHO	81/180
H9925/EXPO	DISPLAY DE 10 PASTILLEROS TUTIFRUTI	266	LI2618.000	PORTA-ROLLO PARA UNA SOLA MANO	77/80
H9930	PARTIDOR DE PASTILLAS	269	LI2630.200	SOPORTE PARA TELÉFONO DE DUCHA	75
H9931	PASTILLERO SEMANAL MEDIDOS	267	LI2631.000	ESCOBILLA DE WC	77
H9931/EXPO	EXPOSITOR MEDIDOS	267	LI2634.000	ESTANTE	76
H9932	PASTILLERO SEMANAL MEDIMAX	267	LI2635.000	SOPORTE PAPEL WC	77
H9933	PASTILLERO DIARIO MEDIMAX	267	LI2636.000	PERCHERO INDIVIDUAL	76
H9935	COJÍN AMORTIGUADOR RING CUSHION	211	LI2636.001	PERCHERO DOBLE	76
H9936	PARTIDOR Y TRITURADOR	269	LI2637.001	ASIDERA TOALLERO 30 cm.	77
H9937	PASTILLERO	269	LI2637.002	ASIDERA TOALLERO 60 cm.	77
H99**	MASILLAS DE EJERCICIO	272	LI2642.001	ASIDERAS PARA ESPEJO BASCULANTE	76
H9971	SÁBANA SUPERDESLIZANTE	151	LI2642.002	MANIVELA PARA ESPEJO	76
HA.KO.ALU	SISTEMA DE FIJACIÓN PARA LOS PUÑOS	142	M007	PLATOS CON COMPARTIMENTOS	253
HA.KO.ALU.R	SISTEMA DE FIJACIÓN PARA EL RESPALDO	142	M010	VASO NOSEY	256
L1	PROTECTOR PARA MANO	28	M012	SILLA INFANTIL DE BAÑO	232
L2	PROTECTOR MEDIO BRAZO	28	M015	MANOPLA	248
L3	PROTECTOR BRAZO ENTERO	28	MAO-1	BOLSA POLIVALENTE SIDE-PACK	136
L4	PROTECTOR MEDIA PIERNA	28	MLO-1	BOLSA BLACK PACK	137
L5	PROTECTOR PIERNA ENTERA	28	MBS-1	BOLSA LOGIC	136
LI09506.400	ASIENTO BLANDO PARA ASIENTO DE DUCHA	79	P505	CAMARA DE 200 x 50 mm. (8x2") VALVULA 90°/90°	146
LI2201.200	ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE	78	P505L	CAMARA 200 x 50 mm. (8x2") VALVULA 30/90°	146
LI2202.200	ASIENTO DE DUCHA CON RESPALDO	78	P506	CUBIERTA DE 200 x 50 mm. (8x2")	146
LI2203.200	ASIENTO DE DUCHA CON RESPALDO Y BRAZOS	78	P511	CAMARA DE 200 x 32 mm. (8 X 1- 1/4") 90/45°	146
LI2214.201	PATAS PARA ASIENTO DE DUCHA (ACCESORIO)	78	P511L	CAMARA 200 x 32 mm. (8 x 1- 1/4") V. 30/45°	146
LI2216.002	ESTRUCTURA CLICK-ON DE ALTURA GRADUABLE	78	P512	CUBIERTA DE 200 x 32 mm. (8 x 1- 1/4")	146

P515	CAMARA DE 150 x 32 mm. (6x 1-1/4") VALVULA 90/35°	146	PP220	RUEDA LLANTA ALUM. 125x24 mm. (GOMA)	145
P516	CUBIERTA DE 150 x 32 mm. (6 x 1- 1/4")	146	PP230	RUEDA LLANTA ALUM. 100x32 mm. P.U.	145
P517	CAMARA DE 180 x 50 mm. (7x 1-3/4") VALVULA 90/90°	146	PP240	RUEDA LLANTA ALUM. 125x32 mm. P.U.	145
P517L	CAMARA 180 x 50 mm. (7 x 1-3/4") VALVULA 30/90°	146	PP250	RUEDA LLANTA ALUM. NEGRO 100x24 cm.	145
P518	CUBIERTA DE 180 x 50 mm. (7 x 1- 3/4")	146	PP260	RUEDA LLANTA ALUM. NEGRO 125x24 cm.	145
P610	CAMARA DE 600 mm. (24 x 1- 3/8")	144	PP500	RUEDA DE 200 x 50 mm. (8x2") MACIZA	146
P611	CUBIERTA DE 600 mm. (24 x 1- 3/8")	144	PP501	RUEDA DE 200 x 32 mm. MACIZA	146
P614	CAMARA ESTRECHA DE 600 mm. (24 x 1")	144	PP502	RUEDA 200 x 50 mm. (8x2") HINCHABLE	146
P615	CUBIERTA ESTRECHA DE 600 mm. (24 x 1")	144	PP503	RUEDA 180 x 50 mm. (7 x 1- 3/4") HINCHABLE	146
P615R	CUBIERTA ESTRECHA 600 mm.(24x1") ANTIPINCHAZO	144	PP504	RUEDA 150 x 32 mm. (6 x 1- 1/4") HINCHABLE	146
P617	CUBIERTA LANDCRUISER	144	PP505	RUEDA DE 200 x 32 mm. (8 x 1- 1/4") HINCHABLE	146
P630	CAMARA DE 315 mm. (12- 1/2 x 2- 1/4")	146	PP506	RUEDA 150 x 32 mm. (6 x 1- 1/4") MACIZA	146
P630L	CAMARA 315 mm. (12-1/2 x 2-1/4") VALVULA 90/90°	146	PP507	RUEDA DE 140 x 40 mm. MACIZA	146
P633	CUBIERTA 315 mm. (12 1/2 x 2 1/4") PERFIL GRUESO	146	PP508	RUEDA DE 125 x 37 mm. MACIZA	147
PL10	SILLA DE RUEDAS CANEO S DE SUPERIOR	116	PP509	RUEDA DE 100 x 32 mm. MACIZA	147
PL12	SILLA DE RUEDAS CANEO L DE LONG	117	PP510	RUEDA DE 125 x 40 mm. MACIZA	147
PL14	SILLA DE RUEDAS CANEO E DE EVOLUTION	118	PP601	RUEDA 600 mm. MACIZA COMPLETA	144
PL15	SILLA DE RUEDAS CANEO B DE BASIC	119	PP602	RUEDA 600 mm. HINCHABLE COMPLETA	144
PL20	SILLA DE ASCENSOR	130	PP615	RUEDA DE 315 mm. HINCHABLE (12- 1/2 x 2-1/4")	146
PL30	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	126	PP616	RUEDA DE 315 mm. MACIZA	146
PL31	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE AUTOPROPULSABLE	126	PP620	RUEDA COMPLETA OUTDOOR (24 x 1.90") HINCHABLE	144
PL33	SILLA TRANSIT	122	PP640	RUEDA COMPLETA NEW YORK (24 x 1") HINCHABLE	144
PL33 BOLSA	BOLSA DE TRANSPORTE	122	R125LITE	RAMPA ULTRALIGERA LITE 125 cm.	155
PL34	SILLA TRANSIT AUTOPROPULSABLE	123	R165LITE	RAMPA ULTRALIGERA LITE 165 cm.	155
PL40	SILLA LIGERA GADES CON RUEDAS DE 300 mm.	125	R205LITE	RAMPA ULTRALIGERA LITE 205 cm.	155
PL41	SILLA LIGERA GADES AUTOPROPULSABLE	124	R3016	BARRA ABATIBLE PRESSALIT 60 cm.	51
PL60	SILLA LIGERA DE ALUMINIO EXPLORER	121	R3018	BARRA ABATIBLE PRESSALIT 85 cm.	51
PL7800	ASIENTO INODORO	125	R3146	BARRA ABAT. PRESSALIT 60 cm. GRADUABLE	51
PL80	SILLA LIGERA MINI TRANSFER	121	R3148	BARRA ABAT. PRESSALIT 85 cm. GRADUABLE	51
PL81	SILLA LIGERA DE ALUMINIO DISCOVERY	120	R32000	ELEVADOR DANIA	15
PLCAB	REPOSACABEZAS PLEGABLE	143	R34000	ELEVADOR DANIA CON TAPA	15
PLMAX	SILLA PLEGABLE MINIMAX	218	R37000	ASIENTO DANIA CON TAPA	15
PLXXL	SILLA DE RUEDAS XXL ECLIPSE	219	R6010	RESPALDO DE DUCHA	23
PP100	RUEDA DE POLIURETANO 72 x 24 mm. (NEGRO)	145	R700	RAMPA PARA UMBRAL	154
PP110	RUEDA LLANTA PLÁST. GOMA NEGRA 100x32 mm	147	R7010	ASIENTO DE DE DUCHA	23
PP120	RUEDA LLANTA PLÁST. GOMA NEGRA 125x32 mm.	147	R70LITE	RAMPA ULTRALIGERA LITE 70 cm.	155
PP130	RUEDA LLANTA PLÁST. GOMA NEGRA 125x40 mm.	147	R7151	ASIENTO ALTURA REG. CON RESPALDO Y BRAZOS	23
PP140	RUEDA LLANTA PLÁST. GOMA NEGRA 140x40 mm.	147	R8503	CAMILLA ALTURA FIJA 130 cm.	63
PP150	RUEDA DE POLIURETANO 72 x 24 mm. (BLANCO)	145	R8508	CAMILLA ALTURA FIJA 180 cm.	63
PP160	RUEDA DE POLIURETANO 100 x 24 mm. (BLANCO)	145	R8513	CAMILLA ELECTRICA ALTURA GRADUABLE 130 cm.	63
PP170	RUEDA DE POLIURETANO 125 x 24 mm. (BLANCO)	145	R8518	CAMILLA ELECTRICA ALTURA GRADUABLE 180 cm.	63
PP180	RUEDA DE 100x24 mm. P.U. (LUMINOSO)	145	R900	RAMPA ENROLLABLE 150 cm.	159
PP190	RUEDA DE 125x24 mm. P.U. (LUMINOSO)	145	R9320	PORTA ROLLO PAPEL WC	51
PP210	RUEDA LLANTA ALUM. 100x24 mm. (GOMA)	145	RC001	PIJAMA SENIORS TALLA PEQUEÑA	181

RC002	PIJAMA SENIORS TALLA MEDIANA	181
RC003	PIJAMA SENIORS TALLA GRANDE	181
RC004	SÁBANA DE SUJECCIÓN AJUSTABLE	181
RC005	EMPAPADOR SUPERABSORVENTE	45
RC006	BABERO DE POLIURETANO	261
RC007	BABERO DE RIZO	261
RC008	BABERO VALA FIT	261
RC010	MANOPLA	183
RC011	TALONERAS DE BORREGUITO	184
RC017	ESPONJAS JABONOSAS DE UN SOLO USO	49
RC101	CONTENEDOR MAXI	48
RC102	CONTENEDOR MINI	48
RC103	CARTUCHO RECAMBIO	48
RC114	PROTECTORES Y FUNDAS COMPLETAS DE COLCHÓN	46/197
RC115	PROTECTORES Y FUNDAS COMPLETAS DE COLCHÓN	46/197
RC22	BOTAS DE BORREGUITO	184
RC900	PROTECTOR DE BARANDILLA	171/173
RF1000	RAMPA DE UNA SOLA PIEZA 1 m.	156
RF1550	RAMPA DE UNA SOLA PIEZA 1,55 m.	156
RF2000	RAMPA DE UNA SOLA PIEZA 2 m.	156
RM120	RAMPA TIPO MALETA, PLEGABLE 122 cm.	158
RM180	RAMPA TIPO MALETA, PLEGABLE 183 cm.	158
RM210	RAMPA TIPO MALETA, TELESCÓPICA/PLEG. 213 cm.	159
RM300	RAMPA TIPO MALETA, TELESCÓPICA/PLEG. 305 cm.	159
RT1500	RAMPA TELESCÓPICA DE ALUMINIO 1,5 m.	157
RT2000	RAMPA TELESCÓPICA DE ALUMINIO 2 m.	157
RT2500	RAMPA TELESCÓPICA DE ALUMINIO 2,5 m.	157
RT3000	RAMPA TELESCÓPICA DE ALUMINIO 3 m.	157
SS6000	SISTEMA DE CONTROL POSTURAL SNUG SEAT PEQUEÑO	230
SS6100	SISTEMA DE CONTROL POSTURAL SNUG SEAT MEDIANO	230
SS6500	SISTEMA DE CONTROL POSTURAL SNUG SEAT GRANDE	230
ST.1	SCOOTER PLEGABLE "LUGGIE"	160
ST.2	SCOOTER "JAMAICA"	161
ST.3	SCOOTER "FLAMINGO"	161
ST.4	SCOOTER "ARUBA"	162
ST.5	SCOOTER "AGIN"	163
ST.6	SCOOTER "BARBADOS"	163
TF4542	ASIENTO FEDDER Y CUÑA	231
TS5	SILLA DE INTERIOR RECLINABLE	127
TSU	SILLA INODORO RESIDENT	127
UL.100	COJÍN ELEVADOR SEAT ASSIST	206
UL.500	COJÍN ELEVADOR POWER SEAT	207

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



c/ Llobregat 12
08130 Santa Perpètua (Barcelona)
tel. 935 74 74 74
fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com